



Drag & Drop

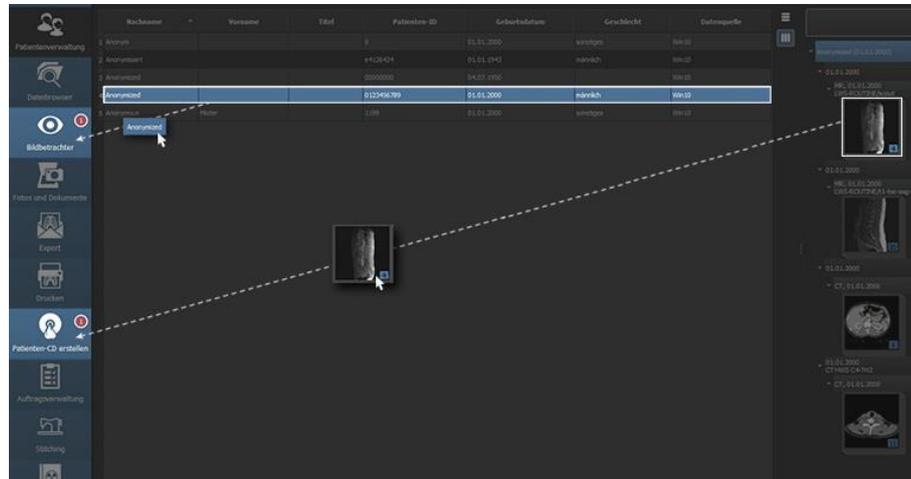

Mit gedrückter linken Maustaste das Objekt zur gewünschten Komponente ziehen.

Quick-Navigation zur Übertragung an andere Komponenten

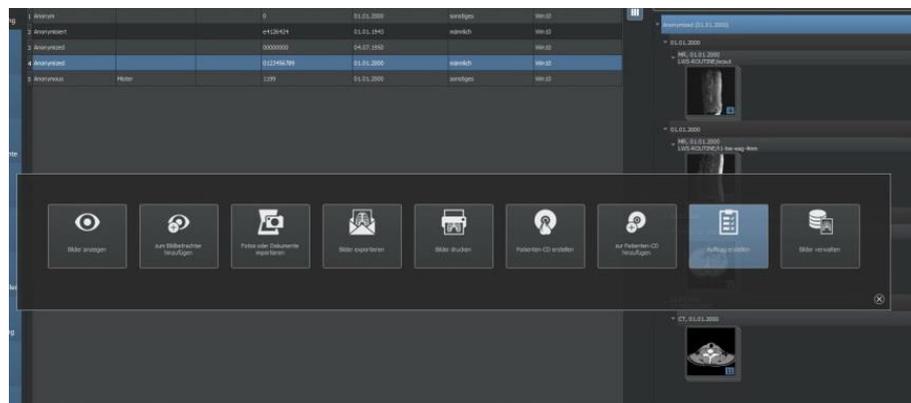

Mit rechter Maustaste auf Objekt klicken (Patient/Untersuchung/Serie/Bild) und die gewünschte Komponente wählen.

Quick-Tools

<p>Werkzeugauswahl (konfigurierbar): Oft verwendete Werkzeuge können auf der ersten Karte (linker weißer Punkt) platziert und dann per Rechtsklick auf das Bild aufgerufen werden.</p>	<p>Schnellauswahl der eigenen Presets für Window-Level sowie Filter: Mit Rechtsklick auf das Bild und weiter zur Karte 2 (mittlere weißer Punkt unten).</p>	<p>Schnellauswahl der einzelnen Untersuchungen und Serien: Einfach mit Rechtsklick auf Bild weiter zur Karte 3 (rechte weißer Punkt unten).</p>

Mausfunktionen

linke Maustaste:	Bild verschieben
mittlere Maustaste bzw. Scrollrad gedrückt:	Fensterung
rechte Maustaste:	Zoom vergrößern / verkleinern (bei vertikaler Mausbewegung)
Scrollrad drehen:	Blättern durch einzelne Bilder der Serie, Untersuchung bzw. Patienten
Alt + linke Maustaste:	Fensterung
Alt + Shift + linke Maustaste:	Zoomrechteck aufziehen
Strg + Shift + linke Maustaste gedrückt:	Magic Sharp Filter
Alt + rechte Maustaste:	Lupe
linke + rechte Maustaste gedrückt:	Magic Sharp Filter

Tastenkombinationen

Entertaste:	Vollbild des aktiven Bildes (roter Rahmen)
Doppelklick auf Bild:	Vollbild des Bildes
Shift + Klick auf Vorschaubild:	Vollbild des Bildes
Shift + Entertaste:	Vollbild der geteilten Ansicht
Shift + Doppelklick:	Vollbild der geteilten Ansicht
Escape-Taste:	Vollbilddarstellung verlassen
Doppelklick:	Vollbilddarstellung verlassen

Annotationen und Messungen

Linien, Pfeile, Rechtecke, Kreise, Ellipsen:

1. Klick mit linker Maustaste auf Startpunkt und Taste gedrückt halten
2. Maus zum Endpunkt ziehen und Taste loslassen

3-Punkt-Winkel:

1. Klick mit linker Maustaste auf Startpunkt und Taste gedrückt halten
2. Maus zum Endpunkt des ersten Schenkels ziehen und Taste loslassen
3. Maus zum Endpunkt des zweiten Schenkels ziehen und mit Einfachklick auf linke Maustaste abschließen

Polygone:

1. Klick mit linker Maustaste auf Startpunkt und Taste gedrückt halten
2. Maus zum nächsten Eckpunkt ziehen und Taste loslassen
3. Maus ohne gedrückte Taste zum nächsten Eckpunkt ziehen
4. mit Einfachklick auf linke Maustaste nächsten Eckpunkt setzen
5. Maus ohne gedrückte Taste zum nächsten Eckpunkt ziehen
6. mit Einfachklick auf linke Maustaste nächsten Eckpunkt setzen
7. so weiter und letzten Eckpunkt durch Einfachklick mit rechter Maustaste setzen

4-Punkt-Winkel:

1. Klick mit linker Maustaste auf Startpunkt und Taste gedrückt halten
2. Maus zum Endpunkt des ersten Schenkels ziehen und Taste loslassen
3. Klick mit linker Maustaste auf Startpunkt des zweiten Schenkels und Taste gedrückt halten
4. Maus zum Endpunkt des zweiten Schenkels ziehen und Taste loslassen

Anders als bei digipaX1 muss die linke Maustaste beim Setzen von einigen Annotationen oder Messungen gehalten werden. Alle Annotationen und Messungen können hinterher durch Verschieben der Eckpunkte noch korrigiert werden.