
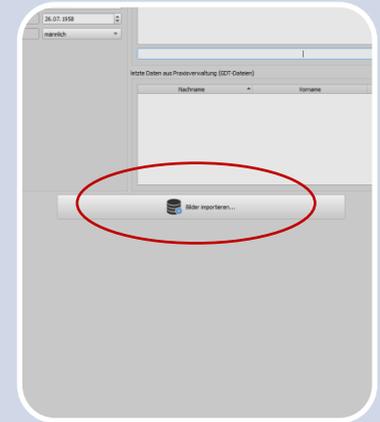


Patienten-CD importieren

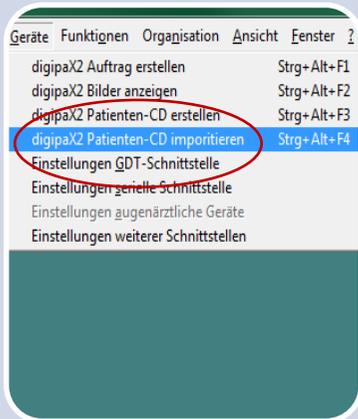

Schritt 1

Patient mit
entsprechenden
Schalter in der
Patientenverwaltung
an digipaX übergeben

oder

digipaX2 starten und
Patient auswählen

Schritt 2

Wenn noch nicht
automatisch
geschehen, den
Patient zur Karte
"Bildverwaltung"
ziehen (per
Drag&Drop)

Schritt 3

Patienten-CD oder -DVD
in das Laufwerk
einlegen

digipaX erkennt
automatisch, dass eine
Patienten-CD eingelegt
wurde und zeigt die
Bilder in der Vorschau
Bildverwaltung an

Die Funktion "Import"
ist bereits ausgewählt

Schritt 4

links in der Vorschau
die Bilder/Bildserien
oder Untersuchungen
auswählen, die import
werden sollen

im rechten Teil
prüfen, ob die alle
Daten des Patienten
korrekt sind , ggf.
anpassen

Schritt 5

im Anschluss auf
"Bilder importieren"
klicken

Nach erfolgreichem
Import wird Ihnen
Erfolgsmeldung
angezeigt.