

The background of the entire page is a dark, almost black, space filled with intricate, glowing blue and white light trails. These trails are composed of many thin, overlapping lines that create a sense of motion and depth, resembling a complex network or a digital landscape. The light trails are most concentrated in the lower-left and central areas, with some brighter spots that draw the eye.

digipax

Версия 1.3.8

Руководство пользователя

Содержание

1	Общее	7
2	Символы и иллюстрации	7
3	Меры безопасности	8
3.1	Программное обеспечение	8
3.2	Правила эксплуатации.....	8
3.3	Профиль пользователя	8
3.4	Оборудование.....	8
3.5	Аварийное завершение системы	9
3.6	Системные сообщения.....	9
3.7	Визуальная проверка	9
3.8	Хранение данных	9
3.9	Проверки	9
3.10	Срок службы	9
4	Установка и техобслуживание	10
4.1	Установка.....	10
4.2	Чистка	10
5	Запуск программного обеспечения.....	10
6	Вид экрана	11
6.1	Заголовок.....	11
6.2	Область просмотра изображения.....	12
6.3	Основание.....	12
6.4	Панели инструментов.....	12
6.5	Полоса разделения окна	12
7	Просмотр изображений / вьювер.....	13
7.1	Выбор изображения.....	13
7.2	Отображение изображения	14
7.2.1	Действия мышью.....	14
7.2.2	Изменение масштаба.....	15
7.2.3	Оверлей (наложение).....	15
7.2.4	Разделение изображений	16
7.2.5	Другие функции	16
7.2.6	Пометка изображений	17
7.2.7	Защита изображений (блокировка)	17
7.2.8	Контекстное меню	18
7.3	Манипуляции с изображениями	18
7.3.1	Преобразования (поворот, отражение, инвертирование).....	19
7.3.2	Управление окнами (Windowing).....	19
7.3.3	Аннотации и измерения	20
7.3.4	Отображение затемнения.....	21
7.4	Линии среза	21
7.5	Гистограмма	22

7.6 Easy Report	23
8 Менеджмент пациентов	25
8.1 Данные пациентов	25
8.2 Источники данных	26
8.2.1 Архив изображений	26
8.2.2 Одиночные файлы	27
8.2.3 CD пациента (DICOMDIR)	28
8.3 Поиск пациентов	28
8.4 Запись нового пациента / изменение данных пациента	29
8.5 Удаление пациента	29
8.6 Отправка изображений пациента в архив изображений	30
8.7 Управление данными пациентов	30
8.8 Список обследований, серий и изображений	31
8.9 Выход из менеджмента пациентов	31
9 Импорт данных	32
9.1 Общая характеристика	32
9.2 Диалоговое окно импорта	32
9.3 Сканирование документов	33
10 Печать	35
11 CD пациента	37
12 Печать этикеток	40
12.1 Общее	40
12.2 Принтеры и носители информации	40
12.3 Выбор шаблона и распечатка	41
12.4 Настройки принтера	42
12.5 Создание шаблона	43
12.5.1 Вставление, редактирование и удаление элементов	44
12.5.2 Редактирование текстовых полей	45
12.6 Редактирование, копирование и удаление шаблонов	47
12.7 Требования относительно данных на носителях информации	47
13 Менеджмент задач	48
13.1 Отображение задачи и обновление списка задач	48
13.2 Фильтрация списка задач	48
13.3 Создание задачи	49
13.4 Менеджмент таблицы органов и коды процедур	50
13.5 Удаление задачи	51
13.6 Запись в рентгеновский журнал	51
13.6.1 Данные из списка задач	51
13.6.2 Данные из полученных изображений	52
13.6.3 Без передачи данных	52
13.7 Отображение полученных изображений	52
13.8 Выход из менеджмента задач	52
14 Рентгеновский журнал	53
14.1 Новая запись	53
14.2 Фильтрация	53

14.2.1	Имя пациента.....	53
14.2.2	Часть тела	53
14.2.3	Промежуток времени.....	53
14.3	Экспорт	54
14.4	Очистка (удаление).....	54
15	Получение изображений.....	55
15.1	Общее	55
15.2	Ход получения изображений с использованием менеджмента задач	55
15.3	Ход регистрации/приема изображения без управления задачами	56
15.4	Получение рентгеновских изображений.....	56
15.4.1	Общее	56
15.4.2	Ход приема рентгеновских изображений	57
15.4.3	Преобразование изображений и управление окнами.....	58
15.4.4	Отметки.....	58
15.4.5	Обрезка изображения	58
15.4.6	Перемещение изображений	59
15.4.7	Отклонение изображения	59
15.4.8	Дополнительные устройства	59
15.4.9	Резервные копии.....	60
15.4.10	Рентгеновский журнал.....	60
15.4.11	Советы по предварительному просмотру	60
15.4.12	Проблемы и решения.....	60
15.5	Frame grabber / регистрация серии изображений	61
15.5.1	Общая характеристика	61
15.5.2	Системные требования для установки видеопроцессора frame grabber....	62
15.5.3	Конфигурация frame grabber в digipax	62
15.5.4	Элементы обслуживаемые видеопроцессором frame grabber	63
15.5.5	Регистрация с использованием видеопроцессора frame grabber	65
15.5.6	Регистрация с помощью модуля регистрации серии изображений	65
15.5.7	Обработка и сохранение полученных изображений	66
15.5.8	Импортирование резервных копий.....	66
15.5.9	Проблемы и решения.....	67
16	Конфигурация.....	68
17	Снятие с эксплуатации	75
17.1	Выход из программы.....	75
17.2	Выключение оборудования.....	75
18	Интерфейс GDT.....	76
19	Ветеринарная версия	78
19.1	Менеджмент пациентов	78
19.2	Менеджмент задач	79
19.3	Распечатка	79
19.4	CD пациента	79
19.5	Прочее	79
20	Подсоединение LOCALITE OrthoPlaner	80
21	Прочее.....	80

21.1 Таблицы.....	80
21.2 Тултипы.....	80
21.3 Лицензия.....	80

1 Общее

Програмное обеспечение digipax предназначается менеджменту, отображению и экспорту изображений DICOM различных медицинских исследований (например рентгеновские снимки (компьютерная рентгенография, цифровая рентгенография) или снимки КТ). Кроме того, оно предлагает широкий спектр полезных инструментов для повседневной работы с медицинскими изображениями.

Все технологии и технические процедуры (структура изображения, передача информации, хранение данных и т.д.) выполняются в соответствии со стандартом DICOM 3.

Система может быть использована для одного рабочего места с архивом изображений (PACS) или для совместной работы с другими системами и множествами архивов. Она может быть легко интегрирована с системами других производителей.

Кроме того, можно как обмениваться задачами при использовании рабочего листа (Worklist), так и пересылать данные, а даже указания, поступающие непосредственно из системы менеджмента в клинике.

2 Символы и иллюстрации

Символ	Значение
	Заметка
	Подсказка

Все иллюстрации (скриншоты) отображают окна программного обеспечения digipax в классическом стиле (для лучшего понимания и восприятия в документе). В программе обычно устанавливается черный стиль, который подходит для просмотра медицинских изображений.

3 Меры безопасности

3.1 Программное обеспечение

Запрещается вносить изменения в данное программное обеспечение без ведома и согласия изготовителя.

3.2 Правила эксплуатации

Продукт запроектирован для применения на персональных компьютерах в жилых и офисных помещениях. Эксплуатируемое оборудование должно быть приспособлено к условиям окружающей среды. Пользователь персонального компьютера должен убедиться в соответствии оборудования требованиям, действующим в месте установки.

3.3 Профиль пользователя

Продукт предназначен для использования медперсоналом. Лица, занимающиеся его обслуживанием должны иметь следующие квалификации:

- требуемые профессиональные знания,
- пройденная подготовка в области применения рентгеновских данных,
- умение обращаться с компьютером,
- знание одного из языков системы.

3.4 Оборудование

Эксплуатируемое оборудование должно иметь знак СЕ и соответствовать требованиям Директивы электромагнитической совместимости и Директивы низкого напряжения. Необходимо соблюдать ограничения по эксплуатации, а также правила техобслуживания и эксплуатации установленного оборудования в соответствии с, полученной от изготовителя, информацией и стандартом EN 60950-1.

Убедитесь, что оборудование установлено не ближе чем в 1,5 метрах от пациента, что бы нельзя было одновременно прикоснуться к пациенту и аппарату. Кроме того, обратите внимание на безопасное расположение оборудования. Мониторы должны стоять на столе устойчиво, что бы их нельзя было случайно перевернуть. Кабели должны быть проложены так, что бы о них нельзя было запнуться.

Оборудование должно устанавливаться таким образом, чтобы в случае возникновения аварийной ситуации его можно было легко и быстро отключить от источника питания. В случае необходимости можно применить альтернативный метод отключения, применяя бытовой удлинитель с выключателем, к которому, однако, должен быть обеспечен хороший доступ.

Клавиатуру, мышь и монитор необходимо разместить на рабочем месте таким образом, чтобы полностью исключить их возможное физическое влияние на окружающую среду.

3.5 Аварийное завершение системы

Если непредвиденное отключение питания или аварийное завершение системы вызвало потерю несохраненных изображений, обратитесь к главе 15.4.12 Проблемы и решения.

3.6 Системные сообщения

О сообщениях оборудования (писк) или сообщениях программного обеспечения (ошибки операционной системы, драйверов или самого программного обеспечения), нужно немедленно сообщать продавцу или системному администратору.

3.7 Визуальная проверка

От правильной работы монитора зависит качество диагноза. Нужно ежедневно проверять правильность настройки монитора с помощью специальной программы или тестового шаблона SMPTE. Если выявлено, что монитор не соответствует спецификации – технический персонал должен его настроить или заменить. За деталями обращайтесь к системному администратору.

3.8 Хранение данных

Каждую неделю нужно делать резервные копии всех новых изображений на CD или DVD. Диски с резервными копиями не должны храниться в том же помещении где находится архив изображений (сервер).

3.9 Проверки

Должны проводиться ежегодные проверки безопасности работы системы.

3.10 Срок службы

Срок службы этого продукта – 1 год.

4 Установка и техобслуживание

4.1 Установка

Инструкция по установке находится в техническом описании (руководстве администратора). Установка и техобслуживание может проводиться только уполномоченными изготовителем лицами. Данные лица могут быть направлены изготовителем с целью проведения вышеупомянутых действий.

4.2 Чистка

Если администратор/попечитель не решит иначе, тогда установленное компьютерное оборудование можно чистить общедоступными дезинфицирующими средствами.

5 Запуск программного обеспечения

Перед началом использования программного обеспечения необходимо запустить компьютер, на котором установлен лицензионный файл, а также обеспечить готовность к работе сетевых соединений. Соответствующую информацию на данную тему Вы можете получить у администратора системы digipax.

Включите компьютер и подождите до полного запуска системы Windows. Если в поликлинике применяется один или большее количество так называемых сетевых переключателей, то необходимо их предварительно включить. Соответствующую информацию на данную тему Вы также можете получить у администратора системы.

Затем сначала включите компьютер на рабочем месте и подождите до полного запуска системы Windows. Осуществите вход в компьютер (если вход не автоматизирован).

Приложение можно запустить путем нажатия на иконку , расположенную на рабочем столе или через программное меню. Если приложение запустилось автоматически одновременно с запуском системы Windows, соответствующая иконка находится в нижнем правом углу в так называемой области уведомлений панели задач.

После подключения программного обеспечения для менеджмента поликлиники приложение может также автоматически запускаться или приводиться в действие данным программным обеспечением. Данный интерфейс поддерживает коммуникационный стандарт GDT или HL7. Конфигурация соединения может осуществляться администратором системы.

Если приложение зависнет, тогда необходимо осуществить его перезапуск путем двойного клика по какому-либо из вышеприведенных соединений или через систему менеджмента поликлиники. Если система зависнет в процессе регистрации изображений и изображения не были сохранены, тогда можно их восстановить благодаря автоматическому резервному копированию, а затем сохранить. Подробнее об этом в разделах 15.4.9 Резервные копии или же 15.5.8 Импортирование резервных копий.

6 Вид экрана

Эскизы: показывают в предварительном просмотре все изображения выбранного пациента (древовидная структура с обследованиями и сериями)

Область просмотра изображения: показывает одно изображение или несколько (рядом или одно под другим)

Подвижные полосы: для изменения разделения изображения или скрытия окон

Различные компоненты

Заголовок с установленными компонентами и дополнительными модулями

Панель инструментов с функциями

Рабочие панели с функциями для обработки изображений (отсортированы по вкладкам)

Гистограмма активного изображения

Основание с информацией об отдельных пациентах и о свободном месте на жестком диске

Вид и разделение экрана

Большое диалоговое окно (на примере - создания CD пациента)

Пример вида экрана после активации компонента

6.1 Заголовок

Заголовок содержит кнопки, с помощью которых выбираются отдельные компоненты, и заменяет отсутствующее меню в системе.

Компоненты заголовка:

- менеджмент пациентов

- печать
- импорт
- CD пациента
- менеджмент задач
- рентгеновский журнал
- конфигурация

6.2 Область просмотра изображения

На панели слева выводятся эскизы изображений, в средней части – представлены выбранные изображения в большом формате, на панели справа – доступные функции для обработки изображений. Кроме того, под областью просмотра находится гистограмма для текущего изображения.

6.3 Основание

В основании показана информация о пациенте и количество свободного места на жестком диске. При выборе нескольких пациентов показано их количество и информация об активном пациенте, чей снимок отображается в данный момент.

Жесткие диски, для которых отображается свободное место, могут быть выбраны в конфигурации (максимум – 3 диска). Если любой из дисков является недоступным или превышен его допустимый объем, будет показано предупреждающее сообщение. Если система приближается к критическому значению, сообщение будет показано красным жирным шрифтом, в других же случаях он стандартный черный.

Основание отображается во всех режимах программы.

6.4 Панели инструментов

На панелях инструментов доступны различные функции. Например, функции для мыши, настройки масштабирования и оверлея, разделения изображения.

На мониторах в портретном формате панели инструментов автоматически распределяются вертикально. Этот параметр можно настроить вручную в конфигурации (категория „Прочее“).

6.5 Полоса разделения окна

Между частями экрана находятся настраиваемые разделительные полосы. Разделение изображения делается при помощи перетаскивания полос влево, вправо, вверх и вниз. Этим способом можно также и закрыть окна.



Используя кнопки на полосе слева, части изображения перемещаются вверх или вниз (влево или вправо), а также могут быть закрыты и восстановлены при нажатии на среднюю кнопку. После закрытия программы, все изменения сохраняются.

7 Просмотр изображений / вьювер

Компонент просмотра изображений охватывает экран выбора, демонстрацию изображения и обработку изображения.

Поддерживается просмотр, как полутоновых изображений, так и цветных. Они могут быть представлены без сжатия, в RLE- или JPEG-сжатии.



Вверху сжатых изображений (методом сжатия с потерями качества) находится соответствующая заметка. Эти изображения не подходят диагностике, потому что вследствие сжатия могла пропасть важная информация со снимка.

Информация о полутоновых снимках, настройки окна, поворот и аннотации хранятся в настраиваемом каталоге Grayscale Softcopy Presentation State (файл DICOM). Настройки для текущего изображения сохраняются при последующем его открытии.

7.1 Выбор изображения

На панели слева находится функция выбора изображения. Ширина панели настраивается полосой разделения. Полностью скрыть панель можно так же при помощи полосы.

Вид панели может быть DICOM древовидным или списком.


На DICOM древовидной структуре представлены обследования выбранного пациента. Каждый новый пациент создается на один узел выше. Узлы обследований можно закрывать и открывать, как и подкатегории содержащихся в них серий. Внутри узлов серии изображаются эскизами снимков.

При использовании списка, информация о каждом выбранном пациенте отображается в вышестоящем узле. Список всех доступных изображений для данного пациента расположен под узлом (с подписью и эскизом), независимо от их принадлежности к сериям и обследованиям. Критерий сортировки, направление сортировки и текст, который может быть отображен в узле, устанавливаются в конфигурации (по умолчанию: дата и время снимка).

Эскизы помечаются красной рамкой, даже если данное изображение отображается в большом размере.

Остановив указатель мыши над узлом (пациентом, обследовании, серии или снимке), появится всплывающее окно с информацией.

Размер эскизов изменяется при помощи переключателей „плюс“ и „минус“ под структурой древа. Установленные размеры сохраняются и используются при следующем запуске программы.

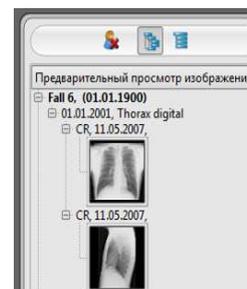

Двойным щелчком по эскизу снимок загружается в свободное окно просмотра. Разделяя область отображения, например 2x2 изображения, появляется возможность работать с большим количеством снимков. Если свободного окна нет, изображение открывается поверх текущего.


При помощи «перетаскивания» (функция Drag & Drop) эскизов в окно просмотра появляется возможность выбрать любую комбинацию снимков. Внутри самого окна, снимки можно менять местами тем же способом, „перетаскиванием“.

Выбор пациентов может быть сброшен кнопкой „Очистить выбор пациента“ над деревом предварительного просмотра.

7.2 Отображение изображения

Область просмотра делится от 1 до n окон изображений и накладывается поверх панели инструментов (слева). Активный снимок помечается красной рамкой.

7.2.1 Действия мышью

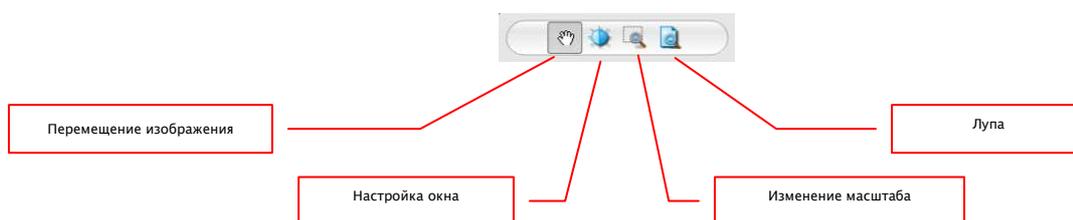

На этой панели инструментов можно выбрать действие для левой кнопки мыши:

- перемещение (если размер снимка больше, чем окно отображения) – функция по умолчанию;
- настройка окна (яркость/контраст):
 - ➔ горизонтальное перемещение мыши: изменение центра окна;
 - ➔ вертикальное перемещение мыши: изменение ширины окна.

Движения могут быть изменены в конфигурации (категория „Прочее“);

- изменение масштаба;
- лупа.


Данные функции могут быть активированы также при нажатии комбинаций:

- Alt + левая кнопка мыши: настройка окна;
- Alt + Shift + левая кнопка мыши: перетаскивание и изменение масштаба;
- Alt + правая кнопка мыши: лупа.

Другие действия мышью:

- Shift + левая кнопка мыши: пометка изображения;
- Strg + левая кнопка мыши: перетаскивание снимков между окнами изображений;
- правая кнопка мыши: увеличение/уменьшение (при вертикальном движении мышью);
- средняя кнопка мыши (или нажатие колеса прокрутки): многооконная работа;
- прокрутка колеса: следующее или предыдущее изображение из серии снимков, обследования или пациента (в зависимости от настройки), насколько имеются.


7.2.2 Изменение масштаба

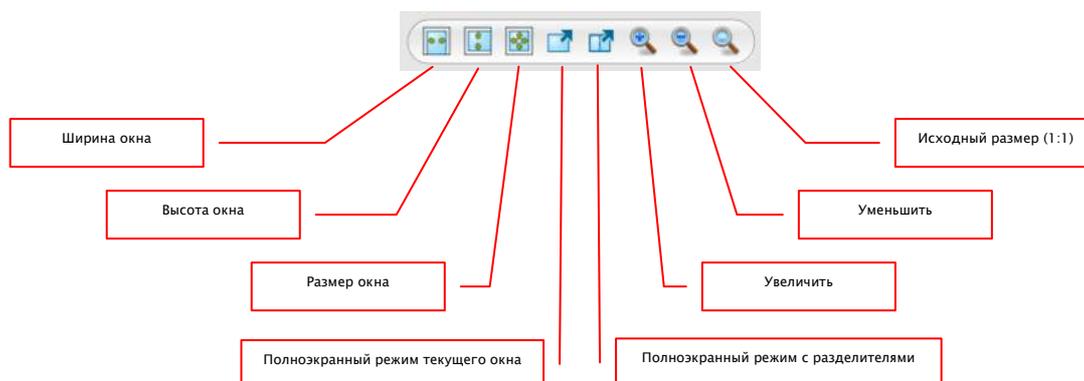

Изменение масштаба изображений относится только к текущему активному снимку. Изображение масштабируется по размеру окна и всегда отображается целиком. При перетаскивании изображений из одного окна в другое, масштаб снимков сохраняется.

Используя кнопку полноэкранного режима, текущее изображение или все отображающиеся окна (созданные разделителями) масштабируются по размеру экрана. Выйти из полноэкранного режима можно нажатием клавиши Esc.

7.2.3 Оверлей (наложение)

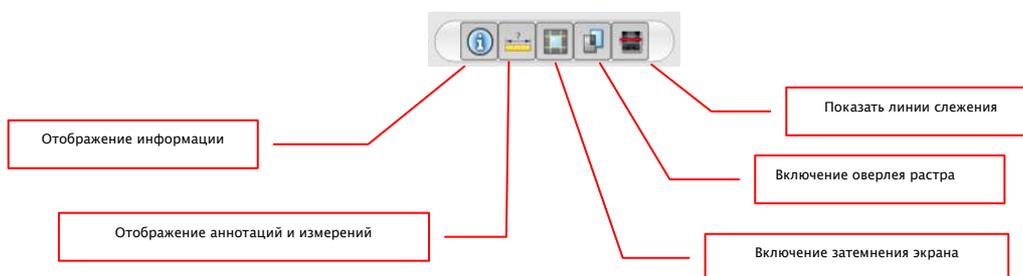


Области оверлея:

- информация – по углам изображения;
- аннотации и измерения – на измеренных участках;
- затемнение экрана – затемнение всего, что находится за границей выделенной области;
- оверлей растра – наложение изображений;
- линии слежения – представление отдельной части снимка КТ или МРТ.

Все области могут быть показаны или скрыты нажатием кнопок на панели инструментов.

Инструмент затемнения экрана включается автоматически, если загружается изображение с выделенной областью из предыдущего просмотра.


7.2.4 Разделение изображений

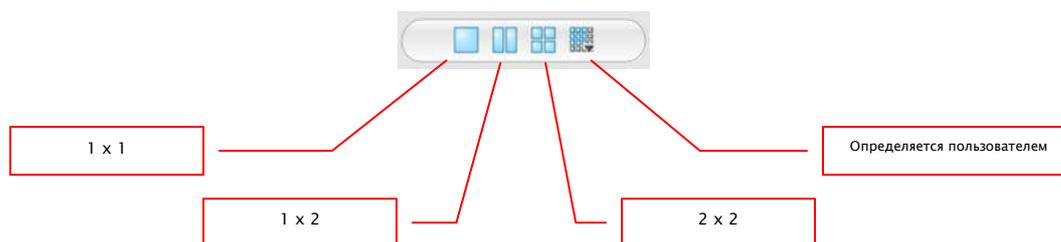

В области отображения снимков может быть представлено одно изображение и более. Количество отображаемых снимков настраивается кнопками на панели инструментов над полем с изображением (1x1, 1x2, 2x2). Дополнительно, при помощи последней кнопки, можно выбрать определенную пользователем настройку (максимально 6x6).



7.2.5 Другие функции

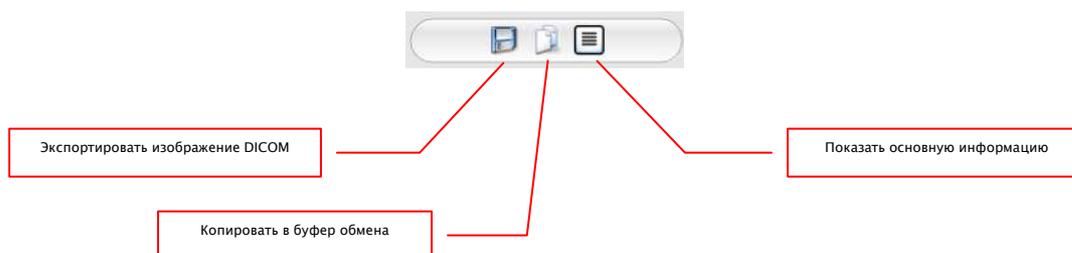

7.2.5.1 Экспорт изображений

Текущее изображение может быть сохранено как DICOM файл. Нажмите на иконку, укажите путь сохранения, и файл будет сохранен в указанное место.

7.2.5.2 Буфер обмена

Изображение копируется в таком виде, в котором оно отображается на экране (со всеми пометками и выделенными областями, если они имеются). Если при копировании зажать клавишу Shift, изображение скопируется в буфер обмена в оригинальном размере.


7.2.5.3 Информация в заголовке (DICOM Dump)

При использовании этой функции, выводится диалоговое окно с DICOM информацией (тегами) о текущем изображении. Теги отсортированы по группам для лучшего обзора. Отображаются все теги, даже те, которые имеют приватную информацию. Какие-либо изменения в значениях невозможны.

Группа	Элемент	Описание	Тип	Значение
Пациент	0010	PatientName	PN	Pat 7
	0020	PatientID	LO	11987741341
	0030	PatientBirthDate	DA	1900001
	0040	PatientBirthTime	TM	000
	0045	PatientSex	CS	M
	0050	MedicalHistory	LO	0
	0100	SeriesNumber	IS	0
Оборудование / серия / изображение	0005	SeriesCharacterSet	CS	ISO 3166
	0008	ImageType	CS	DERIVED+PRIMARY
	0010	SPRNumber	IS	06
	0018	SOPInstanceID	UI	1.2.792.30.1021.8001.3000.444308.14547302.6
	0020	StudyDate	DA	2007051
	0021	SeriesDate	DA	2007051
	0022	ContentDate	TM	8
	0023	StudyTime	TM	11545
	0024	ContentTime	TM	11545
	0025	SeriesTime	TM	11545
	0026	AcquisitionNumber	SH	14
	0027	Modality	CS	CT
	0070	Manufacturer	LO	Philips Medical Systems
	0081	ManufacturerModelName	LO	AnonymousWorklist
	0088	InstitutionAddress	ST	AnonymousAddress
	0090	ReferringPhysicianName	PN	Dr Anonymous
	1010	StationName	SH	Any Station
	1200	StudyDescription	LO	Ellenbogen
	1310	ProcedureCodeSequence	SQ	69
	0008	ReferringPhysicianName	PN	Dr Anonymous
	0100	SeriesNumber	IS	1002
	0101	SeriesDescription	LO	Ellenbogen
	1100	ManufacturerModelName	LO	AnonymousWorklist
	1101	ManufacturerModelName	LO	AnonymousWorklist
	0020	StudyDate	DA	1.2.792.30.1021.8001.3000.444308.14547302.6
	0021	SeriesDate	DA	1.2.792.30.1021.8001.3000.444308.14547302.6
	0022	ContentDate	TM	8
	0023	StudyTime	TM	1717
	0024	ContentTime	TM	0
	0025	SeriesTime	TM	1717
	0026	AcquisitionNumber	SH	0
	0027	Modality	CS	CT
	0028	Manufacturer	LO	Philips Medical Systems
	0029	ManufacturerModelName	LO	AnonymousWorklist
	0030	InstitutionAddress	ST	AnonymousAddress
	0031	ReferringPhysicianName	PN	Dr Anonymous
	1010	StationName	SH	Any Station
	1200	StudyDescription	LO	Ellenbogen
	1310	ProcedureCodeSequence	SQ	69
	0008	ReferringPhysicianName	PN	Dr Anonymous
	0100	SeriesNumber	IS	1002
	0101	SeriesDescription	LO	Ellenbogen
	1100	ManufacturerModelName	LO	AnonymousWorklist
	1101	ManufacturerModelName	LO	AnonymousWorklist
	0020	StudyDate	DA	1.2.792.30.1021.8001.3000.444308.14547302.6
	0021	SeriesDate	DA	1.2.792.30.1021.8001.3000.444308.14547302.6
	0022	ContentDate	TM	8
	0023	StudyTime	TM	1717
	0024	ContentTime	TM	0
	0025	SeriesTime	TM	1717
	0026	AcquisitionNumber	SH	0
	0027	Modality	CS	CT
	0028	Manufacturer	LO	Philips Medical Systems
	0029	ManufacturerModelName	LO	AnonymousWorklist
	0030	InstitutionAddress	ST	AnonymousAddress
	0031	ReferringPhysicianName	PN	Dr Anonymous
	1010	StationName	SH	Any Station
	1200	StudyDescription	LO	Ellenbogen
	1310	ProcedureCodeSequence	SQ	69
	0008	ReferringPhysicianName	PN	Dr Anonymous
	0100	SeriesNumber	IS	1002
	0101	SeriesDescription	LO	Ellenbogen
	1100	ManufacturerModelName	LO	AnonymousWorklist
	1101	ManufacturerModelName	LO	AnonymousWorklist
	0020	StudyDate	DA	1.2.792.30.1021.8001.3000.444308.14547302.6
	0021	SeriesDate	DA	1.2.792.30.1021.8001.3000.444308.14547302.6
	0022	ContentDate	TM	8
	0023	StudyTime	TM	1717
	0024	ContentTime	TM	0
	0025	SeriesTime	TM	1717
	0026	AcquisitionNumber	SH	0
	0027	Modality	CS	CT

7.2.6 Пометка изображений

У каждого изображения в верхнем правом углу находится маленькая красная область. При нажатии на эту область (или Shift + левая кнопка мыши по снимку) появляется красная точка (или пропадает, если она уже есть). Каждое изображение с красной точкой считается помеченным. Кроме того, добавляется затенение по всему изображению, так как иногда точку плохо видно (например, если представлено больше изображений, или на диагностических мониторах). Затенение может быть убрано в конфигурации (категория „Прочее“).

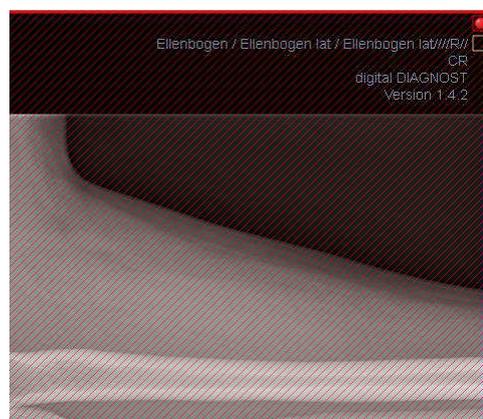

Помеченные изображения могут быть использованы, например, при записи CD пациента и распознаются по красной метке на эскизе на панели слева.

7.2.7 Защита изображений (блокировка)

Под каждой красной областью находится желтая область, нажатие на которую защищает (блокирует) изображение. Любые манипуляции над изображением становятся недоступными. Символ замка в желтой области означает, что изображение заблокировано.

Заблокированные снимки не отображаются в панели выбора изображений.



7.2.8 Контекстное меню

Контекстное меню вызывается кликом правой кнопкой мыши на изображении:

- функции для мыши: передвижение изображения, управление окнами, изменение масштаба выделенной области, лупа;
- изменение масштаба: ширина окна, высота окна, размер окна, включение и выключение полноэкранный режим, увеличение, уменьшение, исходный размер (1:1);
- оверлей: отображение информации, отображение аннотации и измерений, включение затемнения экрана, включение наложения bitmap, включение среза изображений
- деление изображений: 1x1, 1x2, 2x2, определен пользователем
- отправка по эл. почте
- обследования: список обследований пациента и, как подменю, серии изображений данного обследования (первое изображение данной серии появляется при активации пункта меню).



Согласно законодательным положениям требуется кодировка сообщений, отправляемых по электронной почте, которые содержат данные о пациентах или их персональные данные. Именно поэтому, клиент электронной почты должен быть настроен таким образом, чтобы данные кодировались, и прочесть их мог только адресат. Существуют дополнения к клиентам электронной почты, которые позволяют кодировать сообщения

Бесплатным заменителем криптографического программного обеспечения является „The GNU Privacy Guard“. Данное приложение можно получить на сайте <http://www.gnupg.org> и установить на свою машину. Установку и настройку должен проводить специалист.

7.3 Манипуляции с изображениями

Справа от снимка находится окно обработки изображений. Функции обработки отсортированы по закладкам и по темам. Закладки располагаются вертикально.

Для КТ и МРТ изображений действия над снимками автоматически применяются ко всей серии, или каждый раз для активного изображения.

Под закладками располагаются кнопки отмены последнего действия и восстановления отмененного. Все действия выводятся текстом на панели инструментов. Кнопки отмены и восстановления действий относятся к активному изображению и при его закрытии сохраняются все проведенные манипуляции, без возможности отменить их в будущем.

Для полутоновых изображений все изменения сохраняются. Для цветных снимков изменения не сохраняются и являются временными. При выборе другого пациента или закрытии изображения, любые изменения сбрасываются.

Все произведенные манипуляции удаляются нажатием кнопки „Воссоздать оригинальное изображение”, после подтверждения сделанного выбора. Таким образом, воссоздается оригинальное изображение, каким оно сохранено в архиве.

7.3.1 Преобразования (поворот, отражение, инвертирование)


Изображения можно повернуть на 90° по часовой стрелке или против нее или на 180°, нажатием на соответствующие кнопки. Снимки могут быть отражены по горизонтали, по вертикали, а также инвертированы.

Любая операция может быть отменена и возвращена при помощи стрелок внизу панели.



7.3.2 Управление окнами (Windowing)

Многооконный режим используется для работы с полутоновыми снимками и отключен для цветных. При обозначении центра и ширины окна, выбирается диапазон шкалы серого. Эти значения настраиваемые или могут быть выбраны из списка предустановок.

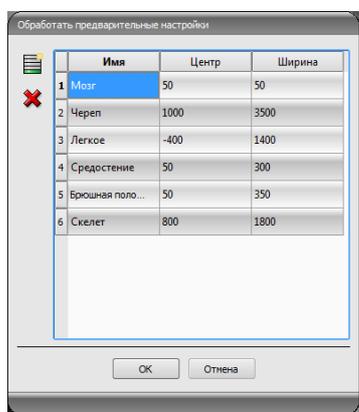

Изменение данных предустановок или добавление пользователем новых делается в диалоговом окне, которое появляется при нажатии кнопки „Обработать предустановки...”. Также пользователь может изменять и удалять установки по умолчанию (они не защищены от записи).



7.3.3 Аннотации и измерения





Погрешности в измерениях могут возникнуть из-за способа получения снимка или захвата изображения!

Измерения следует проводить при подсоединенном средстве визуализации. Погрешности могут быть также вызваны экспозицией – особенно, при традиционной рентгенографии. Расстояние между облучаемой частью тела и пластиной искажает представление о длине на 2D рентгенограмме. Даже если часть тела облучается с эталоном, существует вероятность возникновения погрешности, поскольку эталон не лежит на той-же самой высоте с измеряемой частью тела.

Если для изображений не заданы единицы измерения относительно пикселя, то все результаты измерений записываются в пикселях.

Под аннотациями находятся кнопки выбора графических элементов (линия, стрелка, прямоугольник, эллипс, многоугольник и текст). Прямоугольники, эллипсы и многоугольники можно нанести с внешней заливкой. Каждый раз, после выбора одного из объектов, всплывают подсказки по его правильному нанесению на снимок.

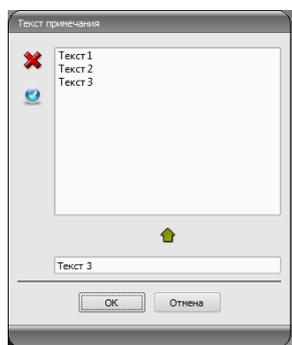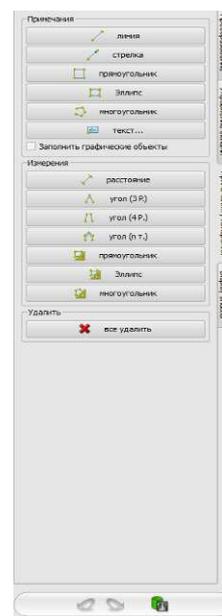

При выборе вставки текста всплывает диалоговое окно, в котором можно: добавить новый текст к списку стандартных заметок (введите текст в нижнем поле и нажмите зеленую стрелочку), выбрать готовый текст из уже имеющихся примеров (двойным щелчком или щелчок и нажатие кнопки ОК), ввести желаемый текст (введите текст в нижнем поле и нажмите ОК). Выбранный (введенный) текст помещается на снимке.

Есть возможность установить стандартный текст, который используется при следующей активации диалогого окна.



Функция измерения существует только в случае включения соответствующего модуля.

Под измерением подразумевается измерение участков и углов, измерение содержимого в выделенных областях (в прямоугольнике, эллипсе и многоугольнике). Измерение угла проводится путем введения 3-х, 4-х или n точек. Для n точек, n углов будет измеренно. Интенсивность может быть измерена нажатием на кнопку „Прямоугольник”, „Эллипс” или „Многоугольник” в нижней части диапазона измерений с зажатой клавишей Shift. Следовательно, понадобится реальное значение шкалы серого, значение максимума и минимума. Для цветных изображений будет выполнено обычное измерение площади.

Пользователь может удалить нанесенные аннотации и измерения при помощи кнопки „Удалить всё” с оверлея изображения. Отдельные объекты нельзя удалить или изменить.

Настройки для графических объектов в оверлее находятся в конфигурации, категория „Оверлей”.

7.3.4 Отображение затемнения

На каждом изображении выделенную область можно выбрать в форме прямоугольника, эллипса или многоугольника. На снимке может быть только одно выделение определенной формы (т.е. нельзя сделать два прямоугольных выделения), но можно использовать все формы одновременно. После нажатия кнопки с выбранной фигурой, появляется объяснение по нанесению.

Установка выделенной зоны определенной формы заменяет уже существующую область этой же формы.

Все, что находится за границами выделенной области, может быть затемнено или показано при помощи кнопки на панели инструментов („Отобразить затемнение” в опциях оверлея).

Объекты можно удалять поочередно.



7.4 Линии среза

Линией среза (локализатором) представляется край среза двух слоев (плоскости) и положение отдельных частей снимка серии КТ или МРТ. Положение изображений любой другой серии в отношении активного изображения визуализируется таким же образом.



При отображении в виде линий проекции не указываются данные относительно угла пересечения двух слоев. Линии не указывают на то, перпендикулярны ли слои относительно друг друга или же наклонены диагонально. Именно поэтому стоит помнить о том, чтобы не констатировать расположение двух слоев относительно друг друга на основании линий проекции.


При отображении в виде плоскости, благодаря трехмерному изображению, можно лучше представить себе расположение плоскостей относительно друг друга. Желаемую форму отображения можно настроить в конфигурации Пользователь::Наложение/ Линии среза путем определения типа в группе „Линии среза / локализатор”.

Перед тем, как открыть серию снимков, необходимо настроить разделение изображения таким образом, чтобы обозревать отдельные серии рядом. Затем откройте каждую из нужных серий. Локализатор автоматически отображается при включенной функции линий слежения. Щелкните на серии и прокрутите колесиком мыши все её изображения.

Как альтернатива, можно использовать клавиши „Page up” и „Page down”. Позиция текущего изображения показана в другой серии как линия или плоскость проекции. Настройки линий слежения находятся в разделе конфигурации – Оверлей /Линии среза – 16 Конфигурация.

7.5 Гистограмма

Под изображением находится окно с гистограммой активного снимка. Окно с гистограммой можно закрыть (спрятать).

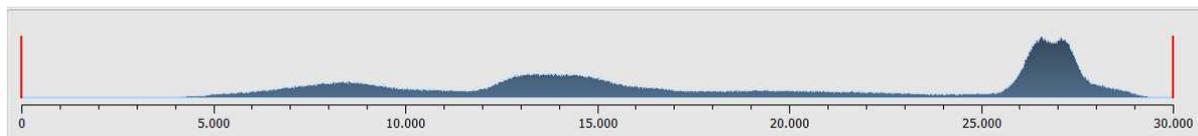

Для цветных изображений отображаются красные, зеленые и синие кривые для RGB каналов. Для полутоновых снимков используется синяя кривая для отображения разброса значений шкалы серого.

На гистограмме полутоновых снимков всегда отображаются текущие настройки окон, которые тут же могут быть и модифицированы. В левой и правой части видимой области находятся красные линии, обозначающие края окна и являющиеся ползунами для их изменения. Уровень сглаживания гистограммы изменяется в конфигурации Пользователь/Гистограмма. Смотрите в разделе 16. Окно можно передвигать, кликнув на область между красными линиями и перетащив его мышью.

Для увеличения масштаба гистограммы, используйте прямоугольник масштаба, перетаскивая его клавишей Shift + левой кнопкой мыши. Щелчком правой кнопкой мыши на гистограмме, восстанавливается полный размер.


Настройки для работы с гистограммой находятся в конфигурации, категория Гистограмма.

7.6 Easy Report




Этот модуль должен быть активирован при помощи настоящей лицензии.


Используя этот модуль, можно создавать для пациентов рапорты, описания, примечания и т.д. в текстовой форме к обследованиям или изображениям. Ввод текста происходит в предусмотренном поле ввода под просмотром изображений. Текст превращается в сжатое полутонное изображение, с которой можете обращаться так же, как и с другими изображениями DICOM. Дополнительно, текст будет также откладываться на теге 0020,4000 – Примечание к изображению“.

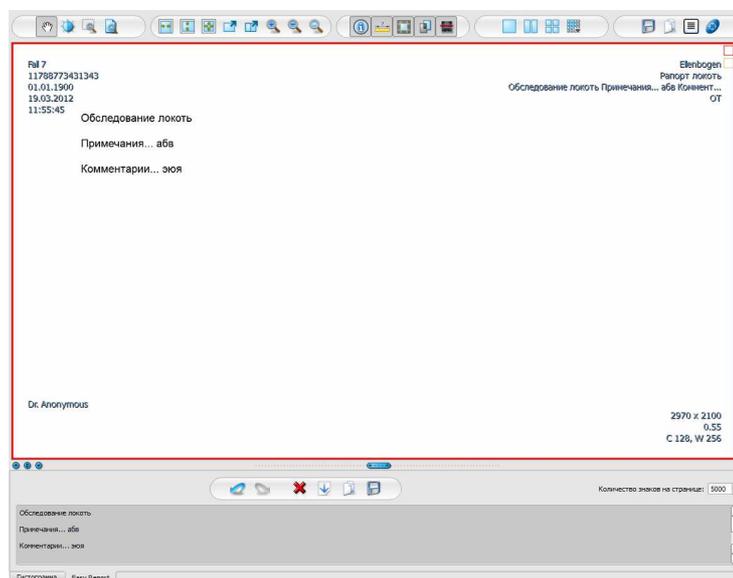

Кнопкой „Сохранить“ данные добавляются существующему обследованию или сохраняются в архиве в форме нового обследования. Easy Report также доступный в режиме множества пациентов. Это означает, что можете открыть нескольких пациентов одновременно. Выберите сначала пациента, которому следует присвоить рапорт. Затем выберите существующее или новое обследование. Введите название рапорта и щелкните „ОК“. Название рапорта сохраняется на теге „0008,103E – Описание серии“.

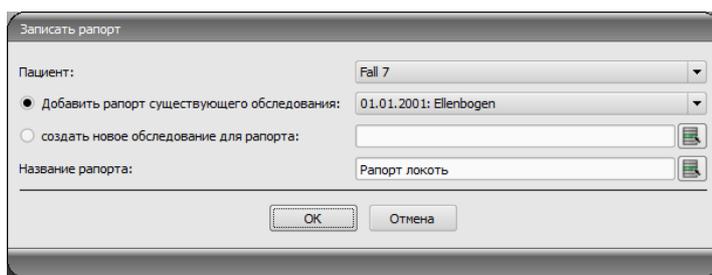

Описание функциональной панели:

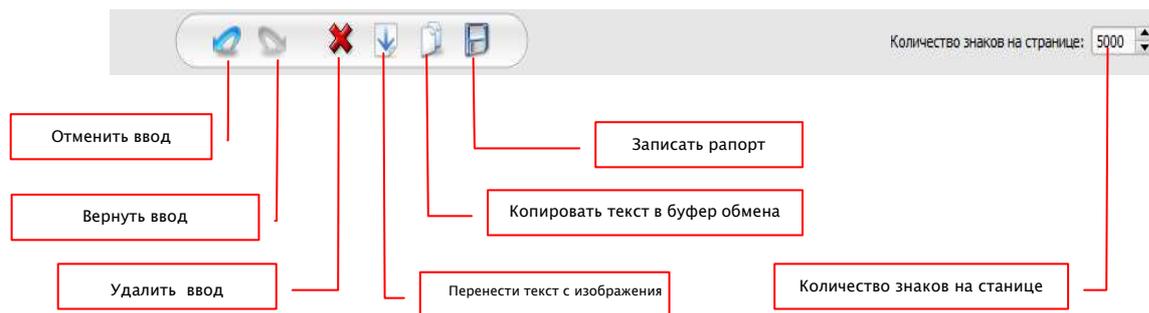


Количество знаков на странице настроено по умолчанию на 5000 знаков. После этого, наступает автоматическая смена страницы. При этом новое изображение автоматически создается в той-же самой серии. Смена страницы совпадает на границе слова. Таким образом, страницы рапорта сохраняются насколько это возможно в формате А4. Количество знаков на странице можно повышать до 10 240 знаков.

Текст можно переносить нажатием иконки „Перенести текст с изображения“ из существующего рапорта в поле ввода и таким образом использовать для нового рапорта. Изменение устойчивого рапорта не возможно.

Можно также далее обрабатывать текст из существующих рапортов. Перенесите текст сперва в поле ввода, дальше копируйте текст в буфер обмена, а потом вставьте, например, в документ Word.

8 Менеджмент пациентов

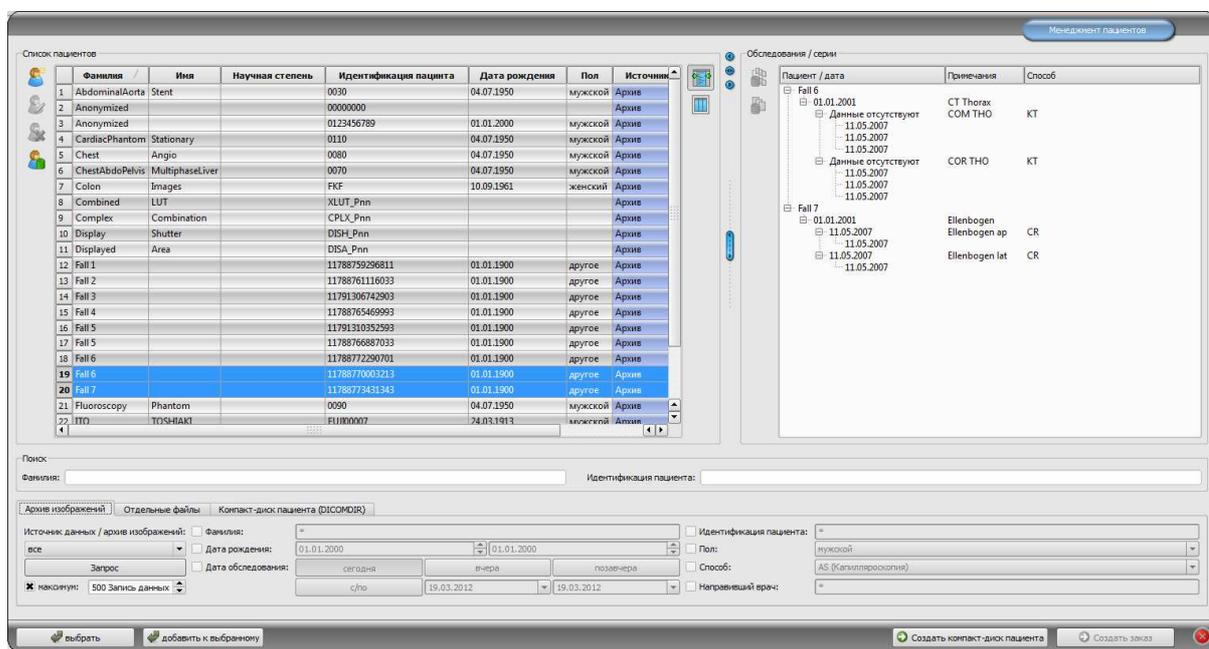

8.1 Данные пациентов

Для каждого пациента определяются такие данные в таблице:

- фамилия
- имя
- звание
- ID пациента
- дата рождения
- адрес
- номер телефона
- пол
- примечания
- источник данных

Колонки могут быть закрыты и восстановлены по отдельности. Нажмите правой кнопкой мыши верхний колонтитул списка пациентов и активируйте или деактивируйте желаемые колонки. Можете также определять порядок колонок. Нажмите левую кнопку мыши и переместите колонку на желаемую позицию.

Колонки адреса, номера телефона и примечаний вставлены по умолчанию, их надо лишь активировать. Чтобы эти данные показывались, может быть необходимым приспособление базы данных. Детально узнайте у системного администратора.

Количество обследований также является частью данных пациента. Каждая серия может содержать множество снимков.

8.2 Источники данных

Данные могут быть запрошены из архива изображений, а также из локальных файлов DICOM. Последнее может быть отслежено сканированием по папкам, загружено открытием отдельных файлов или быть импортированным из DICOMDIR, как это обычно используется при записи CD пациентов.

Список пациентов каждый раз показывает список выбранного источника данных отдельной вкладки. Если вкладка меняется, то и список пациентов будет изменен.

Менеджмент пациентов загружается автоматически при запуске программы, если как раз соединение GDT не требует никакого другого действия (смотрите в главе 18 Интерфейс GDT). Первым же делом программа посылает запрос об обновлении списка пациентов. Нажав „Да”, загружаются все новые архивы изображений без фильтрации (смотрите в главе 8.2.1 Архив изображений). Это займет какое-то время, в зависимости от количества пациентов, сети и использованной базы данных. В конфигурации, категория „Прочее”, настраивается поведение выдачи запроса. Можно настроить так, чтобы список пациентов активировался или нет при запуске программы без запроса. Тим образом, сначала настраивается фильтр и происходит быстрый поиск.

8.2.1 Архив изображений

8.2.1.1 Запрос

Программа дает возможность запрашивать архивы изображений (PACS) и локально установленные данные, которые предусмотрены для записи в архиве изображений. В выпадающем окне „Источник данных/ Архив изображений” определяется, какой из источников будет запрашиваться. Можно выбрать „Все” для использования всех возможных источников, „Локально” – для работы с локальными данными, или выбрать название архива изображений. Деактивированные архивы изображений не включаются в список, и не будут запрашиваться в дальнейшем.

При нажатии кнопки „Запрос” запрашиваются источники с использованием настроенных фильтров и список найденных соответствующих пациентов обновляется.

Для увеличения скорости работы с запросом, можно настроить максимальное количество выводимых на экран пациентов (чем меньше число – тем выше скорость). Если в списке нет искомого пациента, потому что список урезан, надо использовать фильтр для увеличения максимально доступных наборов данных.

8.2.1.2 Фильтр

Список пациентов может быть отфильтрован по различным критериям. При помощи фильтрации, все пациенты, которые не отвечают условию – отсеиваются. Критерии для фильтрации можно активировать и деактивировать переключателями и таким образом комбинировать фильтры.



Локальные данные, следовательно, и локально установленные или переданные посредством GDT пациенты, не фильтруются. Они не появляются в списке результатов, даже если соответствуют критериям поиска.

8.2.1.2.1 Фильтрация по имени

Введите начало искомого имени и „*“ после него (например, „Иван*“), для поиска всех пациентов, чье имя (фамилия) начинается на эти буквы. Звездочка (*) может использоваться и в других местах (например, „*ова“).

8.2.1.2.2 Фильтрация по дате рождения

Пациенты могут быть отфильтрованы по датам рождения включенными между введенными датами.

8.2.1.2.3 Фильтрация по дате обследования

Пациенты могут быть отфильтрованы по содержанию обследования с указанием даты или введением периода времени. У пациента будет показано только одно обследование, которое соответствует критерию поиска.

8.2.1.2.4 Фильтрация по ID пациента

Введите искомое ID пациента или его часть, используя „*“ как для фильтрации по имени.

8.2.1.2.5 Фильтрация по полу

Фильтрует всех пациентов по определенному полу.

8.2.1.2.6 Фильтрация по методам

Все возможные методы (процедуры для получения изображения) перечислены в раскрывающемся списке, из которого можно выбрать один из способов. Впоследствии будут показаны только те пациенты, которые имеют изображения сделанные выбранным методом. Это означает, что будут отфильтрованы и серии изображений.

8.2.1.2.7 Фильтрация по пересылке врачу

Фильтрация производится тем же способом, как и по имени пациента. Возможно, понадобится поставить „*“ в начале и в конце искомой части (например, «*ов*»).

8.2.2 Одиночные файлы



Используя соответствующую вкладку, локальные DICOM файлы могут быть быстро импортированы и просмотрены. Выберите папку или диск, нажмите кнопку „Сканировать“, и все файлы, которые соответствуют настройкам фильтра, будут открыты. Можете задать фильтр для открываемых файлов и фильтр для файлов, которые не должны быть импортированы. Активируйте желаемый фильтр и введите имя файла, используя групповые символы („*“ и „?“). В случае настройки в виде „*.dcm СТ*“ с опцией „Только эти файлы“, будут найдены все файлы с окончанием „dcm“ и все файлы с началом „СТ“. Если вы активируете опцию „Не эти файлы“, и используете фильтр,

например „*.exe*.zip”, вы устранили возможность того, что импортируются программы или ZIP архивы.

Опция „Включить подпапки” активирует сканирование подпапок на наличие нужных файлов.


Если файл, соответствующий настройке фильтра, не может быть импортирован, это будет записано в файле хронологического протокола, который можно просмотреть в случае ошибок.

Выбранная папка сохраняется и её потом можно всегда быстро найти в раскрывающемся списке. Новая папка выбирается иконкой „...”

При нажатии на кнопку „Добавить файлы DICOM...” напрямую открываются одиночные файлы. Для добавления большего количества файлов используйте клавиши Shift и Ctrl.

Источник данных обнуляется при нажатии на кнопку „Убрать/Очистить список”. Все находящиеся в том месте изображения будут удалены из системы. **Тем не менее, файлы останутся в сохранности.**

8.2.3 CD пациента (DICOMDIR)

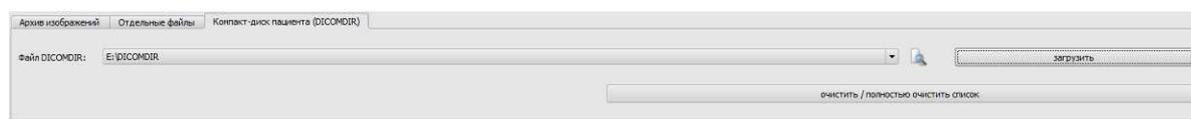

Часто папки для файлов DICOM создаются в файлах DICOMDIR. В основном это происходит при создании CD пациента. Такое CD пациента можно быстро импортировать при помощи этой вкладки.

Файл DICOMDIR (имя файла „DICOMDIR”, без расширения) выбирается при помощи „...”. Уже использованные места хранения открываются в выпадающем списке и снова могут быть быстро выбраны. Нажатием по „Загрузить” загружается файл DICOMDIR, в котором содержится вся информация о выбранном пациенте, вместе со снимками.

Источник данных обнуляется при нажатии на кнопку „Убрать/Очистить список”. Все находящиеся в том месте изображения будут удалены из системы. **Тем не менее, файлы останутся в сохранности.**

Компакт-диски пациентов могут быть автоматически импортированы в систему. Если компакт-диск пациента загружается при открытом приложении, то он может быть открыт самой системой digipax. После считывания диска, вся информация может быть сохранена в архиве изображений. Больше информации о сохранении данных в архиве находится в главах 8.6 Отправка изображений пациента в архив изображений и 0 Управление данными пациентов.

8.3 Поиск пациентов

Данные в таблице могут быть отсортированы по возрастанию или убыванию в каждом поле (колонке), нажав на заглавие.

В поиске есть поля ввода для имени (фамилии) и CD пациента. Первый найденный пациент в списке пациентов будет выделяться каждый раз, когда изменяется текст в любом из полей ввода.

Если текст вводится в любое поисковое поле, то в другом – будет удален. Поля поиска становятся зеленого цвета, если найдено хотя бы одно совпадение, в противном случае – они красные.

8.4 Запись нового пациента / изменение данных пациента

Создание новых пациентов, а также редактирование данных возможно только для источника данных архива изображений.

Во время записи нового пациента, его данные вводятся в диалоговое окно. ID следующего доступного пациента выбирается автоматически. Этот идентификатор можно ввести вручную, если он еще не был назначен. С помощью конфигурации можно также ввести настройки, где ID пациента всегда должен быть введен вручную. В этом случае система не выдает ID.

Если выйти из диалога, нажав „Да”, то новый пациент записывается на местном уровне. Это означает, что пациент не доступен в архиве изображений, потому что это возможно только с передачей изображений, а не только одних данных в DICOM архив. Таким образом, когда у пациента есть обследование, серия или снимок, все данные могут быть переданы, как новый объект DICOM в архив изображений.

Редактирование данных пациентов возможно только для локальных пациентов. Как только данные передаются на сервер (архив изображений), редактирование больше не доступно.

Если в конфигурации установлено, что идентификация (например, номер врача или номер компании) должны быть добавлены к каждому ID пациента, то идентификация будет автоматически добавлена к вводимому вами ID пациента (с разделением „-”). Если в конфигурации установлено, что ID пациента будет автоматически создан системой, поле ввода ID будет отключено.



Следующие символы не допускаются символов в имени или ID пациента: \ / : * „”? <> |.

Строго избегайте специальных символов типа ^ ° : * ? < > | @ € μ ~ ² ³ !. Достаточно просто–напросто использовать настоящую фамилию пациента и возрастающую нумерацию ID пациентов. Можно, к примеру, начать с цифры 000001.


8.5 Удаление пациента

Удаление пациентов в основном доступно для всех источников данных. Пациенты, которые уже хранятся в архиве изображений, должны быть удалены непосредственно из архива изображений.

В случае с источниками данных для отдельных файлов и CD пациентов, отмеченный пациент или пациенты удаляются только из списка. **Соответствующие файлы, таким образом, физически не удаляются.**

8.6 Отправка изображений пациента в архив изображений

Отправка изображений возможна во все возможные источники данных. Серия или обследования из источника данных также могут быть отправлены отдельно в архив. Для того чтобы отправить одиночное обследование, выберите обследование в правой части, а затем нажмите кнопку „Отправить обследование в архив изображений” рядом с древовидной структурой. Для того чтобы отправить конкретную серию, выберите серию и нажмите на кнопку „Отправить серию в архив изображений”.

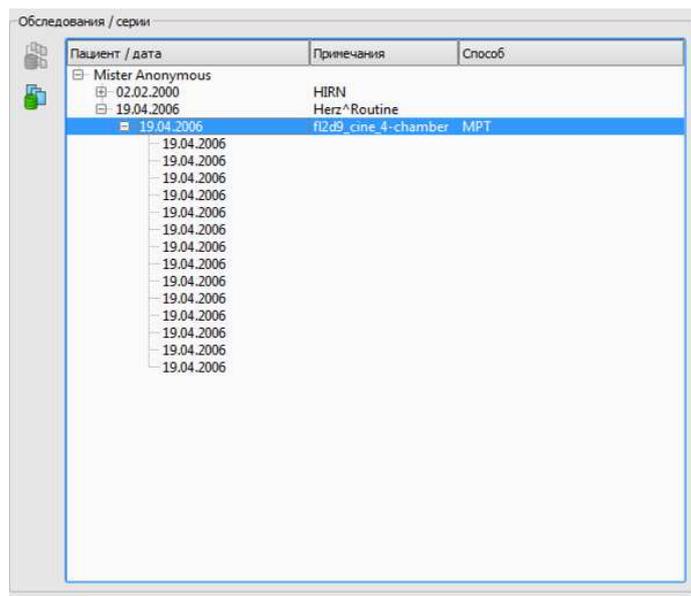


Перед отправкой в архив может быть необходимым присвоение ID пациента. Смотрите в главе 0

Управление данными пациентов.

Если настроено и активировано множество архивов (PACS серверов), то целевой архив должен быть выбран в диалоговом окне. Все изображения активных пациентов (все обследования и серии) будут отправлены в целевой архив. При необходимости, список пациентов (источник данных архива изображений) должен быть обновлен, для того, чтобы все изменения вступили в силу.

8.7 Управление данными пациентов

Для этого выберите в диалоговом окне пациента (ов) и откорректируйте необходимые данные в окне справа. Затем нажмите на кнопку „Выполнить импорт” для того, чтобы передать изображение выбранного пациента (ов) в архив. Если вы хотели бы применять данные уже открытых пациентов, которые были направлены через GDT, пожалуйста, выберите кнопку „Данные текущего пациента”.

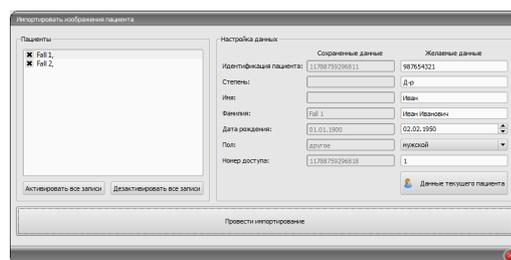

Внимание: Если открыто несколько пациентов, то будут всегда применяться данные первого пациента.

8.8 Список обследований, серий и изображений

Параллельно списку пациентов отображаются обследования выбранного пациента или пациентов. Обследования, серии и изображения представлены в виде древовидной структуры. Запись, замечания и методы серий показываются каждый раз. Многие пациенты могут быть выбраны одновременно – в древовидной структуре в узлах выше – информация о пациенте, а ниже – его обследования.

8.9 Выход из менеджмента пациентов

Выбор пациента делается щелчком по необходимой строке в таблице. Пациент выбирается двойным щелчком в таблице или с помощью кнопки „Выбрать”. Диалоговое окно закрывается и относительно данных снимка обуславливается область просмотра изображений. Кроме того, в таблице возможен множественный выбор пациентов для одновременной работы с ними.

Двойным щелчком в списке обследований открывается только выбранное обследование. Пациенты также могут быть добавлены в текущий выбор пациента с помощью кнопки „Добавить выбор”.



При нажатии „Добавить выбор” диалоговое окно не будет закрыто, если зажать клавишу Shift. Пациент добавляется, а диалоговое окно остается открытым. Таким образом, может быть найдено и выбрано множество пациентов.

Кроме того, следующие кнопки могут быть использованы для того, чтобы получить доступ непосредственно к другому компоненту после активизации пациента:

Создание CD пациента → Запись CD пациента (можно выбрать множество пациентов);

Создание задачи → Создание новой задачи в менеджменте задачи (возможно только для одного выбора).

9 Импорт данных

9.1 Общая характеристика

В компоненте импорта активному пациенту могут быть отсканированы как пиксельная графика из файлов изображений так и изображения (с помощью интерфейса TWAIN). Переключатели сканирования доступны только в том случае, если был запущен соответствующий модуль.




Импортирование изображений с помощью интерфейса TWAIN не предусматривает импорта рентгенодиагностических изображений. Предусмотренная цель применения ограничена до импорта изображений и документов, которые затем могут быть предоставлены пациенту в формате DICOM, и будут одновременно доступны вместе с другими данными изображений паци.

Импортирование данных изображений с помощью интерфейса TWAIN ограничено до 32-битной глубины цвета – в случае цветных изображений, и 8-битной глубины цвета (256 градаций серого) – в случае изображения в оттенках серого цвета.

Документы должны сканироваться на сканере с выбранной настройкой „Оттенки серого“ или „Цветное“. Документы отсканированные на сканере с выбранной настройкой „черно-белое“ не могут импортироваться.

9.2 Диалоговое окно импорта

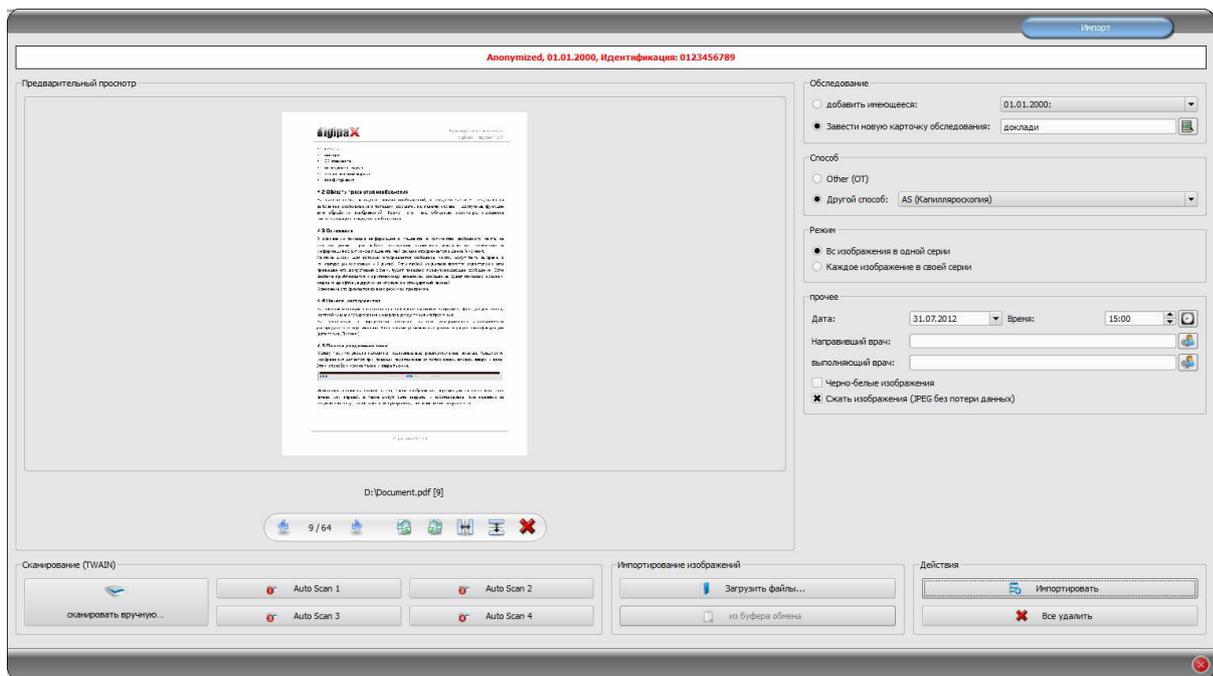

Убедитесь, что выбран только один пациент. Имя текущего пациента отображается в заголовке окна.

Для импорта из файлов нажмите „Открыть файлы...”. Выбранные изображения будут добавлены в список импорта. Для сканирования нажмите „Сканировать...”. Найденные изображения будут добавлены в список импорта.

Список импорта отображается слева. Для работы с изображениями используется панель кнопок снизу. Изображения можно вращать, зеркально отображать и удалять. С помощью кнопки "из буфера обмена" в список можно добавлять изображения из других программ редактирующих изображения, путем копирования их в буфер обмена. Список импорта можно очистить кнопкой „Удалить всё”.

Настройки импорта выбираются в правой панели. Что бы добавить изображения в новое обследование нажмите „Назначить новое обследование” и введите описание обследования. Что бы добавить изображения в существующее обследование нажмите „Добавить к существующим” и выберите нужное обследование из выпадающего списка. Выберите тип изображения с помощью переключателя „Метод”. Обычно используется „ОТ”, но можете также выбрать другой метод, соответствующий открытым изображениям.

С помощью переключателя „Режим” выберите нужно ли добавлять все изображения в одну серию или для каждого изображения создавать отдельную серию. Рекомендуется добавлять все изображения в одну серию.

Под „Прочее” можно настроить дату и время создания DICOM файла и указать лечащего и исполняющего врача, если касается создания нового исследования.

Так же можно указать, что изображения должны быть сохранены как полутоновые.

Чтобы экономить память в архиве и переносить изображения быстрее, импортированные изображения могут быть сжаты методом сжатия без потерь. Для этого активируйте опцию „Сжать изображения”

Для выполнения импорта нажмите кнопку „Импорт” на нижней панели. Изображения будут сохранены как DICOM файлы (соответственно опциям) в архив изображений. Успешно импортированные изображения исчезнут из списка импорта.

При импортировании создаются 8-битовые DICOM изображения. Из изображений в 16-битовом формате (DICOM, TIF) при импорте создаются 16-битовые DICOM изображения.



После того как изображения будут импортированы, их нельзя будет редактировать или удалять. Для редактирования или удаления изображений из архива нужно обратиться к администратору.

В зависимости от настроек системы, после импорта может быть создан GDT файл. Он может быть загружен в систему управления клиники и привязан к карточке пациента.


9.3 Сканирование документов

Доступны следующие опции: „ сканировать вручную...” и автоматическое сканировать вручную...”, Вы активируете диалоговое окно сканера и можете вручную настроить разрешение и цвет и т.п. перед каждым сканированием. Данное диалоговое окно не является составным элементом программного обеспечения digipax, однако, является составным элементов программного обеспечения сканера. Для получения точной


информации необходимо ознакомиться с документацией сканера. Если установлено несколько устройств с интерфейсами TWAIN или данное устройство оборудовано несколькими интерфейсами TWAIN, тогда можно выбрать соответствующее устройство или интерфейс, придерживая нажатую кнопку переключения (Shift) и щелкая одновременно по кнопке „сканировать вручную...“.

Кроме того, в Вашем распоряжении находятся еще четыре кнопки, которые можно запрограммировать соответствующим образом. После настройки кнопок данные параметры будут автоматически передаваться сканеру в процессе распечатки, а документы будут автоматически распечатываться с учетом данных настроек. Для этого необходимо всего лишь раз вручную настроить желаемые параметры, такие как: цвет, разрешение и т.п.

Для того, чтобы провести настройку параметров кнопки автоматического сканирования необходимо одновременно нажать на данную кнопку и на кнопку переключения (Shift). Затем ввести описание данной кнопки и настроить желаемые параметры. Может случиться, что Ваше устройство не обслуживает всех функций и некоторые параметры будут недоступны. В случае использования нескольких устройств, необходимо выбрать, согласно вышеприведенному описанию, с помощью кнопки „Ручное сканирование“ устройство, к которому будут применяться кнопки автоматического сканирования. Всегда запускается тот сканер, который был выбран в данной карте настроек последним.

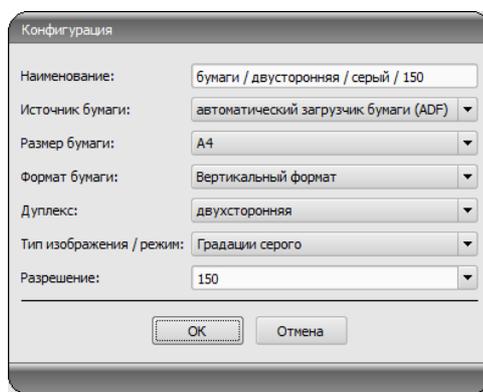

10 Печать

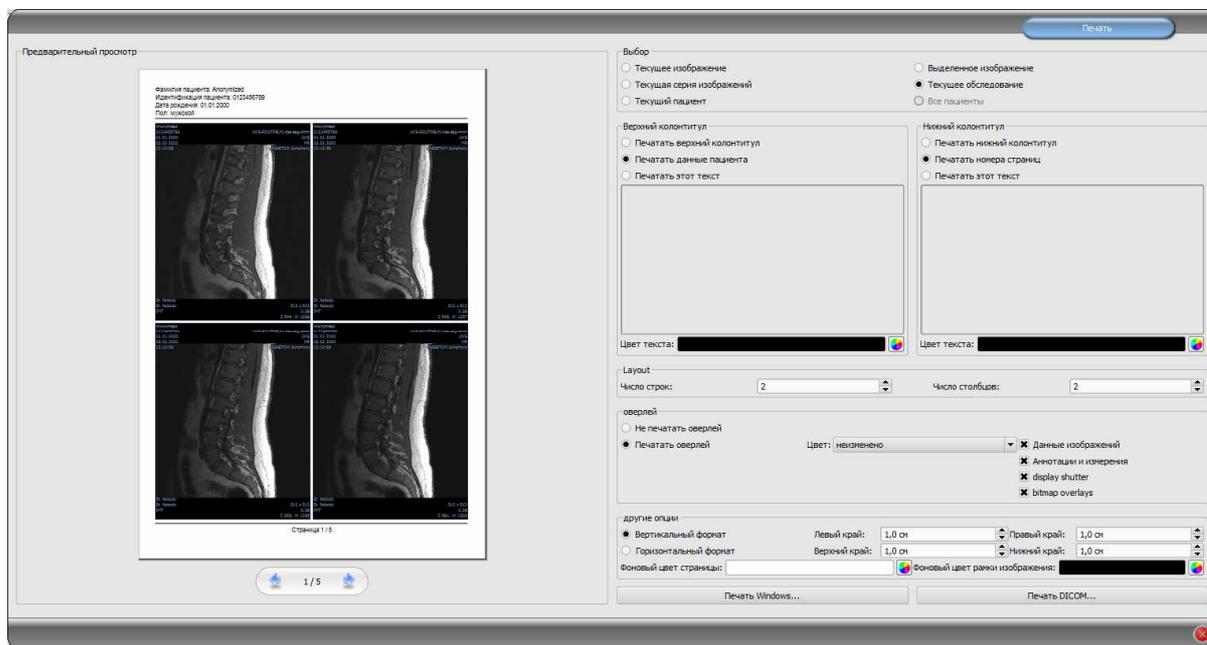

На печать может быть послано одно изображение или сразу несколько. Это определяется в группе „Выбор”.

В верхней части страницы всегда будет печататься строка заголовка, если она активирована. Строка имеет фиксированный размер и шрифт, которые не могут быть изменены. Может быть напечатана как стандартная информация о пациенте с изображением, так и отдельный текст. Цвет текста можно выбрать.

В нижней части страницы всегда будет печататься основание, если оно активировано. Основание имеет фиксированный размер и шрифт, которые не могут быть изменены. Можно печатать нумерацию страниц или самостоятельно определенный текст. Цвет текста также можно выбрать.

Можно распечатать несколько изображений на страницу. Количество строк и колонок устанавливается в группе „Раскладка”.

Для печати можно выбрать также наложенные объекты. Из-за того, что наложение может быть плохо видно на снимке, дается возможность напечатать его черным, белым или без изменений. «Без изменений» означает, что наложения будут напечатаны таким образом, как это представлено на мониторе. Затемнение всегда будет представлено в выбранном цвете (из меню конфигурации). Растровые оверлеи будут представлены в том же цвете, как на экране.

Для того чтобы не перепутать распечатанные снимки, на каждом из них автоматически печатается базовая информация о пациенте.

Дается возможность настраивать границы страницы, цвет фона или даже фоновую картинку страницы.

Все модификации производятся в настройках справа и сразу же показываются слева в предварительном просмотре. Нумерация страниц также обновляется. Все настройки

сохраняются и могут быть использованы в следующей печати (даже после запуска программы). Кнопкой „Печать Windows...” печать выводится на принтер Windows.


Кнопкой „Печать DICOM...” печать выводится на настроенный DICOM принтер. Кнопка доступна только тогда, когда активирован модуль печати DICOM. В диалоговом окне выбирается желаемый принтер, размер пленки.

Прогресс приготовления иправки данных печати показывает индикатор выполнения. Процесс печати можно отменить, нажав кнопку „Отмена”.

11 CD пациента

В digipax можно несколькими способами записать CD или DVD с данными пациента. Обычно данные просто записывают на компакт-диск. Для этого можно использовать программу Nero фирмы Nero AG. Узнайте о возможности использовать эти программы у системного администратора. Если на рабочем компьютере нет возможности записывать диски, можно сбросить данные на флеш-носитель (флешка) или внешний диск и записать на другом компьютере.

Второй способ — воспользоваться специальной программой записи CD/DVD (Disk Producer). Программа поможет автоматически писать диски и печатать обложки. Для начала работы должен быть активирован модуль связи с программой записи. Это модуль работает только совместно с модулем „Печать этикеток на CD“.

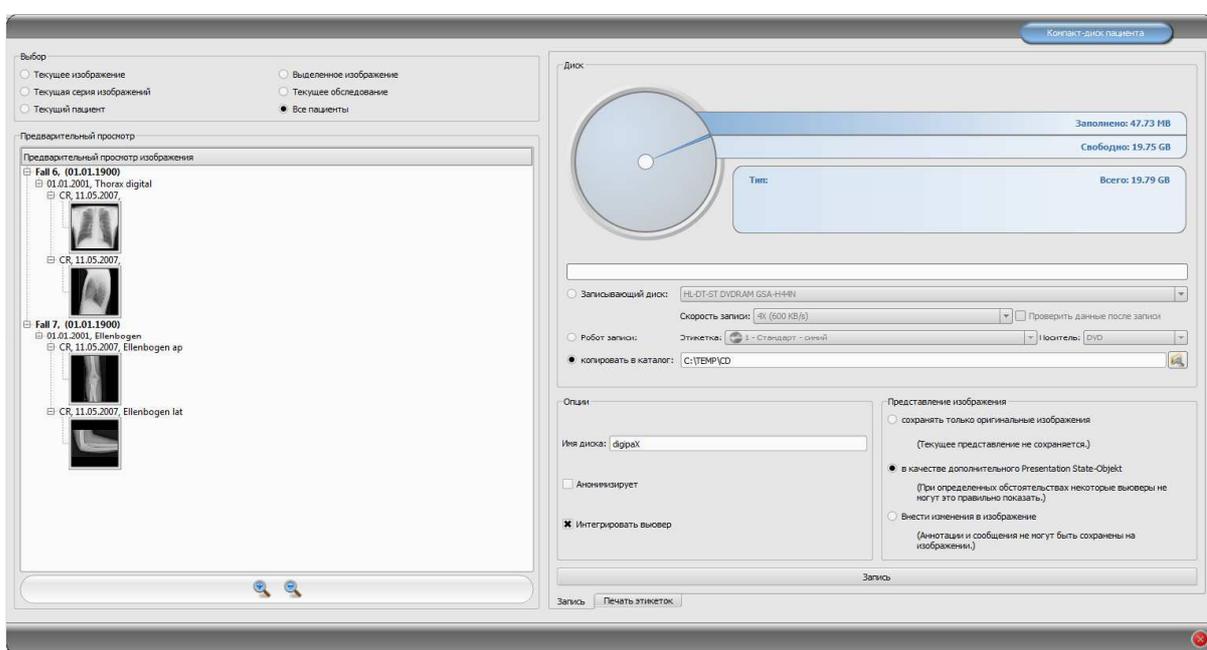

В группе „Выбор“ можно выбрать изображения для записи на CD или DVD. Ниже показываются выбранные изображения. Они сгруппированы по пациентам, обследованиям и сериям.

В группе „Дисковод“ можно выбрать с помощью какого дисковода будет осуществлена запись. Тут же отображается информация о носителе: тип диска (CD, DVD), сколько места доступно для записи, сколько места займут данные. Эти информации обновляются в ходе записи.

Можно выбрать скорость записи. Выбор зависит от типов дисковода и чистого диска. Если поставить птичку „Проверить данные после записи“ — после записи программа проверит, что все данные правильно считываются с диска.

Если у Вас есть доступ к программе записи, то ее можно выбрать в данном месте. Дополнительно должна быть выбрана этикетка, которая будет наноситься на носитель данных, а также тип носителя данных. Готовые этикетки разработаны и расположены в

закладке „Печать этикеток“ и сразу же доступны для программы. В разделе 12 Печать этикеток описано каким образом можно создавать и редактировать собственные этикетки.

Если все настройки уже были осуществлены, то можно нажать на кнопку „Сохранить“. После нажатия на кнопку, данные сопоставляются и передаются для записи (или же просто копируются в промежуточную папку для передачи). Файлы браузера расположены в папке „SharedData“ и повторно используются, поэтому нет необходимости копировать их снова и снова.

Если данные только копируются в целевую папку, тогда значение „Общее“ указывает на общее свободное пространство в памяти соответствующего привода, Значение „Заполнено“ указывает на пространство в памяти, которое занимают новые данные, а значение „Свободно“ – доступное пространство в памяти, которое останется после завершения копирования данных. В данном случае не отображается тип.

Данные могут сохраняться как анонимизированные данные. Это значит, что данные будут выглядеть следующим образом:

- Name: "Anonym" bzw. "Anonym1", "Anonym2" usw. bei mehreren Patienten
- Geburtsdatum: 01.01.2000
- Geschlecht: O (other)
- ID: 0 oder Nummer bei mehreren Patienten

В случае анонимизации будут удаляться следующие теги:

- Patients Address
- Patients Telephone Numbers
- Referring Physicians Name
- Referring Physicians Address
- Referring Physicians Telephone Numbers
- Referring Physician Identification Sequence
- Performing Physicians Name
- Performing Physician Identification Sequence
- Operators Name
- Operator Identification Sequence
- Requesting Physician
- Scheduled Performing Physicians Name
- Scheduled Performing Physician Identification Sequence
- Institution Name
- Institution Address
- Institution Code Sequence
- Institutional Department Name

По желанию на CD / DVD можно также записать браузер digipaX, чтобы после вставления CD в привод компьютера программа для просмотра сохраненных изображений могла открываться автоматически.

В группе „Воспроизведение изображения“ можно выбрать одну из следующих опции, а именно:

1. Изначальные изображения

Изображения сохраняются в таком виде, в каком они попали в архив. Это значит в таком виде, в котором они были изначально созданы единицей, получившей изображения.

2. Дополнительный объект Presentation State

К каждому изначальному изображению каждого полутонового изображения дополнительно добавляется файл DICOM (Grayscale Softcopy Presentation State), который содержит информацию относительно настроек окна, вращения, зеркального отражения, оборачивания, графических примечаний и скрытия части экрана. Не каждый браузер DICOM умеет правильно расшифровывать данного рода информацию. Воспользуйтесь данной опцией, если браузер также был сохранен на CD, или если Вы знаете, что адресат CD пользуется программным обеспечением, позволяющим правильно анализировать информацию в таком виде.

3. Объединить изменения изображения

К каждому изображению создается новое изображение и переносятся изменения изображения (настройка окна, вращение, зеркальное отражение, затемнение экрана). Тип изображения устанавливается на „SECONDARY“ и для нового изображения создается новая SOP Instance UID. Новосозданное изображение сохраняется и переносится на CD пациента.

Если такая возможность отсутствует, рекомендуется воспользоваться вариантом 2 с дополнительными файлами Presentation State.

После нажатия на кнопку "Сохранить", данные собираются (сжатые данные разворачиваются и анонимизируются). Если опция записи активна, то данные сохраняются на CD / DVD, после чего диск выбрасывается компьютером. Если опция записи неактивна, то данные копируются в указанный целевой каталог. Индикатор прогресса отображает текущее состояние продвижения процесса.

12 Печать этикеток



Печать этикеток является возможной только после активации соответствующего модуля.

12.1 Общее

С помощью инструмента „Печать этикеток“ можно напечатать на CD/DVD пациентов следующие данные: фамилию пациента, дату рождения, ID пациента и т.п. Вышеупомянутые данные автоматически считываются с изображений (Заголовок DICOM), и совершенно нет необходимости вводить их вручную. В данном случае программа руководствуется инструкциями DRG (Немецкого Общества Рентгенографии), содержащимися в „Каталоге требований DRG к носителям информации пациентов“ <http://www.dicom-cd.de/specs.php.de>.

В Вашем распоряжении находятся разные шаблоны. Готовые шаблоны могут изменяться, а также можно создавать новые собственные шаблоны.

Переход к модулю происходит после нажатия кнопки „CD пациента“ и выбора закладки „Печать этикеток“.

12.2 Принтеры и носители информации

Необходимо иметь в распоряжении специальный принтер, который может наносить печать непосредственно на CD диски, к примеру, Canon PIXMA. Такие принтеры можно свободно найти в торговых предложениях многих изготовителей компьютерной техники. Специальные рекомендации относительно модели принтера отсутствуют. Единственным условием является совместимость принтера с операционной системой Windows. Должен быть установлен соответствующий операционной системе драйвер принтера. Нет необходимости в установке дополнительного программного обеспечения. Носители информации, на которые будет наноситься печать, также можно найти в торговых предложениях многих изготовителей. Для печати можно использовать как CD так и DVD диски. **Рекомендуется руководствоваться каталогом требований DRG, в котором в данный момент еще не содержится информация относительно официальных обслуживаемых DVD.**

digipax не предусмотрены специальные рекомендации относительно носителей информации. Может возникнуть ситуация, в которой все носители совместимы с данной моделью принтера. Чтобы получить детальную информацию по вышеупомянутому вопросу необходимо ознакомиться с документацией принтера. Модуль „Печать этикеток“ предусмотрен только для CD/DVD дисков, предусмотренным для непосредственной наклейки. Система не предусмотрена для распечатки самоклеящихся этикеток.


12.3 Выбор шаблона и распечатка

Условием является правильно установленные драйвера для принтера и безошибочная работа самого устройства. Приведенные примеры распечаток были осуществлены с помощью принтера Canon PIXMA iP4000.

В ходе инсталляции digipax устанавливаются разные шаблоны для CD дисков с изображениями одного пациента, а также для CD с изображениями большего количества пациентов.

Выберите пациента и щелкните по CD пациента. По умолчанию сначала на CD пациента осуществляется запись желаемых изображений и настроек. Затем происходит переход к доступным в закладке „Печать этикеток“ функций нанесения печати на данный носитель информации.

Щелкая мышью по левому и правому краю миниатюр можно осуществлять просмотр галереи шаблонов. Шаблоны расположены в алфавитном порядке. Названия расположены внизу.

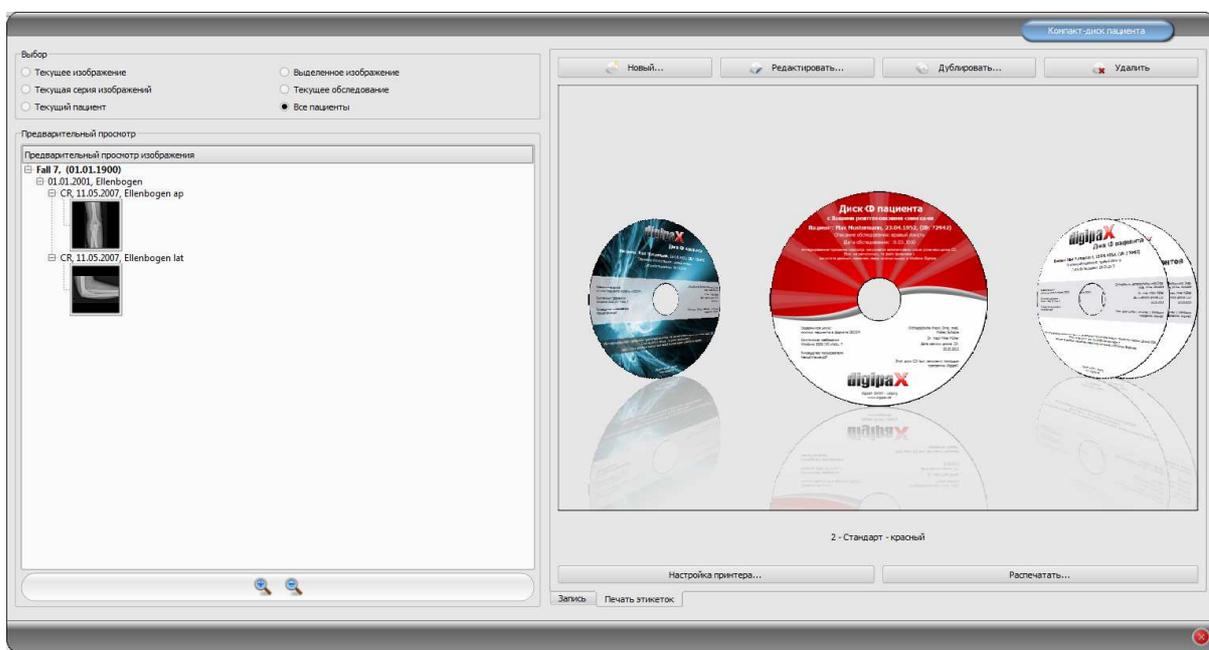

Выберите желаемый шаблон и щелкните по „Распечатать“.

После нажатия откроется диалоговое окно выбора принтера. Затем осуществите выбор соответствующего принтера, посредством диалога настроек активируйте режим просмотра и продолжайте процесс путем нажатия на „Распечатать“.

В следующем диалоговом окне отображается просмотр носителя информации. Именно здесь видно как данные пациента автоматически считываются с изображений и применяются. Просмотр может отображаться по-разному в зависимости от модели принтера.




После нажатия на „Начать печать “ на носитель информации наносится информация.

12.4 Настройки принтера

В данном разделе определяется размер и позиция носителя информации.

Размер этикетки соответствует размеру носителя информации. Стандартный внешний диаметр поверхности CD с накаткой составляет 118 или 119 мм. Внешние диаметры без нанесенной печати имеют разные размеры. Параметры должны быть настроены в соответствии с изготовителем и версией носителя.

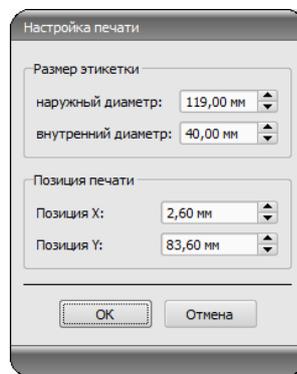

Позиция наката зависит от модели принтера и должна настраивается только раз, чтобы принтер в ходе накатки тщательно наносила печать на носитель информации. Изменяя параметры, распечатываемое изображение можно перемещать налево/направо (позиция X) и вверх/вниз (позиция Y). С помощью просмотра можно переместить распечатываемое изображение на выбранное место с точностью до миллиметра.




Примерная характеристика:

Модель принтера	Позиция X	Позиция Y
Canon PIXMA iP4000	2,60 мм	83,60 мм
Canon PIXMA MG5250	2,60 мм	87,50 мм
Canon PIXMA iP4850	2,80 мм	87,50 мм
Canon PIXMA iP4950	2,60 мм	87,50 мм
Canon PIXMA iP4950	2,60 мм	87,50 мм

12.5 Создание шаблона

Нажатием „Новый“ открывается новый пустой шаблон накатки. Сначала в верхней строке необходимо ввести название нового шаблона распечатки.

Можно менять фоновый рисунок, вставлять изображения или символы, текстовые поля, прямоугольники и линии.

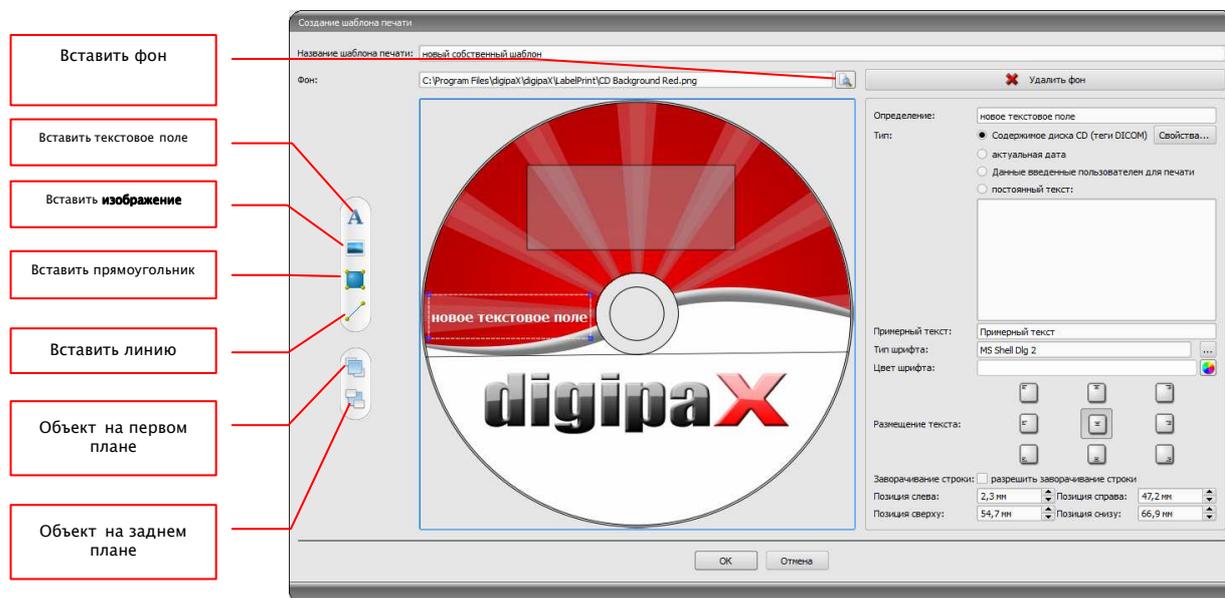

12.5.1 Вставка, редактирование и удаление элементов

Этикетки могут содержать разные графические элементы. Размещение и позиционирование всегда осуществляются с помощью мыши. Справа от диалога всегда отображается страница со свойствами активного элемента. Изменения настроек сразу же отображаются на изображении. Щелкнув левой кнопкой мыши по выбранному элементу, данный элемент активируется.

Фоновый рисунок:

В виде фонового рисунка можно применить любую графику. Рекомендуется применять графику в формате „png“, размер которой составляет минимум 500 x 500 пикселей.

Для создания собственных фоновых рисунков можно воспользоваться шаблоном Photoshop CD-Template.psd из папки „Печать этикеток“, расположенной в инсталляционном каталоге.

Нажмите на „Искать файл“ и укажите месторасположение желаемой графики. Выбранный фоновый рисунок будет автоматически вставлен в шаблон.

С помощью кнопки „Удалить фон“ можно удалить данную графику. После удаления фонового рисунка фон становится белым.

Вставить текстовое поле:

Нажмите на „Вставить текстовое поле“: Затем щелкните кнопкой мыши по любому месту в шаблоне и перетащите текстовое поле желаемых формы и размера. С помощью мыши можно также перемещать объект в любом направлении. Функции текстовых полей детально описаны в дальнейшей части инструкции, в пункте 10.5.2 Редактирование текстовых полей.

С помощью страницы со свойствами можно подобрать позицию и размер с точностью до миллиметра.




Вставить изображение:

Как и в случае фона, можно вставить любое изображение. Нажмите на „Вставить изображение“ и укажите месторасположение желаемой графики. С помощью выбора опции „Открыть“ графика будет применена. С помощью мыши можно перемещать объект в любом направлении и подбирать соответствующий размер.

Вставить прямоугольник:

Вставка прямоугольника осуществляется аналогично вставлению текстового поля. Щелкните мышью по „Вставить прямоугольник“ и перетащите прямоугольник с помощью мыши. С помощью мыши можно также перемещать прямоугольник в любом направлении и масштабировать.

Применяя элементы редактирования, можно изменять свойства прямоугольника. Таким образом можно подобрать цвет и толщину рамки, цвет заливки, прозрачность и закругление углов. Позицию и размер можно подбирать с точностью до миллиметра.

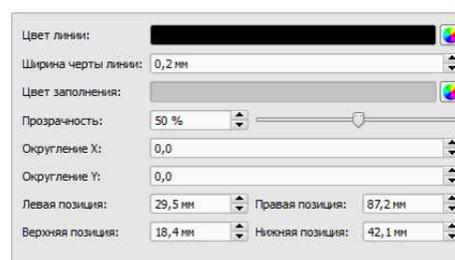

Вставить линию:

Щелкните мышью по „Вставить линию“ и перетащите линию на шаблон.

На странице со свойствами можно подобрать цвет и толщину линии, а также разместить ее с точностью до миллиметра.



Удалить элементы:

Щелкните по элементу, который Вы хотели бы удалить и нажмите на кнопку „Удалить“ для удаления выбранного элемента.

12.5.2 Редактирование текстовых полей


12.5.2.1 Функции

Описание

- служит только для ввода описания текстового поля, не печатается (можно только отображаться на редактируемом изображении)

Тип

- содержание CD (теги DICOM): содержание тегов автоматически переносится на поле в ходе накатки, свойства: см. пункт 10.5.2.2 Принцип и свойства содержания CD (тегов DICOM) в текстовом поле.
- актуальная дата: в текстовое поле вводится актуальная дата
- данные введенные пользователем в процессе накатки: запрос на ввод текста перед накаткой
- постоянный текст: в поле вводится постоянный текст

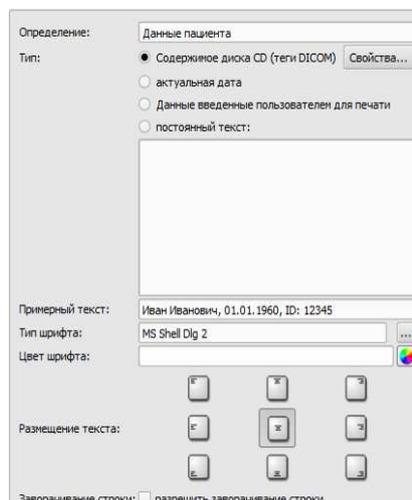

Пример текста:

- введите примерный текст, который будет отображаться в виде образца при просмотре этикетки

Виды и цвета шрифтов:

- подбор вида, цвета и размера шрифта

Расположение текста:

- расположение текста внутри текстового поля (напр., выравнивание по левому или по правому краю)

Перевод строки:

- когда данная опция включена, то осуществляется автоматический перевод строки в конце текстового поля, в противном случае текст, в зависимости от размещения, будет урезан спереди, сзади или по краям


12.5.2.2 Принцип и свойства содержания CD (тегов DICOM) в текстовом поле



В каждом изображении DICOM содержится информация относительно пациента, обследований и изображения. Вся вышеупомянутая информация содержится в так называемых тегах заголовка DICOM каждого изображения. Содержание тегов таких как, к примеру, фамилия пациента, обследование, учреждение отображаются в углах изображения. Теги DICOM пронумерованы (напр., тег „0010,0010“ содержит фамилию пациента). Варианты отображения информации в заголовке описаны в разделе 5.2.5.3 Информация в заголовке (DICOM Dump).

В текстовом поле можно применить значения трех разных тегов. Если, к примеру, размещаются фамилия, дата рождения и ID пациента, то соответственно должны быть загружены теги (0010,0010), (0010,0020) и(0010,0030). С этой целью необходимо настроить теги для значений от 1 до 3. Некоторые теги содержат большее количество элементов (напр., имя, фамилия и заглавие). Если необходимо, чтобы отображался только один определенный элемент, то можно настроить такую опцию в элементе тега. В строку подписи необходимо ввести текст, который будет отображаться. При этом %1, %2 и %3 исполняют функцию многозначных символов и заменяются фактическим содержанием тега.

Именно поэтому на нижеприведенном примере текстовое поле отображается следующим образом: Max Mustermann, 01.01.1960, ID: 12345

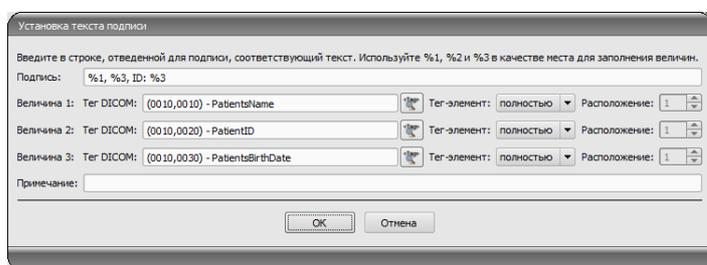

Можно создать списки значений большого количества изображений. Такая необходимость возникает, к примеру, в случае вывода фамилий всех пациентов, которые были сохранены на носителе информации. Для этого служит ключевое слово LIST в строке подписи:

`LIST{<теги DICOM>|<делитель>}`

Значение <тегов DICOM> в данном сопоставлении является аналогичным ранее описанной одиночной строке. <Делитель> вставляется всегда между одиночными данными. В данном случае необходимо применять:

- „nI“ для перевод строки (new line)
- „tab“ для табулятора
- любой другой символ, к примеру, точку с запятой или запятую.

Следуя вышеперечисленным указаниям строка будет выглядеть следующим образом:
LIST{%1, %3, ID: %2|nl}.

12.6 Редактирование, копирование и удаление шаблонов

Для того, чтобы провести редактирование шаблона необходимо его найти, а затем нажать на „Редактировать“. Редактирование осуществляется аналогично принципу создания шаблона.

С помощью кнопки „Сделать копию“ можно создать копию шаблона. Копия содержит название оригинала с дополнением „Копия 1“ в конце названия. Можно изменять копию и ее название. С помощью кнопки „Удалить“ шаблон можно удалить шаблон из системы. Примечание: данное действие приводит к безвозвратной потере шаблона

Все шаблоны расположены в инсталляционном каталоге digipax, в папке „Печать этикеток“. Для каждого шаблона создан отдельный подкаталог с названием шаблона. Для того, чтобы перенести шаблон на другую систему, необходимо копировать целую папку с шаблоном на данную систему.

12.7 Требования относительно данных на носителях информации

Рекомендуется руководствоваться инструкциями, находящимися в каталоге требований DRG к носителям информации пациентов. В разделе 2.4 каталога приведено детальное описание того, каким образом необходимо маркировать носители информации.

Источник:

<http://www.dicom-cd.de/docs/DRG-Anforderungskatalog-2006.pdf>

2.4 Маркировка носителя информации

2.4.1 Внешняя маркировка

Для маркировки и однозначной идентификации носителя информации необходимо создать ему внешнее описание, содержащее четкую информацию для заинтересованных лиц.

Указания: в случае применения программ записи CD/DVD, которые могут подписывать носители информации без участия пользователя, такого типа описание является обязательным. Системы, не имеющие возможности самостоятельно подписывать носители информации, должны осуществлять поддержку пользователя при создании правильной подписи носителя вручную, к примеру, отображая предлагаемое описание в диалоговом элементе, появляющемся на экране при выборе носителя информации.

2.4.2 Содержание внешней маркировки (рекомендуемое)

Рекомендуется указывать на носителе фамилию и дату рождения па, ID пациента, дату создания носителя информации, а также дат обследований, находящихся на носителе и названия учреждения, где был создан носитель информации. В случае, если на одном носителе находятся данные нескольких пациентов, то рекомендуется указать на внешней части носителя соответствующее примечание. Кроме того, рекомендуется указать на внешней части носителя информации данные относительно вида содержащихся в нем материалов (DICOM, сеть, браузер DICOM и т.п.).


13 Менеджмент задач



ПОМНИТЕ!

Чтобы избежать ненужного рентгеновского обследования и ненужного облучения пациента, вы должны поинтересоваться, не делал ли он недавно рентгенографию.

При помощи менеджмента задач (DICOM-Worklist-Management), можно обмениваться задачами между разными системами DICOM. MPPS (Modality Performed Procedure Step) для использования статуса задач не обслуживается.

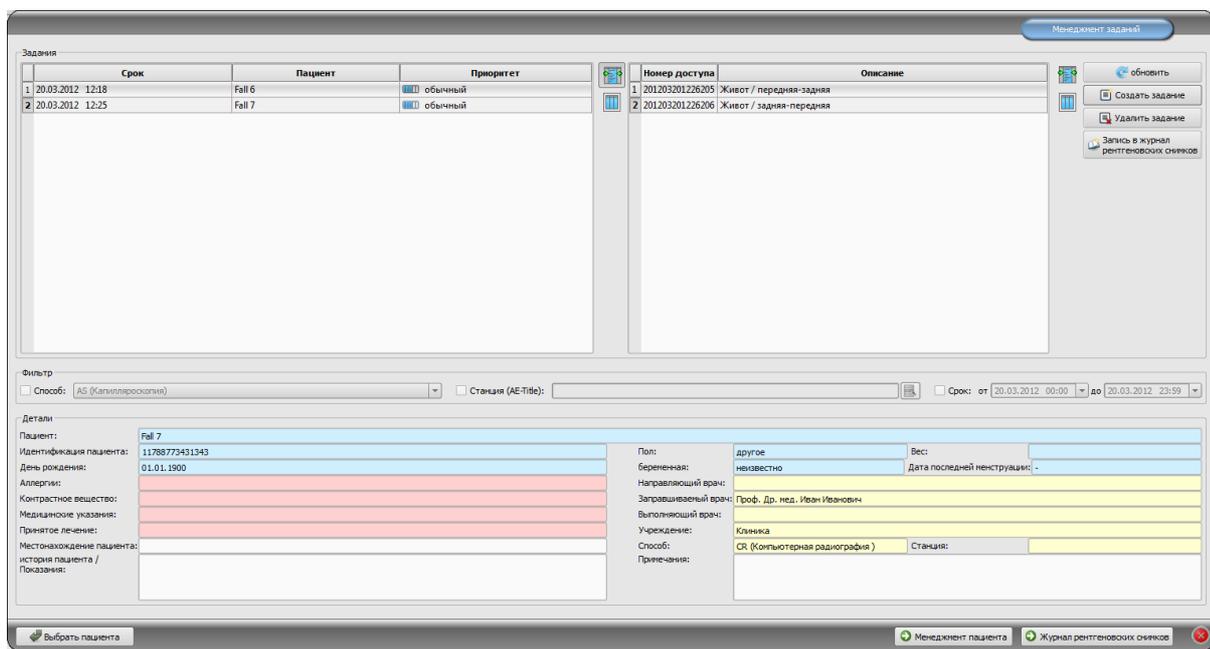

13.1 Отображение задачи и обновление списка задач

Список будет обновляться через равные промежутки времени, которые задаются в настройках (категория „Менеджмента задач” – доступна только для администраторов). В конфигурации можно отключить автоматическое обновление.

При использовании кнопки „Обновление”, происходит обновление списка.

Слева отображается список всех пациентов, для которых существует хотя бы одна задача. При выборе пациента из списка, все его проекты будут отображаться в правой части. Таким образом, каждая задача имеет свой уникальный номер.

13.2 Фильтрация списка задач

В качестве фильтра можно выбрать метод обследования (например, рентгеновский снимок, ультразвуковое обследование), название оборудования, на котором будет выполняться задача, или фиксированную дату, на которую запланировано обследование. Для этого активируйте поле выбора и введите желаемый метод или желаемое имя станции или определите начальную и конечную дату. С помощью кнопки „Обновить“

(вверху справа), обновится список с задачами, которые соответствуют настройке фильтра. Настройки сохраняются и применяются при следующем выборе списка задач.

13.3 Создание задачи

Новая задача всегда создается для активного пациента, выбранного в данный момент в системе. Если выбрано несколько пациентов, создание задачи невозможно.


Данные о пациенте, для которого создается задача, отображаются в заголовке диалогового окна и не могут быть изменены.

С левой стороны диалогового окна находится поле ввода для задач. Часть тела и уровни определяются на изображении справа. Для этого укажите мышью на нужную вам часть тела (она выделится другим цветом), щелкните левой или правой кнопкой мыши на эту область, вызвав меню для уточнения. Выберите нужное уточнение и активируйте уровни (путь луча). Можно выбрать несколько уровней одновременно и подтвердить выбор в меню пунктом „Готово”. Все настройки появятся в списке в диалоговом окне слева.

Также можно добавлять элементы в список вручную. Для этого щелкните дважды на свободном элементе в списке и введите нужный орган. Таким же образом, вы можете редактировать уже существующие записи. Записи могут быть удалены из списка нажатием красного крестика (в верхней правой части списка). Под кнопкой „Выбрать из списка” находятся predetermined записи и описания. В этот список можно добавлять и новые записи, которые в будущем будут предлагаться на выбор.


Если вы нажмете на фон изображения, появится меню со всеми доступными частями тела. Этот список дает возможность определять те участки тела, которые еще не были назначены.

Если вы нажмете в контекстном меню пункт „Управление ...”, вы можете настроить списки уточнений и путь лучей (для того обратитесь к главе 13.4 Менеджмент таблицы органов и коды процедур).

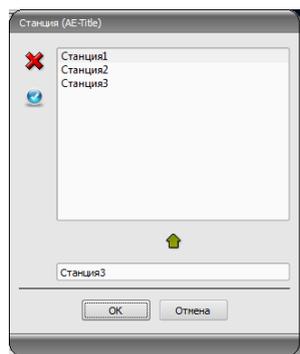

Благодаря небольшим кнопкам за полями ввода вы получаете быстрый доступ к predetermined терминам, которые можно использовать для заполнения поля. Они могут быть добавлены по зеленой стрелке, удалены при помощи красного крестика или выбраны двойным щелчком.

Один из элементов может быть определен по умолчанию. Он будет автоматически вводиться при активации

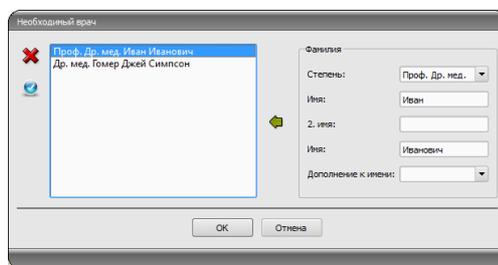


диалогового окна. Это происходит таким же образом, как и для имени пациента.

После подтверждения кнопкой „OK“, задача передается на сервер со списками задач. Если настроено несколько серверов, в диалоговом окне можно выбрать подходящий сервер. Если было введено несколько уровней, для каждого из них будет создано по отдельной задаче, потому что изображения получаются единично и для каждого из них делается запись в журнале рентгеновских снимков.

13.4 Менеджмент таблицы органов и коды процедур

Диалоговое окно для обработки таблиц органов вызывается в контекстном меню изображения пунктом „Управление ...“. Этот диалог показывает иерархически организованные элементы частей тела, уточнения и ход лучей. В последствии, элементы могут быть деактивированы. Отключенные элементы не отображаются в контекстном меню при выборе органов.

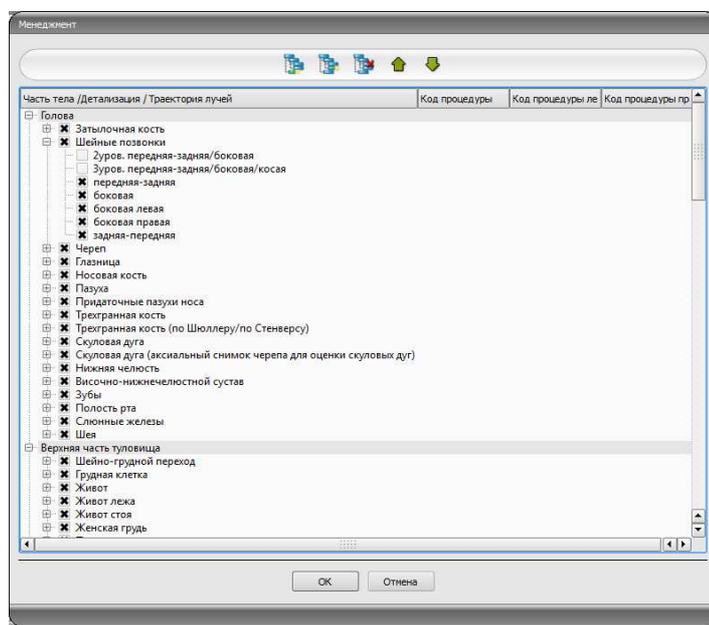

Элементы уточнений и хода лучей можно свободно добавлять или удалять. Для добавления уточнения, активируйте

соответствующую часть тела или уже существующее уточнение в этой части тела и нажмите на кнопку „Добавить уточнение“. Для добавления нового пути луча, активируйте соответствующее уточнение и нажмите кнопку „Добавить путь луча“. Кроме того, укажите желаемое назначения. С помощью переключателя „Удалить выбранный элемент“ удаляется активный узел со всеми возможными подчиненными элементами. Узлы частей тела не могут быть удалены таким же образом.

Записи можно сортировать с помощью переключателей со стрелками.

Для каждого луча может быть указан так называемый „процедурный код” (Procedure Code). Эти коды должны быть настроены под целевую установку, поскольку каждый производитель использует свои коды для доступа к своим предопределенным настройкам. Двойным щелчком по необходимой ячейке в древовидной структуре, можно назначить код для луча из этой строки. Максимум могут быть введены три кода для каждого луча. В таком случае коды должны быть отделены точкой с запятой („;”). Обратите внимание, что пробелы перед точкой с запятой и после не ставятся, только если они не принадлежат самому коду. Коды могут быть переданы на другие устройства. Конфигурация передачи кодов и установка или ссылка на соответствующие устройства выполняется администратором.

В диалоговом окне создания задачи, код процедуры отображается в виде всплывающей подсказки (отображается, если мышь просто наведена, без щелчка). Описание задачи в этом случае не может быть изменено. Если задачи вводятся вручную, не выбирая изображения, код процедуры не может отслеживаться.

13.5 Удаление задачи

Выбранная (помеченная) в списке задача может быть удалена с помощью кнопки „Удалить задачу” **без подтверждения**.

Кроме того, задачи могут быть автоматически удалены по прошествии определенного периода времени. Такое удаление задач выполняется только системой digipax, и поэтому при определенных обстоятельствах не выполняется на станции, на которой выполняется работа. Период времени надо выбрать такой, чтобы в нем могли быть обработаны все задачи .

13.6 Запись в рентгеновский журнал

Если рентгеновский журнал не активирован в этой системе, переход на новую запись отсутствует.

Для упрощения работы и для избежания ошибок, все значения могут быть перенесены в рентгеновский журнал в диалоговом окне при создании новой записи. В зависимости от конфигурации, доступны три различных режима:

1. передача данных из списка задач;
2. передача данных автоматически получаемых изображений;
3. без передачи данных.

Кроме того, возможна передача данных от присоединенного генератора. Если система администратором настроена соответствующе, значения генератора можно передать двойным щелчком по таблице полученных значений.

13.6.1 Данные из списка задач

Отметьте задачу, для которой вы хотите создать запись в рентгеновском журнале. Насколько это возможно, данные (например, имя пациента, дата рождения), уже должны быть переданы из задач и введены в область диалогового окна журнала. Заполните

остальные поля соответствующей информацией и внесите данные в рентгенографический журнал нажатием кнопки ОК.

13.6.2 Данные из полученных изображений

Для использования данных из снимков, должно быть включено и правильно настроено автоматическое получение изображений (обратитесь к главе 14 Рентгеновский журнал). Новые изображения передаются из архива на станцию и могут быть использованы в качестве шаблона для записи в журнал. Сначала выберите из списка вновь принятых изображений снимок, для которого хотите создать запись. В данном случае идет передача всех данных изображения DICOM. Заполните остальные поля соответствующей информацией и внесите данные в рентгенографический журнал нажатием кнопки ОК.

13.6.3 Без передачи данных

При выборе этого режима, все поля диалогового окна журнала будут пустыми. Все данные вносятся вручную и сохраняются в записи после нажатия кнопки ОК.

13.7 Отображение полученных изображений

Если маршрутизация изображений, архив изображений и установка digipax настроены правильно, то digipax может автоматически получать изображения в фоновом режиме. Если это так, и опция „Помечать цветом колонку с количеством полученных изображений и элемент списка, когда приходит изображение” активирована администратором, то, как пользователь, вы получаете возможность управлять задачами. Если на рабочей станции нельзя удалить выбранную задачу, это означает, что оно находится в процессе. Если задачи удаляются с установки (digipax), которая делает снимки, они автоматически убираются со списка.

13.8 Выход из менеджмента задач

Компонент закрывается после выбора пациента из списка при помощи кнопки „Выбор пациента” или дважды щелкнув по нужному пациенту. Если в вашем списке пациент еще не существует (взят из источника данных архива изображений), он будет внесен в список локально.

Кроме того, с этого места вы можете перепрыгнуть непосредственно к менеджменту пациентов. Если Вы успели отметить пациента в списке, то он будет выбран первым, как активный пациент.

Если установлены и активированы рентгеновские журналы, можно перейти непосредственно в них. Таким образом, ни один пациент не будет выбран.

14 Рентгеновский журнал

14.1 Новая запись

Значение полученного изображения может быть передано при добавлении новой записи в рентгеновский журнал в том случае, если правильно настроено получение снимка в фоновом режиме. Для этого выберите в диалоговом окне из списка вновь принятых изображений снимок, который хотите добавить к записи. Если ни одно изображение не выбрано, поля останутся пустыми и могут быть заполнены вручную. Внесите запись в журнал нажатием кнопки ОК.

Если есть напрямую подключенный генератор и система соответствующе настроена администратором, то значения генератора можно передать двойным щелчком по таблице полученных значений. Уже используемые значения генератора повторно не высвечиваются.

14.2 Фильтрация



Внизу диалогового окна можно настроить фильтр по именам пациентов, частям тела и датам записи. Каждый раз при использовании фильтра активируются блоки управления. При закрытии всех блоков управления и нажатии кнопки „фильтровать“, отображается полный список записей.

Настройки фильтра сохраняются до следующего запуска рентгеновского журнала.

14.2.1 Имя пациента

Введите часть искомого имени, используя групповой символ („*“). Например, „Клим*“.

14.2.2 Часть тела

Укажите один или несколько терминов или частей слов в поле ввода для частей тела. В выпадающем списке можно определить, должно ли описание части тела одержать все термины (И) или только один (ИЛИ). После нажатия на кнопку „фильтровать“, выводится список записей, в которых находятся выбранные термины.

14.2.3 Промежуток времени

Укажите в поле „от“ дату, на которую должен начинаться фильтруемый список и в поле „до“ дату конечной записи. После нажатия на кнопку „фильтровать“, отобразятся записи журнала, которые были созданы в промежуток указанного времени (включая в себя даты „от“ и „до“).

14.3 Экспорт

Журнал может быть экспортирован в виде CSV файла (текстовый файл с точкой с запятой как сепаратором между значениями), который можно прочесть при помощи Excel.

Если был настроен фильтр, он также будет экспортирован. Таким образом будут сохранены записи, которые показываются в таблице.

По желанию, экспортированный журнал может быть сразу открыт, отредактирован и распечатан при помощи стандартного программного обеспечения, например Excel.

14.4 Очистка (удаление)

Для очистки журнала Вам понадобится ввести специальный пароль для удаления.

Пароль: digipax

Введите пароль, и **все записи** будут стерты из журнала.

15 Получение изображений

15.1 Общее

Для регистрации изображений предусмотрено три разных модуля, при этом на каждой машине может быть запущен только один из них.

Модуль регистрации рентгеновских изображений может использоваться для приема цифровых рентгеновских изображений из подсоединенных устройств, а именно: считывателей радиографических изображений, а также детекторов.

Видеомодуль frame grabber/изображения служит для приема изображений или серии изображений из устройств, использующих видеовыходы или подсоединенных к системе с помощью соответствующего компьютерного оборудования. Это могут быть, к примеру, эндоскопы, ультразвуковые аппараты и т.п. Для управления регистрацией можно применять ножные переключатели.

Следующие устройства могут быть подсоединены посредством модуля регистрации серии изображений. Это интерфейс для устройств, которые не обязательно должны быть соединены со станцией digipax, и самостоятельно хранят данные изображений в ранее определенном каталоге компьютера или в сети. Затем изображения принимаются digipax и в дальнейшем обрабатываются именно там.



Устанавливая устройства необходимо всегда обращать внимание на безопасное размещение проводов, чтобы свести до минимума риск возникновения несчастного случая, в результате которого может быть повреждено оборудование. Ножные переключатели работают на низковольтном напряжении и не несут опасность здоровью или жизни.

15.2 Ход получения изображений с использованием менеджмента задач

Принципиально поступки для получения изображений те же самые во всех модулях. Выберите из „Менеджмента задач“ пациента, для которого вы хотели бы выполнять следующий захват. Для этого выделите имя пациента в списке, ознакомьтесь с деталями запроса в нижней части диалога и нажмите „Выбор пациента“ (или двойной щелчок на имя пациента).

№	Описание	Аллергии	Контрастное вещество	Медицинские указания	Принятое ранее лечение	Запрашиваемый врач
201208241120201	Шейные позвонки / передняя-задняя					Др. мед. Гомер Джей Симпсон
201208241120202	Шейные позвонки / задняя-передняя					Др. мед. Гомер Джей Симпсон
201208241120213	Поясничные позвонки / передняя-задняя					Др. мед. Гомер Джей Симпсон
201208241120214	Поясничные позвонки / задняя-передняя					Др. мед. Гомер Джей Симпсон

Пациент теперь должен быть активирован, и вы увидите относящиеся к нему задачи. Удерживая курсор на записи (без щелчка), вы можете просмотреть все детали этой

задачи в виде всплывающей подсказки. Теперь отсортируйте задачи по порядку, в котором вы хотели бы выполнить захват.

От следующего шага начинается захват изображений. Шаги будут разные в зависимости от используемого модуля.



После того как вы импортировали первое изображение, вы не можете больше сортировать задачи.

После завершения разработки задачи последние шаги аналогичны во всех модулях, но все же зависят от опций, которые были настроены администратором: после получения и приема каждого изображения/серии Вас будет попросено об удалении завершенной задачи или же она будет автоматически удалена либо вовсе не будет удалена.

Каждый шаг регистрации и приема, а также обработки изображений/серий в каждом модуле, приведен в дальнейших частях руководства. Подробнее об этом также в разделах 15.4 Получение рентгеновских изображений и 15.5 Frame grabber / регистрация серии изображений.

15.3 Ход регистрации/приема изображения без управления задачами

Осуществите выбор пациента в своем приложении менеджмента поликлиники или в менеджменте пациентов digipax. Начните регистрацию/прием изображения. В случае регистрации рентгеновских изображений необходимо дополнительно – в зависимости от программного обеспечения видеоустройства – вручную выбрать орган и проекцию изображений. Получите изображение или серию и сделайте соответствующие шаги по их обработке. Описание шагов Вы найдете в разделе 15.4 Получение рентгеновских изображений или 15.5 Frame grabber / регистрация серии изображений.

Перед сохранением необходимо дополнительно указать отсутствующие данные, а именно: описание обследования, изображения или серии. Необходимо указать общее описание обследования, которое будет относиться ко всем изображениям данного обследования, к примеру, „Поясничный отдел позвоночника, грудной отдел позвоночника“ или „Плечо, правое“. В виде комментария к изображению или серии введите точное описание данной регистрации, к примеру, „поясничный отдел позвоночника, задне-передняя проекция“. Затем укажите параметры регистрации, а также фамилию и сокращенное название рентгеновского технолога.

Когда все данные введены, можно сохранить изображение или серию и продолжить процедуру со следующими регистрациями или пациентами.

15.4 Получение рентгеновских изображений

15.4.1 Общее

Если в конфигурации включен модуль для захвата рентгеновских изображений, то справа будет отображаться дополнительная панель инструментов „Сканировать“ с разнообразными функциями для получения и обработки изображений. Вверху вкладки показаны подключенные устройства. Поля вкладки, во время сканирования, временно

отмечаются цветом (желтым во время передачи, зеленым при успешной передаче, красным при неудачной передаче).


Кроме того, появляются дополнительные вкладки под область просмотра изображений (например, список задач или вкладка сохранения и передачи изображений в архив).

Во время получения рентгеновских снимков, нельзя работать с несколькими пациентами. Но здесь доступны все возможности печати и создания CD пациентов.

15.4.2 Ход приема рентгеновских изображений

После выбора пациента можно начать регистрацию изображений.

Теперь, сделайте захват первого изображения и импортируйте его с помощью кнопки „Сканировать“.

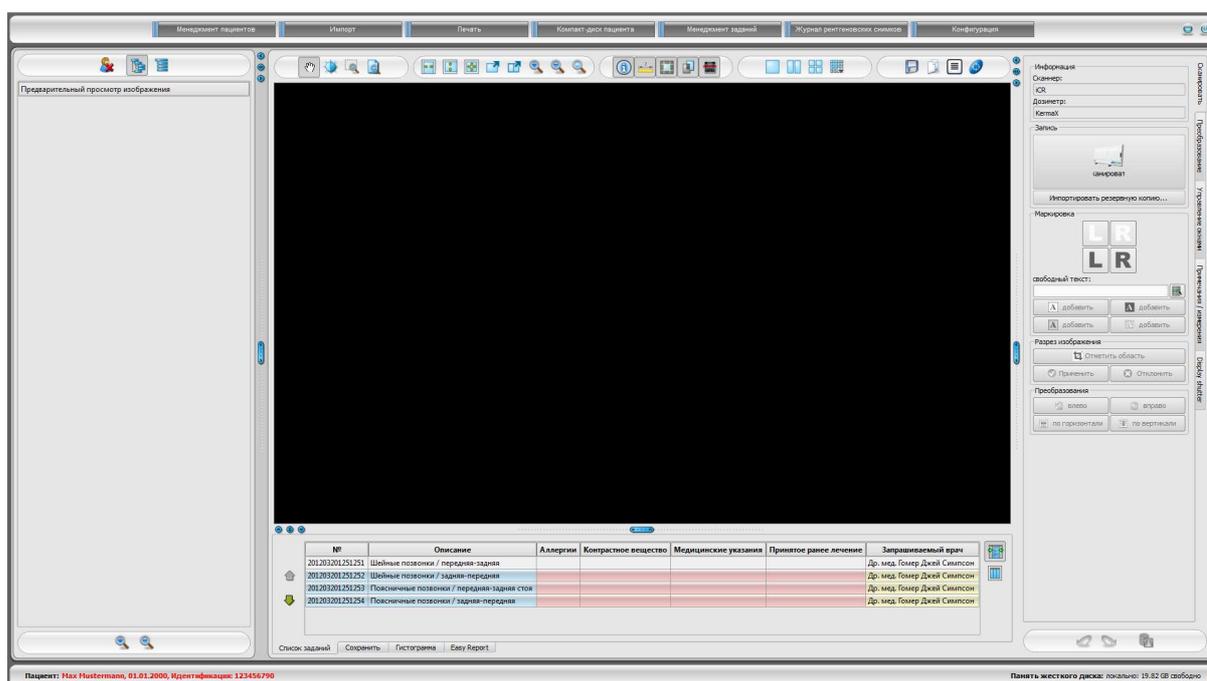

После этого откроется программа сканирования, при помощи которой данные об изображении могут быть переданы.



Подпись и символ этой кнопки, могут отличаться на вашей установке. Это зависит от конфигурации системы.

Если Вы работаете с менеджментом задач, загруженное изображение присваивается следующему заданию. Во время чтения и передачи графических данных, при определенных обстоятельствах может уже выполняться следующий захват. Программное обеспечение для чтения данных изображения (не digipax) должно быть закрыто после каждого захвата.

После передачи первого изображения, новое обследование и серия изображений создаются системой автоматически. Новое изображение сохраняется в этой серии и отображается в окне просмотра изображений. Кроме того, автоматически включается

вкладка сохранения (в нижней части, рядом со списком задач). Для захвата существуют настраиваемые параметры и область для указания ассистента. При вводе значения используйте десятичный знак (обычно это запятая) в региональных настройках и настройках языка системы Windows. При введении значения мАс стандарт DICOM не допускает использования десятичных чисел (с десятичными числами после запятой). Однако администратор системы может в меню конфигурации включить опцию "Разрешить мАс как десятичное число". Когда все данные будут заполнены, можно будет сохранить изображение. Нажав на кнопку „Сохранить“, новый снимок переносится в архив изображений.

15.4.3 Преобразование изображений и управление окнами

Вы можете преобразовать вновь полученные изображения перед их сохранением. Все изменения (поворот, отражение, кадрирование и т.д.) сохраняются и передаются в архив. Эти преобразования сразу же отображаются на других станциях, на которых извлекается изображение.

В конфигурации („Захват изображения“) вращение и отражение могут быть установлены автоматически, и применяться ко всем новым изображениям.

15.4.4 Отметки



Отметки доступны только при активированном соответствующем модуле.

Перед сохранением изображения на нем можно сделать пометки (в конфигурации „Захват изображения“ должны быть активированы пометки). Выберите один из предоставленных символов и, зажав левую кнопку мыши, перетащите его на снимок. Размер символа может быть изменен с помощью прокрутки мыши или клавишами „плюс“ и „минус“ на клавиатуре. Расположите символ на изображении и закрепите его щелчком левой кнопки мыши. Вы можете отменить операцию (кнопками со стрелками), но если изображение будет сохранено, отметки уже невозможно будет удалить.

На изображении также можно поместить текст. Для этого введите нужный текст в поле „Свободный текст“ или выберите текст из списка готовых. У Вас есть возможность разместить черный текст на белом фоне, белый текст на черном фоне, черный текст без фона или белый текст без фона, в зависимости от того, какие настройки предлагается для текущего изображения. Кроме того, размер текста в текстовом поле изменяется таким же образом, как и размер символов.

15.4.5 Обрезка изображения



Обрезка изображения доступно только при активированном соответствующем модуле.

Перед тем как изображения будут сохранены, они могут быть обрезаны по краям. Это дает следующие преимущества:

- можно осматривать отдельные части изображения, без изменения масштаба;
- используется меньше памяти на жестком диске;
- осуществляется быстрая передача данных;
- быстрое отображение и обработка изображений (например, кадрирование)

Тем не менее, существует опасность, что на снимке может быть обрезана важная информация.



Исходное изображение доступно только в качестве резервного снимка в списке новых изображений. Если обрезанное изображение сохранено в архиве, оно уже не может быть восстановлено.

Для обрезки изображения, нажмите на кнопку „Пометить изображение“. После этого щелкните левой кнопкой мыши два раза по изображению и отметьте область, которую хотите вырезать. В предварительном просмотре отображается часть снимка, которая будет вырезана. **Проверьте еще раз изображение в предварительном просмотре, не будет ли удалена какая-нибудь важная информация после обрезки.** Нажав на кнопку „Принять“ вы подтверждаете обрезку, но при этом изображение еще не сохраняется, и вы можете отменить это действие. Нажав на кнопку „Отменить“ отменяется выбранная область для обрезки, и вы можете ее откорректировать.

15.4.6 Перемещение изображений

Не сохраненные изображения можно обменять между собой на панели предварительного просмотра, слева. Для этого щелкните (и удерживайте) левой кнопкой мыши по одному из двух изображений и перетащите его на второе изображение. Отпустите левую кнопку мыши, и изображения будут обменяны. Другие данные (например, задачи) остаются привязанными для определенного изображения. Их менять или перетаскивать не требуется.

15.4.7 Отклонение изображения

Изображения могут быть отклонены. Это означает, что они не передаются в архив изображений, а сразу удаляются. Для этого нажмите кнопку „Отклонить“ на вкладке сохранения. Появляется сообщение о подтверждении, на которое необходимо ответить „Да“.

15.4.8 Дополнительные устройства

В случае необходимости, к системе могут быть подключены дополнительные устройства, как например, генератор рентгеновского излучения или дозиметр. Устройства автоматически передают новые значения в систему или система сама циклически запрашивает данные. Как только становятся доступны новые значения, они автоматически выводятся с новым „изображением“. Это новое „изображение“ не содержит графических данных и в предварительном просмотре выглядит как черный прямоугольник. Следующий полученный снимок будет назначен на это „изображение“ и оно может быть нормально сохранено.

15.4.9 Резервные копии

Для каждого изображения, которое будет проверяться, создается резервная копия до первого действия перед обработкой. Если подключены дополнительные устройства, их значения также будут сохраняться в резервной копии.

Для восстановления изображения из резервной копии, сначала активируйте пациента, к которому это изображение относится. Далее используйте кнопку „Импортировать резервную копию...“ под вкладкой проверки. В диалоговом окне появятся эскизы с данными и датами получения снимков. Выберите запись, которая будет импортирована и нажмите „Ok“. Изображение импортируется в таком виде, в котором было получено изначально. Заполните нужные данные во вкладке сохранения и нажмите „Сохранить“, для передачи снимка в архив.

15.4.10 Рентгеновский журнал

Если на станции активирован модуль рентгеновского журнала, при каждом сохранении будет создаваться запись в журнале. Запись происходит автоматически, если есть доступ к необходимой информации. В противном случае, появится диалоговое окно для ручного ввода данных. Запись сохраняется при нажатии на кнопку „Ok“.

15.4.11 Советы по предварительному просмотру

Новые снимки каждый раз отображаются слева, на панели предварительного просмотра. Новые снимки отмечены символом дискеты в левом нижнем углу эскиза. Если снимок сохраняется, то к символу дискеты добавляется зеленая галочка.

Если активировано управление задачами, и новые снимки были сделаны в рамках новых задач, то номер задачи будет отображаться в левом нижнем углу эскиза.

Если вы активируете пациента (в менеджменте задача или пациентов), то обследования, которые уже существуют для этого пациента, не будут открыты в эскизах. Новые снимки имеют приоритет.

Как обычно, Вы можете открыть увеличенное изображение по двойному щелчку мышей или перетащить в окно просмотра, независимо от того, сохранено оно или нет.

15.4.12 Проблемы и решения

Что делать если кассеты перепутались и изображения расположены в не правильной последовательности?

Перетаскивая изображения можно менять их местами (см. 15.4.6 Перемещение изображений). При этом меняется только положение изображений. Положение другой информации (например, данные из задач и с подключенных устройств) не изменится.

Что делать, если изображения назначены не тому пациенту?

Если новые изображения были назначены не тому пациенту нужно справа отклонить изображения, потом выбрать нужного пациента и импортировать нужные снимки из резервной копии. См. 15.4.7 Отклонение изображения и 15.4.9 Резервные копии.

Если неправильные изображения уже были сохранены в архив, нужно выбрать нужного пациента и импортировать необходимые снимки из резервной копии. Попросите у администратора архива изображений удалить не верные изображения из архива.

Что делать если данные с устройств уже были переданы в архив до того как был создан клиент?

Данные с устройств сохраняются в резервной копии. По-этому активируйте нужного пациента; импортируйте данные из резервной копии; осмотрите снимки и сохраните их.

Что произойдёт если попытаться сменить текущего пациента или закрыть приложение прежде чем его изображения будут сохранены?

Появится сообщение о том, что сначала нужно сохранить или отклонить все изображения текущего пациента. Нельзя переключить текущего пациента или закрыть программу, пока изображения не сохранены в архив.

Что если произошёл сбой программы во время захвата изображения?

Снова запустите программу. Выберите пациента в разделе „Менеджмент пациентов” и проверьте какие изображения сохранились.

Если для текущего пациента сохранены не все изображения, откройте список резервных копий. Восстановите недостающие изображения. Если недостающие изображения отсутствуют, нажмите кнопку „Захват изображения”. Появится диалоговое окно, с помощью которого можно импортировать изображения с устройства захвата. Выберите „импортировать” – захваченные изображения будут импортированы и их можно будет сохранить. Если нужные изображения не были измортированы, изображения не возможно восстановить в программе. Изучите раздел о восстановлении изображений в руководстве по эксплуатации устройства захвата, или обратитесь к администратору системы.

15.5 Frame grabber / регистрация серии изображений

15.5.1 Общая характеристика

Модуль „Frame grabber“ позволяет получать одиночные изображения или целые серии изображений из внешнего источника с помощью видеоконвертера и передавать их в архив изображений. Frame grabber может быть установлен лишь при наличии в источнике изображений видеоинтерфейса Composite или S-Video, к которому можно подсоединить видеоконвертер. Конвертер преобразует данные изображений и передает их в компьютер. Может использоваться оборудование обслуживающее технологии DirectShow или оборудованное драйвером WDM. Подробную информацию относительно технических деталей и помощи при подборе наиболее соответствующего устройства Вы можете получить у администратора системы.

Существуют устройства, которые должны быть вмонтированы в компьютер, а также такие, которые могут быть подсоединены под внешний коммуникационный порт USB. Обслуживание может осуществляться с помощью клавиатуры, мыши или внешнего ножного переключателя. Оптимальный ножной переключатель должен иметь две программируемые педали. Под одной из педалей будет запрограммирована кнопка „F5” клавиатуры, а под другой – „F9”, при этом можно по усмотрению выбрать, какая (правая или левая) из педалей будет соответствовать какой-либо из двух вышеупомянутых

кнопок клавиатуры. Как правило, программирование осуществляется с помощью программного обеспечения, которое приложено к переключателю. Каким образом подсоединить и установить устройство Вы можете узнать в документации изготовителя данного устройства. Установку должен проводить исключительно специалист.

Модуль „Регистрация серии изображений“ позволяет получать данные изображений независимо от digipax непосредственно в устройство или обрабатывать их с помощью конвертирующей системы, а также передавать их по сети в компьютер. Таким образом приложение принимает эти данные и занимается их дальнейшей обработкой.

15.5.2 Системные требования для установки видеопроцессора frame grabber

Для обработки серии изображений со скоростью нескольких изображений в секунду необходим компьютер соответствующей мощности. Ниже приведена таблица, отображающая минимальные требования, которым должен соответствовать компьютер, для обслуживания frame grabber и digipax.

Процессор	Dual Core или Quad Core от 2,5 ГГц и выше
Рабочая память	2 Гб RAM и выше
Операционная система	Windows XP Prof. (32/64–бит) или Windows 7 Prof. (32/64–бит)
Программное обеспечение	DirectX 9c и выше
Графика	минимум 128 Мб DVI (Dual), мин. 1280 x 1024
Жесткий диск	мин. 60 Гб
Сеть	1000BaseT (Gigabit Ethernet)
Интерфейс оборудования	свободный порт USB 2.0 для внешних устройств или же свободный разъем (чаще всего PCI или PCIe) для встроенных в компьютер устройств


15.5.3 Конфигурация frame grabber в digipax

Для того, чтобы можно было пользоваться модулем „Frame grabber“ в системе digipax, он должен быть лицензирован и запущен. Конфигурация в digipax также должна быть проведена специалистом. Если модуль включен, тогда в браузере изображений будет активирована новая панель инструментов для настройки и управления устройством.

С помощью переключателей „Видеоисточник“ и „Конфигурация“ осуществляется выбор и конфигурация подсоединенного устройства. Элементы конфигурации и обслуживания активируются только после того, как был открыт только ОДИН пациент. Если было открыто более одного пациента, тогда элементы деактивируются. Таким образом данные изображений не могут быть присвоены несоответствующим пациентам.

15.5.3.1 Видеоисточник

- **Название устройства:** если видеоустройство было правильно установлено, то оно отображается в списке „Название устройства“. Если список пуст – это значит, что либо устройство было установлено неправильно либо оно не соответствует вышеприведенным требованиям. Если в списке присутствуют несколько устройств, тогда необходимо выбрать одно из них.
- **Серийный номер:** отображает серийный номер выбранного устройства.
- **Свойства:** открывает диалоговое окно доступа к разным точным настройкам устройства. Подробнее об этом в документации изготовителя.
- **Видеостандарт:** настраивает видеостандарт. Стандарт зависит от видеоисточника или же источника изображений. В Европе обычно применяется стандарт PAL.
- **Видеоформат:** рекомендуется использовать изображения с высоким разрешением параллельно с наилучшей глубиной цвета устройства.
- **Эффективность работы преобразователя:** определяет количество изображений в секунду, поставляемых видеоисточником. При скорости 25 изображений в секунду, каждые 40 миллисекунд видеоисточник транслирует изображение.
- **Входной канал:** видеоинтерфейс видеоконвертера, к которому подсоединен видеоисточник.

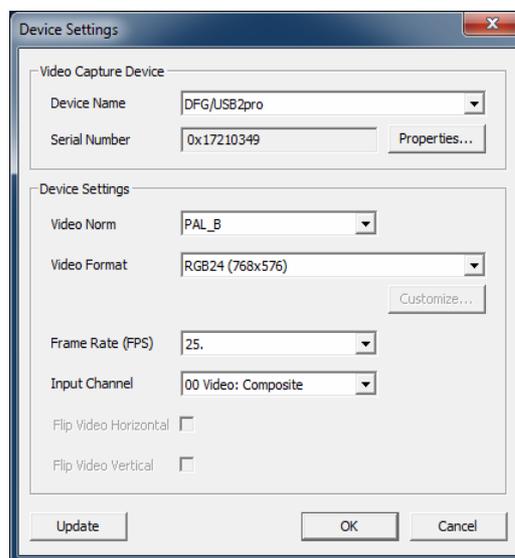

Всем данным настройкам не присущи общие обязательные параметры. Параметры всегда зависят от используемого компьютерного оборудования и могут быть разными. Детальная информация относительно данной темы размещена в документации изготовителей компьютерного оборудования и видеоконвертера, а также источника изображений или же видеоисточника.

15.5.3.2 Конфигурация

В данном случае активируется диалоговое окно доступа к точным настройкам аналогичное „Видеоисточник/Свойства:“. Разница состоит лишь в том, что диалоговое окно в данном месте можно активировать и изменять настройки также в процессе прямой передачи изображений.

15.5.4 Элементы обслуживаемые видеопроцессором frame grabber

Для обслуживания можно использовать мышь или клавиатуру. Кроме того, существует возможность подсоединения внешнего ножного переключателя компьютера. Благодаря этому, устройство можно обслуживать с помощью ступней, а руки использовать для обслуживания источника видеосигнала. Кнопки „F5“ (Запуск прямого изображения) и „F9“

(Запуск моментального снимка) можно по усмотрению настроить к любой из педалей ножного переключателя, для создания оптимально удобных условий работы обслуживающему лицу.

- **привести в действие прямое изображение:** отображает изображение при активной прямой передаче в браузере.
- **масштабировать до размеров окна:** увеличивает или уменьшает изображение до размеров окна.
- **Старт (F5):** запускает прямую передачу изображения. Данное действие можно активировать путем щелчка мышью, нажатия на кнопку клавиатуры „F5“ или на соответствующую педаль ножного переключателя. Повторное нажатие задерживает передачу.


Необходимо обратить внимание на то, что полученные изображения можно обрабатывать только после задержки прямой передачи.

- **Моментальный снимок (F9) при настройке одиночных изображений:** щелчком по мыши, нажатием на кнопку клавиатуры „F9“ или на соответствующую педаль ножного переключателя осуществляется моментальный снимок текущей видеопередачи.
- **Регистрация (F9) при настройке серии изображений:** щелчком по мыши, нажатием на кнопку клавиатуры „F9“ или на соответствующую педаль ножного переключателя в течение определенного времени загружается серия изображений. Детальная информация по данной теме находится в пункте „Серия изображений“.
- **одиночные изображения:** переводит переключатель регистрации на моментальные снимки. Всегда получаются только одиночные изображения.
- **серия изображений:**
 - интервал: – определяет в течение какого времени будет загружаться изображение. Необходимо обратить внимание на то, что максимальное количество изображений в секунду зависит от установленного преобразователя frame grabber, а также эффективности работы компьютера.
 - продолжительность: – регистрация автоматически завершается по истечении наведенного времени. Запуск регистрации производится щелчком мыши или одноразовым нажатием на кнопку „F9“ либо на соответствующую педаль ножного переключателя.
 - до тех пор, пока кнопка находится в нажатом состоянии: – регистрация запускается путем щелчка мышью, нажатия на кнопку „F9“ или на соответствующую педаль ножного переключателя и остается во вкл. состоянии до тех пор, пока остается нажатой кнопка.



15.5.5 Регистрация с использованием видеопроцессора frame grabber

При запуске прямой передачи изображений создается новая серия. Полученные одиночные изображения или же серии изображений отображаются в виде кандидатов в окне просмотра внизу, а после того, как будет задержана прямая передача, изображения отображаются также в виде просмотра миниатюр и могут проходить обработку.

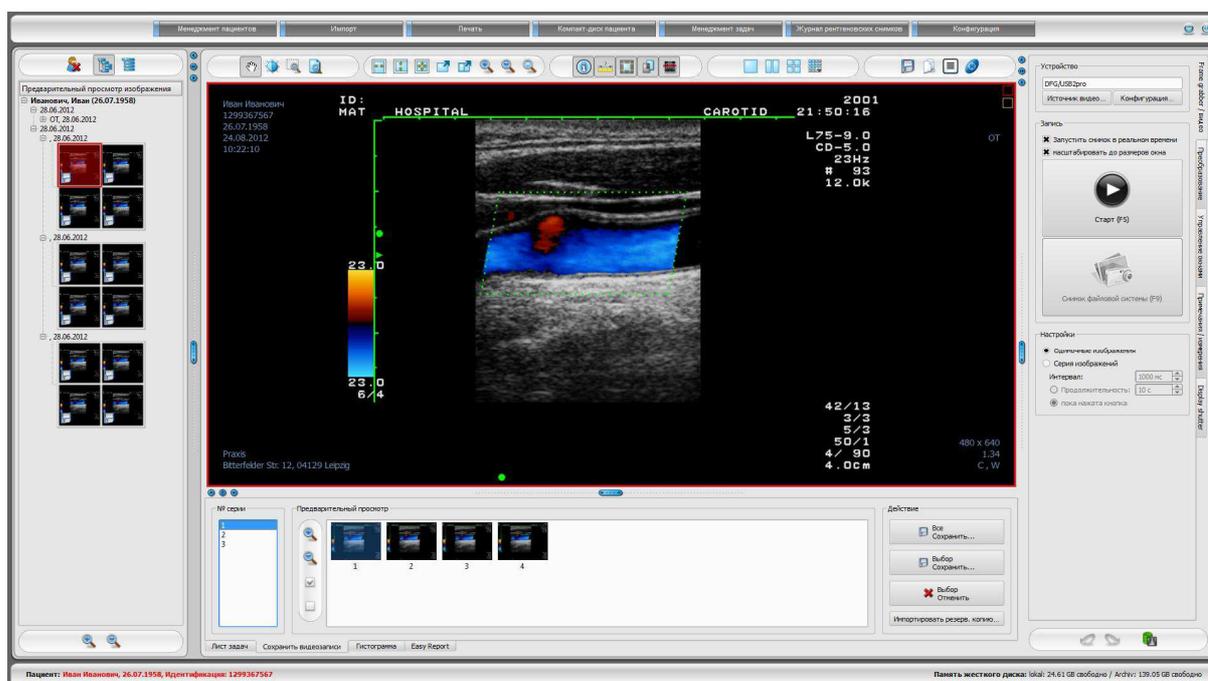

После приведения в действие одиночных изображений одновременно с каждым моментальным снимком получается новое изображение, которое добавляется к списку кандидатов, а также откладывается в серию. Если Вы желаете начать новую серию, к примеру, если необходимо обследовать другой орган, тогда Вам необходимо задержать и перезапустить прямую передачу изображений, поскольку каждый перезапуск прямой передачи позволяет создавать новую серию. При применении менеджмента задач можно разрабатывать задачу за задачей.


Также при настройке „Серия изображений“ все полученные изображения откладываются в одну серию, а серия закрывается при завершении прямой передачи изображений. Дальнейшая обработка данных и сохранение в архиве описаны в разделе 15.5.7 Обработка и сохранение полученных изображений.

15.5.6 Регистрация с помощью модуля регистрации серии изображений

Изображения получают из внешнего устройства и передаются посредством компьютера, а приложение принимает эти данные. После того как будет передано первое изображение, digipaxX ожидает в течение времени ожидания, наведенного администратором системы. Если в течение наведенного времени не будут получены следующие изображения, тогда полученные изображения автоматически добавляются к

листу кандидатов и откладываются в новую серию. Если Вы целесообразно желаете получить несколько серий одного пациента, то для этого лучше всего получить изображения серии в устройство, а затем передать закрытую серию в digipax и подождать до тех пор, пока digipax завершит импорт серии. Затем можно продолжить процедуру без предварительного сохранения полученной серий со следующей серией. В завершение можно провести соответствующую обработку изображений и занести их в архив.

15.5.7 Обработка и сохранение полученных изображений

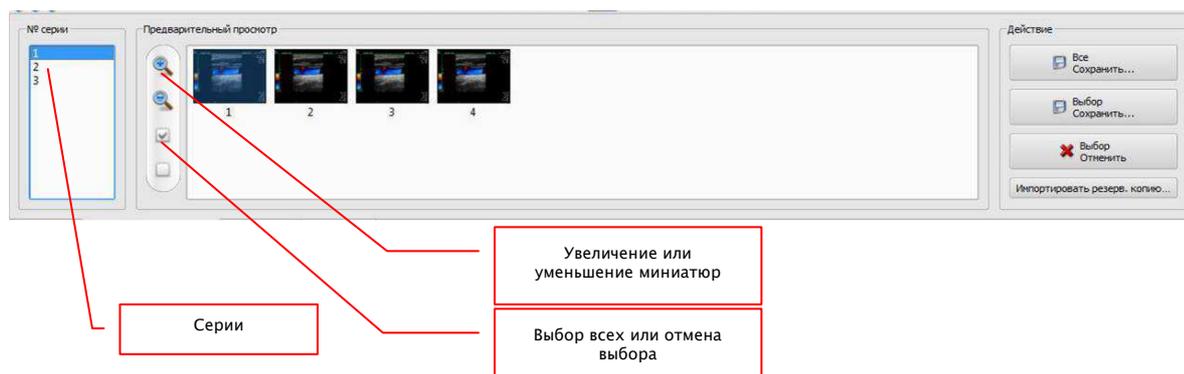

В случае щелчка по левому листу в окне просмотра отображаются изображения-кандидаты. Чтобы улучшить отображение можно увеличивать или уменьшать миниатюры. Для сохранения всех изображений достаточно нажать на „Сохранить все“. Таким образом будут сохранены все изображения серии. Если Вы желаете сохранить только конкретные изображения, то Вы можете отмечать их или же убирать отметки путем нажатия на миниатюры. Щелкая по „Убрать выбор“ будут убраны отметки со всех отмеченных изображений. Изображения, в которых нет необходимости, можно пропустить, выбирая данные изображения и щелкая по „Выбор Отменить“. Выбранные изображения будут удалены из режима просмотра и из окна просмотра миниатюр. Когда все желаемые изображения будут отмечены, щелкните мышью по „Сохранить“. После щелчка откроется диалоговое окно записи. Выберите соответствующую задачу из листа (только в случае использования модуля менеджмента задач). По усмотрению Вы можете настроить дату, описание обследования и серии, а также данные относительно врача. Щелчок по „ОК“ позволяет занести данные в архив.

15.5.8 Импортирование резервных копий

к каждой прямой передаче изображений или же серий изображений создаются резервные копии полученных моментальных снимков или серий изображений. В случае, если возникнет такая необходимость, их можно воспроизвести благодаря резервной копии. Для этого сначала активируйте пациента, которому будут присвоены изображения. Щелкните кнопкой мыши по „Импортировать резервную копию...“. В активированном диалоговом окне отображаются миниатюры регистрации с датой, временем и количеством изображений. Выберите регистрацию, которую Вы желаете

импортировать и подтвердите выбор путем нажатия на кнопку „Ok“. Моментальные снимки или серии изображений импортируются обратно и могут быть обработаны.

15.5.9 Проблемы и решения

Что делать, если неправильный пациент ещё активирован?

Если новые изображения были назначены не тому пациенту нужно сперва удалить (отклонить) изображения. Потом выбрать нужного пациента и импортировать нужные снимки из резервной копии (кнопкой “Импортировать резервную копию...”). См. 15.5.7 Обработка и сохранение полученных изображений и 15.5.8 Импортирование резервных копий.

Если неправильные изображения уже были сохранены в архив, нужно выбрать нужного пациента и импортировать необходимые снимки из резервной копии. Попросите у администратора архива изображений удалить не верные изображения из архива.

Что делать если данные с устройств уже были переданы в архив до того как был создан пациент?

Это может произойти только когда употребляемый модуль получения серии изображений.

Если пациент не активирован, данные изображений остаются в указанной папке для передачи данных. Как только активируете пациента, эти данные изображений будут импортированы и назначены тому пациенту. Затем можете продолжать нормально с сохранением изображений.

Что произойдёт если попытаться сменить текущего пациента или закрыть приложение прежде чем его изображения будут сохранены?


Появится сообщение о том, что сначала нужно сохранить или отклонить все изображения текущего пациента. Нельзя переключить текущего пациента или закрыть программу, пока изображения не сохранены в архив.

Что если произошёл сбой программы во время захвата изображения?

Снова запустите программу. Выберите пациента в менеджменте пациентов и проверьте какие изображения сохранились.

Когда употребляемый модуль получения серии изображений все ещё не импортированы изображения будут автоматически ещё раз прочитаны для пациента и Вы можете продолжать нормально с сохранением изображений. Если это не происходит или Вы работаете с модулем frame grabber, нужно импортировать нужные изображения из резервной копии. Для того активируйте список резервных копий и импортируйте резервную копию для уже правильно выбранного пациента и проведите запись ещё раз.

16 Конфигурация

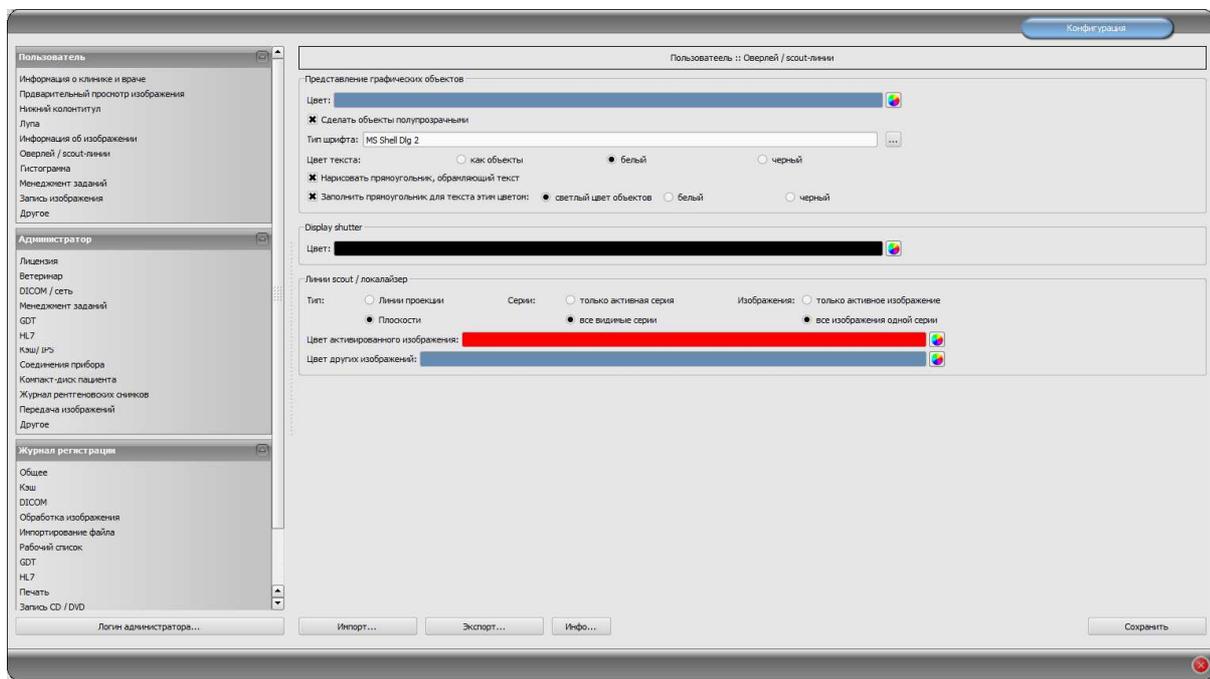

Существует центральное место конфигурации программы. При этом конфигурации, а также разные записи лога разделены в диалоге на следующие группы: Пользователь, Администратор и Лог. Конфигурации в группе Администратор могут изменяться только при условии, если имеются права администратора. Администратор должен осуществлять вход в систему при запуске данного компонента „Вход в систему в качестве администратора...“. Пользователь, который вошел в качестве администратора имеет возможность с помощью „Импортировать...“ и „Экспортировать...“ получить полную конфигурацию или ее часть из файла INI или же сохранить ее в файле с таким же расширением.

Кнопка „Инфо...“ служит для отображения информации относительно продукта.

Пользователь может осуществлять следующие настройки конфигурации:

- **Информация о клинике и врачах**
Учреждение: название клиники, поликлиники и т.п.
Адрес: главный офис клиники
Фамилия врача: фамилия врача, пользующегося данным аппаратом
Номер врача / идентификационный номер учреждения: Идентификационный номер врача, если в клиниках работает несколько врачей, или идентификационный номер учреждения (данное поле может оставаться незаполненным)
- **Интерфейс пользователя.**
Монитор: настройка и размещение мониторов. Если включено несколько мониторов, отдельные элементы для индивидуальной настройки могут показываться на всех или только на определенных мониторах – гистограмму и EasyReport можно выключить на

всех мониторах (это касается также получения изображений и таблицы заданий, если модуль получения изображения выключен) – карта управления пациентами может быть активна только на одном мониторе – размещение мониторов можно регулировать



Модуль конфигурации нескольких мониторов имеет дополнительную лицензию и требует отдельного запуска – после запуска количество используемых мониторов зависит от установленного оборудования – без лицензии digipax может высвечиваться только на одном из доступных мониторов.

▪ **Интерфейс пользователя:**

Design: разнообразные возможности отображения.

Позиция панелей инструментов: в случае вертикальных экранов рекомендуется располагать слева – это происходит автоматически или же это можно указать здесь.

Высота рабочей панелей инструментов (расположение окон): в случае вертикальных экранов рекомендуется использовать короткую рабочую панель, и соответственно широкую нижнюю рабочую панель (гистограмму) – это происходит автоматически или же это можно указать здесь.

▪ **Просмотр изображений**

Древоподобный просмотр: выбор тегов, по которым должна осуществляться сортировка перечня изображений, направление сортировки и определение отображаемого текста в узлах изображений (аналогично принципу информации на изображениях)

Для сортировки по отображению можно применить следующие теги:

0x0008, 0x0016	SOPClassUID
0x0008, 0x0018	SOPInstanceUID
0x0020, 0x0013	InstanceNumber
0x0008, 0x0023	ContentDate
0x0008, 0x0033	ContentTime
0x0028, 0x0008	NumberOfFrames
0x0008, 0x0022	AcquisitionDate
0x0008, 0x0032	AcquisitionTime
0x0028, 0x0002	SamplesPerPixel
0x0028, 0x0010	Rows
0x0028, 0x0011	Columns
0x0028, 0x0101	BitsStored
0x0008, 0x0008	ImageType
0x0054, 0x0400	ImageID

Режим развертывания: Развернуть все: после выбора пациента все узлы обследований и узлы серий изображений в древовидной структуре развертываются, и, соответственно, при просмотре отображаются все его изображения; Свернуть все: Все узлы обследований свернуты, и, соответственно, не отображаются миниатюры – в данном случае необходимо вручную выбрать обследование и серию изображений, просмотр которых будет осуществляться; Автоматически: без включенной аквизиции изображений узлы развернуты и отображаются все миниатюры, в случае включенной аквизиции изображений узлы обследований свернуты и только новосозданные обследования развернуты

Режим отображения серии изображений: в качестве альтернативы все изображения данной серии могут отображаться в виде дерева просмотра или только одиночного изображения серии (возможность настройки каждого типа изображения отдельно) – сначала необходимо слева выбрать соответствующую модальность, напр., СТ, а затем справа – настройку, которая будет применена к данному типу изображения (все изображения или только первое, центральное и последнее изображение серии)

- **Нижний колонтитул**

Проверка: отмечая галочкой можно включить или выключить проверку данного привода; для привода необходимо выбрать любой каталог на проверяемом диске (или же сетевой путь); перед отображаемым в нижнем колонтитуле текста может находиться префикс; если свободное место на приводе упадет ниже критического значения, тогда один раз в процессе сессии будет отправляться предупреждение, если свободное место на приводе упадет в два раза критического значения, то значение будет отмечаться красным цветом, в противном случае будет оставаться черного цвета

Циклы обновления: циклы в секундах, в процессе которых будет обновляться проверка свободного места в памяти

- **Лупа**

Прямоугольник: применение прямоугольного увеличительного стекла в программе просмотра с указанным или автоматическим пиксельным размером

Круг: применение круглого увеличительного стекла в программе просмотра с указанным диаметром или автоматическим размером

Автоматический размер: ширина и высота прямоугольника или диаметра круга настраиваются на одну треть текущей ширины окна или высоты окна изображения, в зависимости от того, какое из значений меньше

Коэффициент зума: коэффициент увеличения отображаемого фрагмента изображения в выделенной области лупы(касается оригинального изображения)

- **Информация об изображении**


Цвет текста: цвет текста информации, отображаемой в углах изображения

Вид шрифта: вид шрифта текста информации

Коэффициент увеличения: служит для подбора размера шрифта (конечно же, размер шрифта автоматически подстраивается под размер окна)

Полутоны: поскольку текст на изображениях с белым фоном может быть непригодным для чтения, используя данную опцию можно применить тени – в случае черных или темных изображений полутоны могут быть почти незаметными

- **Группа элементов:** для каждого типа изображений (модальности) можно определить, какая информация должна отображаться в углах наложения изображения. Сначала необходимо выбрать желаемый тип, а затем опцию „Применить данные настройки“, если применяются стандартные настройки. Щелкнуть по желаемому полю, чтобы определить угол изображения, а затем по кнопке ”Новый текст в актуальном поле“, чтобы добавить элемент в данном поле. В строку подписи можно ввести любой текст, который появится на изображениях. Необходимо применить %1, %2 и %3 в качестве „переменных“

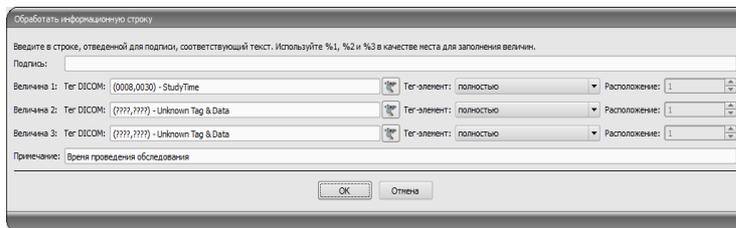

- (многозначных символов). Переменные будут заменены соответствующими тегами DICOM на дисплее. В случае необходимости можно определить отображение только части данного тега, напр., фрагмента фамилии пациента или значения в определенном месте тегов, которые допускают несколько значений (мультипликация). С помощью двойного щелчка по тексту в полях перечней или по кнопке „Редактировать активный элемент“ можно редактировать введенные данные. Для удаления введенных данных из перечня необходимо воспользоваться кнопкой „Удалить активный элемент“. Для перетаскивания или копирования элементов в рамках одного поля перечня или между полями перечня можно их перетаскивать придерживая левую кнопку мыши (drag & drop). Для того, чтобы перетащить элемент, необходимо придерживать нажатым клавишу Shift. Без нажатой клавиши Shift элемент будет скопирован

- **Оверлей / линии среза**

Презентация графических объектов:

Цвет: цвет для рисования графических объектов

Полупрозрачная заливка объектов: если данная опция активна, то при рисовании на изображении объектов с заливкой, заливка рисунков является полупрозрачной, чтобы можно было распознать изображение, скрывающееся за ними, в противном случае заливка объектов будет полной и того цвета, который будет выбран

Вид шрифта: вид шрифта используемый в текстовых объектах

Цвет текста: ранее выбранного белого или черного цвета

Создать прямоугольную рамку для текста: если данная опция включена, то текст будет помещен в прямоугольную рамку ранее выбранного цвета из палитры, доступной для графических объектов; благодаря этому, в некоторых случаях текст является более четким

Залить прямоугольник текста данным цветом: если данная опция будет включена, тогда прямоугольник, в котором будут помещены текстовые объекты будет залит выбранным цветом (ранее выбранная полупрозрачность будет применена также в данном случае), в противном случае прямоугольник останется без заливки и будет виден фон в виде изображения; для заливки можно применить тот же цвет, что и в

случае объектов (осветленного), белого или черного

Display Shutter:

Цвет: цвет, перекрывающий скрываемые области

Линии среза (scout lines):

Тип „линии проекции“ – при включенной данной опции отображаются только прямые линии среза изображений или проекции краев; „плоскость“ – в данном случае изображения отображаются в виде плоскостей среза в третьем измерении.

Серии: „только активные серии“ – в данном случае отображаются только линии проекции или плоскости активных серий; „все видимые серии“ – в данном случае отображаются линии проекции или плоскости всех видимых серий – **Указания:** данная опция работает только в том случае, если включена опция „все изображения серии“.

Изображения: „только активное изображение“ – в данном случае отображается только линия проекции или плоскость активного изображения; „все изображения серии“ – в данном случае отображаются линии проекции или плоскости серии.

Цвет: цвет отображения активного изображения, и цвет отображения других изображений.

▪ **Гистограмма**

Урезать справа и слева: благодаря данным опциям, значения гистограммы правых и левых краев приобретают такие промежуточные значения, которые позволяют правильно отобразить в окне целую гистограмму. Если при этом возникает необходимость урезать существенные области или значения представляемые между данными граничными значениями продолжают оставаться слишком малыми, то необходимо увеличить или уменьшить указываемые размеры.

Сглаживание гистограммы для отображения: проведите сглаживание гистограммы для отображения путем соответствующего количества одиночных сглаживаний. Изображения при этом не сглаживаются. Данная опция служит только для более качественного отображения гистограммы.

Значения: отображение на оси X только тех значений, которые действительно применяются в изображении, или же всех значений которые могли бы появиться на основании глубины цветов изображения.

▪ **Менеджмент задач**

Поля менеджмента задач: выбор всех полей, которые должны быть применены в процессе работы с рекомендациями. Необходимо провести деактивацию тех полей, которые не должны применяться.

Области применения: области применения – это области, где данные или направления вводятся или отображаются. В данном случае необходимо определить, к каким из областей должен применяться вышеупомянутый выбор. В областях, которые не были здесь активированы будут отображаться все поля данных.

Применить цвет к полям: если данная опция включена, тогда поля данных в разных областях применения будут отмечаться разными цветами соответствующими их значениям. Если же данная опция выключена, то цвета применяться не будут и поля останутся белыми.

- **Захват изображений**

Удаление направления из рабочего списка: с вопросом или автоматически после сохранения данного изображения.

Уведомление относительно статуса сохранения: настройка времени отображения уведомления (в секундах) или введенный «0», чтобы уведомление не появлялось (уведомление статуса отображает информацию относительно осуществленных операций сохраненного изображения).

Запасные копии: количество создаваемых запасных копий (когда данное количество будет превышено, самая старая копия будет автоматически удалена).

- *Режим серии изображений:* создание одной серии всех новых изображений или отдельной серии каждого изображения.

Стандартной настройкой является сохранение каждого изображения в собственной серии. В данном режиме также дополнительно сохраняется комментарий к изображению, указанный в ходе регистрации изображения в виде описания серии и отображается в режиме просмотра миниатюр. При изменении данной настройки комментарий к изображению не будет сохраняться дополнительно в виде описания серии, и не будет отображаться в режиме просмотра миниатюр

Автоматические преобразования изображения: любое новое полученной изображение проходит автоматические преобразования.

Пометки: активация пометок; выбор типов изображений для виртуальных свинцовых букв; выбор шрифта для любого текста.

Запись в журнале rtg: повтор отображения данных или автоматическое создание записи, если доступны все требуемые данные.

Кнопка регистрации изображений: здесь можно настроить другое описание и другую иконку кнопки регистрации рентгеновских изображений

- **Прочее**

Архивные данные: после открытия программы данная настройка применяется для запуска (инициализации) перечня пациентов или же при требуемом обновлении.

Функция мыши: настройка окна: синхронизирована с отображаемой ниже гистограммой или модифицируемая, чтобы сохранить настройки другой системы.

Режим прокрутки изображений: изображения можно менять путем прокрутки колесом мыши или с помощью кнопок „Изображение вверх“ и „Изображение вниз“. Здесь можно также настроить будет ли прокрутка работать только в рамках одной серии изображений. Изменение изображений может распространяться не только на одну серию и может относиться ко всем изображениям обследования, а также распространяться на все изображения данного пациента в рамках нескольких обследований.

Отображение изображений после зумирования: если данная опция отключена, тогда пиксели увеличены и не происходит сглаживание (однако, иногда детали могут быть заметными), если же данная опция включена, тогда сильно увеличенные изображения сглаживаются (изображения теряют четкость, а детали иногда расплываются).

Отображение отмеченных объектов: добавление или нет затемнения к отмеченным изображениям (при убранном затемнении только красная точка в правом верхнем углу изображения).

Информация / сообщения: некоторым действиям сопутствуют отображаемые

указания, расположенные в малом окне в нижнем правом углу экрана – здесь можно настроить время их отображения, данные сообщения можно также полностью деактивировать.

Единицы измерения: эта опция служит для выбора единицы измерения „мм/мм²“, или „см/см²“

Для просмотра записей лога необходимо в группе „Лог“ выбрать желаемую категорию. Затем в правой части окна отображаются записи лога данной категории. Записи в окне лога можно отмечать с помощью мыши или клавиши Strg + A, а также с помощью комбинации Strg+C копировать в буфер обмена. После копирования их можно вклеить в любой редактор и сохранить. Кроме того, файл лога global.log расположен в инсталляционном каталоге, куда попадают отчеты всех действий приложения.

17 Снятие с эксплуатации

17.1 Выход из программы

Выход из программы производится нажатием на символ  в верхнем правом углу заголовка или на красный крестик окна Windows. Приложение сворачивается в системный лоток, в правый нижний угол (символ – красный X), если иное не установлено администратором. Приложение остается активным в фоновом режиме и может быть снова открыто через контекстное меню иконки в системном лотке. Через контекстное меню программу можно закрыть полностью.

Вы можете спокойно выключить компьютер, не выходя из программы, работающей в фоновом режиме.

Программа закрывается моментально (не сворачивается), если при закрытии её главного окна задержать клавишу Shift, Ctrl или Alt. То же самое происходит, если закрыть сочетанием клавиш Alt + F4.

17.2 Выключение оборудования

Для того чтобы полностью выключить систему необходимо отсоединить устройство и компьютер от электросети. С этой целью можно воспользоваться бытовыми удлинителями с выключателями.



Перед выключением компьютера необходимо правильно закрыть систему Windows. В противном случае система может быть повреждена и стать непригодной к использованию.

18 Интерфейс GDT

Маркировка GDT: GDT-D-11

В программу можно в любой момент, как при запуске так и при входе в программу передать файл GDT. Передача происходит в указанном коммуникационном каталоге и в указанном формате. Настройка каталога и формата проводится администратором системы.

Тип GDT-записи	Действие
6301: Отправить постоянные данные	<ul style="list-style-type: none"> • Пациент, переданный в файле GDT, создается локально, если он еще не существует в одном из определенных архивов изображений • При запуске программы, или если ни один компонент не открыт, открывается управление пациентами
6302: Запрос на новое обследование	<ul style="list-style-type: none"> • В данном случае пациент также создается локально, если, конечно, он еще не существует в системе • Затем пациент выбирается для работы • В ходе запуска программы, или если ни один компонент не открыт: <ul style="list-style-type: none"> А) активируется только пациент, если включен модель аквизиции изображений и аквизиция происходит непосредственно на данной машине или Б) запускается компонент рабочего перечня и открывается диалог создания нового направления, если аквизиция изображений не включена или приложение запущено с помощью параметра /w В) запускается компонент импортирования, если аквизиция изображений и компонент рабочего перечня не включены или приложение не запущено с помощью параметра /i
6311: Показать данные обследования	<ul style="list-style-type: none"> • В данном случае пациент также создается локально, если, конечно, данная опция востребована и выбрана • Не был запущен ни один компонент, но все доступные обследования данного пациента отображаются в виде дерева просмотра и могут быть сразу же просматриваться в браузере • Отображается первое изображение обследования

	<p>(если будет передана дата обследования и будет найдено обследование с указанной датой)</p> <ul style="list-style-type: none">• Компонент CD пациента запускается, если приложение было запущено с помощью параметра /pcd
--	---

Данные могут отправляться на другие системы, напр., если обследование уже проведено. Это также осуществляется посредством файлов GDT по указанному коммуникационному пути.

19 Ветеринарная версия

Система может применяться также в ветеринарии. В таком случае администратор системы настраивает систему таким образом, чтобы можно было работать с животными в качестве пациентов. В ветеринарной версии в качестве данных пациентов применяются, изменяются и отображаются данные животного и его владельца.

В дальнейшей части находятся объяснения элементов программы, которые отличаются в ветеринарной версии. Основная часть программы остается без изменений.

Примечание: сохранение данных животных не предвидится международным стандартом DICOM (являющимся основой архитектуры системы). Поэтому администратор должен осуществить специальные настройки, позволяющие сохранять значения на других тегах DICOM. В связи с этим полученное таким образом изображения являются или же не являются при определенных условиях „совместимыми“ с другими системами (напр., кличка животного или вид животного не отображается или же неправильно отображается на другой системе либо значение появляется в другом месте системы). Однако это ни коим образом не влияет на работу самих систем.

19.1 Менеджмент пациентов

В таблице пациентов находятся следующие группы колонок: кличка животного, фамилия владельца, вид животного, ID пациента, дата рождения владельца и источник данных.

Для поиска пациента в таблице можно воспользоваться следующими полями поиска: кличка животного, фамилия владельца и ID пациента.

В источнике данных „Архив изображений“ нельзя воспользоваться, как в стандартной версии программы, фильтрованием по полу пациента, а только по виду животного. Необходимо ввести в поле ввода вид животного, такой же, как и тот, что был указан при регистрации животного, затем нажать на кнопку „Поиск“ для обновления таблицы пациентов. При вводе или

Создать пациента

Идентификация пациента:	<input type="text"/>	Имя животного:	<input type="text"/>
Имя владельца:	<input type="text"/>	Вид животного:	<input type="text"/>
Фамилия владельца:	<input type="text"/>	Порода:	<input type="text"/>
Дата рождения владельца:	<input type="text" value="01.01.2000"/>	Цвет:	<input type="text"/>
Пол владельца:	<input type="text" value="мужской"/>	Дата рождения животного:	<input type="text" value="01.01.2000"/>
Адрес:	<input type="text"/>	Пол животного:	<input type="text" value="мужской"/>
Телефон:	<input type="text"/>	Родословная:	<input type="text"/>
Примечания:	<input type="text"/>	Tattoo/Chip:	<input type="text"/>

изменении данных пациентов осуществляется поиск так данных владельца как и данных животного. Может произойти, что некоторые поля в системе будут недоступными. Эти поля были выключены администратором, поскольку они не являются существенными в данном случае, но значительно упрощают работу с системой.

В ветеринарной версии **нельзя** манипулировать данными при отправке изображений в архив изображений.

19.2 Менеджмент задач

В таблице пациентов, ожидающих направлений, отображаются кличка животного (фамилия владельца), вид животного и, по мере возможности, количество полученных изображений. Фамилия владельца находится в скобках с кличкой животного. При детальном обзоре направления отображаются остальные данные животного.

Если не были введены изменения, то по умолчанию диалог создания направления не отображает изображения выбора органов. Ввод данных проводится полностью вручную в виде текста.

19.3 Распечатка

В процессе распечатки осуществляется соответствующая настройка стандартного заголовка. Всегда отображается ID пациента. Остальные отображаемые значения обусловлены полями данных активированных в процессе конфигурации. Это значит, что если администратор системы активировал пол животного, то пол также будет находиться на распечатке в строке стандартного заголовка.

19.4 CD пациента

Если при создании CD пациента была выбрана опция анонимизации, тогда сначала значения будут анонимизироваться, так же как и в нормальной версии программы (см. 9 CD пациента) и отображаться следующим образом:

- фамилия владельца: "AnonymOwner" или "AnonymOwner1", "AnonymOwner2" и т.д. в случае нескольких пациентов
- дата рождения владельца: 01.01.2000
- пол владельца: О (Прочее)
- кличка животного: "AnonymAnimal" или "AnonymAnimal1", "AnonymAnimal2"

Если программа просмотра должна быть объединена с CD пациента, тогда программа тоже получает настройки, которые являются характерными ветеринарной версии. Поэтому настройки программы аналогичны настройкам системы.

19.5 Прочее

Информация, передающаяся в подсказках – тултипах (полях с краткой информацией, которые появляются после наведения мышью без щелчка в течение короткого промежутка времени), содержат данные владельца и животного. Данные тултипы присутствуют в древе просмотра выбранных пациентов (слева) и в обзорах в качестве древа обследований. Кроме того, древо просмотра отображает кличку животного и в скобках фамилию владельца.

В нижнем колонтитуле отображаются кличка животного и в скобках фамилия владельца.

20 Подсоединение LOCALITE OrthoPlaner



Подсоединение возможно только после активации соответствующего модуля.

digipaxX совместимо с программным обеспечением LOCALITE OrthoPlaner. Для передачи изображения в LOCALITE необходимо его открыть и нажать на соответствующую кнопку, расположенную в верхнем правом углу панели инструментов. Кнопка является доступной только в том случае, если был активирован соответствующий модуль.



После завершения переработки необходимо отправить изображение в архив и закрыть LOCALITE. Выполнив данное действие, digipaxX обновляет данные пациента и новое изображение становится доступным.

21 Прочее

21.1 Таблицы

В системе можно настроить большое количество таблиц. Перетаскивая заголовок колонки, ее можно изменить. Щелкая правой кнопкой мыши по элементу в заголовке, можно в появляющемся контекстном меню показывать и скрывать колонки.

21.2 Тултипы

Большая часть кнопок, полей данных или конфигураций содержит так называемые „тултипы“ (подсказки). После наведения на поле мышью без щелчка по нему, в течение короткого промежутка времени на месте курсора мыши появится окно помощи. Тултипы содержат информацию относительно данного поля – действие, запускающееся ним или значение в случае конфигурационных возможностей.

21.3 Лицензия

Программное обеспечение защищено лицензией. Система запускается администратором. Администратор заказывает файл с лицензией от изготовителя и загружает его в систему.

Продукт: digipaX

Изготовитель: digipaX GmbH
Bitterfelder Str. 12
04129 Leipzig
GERMANY

Данный продукт имеет знак CE 0494

Последняя правка руководства: 27.08.2012