



Версия 1.4.20

Руководство пользователя

Содержание

1 Общее	8
2 Символы и иллюстрации	8
3 Меры безопасности	9
3.1 Программное обеспечение	9
3.2 Правила эксплуатации	9
3.3 Профиль пользователя	9
3.4 Оборудование	9
3.5 Резервирование	9
3.6 Аварийное завершение системы	10
3.7 Системные сообщения	10
3.8 Визуальная проверка	10
3.9 Хранение данных	10
3.10 Проверки	10
3.11 Срок службы	11
4 Установка и техобслуживание	11
4.1 Установка	11
4.2 Техобслуживание	11
4.3 Чистка	11
4.4 Обновление программного обеспечения	11
4.5 Критические программные патчи для безопасности	11
4.6 Выход из программы	11
5 Запуск программного обеспечения	12
6 Вид экрана	13
6.1 Кнопка Start / заголовок (дополнительно)	14
6.2 Область просмотра изображения	15
6.3 Основание	15
6.4 Панели инструментов (дополнительно)	15
6.5 Полоса разделения окна	15
7 Просмотр изображений / вьювер	15
7.1 Выбор изображения	16
7.2 Отображение изображения	17
7.2.1 Действия мышью	17
7.2.2 Изменение масштаба	18
7.2.3 Оверлей (наложение)	19
7.2.4 Разделение изображений	19
7.2.5 Синхронизация	20
7.2.6 Проекции	21
7.2.7 Другие функции	22
7.2.8 Пометка изображений	25
7.2.9 Защита изображений (блокировка)	25
7.2.10 Контекстное меню	25

7.3 Манипуляции с изображениями	26
7.3.1 Преобразования (поворот, отражение, инвертирование)	27
7.3.2 Управление окнами (Windowing)	27
7.3.3 Фильтры	28
7.3.4 Аннотации и измерения	32
7.3.5 Диафрагма / Display Shutter.....	35
7.3.6 Просмотр ряды изображений (кино-петля)	36
7.3.7 Протоколы изображения (Hanging Protocols).....	37
7.4 Линии среза	38
7.5 Гистограмма	38
7.6 Easy Report	39
8 Менеджмент пациентов	41
8.1 Данные пациентов	41
8.2 Источники данных	42
8.2.1 Архив изображений	42
8.2.2 Одиночные файлы	44
8.2.3 CD пациента (DICOMDIR)	45
8.3 Запись нового пациента / изменение данных пациента.....	45
8.3.1 Сохранение данных	46
8.3.2 Редактирование данных пациентов	46
8.4 Удаление пациента.....	48
8.5 Отправка изображений пациента в архив изображений	49
8.6 Управление данными пациентов перед отправкой в архив	50
8.7 Список обследований, серий и изображений	50
8.8 Выход из менеджмента пациентов	50
8.9 Функция удаление.....	51
8.9.1 Удаление изображений	51
8.9.2 Изменение присвоения изображений	52
9 Импорт данных	53
9.1 Общее	53
9.2 Диалоговое окно импорта	54
9.3 Сканирование документов	55
10 Экспорт	56
10.1 Выбор	56
10.2 Настройки	56
10.2.1 Название файла для экспорта изображений	56
10.2.2 Формат для экспорта снимков	57
10.2.3 Экспорт в виде файла	58
10.2.4 Экспорт в виде email.....	58
11 Печать	59
11.1 Выбор	59
11.2 Просмотр изображений.....	59
11.3 Макет страницы	59
11.4 Версия для печати.....	59
11.5 Заголовок.....	60

11.6 Колонтитул	60
11.7 Расширенные настройки	60
11.7.1 Оверлей.....	60
11.7.2 Другие опции	61
11.8 Печать	61
12 CD пациента	61
12.1 Общее	61
12.2 Выбор изображений.....	62
12.3 Дисководы	62
12.4 Опции	63
12.5 Запись/копирование данных	64
12.6 Создание CD пациента с помощью дубликатора	64
12.6.1 EPSON PP-100 / PP-100N	64
12.6.2 PRIMERA Disc Publisher.....	66
12.7 Функция «Специальное»	68
13 Печать этикеток	69
13.1 Общее	69
13.2 Принтеры и носители информации	69
13.3 Выбор шаблона и распечатка	70
13.4 Настройки принтера.....	71
13.5 Создание шаблона	73
13.5.1 Вставление, редактирование и удаление элементов	73
13.5.2 Редактирование текстовых полей	75
13.6 Редактирование, копирование и удаление шаблонов	76
13.7 Требования относительно данных на носителях информации.....	77
14 Управление задачами	78
14.1 Статус беременности.....	78
14.2 Отображение задачи и обновление списка задач.....	79
14.3 Фильтрация списка задач	79
14.4 Создание задачи.....	80
14.5 Управление таблицей органов и коды процедур.....	82
14.6 Удаление задачи.....	83
14.7 Запись в рентгеновский журнал	83
14.7.1 Данные из списка задач.....	83
14.7.2 Данные из полученных изображений.....	83
14.7.3 Без передачи данных.....	84
14.8 Отображение полученных изображений.....	84
14.9 Выход из менеджмента задач	84
15 Рентгеновский журнал	84
15.1 Новая запись	84
15.2 Просмотр записей в рентгеновском журнале	85
15.2.1 Фильтрация	85
15.3 Экспорт	86
15.4 Очистка (удаление)	86
16 Сшивка изображений (stitching)	86

16.1 Общее	86
16.2 Аквизиция радиограмм	86
16.3 Обслуживание опции stitching	87
16.4 Автоматическая сшивка изображений	88
16.5 Мануальная сшивка изображений	88
16.6 Сохранение всей радиограммы	88
17 Отправление изображений	89
18 Аквизиция изображений	90
18.1 Общее	90
18.2 Ход аквизиции изображений с использованием управления задачами	91
18.2.1 Планирование задач	92
18.3 Ход аквизиции изображения без управления задачами	93
18.4 Аквизиция рентгеновских изображений	94
18.4.1 Общее	94
18.4.2 Специальные функции устройств и правила безопасности	94
18.4.3 Ход аквизиции рентгеновских изображений	99
18.4.4 Обозначение	101
18.4.5 Обрезка изображения	102
18.4.6 Трансформация изображений / оконный режим/ фильтры / диафрагма	103
18.4.7 Отклонение изображения	103
18.4.8 Дополнительные устройства	103
18.4.9 Резервные копии	104
18.4.10 Рентгеновский журнал	104
18.4.11 Показатель дозы экспозиции согласно EN 62494-1	105
18.4.12 Затушевывание полосок сетки	106
18.4.13 Проблемы и решения	107
18.5 Аквизиция изображений МРТ	108
18.5.1 Общее	108
18.5.2 Специальные функции устройств и рекомендации по безопасности	108
18.5.3 Ход аквизиции изображений МРТ	109
18.5.4 Улучшение качества изображения (фильтры МРТ)	110
18.5.5 Обозначение	112
18.5.6 Обрезка изображений	112
18.5.7 Обслуживание окон	113
18.5.8 Непринятие изображений	113
18.5.9 Импортирование резервной копии	113
18.5.10 Решение проблем	114
18.6 Frame grabber / аквизиция серии изображений	115
18.6.1 Общее	115
18.6.2 Системные требования для установки видеопроцессора frame grabber	116
18.6.3 Конфигурация frame grabber в digipaX	116
18.6.4 Элементы обслуживаемые видеопроцессором frame grabber	117
18.6.5 Аквизиция с использованием видеопроцессора frame grabber	119
18.6.6 Аквизиция с помощью модуля аквизиции серии изображений	120
18.6.7 Обработка и сохранение полученных изображений	120

18.6.8	Импортирование резервных копий	121
18.6.9	Проблемы и решения.....	121
18.7	Аквизиция изображений из томосинтеза.....	122
18.7.1	Общее	122
18.7.2	Специальные функции устройств и правила безопасности.....	122
18.7.3	Ход аквизиции изображений из томосинтеза	123
18.7.4	Выбор интересных изображений.....	124
18.7.5	Обозначение	125
18.7.6	Обрезка изображения	125
18.7.7	Трансформация изображений / оконный режим/ фильтры / диафрагма	126
18.7.8	Отклонение изображения	127
18.7.9	Дополнительные устройства	127
18.7.10	Резервные копии.....	127
18.7.11	Проблемы и решения.....	128
19	Конфигурация	129
20	Выход из программы	137
20.1	Выход из программы	137
20.2	Выключение оборудования.....	137
21	Интерфейс GDT	138
22	Ветеринарная версия	140
22.1	Управление пациентами.....	140
22.2	Управление задачами	141
22.3	Специальные измерения (ветеринарные)	141
22.4	Распечатка	143
22.5	CD пациента	143
22.6	Экспорт	143
22.7	Прочее	143
23	Подсоединение LOCALITE OrthoPlaner	144
24	Прочее.....	144
24.1	Таблицы	144
24.2	Тултипы	144
24.3	Завершение работы с приложением	144
24.4	Лицензия.....	145

1 Общее

Програмное обеспечение digipaX предназначается менеджменту, отображанию и экспорту изображений DICOM различных медицинских исследований, например рентгеновские снимки (компьютерная рентгенография, цифровая рентгенография) или снимки КТ). Кроме того, оно предлагает широкий спектр полезных инструментов для повседневной работы с медицинскими изображениями.

Все технологии и технические процедуры (структура изображения, передача информации, хранение данных и т.д.) выполняются в соответствии со стандартом DICOM 3.

Система может быть использована для одного рабочего места с архивом изображений (PACS) или для совместной работы с другими системами и множествами архивов. Она может быть легко интегрирована с системами других производителей.

Кроме того, можно как обмениваться задачами при использовании рабочего списка (Worklist), так и пересылать данные, а даже указания, поступающие непосредственно из системы менеджмента в клинике.

2 Символы и иллюстрации

Символ	Значение
	Заметка
	Подсказка

Все иллюстрации (скриншоты) отображают окна программного обеспечения digipaX в классическом стиле (для лучшего понимания и восприятия в документе). В программе обычно устанавливается черный стиль, который подходит для просмотра медицинских изображений.

3 Меры безопасности

3.1 Программное обеспечение

Запрещается вносить изменения в данном программном обеспечении без ведома и согласия изготовителя.

3.2 Правила эксплуатации

Продукт запроектирован для применения на персональных компьютерах в жилых и офисных помещениях. Эксплуатируемое оборудование должно быть приспособлено к условиям окружающей среды. Пользователь персонального компьютера должен убедиться в соответствии оборудования требованиям, действующим в месте установки.

3.3 Профиль пользователя

Продукт предназначен для использования медперсоналом. Лица, занимающиеся его обслуживанием должны иметь следующие квалификации:

- требуемые профессиональные знания,
- пройденная подготовка в области применения рентгеновских данных,
- умение обращаться с компьютером,
- знание одного из языков системы.

3.4 Оборудование

Эксплуатируемое оборудование должно иметь знак CE и соответствовать требованиям Директивы электромагнитической совместимости и Директивы низкого напряжения. Необходимо соблюдать ограничения по эксплуатации, а также правила техобслуживания и эксплуатации установленного оборудования в соответствии с, полученной от изготовителя, информацией и стандартом EN 60950-1.

Убедитесь, что оборудование установлено не ближе чем в 1,5 метрах от пациента, что бы нельзя было одновременно прикоснуться к пациенту и аппарату. Кроме того, обратите внимание на безопасное расположение оборудования. Мониторы должны стоять на столе устойчиво, что бы их нельзя было случайно перевернуть. Кабели должны быть проложены так, что бы о них нельзя было запнуться.

Оборудование должно устанавливаться таким образом, чтобы в случае возникновения аварийной ситуации его можно было легко и быстро отключить от источника питания. В случае необходимости можно применить альтернативный метод отключения, применяя бытовой удлинитель с выключателем, к которому, однако, должен быть обеспечен хороший доступ.

Клавиатуру, мышь и монитор необходимо разместить на рабочем месте таким образом, чтобы полностью исключить их возможное физическое влияние на окружающую среду.

3.5 Резервирование

Пользователь системы отвечает за применение резервных (двойных) защит системы, чтобы авария одной из защит не несла за собой необоснованный риск.

3.6 Аварийное завершение системы



Следует предохранять свои системы от аварий, вызванных отсутствием питания, во избежание потери изображений во время получения данных из внешних устройств, исключая тем самым угрозу для пациента. Следует также помнить о защите серверов и компонентов сети (например, сетевых переключателей LAN, беспроводных точек доступа).

Необходимо спросить администратора о рекомендуемых средствах защиты, пригодных для Вашей системы.

Если бы, однако, в случае отсутствия питания произошла авария или зависание системы, следует действовать в соответствии с указаниями кас. восстановления несохраненных изображений (18.4.13, 18.5.10, 18.6.9).

3.7 Системные сообщения

О сообщениях оборудования (писк) или сообщениях программного обеспечения (ошибки операционной системы, драйверов или самого программного обеспечения), нужно немедленно сообщать продавцу или системному администратору.

3.8 Визуальная проверка

От правильной работы монитора зависит качество диагноза. Нужно ежедневно проверять правильность настройки монитора с помощью специальной программы или тестового шаблона SMPTE. Если выявлено, что монитор не соответствует спецификации – технический персонал должен его настроить или заменить. За деталями обращайтесь к системному администратору.

3.9 Хранение данных



Каждую неделю нужно делать резервные копии всех новых изображений на CD/DVD или другом подходящем носителе. Диски с резервными копиями должны храниться отдельно от компьютера на котором находится архив изображений (сервер). Носители следует хранить так, чтобы данные не были уничтожены через воздействию света или электромагнитного излучения. При выборе носителей нужно иметь в виду, что данные должны храниться в течение многих (10 и более) лет. Пожалуйста, обратитесь к информации предоставленной изготовителем носителя. Системный администратор проконсультирует по вопросам практической и эффективной стратегии обеспечения данных и их долгосрочного архивирования.

3.10 Проверки

Должны проводиться ежегодные проверки безопасности работы системы. Это связано с осмотром используемого технического оборудования (напр. рентгеновских аппаратов).

3.11 Срок службы

Срок службы этого продукта – 1 год. По истечении этого срока рекомендуется обновление программного обеспечения до текущего уровня технических знаний. Программное обеспечение может использоваться и без обновления в текущей версии. Можно будет по-прежнему получать, отображать и обрабатывать изображения.

4 Установка и техобслуживание

4.1 Установка

Инструкция по установке находится в техническом описании (руководстве администратора). Установка и техобслуживание может проводиться только уполномоченными изготовителем лицами. Данные лица могут быть направлены изготовителем с целью проведения вышеупомянутых действий.

4.2 Техобслуживание

Компьютерная техника, для обслуживания программного обеспечения должна проходить техобслуживание и осмотры согласно рекомендациям производителя и юридическим предписаниям.

4.3 Чистка

Если администратор/попечитель не решит иначе, тогда установленное компьютерное оборудование можно чистить общедоступными дезинфицирующими средствами.

4.4 Обновление программного обеспечения

Клиент может требовать обновления программного обеспечения в установленных циклах обновления. Обновление программного обеспечения могут производить только уполномоченные производителем лица. Однако клиент не имеет автоматического права требовать улучшения программного обеспечения, т.е. установки его новых версий (имеющих новые функции).

Циклы обновления продлеваются автоматически, если клиент не откажется от обновления.

4.5 Критические программные патчи для безопасности

Клиент обязан установить новые версии программы, если это связано с устранением ошибок важных для технической безопасности.

4.6 Выход из программы

Выход из программы и выключение системы – смотри раздел 20 Выход из программы. Администратор системы может полностью удалить программное обеспечение. После удаления программное обеспечение не может больше использоваться.

5 Запуск программного обеспечения

Перед началом использования программного обеспечения необходимо запустить компьютер, на котором установлен лицензионный файл, а также обеспечить готовность к работе сетевых соединений. Соответствующую информацию на данную тему Вы можете получить у администратора системы digipaX.

Включите компьютер и подождите до полного запуска системы Windows. Если в поликлинике применяется один или большее количество так называемых сетевых переключателей, то необходимо их предварительно включить. Соответствующую информацию на данную тему Вы также можете получить у администратора системы.

Затем сначала включите компьютер на рабочем месте и подождите до полного запуска системы Windows. Осуществите вход в компьютер (если вход не автоматизирован).


Приложение можно запустить путем нажатия на иконку  , расположенную на рабочем столе или через программное меню. Если приложение запустилось автоматически одновременно с запуском системы Windows, соответствующая иконка находится в нижнем правом углу в так называемой области уведомлений панели задач.

После подключения программного обеспечения для менеджмента поликлиники приложение может также автоматически запускаться или приводиться в действие данным программным обеспечением. Данный интерфейс поддерживает коммуникационный стандарт GDT или HL7. Конфигурация соединения может осуществляться администратором системы.

Если приложение зависнет, тогда необходимо осуществить его перезапуск путем двойного клика по какому-либо из вышеприведенных соединений или через систему менеджмента поликлиники. Если система зависнет в процессе аквизиции изображений и изображения не были сохранены, тогда можно их восстановить благодаря автоматическому резервному копированию, а затем сохранить. Подробнее об этом в разделах 18.4.9, 18.5.9 или же 18.6.8.


6 Вид экрана

Вид и разделение экрана

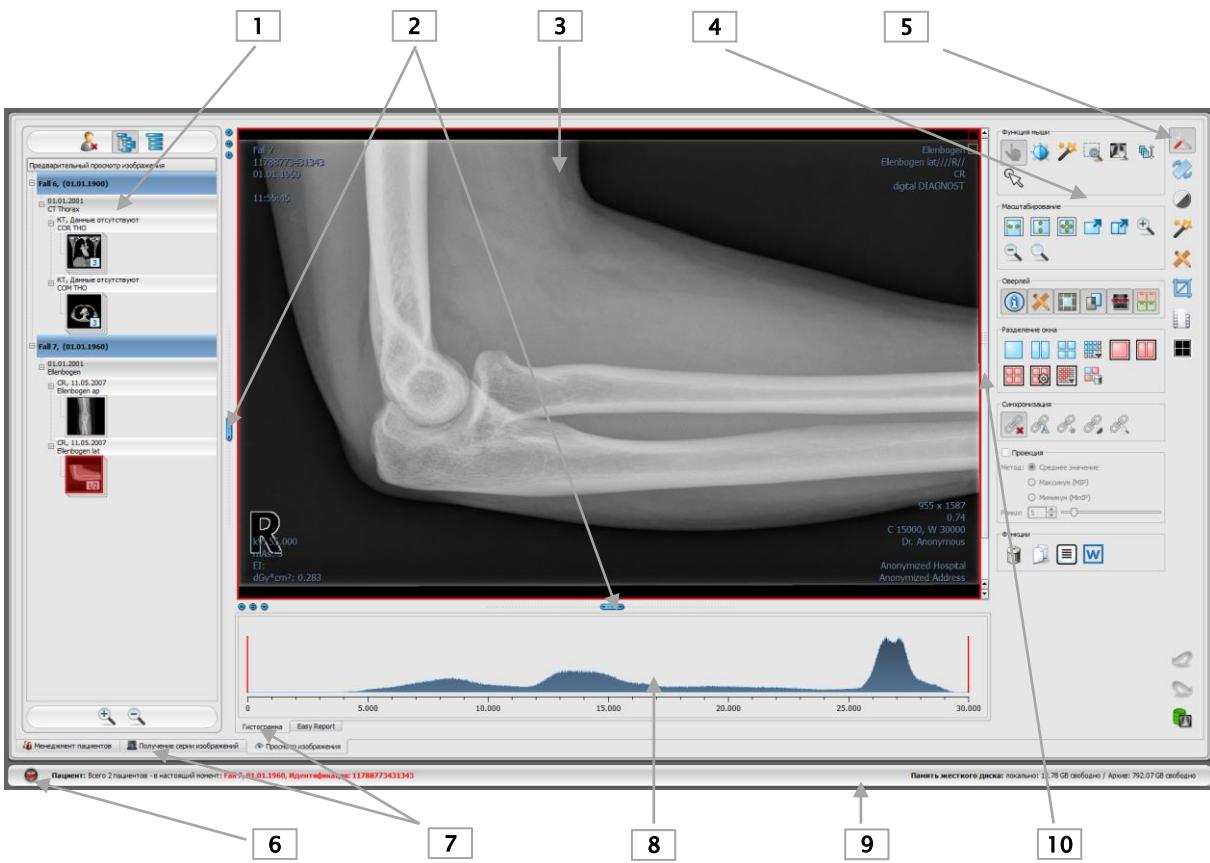

- 1 – Эскизы: показывают в предварительном просмотре все изображения выбранного пациента (древовидная структура с обследованиями и сериями)
- 2 – Подвижные полосы: для изменения разделения изображения или скрытия окон
- 3 – Область просмотра изображения: показывает одно изображение или несколько (рядом или одно под другим)
- 4 – Инструменты с функциями для обработки изображений (разделены на разные панели инструментов)
- 5 – Выбор разных панелей инструментов
- 6 – Кнопка Start: запуск разных компонентов приложения, а также завершение работы или минимизация приложения
- 7 – Различные компоненты : доступность компонентов зависит от приобретенного пакета программного обеспечения
- 8 – Гистограмма активного изображения
- 9 – Основание с информацией об отдельных пациентах и о свободном месте на жестком диске
- 10 – Лента прокрутки отдельных изображений серии

Для того чтобы иметь доступ к самым важным компонентам приложения и инструментам вызуера путем одного щелчка, можно дополнительно активировать заголовок и панель инструментов. С уровня заголовка можно напрямую запускать компоненты, а на панели инструментов находятся разные инструменты (дальнейшее об этом см. разделы 6.1 и 6.4).

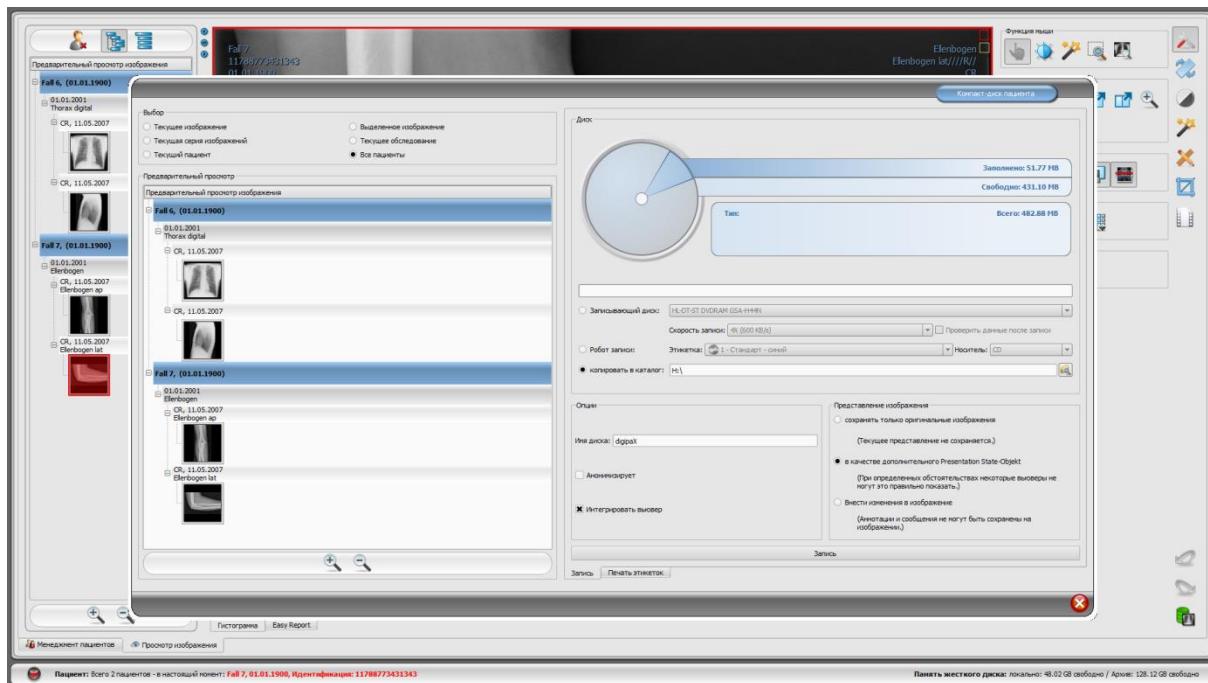

Пример вида экрана после активации компонента – здесь показано большое диалоговое окно для создания CD пациента

Менеджмент пациентов можно также переставлять в виде отдельного компонента, так же как это представлено на вышеуказанном диалоговом окне. Для этого ознакомьтесь с разделом 8.

6.1 Кнопка Start / заголовок (дополнительно)



Кнопка Start в нижнем левом углу предназначена для вызова меню (похожего на стартовое меню в системе Windows), благодаря которому можно запускать компоненты приложения, а также завершать работу или минимизировать приложение.

К компонентам причислены:

- менеджмент пациентов (только если закладка менеджмент пациентов неактивна, см. раздел 19 Интерфейс пользователя)
- импорт
- печать
- CD пациента
- менеджмент задач
- рентгеновский журнал
- конфигурация

Заголовок можно активировать по желанию в конфигурации (раздел 19) интерфейса пользователя. Заголовок отображается на самом верху монитора. В заголовке повторены еще раз все функции стартового меню, которые можно вызывать путем одного щелчка.

6.2 Область просмотра изображения

На панели слева выводятся эскизы изображений, в средней части – представлены выбранные изображения в большом формате, на панели справа – доступные функции для обработки изображений. Кроме того, под областью просмотра находится гистограмма для текущего изображения.

6.3 Основание

В основании показана информация о пациенте и количество свободного места на жестком диске. При выборе нескольких пациентов показано их количество и информация об активном пациенте, чей снимок отображается в данный момент.

Жесткие диски, для которых отображается свободное место, могут быть выбраны в конфигурации (максимум – 3 диска). Если любой из дисков является недоступным или превышен его допустимый объем, будет показано предупреждающее сообщение. Если система приближается к критическому значению, сообщение будет показано красным жирным шрифтом, в других же случаях он стандартный черный.

Основание отображается во всех режимах программы.

6.4 Панели инструментов (дополнительно)

На панелях инструментов доступны различные функции. Например, функции для мыши, настройки масштабирования и оверлея, разделения изображения.

Любую из панелей инструментов можно по отдельности сворачивать и разворачивать.

Панель инструментов можно активировать по желанию в конфигурации (раздел 19) интерфейса пользователя. Панель инструментов отображается над вышерем изображений и повторяет еще раз все функции панели инструментов, которые можно вызвать путем одного щелчка.

6.5 Полоса разделения окна

Между просмотром миниатюр (слева) и областью изображения, а также между нижней частью вышера и областью изображения находятся настраиваемые разделительные полосы. Разделение изображения делается при помощи перетаскивания полос влево, вправо, вверх и вниз. Этим способом можно также и закрыть окна.



Используя кнопки на полосе слева, части изображения перемещаются вверх или вниз (влево или вправо), а также могут быть закрыты и восстановлены при нажатии на среднюю кнопку. После закрытия программы, все изменения сохраняются.

7 Просмотр изображений / вышер

Компонент просмотра изображений охватывает экран выбора, демонстрацию изображения и обработку изображения.

Поддерживается просмотр, как полутоновых изображений, так и цветных. Они могут быть представлены без сжатия, в RLE- или JPEG-сжатии.



Верху сжатых изображений (методом сжатия с потерями качества) находится соответствующая заметка. Эти изображения не подходят диагностике, потому что вследствие сжатия могла пропасть важная информация со снимка.


Информация о полутоночных снимках, настройки окна, поворот и аннотации хранятся в настраиваемом каталоге Grayscale Softcopy Presentation State (файл DICOM). Настройки для текущего изображения сохраняются при последующем его открытии.

7.1 Выбор изображения

На панели слева находится функция выбора изображения. Ширина панели настраивается полосой разделения. Полностью скрыть панель можно так же при помощи полосы.

Вид панели может быть DICOM древовидным или списком.

На DICOM древовидной структуре представлены обследования выбранного пациента. Каждый новый пациент создается на один узел выше. Узлы обследований можно закрывать и открывать, как и подкатегории содержащихся в них серий. Внутри узлов серии изображаются эскизами снимков. Серии состоящие из большого количества снимков (multi frame) изображаются в виде отдельных миниатюр. Серии состоящие из большого количества снимков – это серии изображений сжатые в одном файле DICOM. В правом верхнем углу миниатюры указывается номер текущего снимка, а также количество снимков.

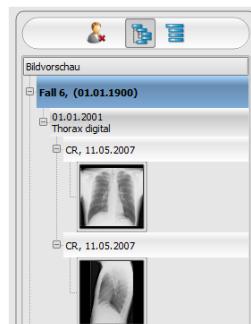

При использовании списка, информация о каждом выбранном пациенте отображается в вышестоящем узле. Список всех доступных изображений для данного пациента расположен под узлом (с подписью и эскизом), независимо от их принадлежности к сериям и обследованиям. Критерий сортировки, направление сортировки и текст, который может быть отображен в узле, устанавливаются в конфигурации (по умолчанию: дата и время снимка).

Эскизы помечаются красной рамкой, даже если данное изображение отображается в большом размере.

Остановив указатель мыши над узлом (пациентом, обследованием, серии или снимке), появится всплывающее окно с информацией.

Размер эскизов изменяется при помощи переключателей «плюс» и «минус» под структурой дерева. Установленные размеры сохраняются и используется при следующем запуске программы.

Двойным щелчком по эскизу снимок загружается в свободное окно просмотра. Разделяя область отображения, например 2x2 изображения, появляется возможность работать с большим количеством снимков. Если свободного окна нет, изображение открывается поверх текущего.

При помощи «перетаскивания» (функция Drag & Drop) эскизов в окно просмотра появляется возможность выбрать любую комбинацию снимков. Внутри самого окна, снимки можно менять местами тем же способом, «перетаскиванием».

Двойным щелчком на узел обследования снимки этого обследования загружаются автоматически и соответственно модальности различных окон просмотра. Разделение окон определяется в конфигурации (смотри 19 Конфигурация).

Выбор пациентов может быть сброшен кнопкой «Очистить выбор пациента» над древом предварительного просмотра.

7.2 Отображение изображения

В выовере отображаются изображения. Выовер может быть разделен на большое количество окон, состоящих из одиночных изображений. Во выовере могут отображаться бок о бок несколько изображений. Одновременно можно отображать от 1 до 36 изображений.

Возможным является дальнейшее разделение этих частичных окон, чтобы представить отдельные изображения серии в этой сетке.

В распоряжении выовера – разнообразные функции отображения изображений.




Данные функции расположены на панели инструментов, которая размещена в верхнем правом углу. Функции дальнейше описаны в дальнейших разделах.

Некоторый из представленных функций по умолчанию скрыты. Щелкнув правой клавишей мыши по иконе функции можно вызвать контекстное меню. Именно в нем можно скрывать и открывать разные функции. Таким же образом можно упорядочить расположение кнопок, отключая функции, в которых нет необходимости.

Можно также отображать панель инструментов, прикрепленную к верху выовера. Для этого необходимо ознакомиться с разделом посвященным интерфейсу пользователя – 19 Конфигурация.

7.2.1 Действия мышью

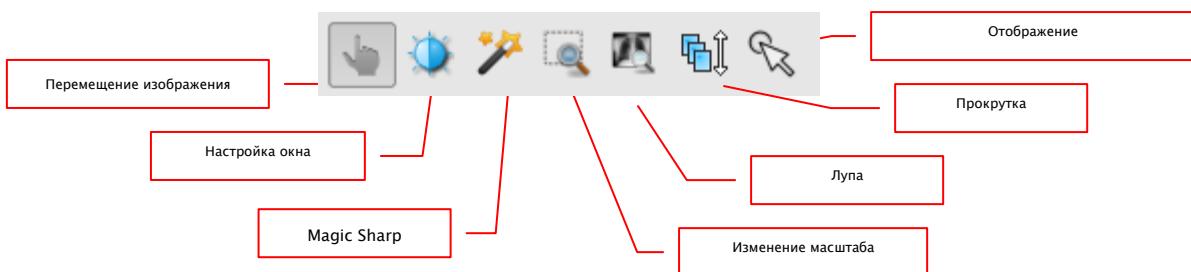

На этой панели инструментов можно выбрать действие для левой кнопки мыши:

- **перемещение** (если размер снимка больше, чем окно отображения) – функция по умолчанию;
 - **настройка окна** (яркость/контраст):
 - ➔ горизонтальное перемещение мыши: изменение центра окна;
 - ➔ вертикальное перемещение мыши: изменение ширины окна.
- Движения могут быть изменены в конфигурации (категория «Прочее»);
- **фильтр Magic Sharp** (размер/резкость)
 - ➔ движение мыши по горизонтали: изменение размера
 - ➔ движение мыши по вертикали: изменение резкости

Подробное описание действия этих фильтров можно прочитать в дальнейшей части данного руководства в разделе 7.3.3.1 Magic Sharp

- **изменение масштаба**
- **лупа**
- **прокрутка**
 - вертикальное движение мышью: прокручивание изображений в сериях
- **отображение (курсор для отображения на мониторе)**


Данные функции могут быть активированы также при нажатии комбинаций:

- Alt + левая кнопка мыши: настройка окна;
- Alt + Shift + левая кнопка мыши: перетаскивание и изменение масштаба;
- Alt + правая кнопка мыши: лупа.
- Shift + правая кнопка мыши: прокрутка

Другие действия мышью:

- Shift + левая кнопка мыши: пометка изображения;
- Ctrl + левая кнопка мыши: перетаскивание снимков между окнами изображений;
- правая кнопка мыши: увеличение/уменьшение (при вертикальном движении мышью);
- средняя кнопка мыши (или нажатие колеса прокрутки): многооконная работа;
- прокрутка колеса: следующее или предыдущее изображение из серии снимков, обследования или пациента (в зависимости от настройки), насколько имеются;
- Ctrl + Shift + левая кнопка мыши: фильтр Magic Sharp
- левая + правая кнопка мыши: фильтр Magic Sharp

7.2.2 Изменение масштаба

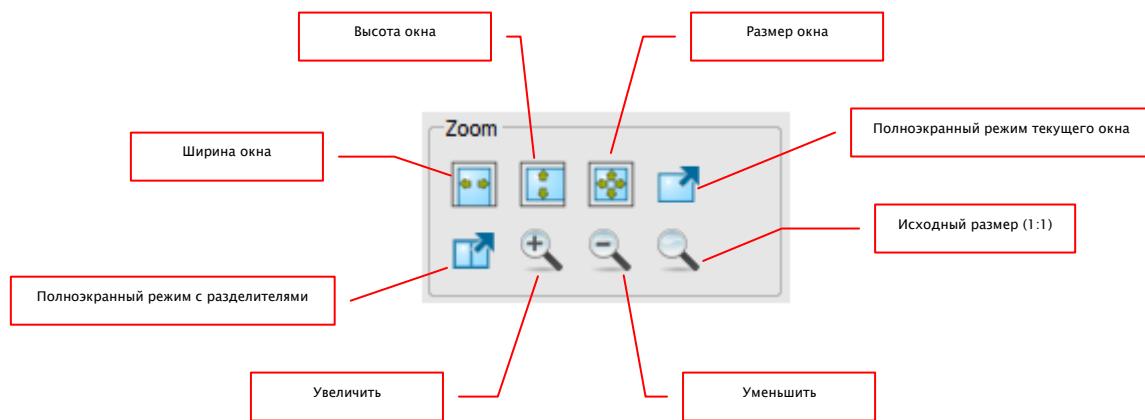


Изменение масштаба изображений относится только к текущему активному снимку. Изображение масштабируется по размеру окна и всегда отображается целиком.

При перетаскивании изображений из одного окна в другое, масштаб снимков сохраняется.

Одиночное нажатие клавиши Enter или кнопки «Полноэкранный режим текущего окна» текущее изображение масштабируется по размеру экрана. Используя клавиши Shift + Enter или кнопку «Полноэкранный режим с разделителями» все отображающиеся окна

(созданные разделителями) масштабируются по размеру экрана. Выйти из полноэкранного режима можно нажатием клавиши Esc.

7.2.3 Оверлей (наложение)

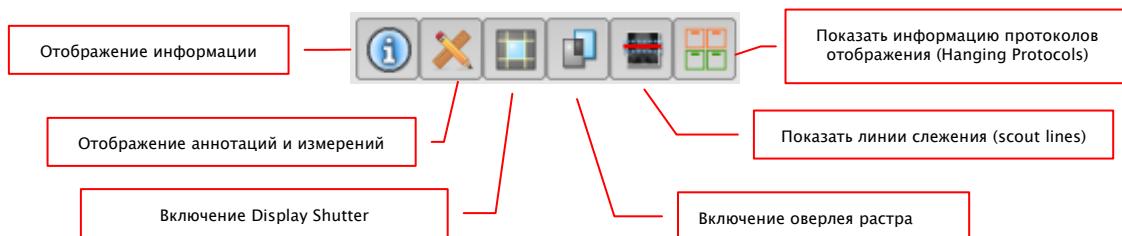


Области оверлея:

- информация – по углам изображения;
- аннотации и измерения – на измеренных участках;
- Display Shutter – затемнение всего, что находится за границей выделенной области;
- оверлей растра – наложение изображений;
- линии слежения – представление отдельной части снимка КТ или МРТ,
- информация протоколов изображения.


Все области могут быть показаны или спрятаны нажатием кнопок на панели инструментов.

Инструмент Display Shutter включается автоматически, если загружается изображение с выделенной областью из предыдущего просмотра.

7.2.4 Разделение изображений

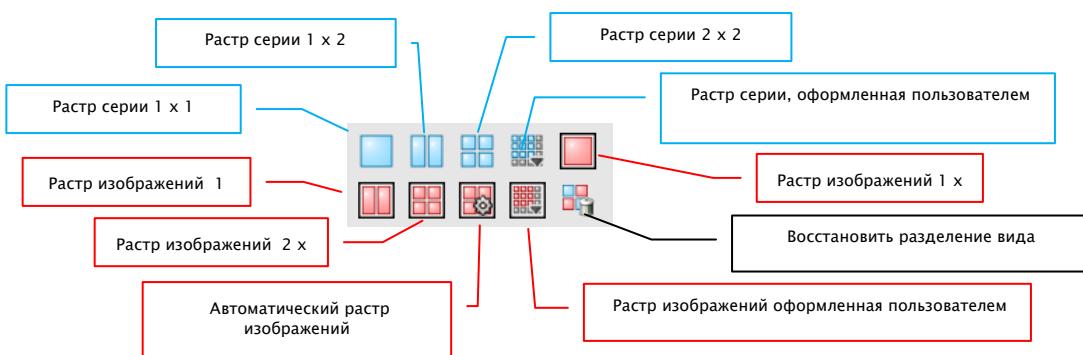

Окно изображений можно разделить на разное количество дальнейших окон, чтобы разместить отдельные серии данного обследования в одном растре. Эти окна можно также поделить дальше, чтобы представить индивидуальные изображения серии в растре.

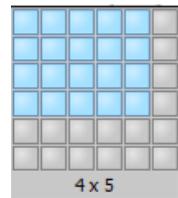


Для представления серии данного обследования в растре необходимо использовать синюю кнопку. Можно выбрать раstry 1x1, 1x2, 2x2, максимальное допустимое значение раstra для пользователей составляет 6x6. Для дальнейшего разделения окон необходимо нажать данное окно и использовать красную кнопку.

При использовании кнопки «Автоматический растр изображений» отдельные изображения серии отдельно размещаются в актуальном окне. Используя кнопку «Восстановить разделение изображений» можно восстановить главное окно. Опционально все эти кнопки также находятся на правой кнопке мышки. Отдельные изображения серии представлены в растре, начиная от первого изображения серии по очереди в рядах. В случае раstra 2x2, то есть в левом верхнем окне, представлено первое изображение, возле него второе, в нижнем левом окне третье и в нижнем правом окне четвертое. Если мы пролистаем изображения колесом мышки в рамках представленной серии, они будут меняться синхронно в соответствии с направлением пролистывания при этом разделе.

7.2.5 Синхронизация

Синхронизация (синхронная прокрутка) дает возможность синхронного прокручивания двух серий изображений одновременно, например, серий изображений томографии и магнитного резонанса, принадлежащих одному и тому же пациенту, или серий изображений более раннего или более позднего обследования. Для того чтобы синхронная прокрутка была активна, необходимо отобразить обе серии изображений друг возле друга. Синхронизация допускает следующие функции:

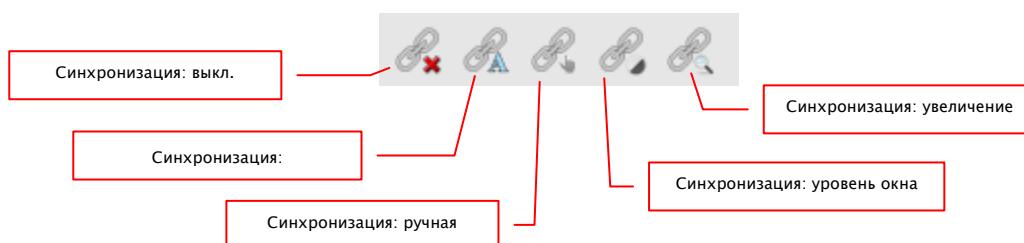

выкл.: синхронизация выключена

автоматическая: автоматически синхронизированное прокручивание серий изображений одного обследования (FrameOfReferenceUID).

Для того чтобы серии изображений автоматически прокручивались синхронизированным способом, следует открыть требуемые серии изображений в двух окнах друг возле друга и нажать кнопку «Синхронизация: автоматическая».

ручная: вручную синхронизированное прокручивание серий изображений одного обследования (FrameOfReferenceUID) или серий с одинаковым описанием (SeriesDescription), например, в случае серий изображений более раннего и более позднего обследования.

Для того чтобы вручную прокручивать серии изображений синхронизированным способом, следует открыть требуемые серии изображений в двух окнах друг возле друга и нажать кнопку «Синхронизация: ручная». Актуальное изображение или актуальная рамка являются исходным пунктом для синхронизированной

прокрутки, что дает возможность выравнивать разницы для начала прокручивания серий.

уровень окна: для серий изображений одного и того же обследования (FrameOfReferenceUID) или серий изображений с одинаковым описанием (Series-Description) сразу устанавливаются настройки для уровня окна.

Для того чтобы воспользоваться этой функцией при синхронном прокручивании серий изображений следует открыть требуемые серии, выбрать соответствующий метод, нажать кнопку «Синхронизация: уровень окна», нажать на изображение и установить требуемый уровень окна.


увеличение: для серий изображений одного и того же обследования (FrameOfReferenceUID) или серий изображений с одинаковым описанием (Series-Description) сразу устанавливаются настройки для увеличения и перемещения.

Для того чтобы воспользоваться этой функцией при синхронном прокручивании серий изображений следует открыть требуемые серии, выбрать соответствующий метод, нажать кнопку «Синхронизация: увеличение», нажать на изображение и установить требуемое увеличение и положение.

7.2.6 Проекции

В разных техниках проекции анализируется интенсивность тех самых образных пунктов в следующих друг за другом изображениях, и на этом основании подсчитывается и отображается реконструкция. Например, когда у нас есть пять изображений, для каждого образного пункта, на основе пяти значений, определяется интенсивность реконструкции.

- Средняя величина: определяется средняя величина
- Максимум (MIP): определяется максимальная величина
- Минимум (MinIP): определяется минимальная величина

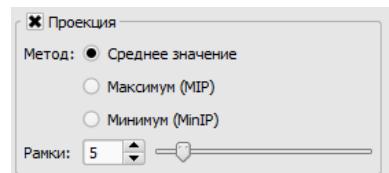

Рамки: число изображений, которые подлежат анализу

7.2.7 Другие функции



- Дублировать изображение: создание копии выбранного изображения
 - Функция удаления: см. раздел 8.9
 - Копировать в буфер обмена: копирование актуального изображения в буфер обмена
 - Показать информацию в заглавии: отображение заглавия DICOM актуального изображения
 - Рапорт в виде MS-Word: см. раздел 7.2.7.3
 - LOCALITE OrthoPlaner: см. раздел 23

7.2.7.1 Буфер обмена

Изображение копируется в таком виде, в котором оно отображается на экране (со всеми пометками и Display Shutter, если они имеются). Если при копировании зажать клавишу Shift, изображение скопируется в буфер обмена в оригинальном размере.

7.2.7.2 Информация в заголовке (DICOM Dump)

При использовании этой функции, выводится диалоговое окно с DICOM информацией (тегами) о текущем изображении. Теги структурированные по группам для лучшего обзора. Отображаются все теги, даже те, которые имеют приватную информацию.

Какие-либо изменения в значениях невозможны.

В первой карте «структурированные» окна отдельные данные из заголовка можно копировать в буфер обмена и вставить в другое приложение (например обработку текстов). Для этого кликните два раза на требуемый элемент и выберите следовательно копирование правой кнопкой мышки. При сериях, состоящих из большого количества снимков, следует помнить о том, что они имеют только один заголовок для целой серии, в котором содержатся данные отдельных изображений.

Во второй карте «текст» Вы можете копировать в буфер обмена целые части или же весь заголовок. Для этого необходимо выделить с помощью мыши желаемую строку или же с помощью сочетания клавиш Ctrl+A весь заголовок и скопировать текст в буфер обмена. Оттуда данные можно вставить в текстовый файл или же документ в формате Word и т.п.

7.2.7.3 Рапорт в MS Word

7.2.7.3.1 Общее

Используя эту функцию, вы можете быстро создавать отчеты и документы, используя MS Word. В качестве источника можно использовать независимо созданные шаблоны в формате XML для MS Word, для которых следующим образом считывается из изображения DICOM конкретная информация, такая как ID пациента, имя, дата рождения и т.д., и переносятся в формат текста. Эта информация полезна, когда, например, мы хотим или должны выполнить изменения в определенном протоколе исследования.

В этом случае необходимо создать протокол один раз в качестве шаблона и в соответствующих местах в тексте ввести переменные.

При вызове этой функции открывается шаблон и в место изменений автоматически передаются в текст данные с актуально открытого изображения.

Условием работы этой функции является наличие Microsoft Word в версии 2003 с поддержкой и текущим пакетом услуг Service Pack .

В качестве альтернативы для MS Word, вы можете также использовать файлы в формате RTF, которые могут быть обработаны с помощью WordPad. WordPad является составной частью Windows.

Следует иметь в виду, что файлы RTF, содержащие изображения или графику, могут иметь в эффекте очень большую емкость. Вариативно RTF файлы могут быть также обработаны с использованием других текстовых редакторов, например Open Office. Но их следует предварительно проверить. Все рабочие места в одном из учреждений должны использовать одну и ту же программу в той же версии. Администратор системы обеспечи более точную информацию по этому вопросу.

7.2.7.3.2 Возможные изменения

Следующий вид информации могут быть считаны с изображения и введены в шаблон в качестве переменных данных.

Информация	Изменение	Таги DICOM
Фамилия пациента	PatientsName	0010,0010
ID Пациента	PatientID	0010,0020
Дата рождения	PatientsBirthDate	0010,0030
Дата обследования	StudyDate	0008,0020
Описание обследования	StudyDescription	0008,1030
Дата серии	SeriesDate	0008,0021
Описание серии	SeriesDescrition	0008,103e
Комментарий к изображению	ImageComments	0020,4000
Модальность	Modality	0008,0060

7.2.7.3.3 Создание шаблона

Создайте документ и придайте ему форму, которая вам нужна. В соответствующих местах текста введите соответствующие переменные без каких-либо дополнительных символов.

Пример:

«Пациенту *PatientName* с ID *PatientID*, рождения *PatientsBirthDay* сделано *SeriesDate* рентгеновский снимок *SeriesDescription*».

Важно обратить особое внимание на написание прописных и строчных букв в переменных (см. таблицу выше). В случае неправильного написания переменная не будет работать.

Примечание:

Если происходит ошибка в написании переменной, не можно исправлять ошибку в выражении, однако следует удалить переменную и записать её снова. Исправление ошибок выражения в формате XML записываются и такого вида переменная не будет больше правильно интерпретирована.

Сохраните документ в Word следующим образом «Файл -> Сохранить как «документ Word XML (*.xml)» в директории шаблонов digipax. Имя файла может быть выбрано произвольно. Файл должен иметь расширение «XML» (например, Шаблон1.xml).

Каталог шаблонов и каталог вывода должны быть определены администратором и доступны пользователю.

7.2.7.3.4 Запись отчета

Откройте изображение, которое требуется для создания отчета. Нажмите кнопку «Отчет в MS Word» и выберете в части с левой стороны нужный шаблон.

Шаблон открывается, данные с изображения будут вставлены в соответствующие места. Затем вы можете ещё нанести исправления в документ, изменить его или распечатать его. Созданный digipax файл для выхода находится в каталоге, определенном администратором.

Если при открытии шаблона MS Word выдает запрос об конвертации, это вызвано расширениями в настройках программы Word. Если вы не хотите, чтобы система запрашивала информацию о конвертации, следует обозначить в настройках программы MS Word «Расширения / Общие» позицию «подтвердить конвертацию файла во время открытия».


7.2.7.3.5 Редактирование и удаления отчета

Если вы хотите редактировать отчет, откройте изображение и выберете соответствующего пациента и нажмите «Отчет в формате MS Word». В части на правой стороне показаны существующие отчеты для пациента. Нажмите соответствующий отчет. После внесения изменений, нажмите настройку «Сохранить» и перезапишите текущий отчет.

Если вы хотите удалить отчет, выберите его в правой части и нажмите кнопку «Удалить отчет». Отчет будет удален из списка. В целях безопасности файл не удаляется с носителя данных, однако переносится в подкаталог «Recycled» в каталоге вывода.

7.2.8 Пометка изображений

У каждого изображения в верхнем правом углу находится маленькая красная область. При нажатии на эту область или Shift + левая кнопка мыши по снимку появляется красная точка (или пропадает, если она уже есть). Каждое изображение с красной точкой считается помеченным. Кроме того, добавляется затенение по всему изображению, так как иногда точку плохо видно (например, если представлено больше изображений, или на диагностических мониторах). Затенение может быть убрано в конфигурации (категория «Прочее»). Помеченные изображения могут быть использованы, например, при записи CD пациента и распознаются по красной метке на эскизе на панели слева.

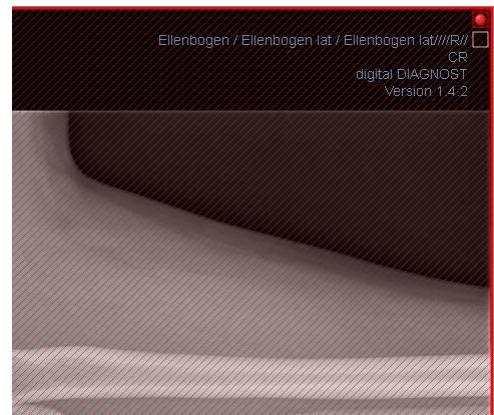

7.2.9 Защита изображений (блокировка)

Под каждой красной областью находится желтая область, нажатие на которую защищает (блокирует) изображение. Любые манипуляции над изображением становятся недоступными. Символ замка в желтой области означает, что изображение заблокировано.

Заблокированные снимки не отображаются в панели выбора изображений.



7.2.10 Контекстное меню

Контекстное меню вызывается кликом правой кнопкой мыши на изображении:

- функции для мыши: передвижение изображения, управление окнами, изменение масштаба выделенной области, лупа;
- изменение масштаба: ширина окна, высота окна, размер окна, включение и выключение полноэкранного режима, включение и выключение полноэкранного режима с разделителями, увеличение, уменьшение, исходный размер (1:1);
- оверлей: отображение информации, отображение аннотации и измерений, включение Display Shutter, включение наложения bitmap, включение среза изображений, изображение информации протоколов изображения

- деление изображений: 1x1, 1x2, 2x2, определен пользователем
- растр серии 1x1, 1x2, 2x2 определенный пользователем
- растр изображений 1x1, 1x2, 2x2, автоматический, определенный пользователем
- восстановление разделения окна
- отправка по эл. почте (DICOM)
- отправка по эл. почте (JPEG)
- обследования: список обследований пациента и, как подменю, серии изображений данного обследования (первое изображение данной серии появляется при активации пункта меню).



Согласно законодательным положениям требуется кодировка сообщений, отправляемых по электронной почте, которые содержат данные о пациентах или их персональные данные. Именно поэтому, клиент электронной почты должен быть настроен таким образом, чтобы данные кодировались, и прочесть их мог только адресат. Существуют дополнения к клиентам электронной почты, которые позволяют кодировать сообщения

Бесплатным заменителем криптографического программного обеспечения является «The GNU Privacy Guard». Данное приложение можно получить на сайте <http://www.gnupg.org> и установить на свою машину. Установку и настройку должен проводить специалист.

7.3 Манипуляции с изображениями

Справа от снимка находятся инструменты для редактирования изображений, которые можно открывать и скрывать с помощью соответствующих кнопок. Инструменты размещены по вертикали и тематически отсортированы.

Под инструментами располагаются кнопки отмены последнего действия и восстановления отмененного. Все действия выводятся текстом в виде текста во всплывающих подсказках. Кнопки отмены и восстановления действий относятся к активному изображению и при его закрытии сохраняются все проведенные манипуляции, без возможности отменить их в будущем.

С помощью последней кнопки «Вернуть изначальное изображение» все проделанные действия отменяются после вывода системой контрольного подтверждающего вопроса и изображение возвращается к виду, который сохранен в архиве изображений.




Для КТ и МРТ изображений а также серий, состоящих из большого количества снимков действия над снимками автоматически применяются ко всей серии, или каждый раз для активного изображения.

Для полутоновых изображений все изменения сохраняются. Для цветных снимков изменения не сохраняются и являются временными. При выборе другого пациента или закрытии изображения, любые изменения сбрасываются.

7.3.1 Преобразования (поворот, отражение, инвертирование)



Изображения можно повернуть на 90° по часовой стрелке или против нее или на 180°, нажатием на соответствующие кнопки. Снимки могут быть отражены по горизонтали, по вертикали, а также инвертированы.

Любая операция может быть отменена и возвращена при помощи стрелок внизу панели.

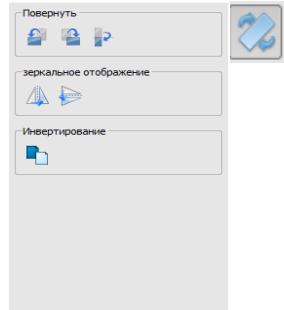

7.3.2 Управление окнами (Windowing)


Многооконный режим используется для работы с полутоновыми снимками и отключен для цветных. При обозначении центра и ширины окна, выбирается диапазон шкалы серого. Эти значения настраиваемые или могут быть выбраны из списка предустановок.

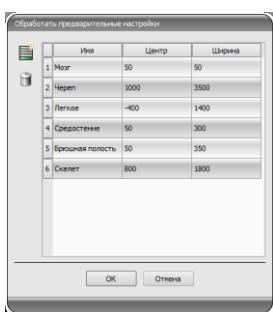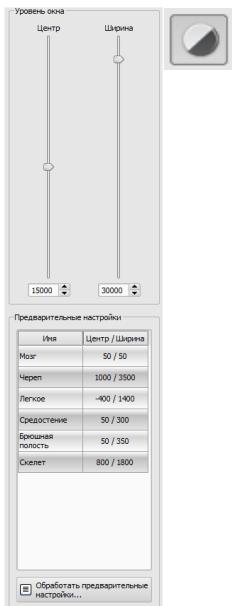

Изменение данных предустановок или добавление пользователем новых делается в диалоговом окне, которое появляется при нажатии кнопки «Обработать предустановки...». Также пользователь может изменять и удалять установки по умолчанию (они не защищены от записи).

В автоматическом режиме окон можно ввести дополнительные специальные стандартные настройки, которые после ввода можно будет применять к открытому изображению путем одиночного щелчка.

Настраиваемые кнопки от 1 до 3 предназначены для автоматического определения соответствующих значений для режима окон по алгоритму, основанному на гистограмме. Для данного алгоритма должно быть определено пороговое значение. Чтобы определить пороговое значение для данной кнопки, необходимо щелкнуть по этой кнопке, одновременно придерживая клавишу Shift. Таким образом будет вызвано диалоговое окно, куда можно ввести число от 1 до 49. Чем выше будет число, тем резче будет изображение. Таким способом можно установить стандартные настройки для каждой из 3 кнопок. Одним щелчком по соответствующей кнопке, алгоритм и, определенные с его помощью, значения для режима окон будут мгновенно применены к изображению.

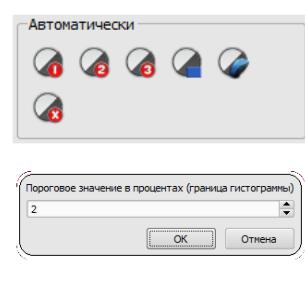

С помощью кнопки «Определить прямоугольник» можно натянуть прямоугольник на изображение. Из данного прямоугольника будут определены и применены к изображению оптимальные значения. Для этого необходимо сначала щелкнуть по кнопке, а затем определить прямоугольник путем двойного щелчка по изображению. Значения будут мгновенно определены и применены к изображению.

Следующая кнопка – это активный прямоугольник. Щелкните по кнопке и протяните прямоугольник по изображению. Оптимальное значение сразу же автоматически определяется внутри прямоугольника и отображается на всем изображении. Когда Вы найдете соответствующее изображение, тогда повторно щелкните по кнопке, чтобы применить значение к изображению. С помощью колеса прокрутки мыши можно увеличивать и уменьшать прямоугольник. С дополнительно нажатыми кнопками «Управление» (Ctrl) или Shift можно будет изменять только ширину либо только высоту. Процедуру можно прервать, нажав на клавишу Esc.

Кнопка «Вся область» предназначена для отображения целой видимой области от минимального до максимального значения полутоновой шкалы изображения.

7.3.3 Фильтры

Для использования фильтров необходимо включить модуль лицензии.

Доступны следующие фильтры: «Magic Sharp», «Выравнивание гистограммы», «Настройка резкости» и «Усиление контраста», которые можно использовать отдельно, или в комбинации друг с другом. Чтобы воспользоваться фильтром, необходимо пометить соответствующий квадратик.

Нажатием кнопки «Удалить фильтры» фильтры выключаются, а значения переходят в исходное состояние.


Как только фильтр будет включен, внизу изображения появится маленькая иконка. Одиночным нажатием на эту иконку можно выключить фильтр, а очередным нажатием вновь его включить. Это позволяет сравнить изображение с фильтром и без фильтра.

В списке фильтров можно записать различные настройки фильтров. Тогда фильтры из списка можно быстро использовать для следующих изображений. Список фильтров можно экспортовать и импортировать на другую станцию. Таким образом можно легко передавать любые предварительные настройки фильтров на многие станции.

7.3.3.1 Magic Sharp



Этот фильтр не действует при цветных изображениях. Может использоваться только при изображениях в шкале тонов серого цвета.

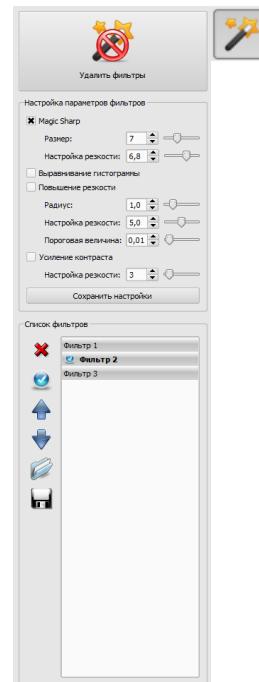

Алгоритм этого фильтра автоматически настраивает контраст изображения, при чем эта настройка применяется для отдельных областей изображения. Таким образом, оптимизируется контраст отдельных областей изображения, что дает лучшие результаты по сравнению с настройкой контраста целого изображения. Размеры отдельных частичных областей выбираются с помощью параметра «Размер». Размер можно выбрать в диапазоне от 2 до 16. Чем больше значение, тем меньшими будут частичные области. Значение 5 означает 1/5, а значение 10 означает 1/10 размера целого изображения. Таким образом, чем выше значение, тем более острыми будут малые структуры изображения. Параметр «Настройка резкости» определяет резкость изображения. Этот параметр может устанавливаться в диапазоне от 0.1 до 10. Значения менее 1 приводят к слабой резкости, а более 1 усиливают резкость. Когда значение равно 1 изображение выглядит 1:1, как в оригинале.

7.3.3.2 Функция мыши Magic Sharp

Эта функция служит для настройки фильтра Magic Sharp путем перемещения мыши по изображению. Она включается с помощью мыши, как указано в разделе 7.2.1. Самым простым способом является одновременное нажатие левой и правой кнопки мыши. Тогда включиться только фильтр Magic Sharp. Остальные фильтры будут выключены. Включите функцию с помощью одного из описанных способов и переместите мышь по горизонтали слева направо, чтобы изменить размер изображения. Значение с левой стороны изображения начинается с 2 и увеличивается вправую сторону до 16. Чтобы изменить резкость, необходимо переместить мышь по вертикали снизу вверх. Диапазон изменения от 1 до 10. В нижней части изображения, которая на нижеуказанном изображении показана штриховым полем, фильтр выключен. Только с того места, которое находится над этим штриховым полем, увеличивается резкость. В программе эта область (составляющая примерно четвертую часть изображения) не заштрихована. Но как только стрелочка мыши появится в нем, фильтр выключится и исчезнет иконка фильтра в нижней части изображения, когда стрелочка мыши переместится вверх над этой областью, фильтр вновь включится. Следует не забывать, что при перемещении мыши всегда одновременно изменяются оба значения. Чем больше вправо, тем выше находится стрелочка мыши и тем выше значения размера и резкости изображения.



7.3.3.3 Выравнивание гистограммы

При выравнивании гистограммы серые тона интересующих нас областей изображения расширены до шкалы полутоонов, а реже используемые серые тона менее интересующих нас областей заужены. Это вызывает более четкое показание интересующих нас областей изображения.



Этот фильтр включается и выключается путем пометки соответствующего квадратика. Он не имеет никаких других настроек. Изменения возникшие в результате выравнивания гистограммы не отражаются в самой гистограмме, поскольку в гистограмме всегда.

7.3.3.4 Настройка резкости

Настройка резкости показывает разницу яркости, благодаря чему изображение становится более острым.

Резкость настройки конечного изображения измеряется в пикселях. Параметр «Радиус» подает, сколько пикселей необходимо взять для расчета резкости. Малый радиус приводит к повышению резкости малых структур. Большой радиус увеличивает изображение структур на целевом изображении. При значении 0 соответствующее значение для области устанавливается автоматически. Параметр «Настройка резкости» говорит о том, в какой степени должна быть настроена резкость изображения. Высокие значения дают высокую резкость. Во избежание одновременного повышения резкости гладких областей изображения, устанавливается «Предельное значение» параметра. Чтобы сделать резкими все области изображения, этот параметр необходимо установить на 0. Предельное значение необходимо увеличить, чтобы сделать более резкими только более контрастные области.

Выберите область изображения для обследования. При необходимости увеличьте эту область изображения. Начните с более высокой настройки резкости, затем увеличивайте радиус до тех пор, пока структуры не будут хорошо видны. Затем можно обратно уменьшить резкость.

7.3.3.5 Усиление контраста

С помощью функции усиления контраста можно более четко показывать разницу между светлыми и темными областями на снимке. Светлые области станут еще более светлыми, а темные – более темными. Для этой функции можно настроить коэффициент усиления от 1 (слабое) до 25 (очень сильное).


7.3.3.6 Список фильтров

В списке фильтров можно записать настройки фильтров, которые могут потом многократно использоваться. Для записи настроек фильтра нажмите на «Запись настройки». В список фильтров будет добавлена новая запись. Подайте соответствующее название для нового фильтра. Таким образом, можно записать в списке целый ряд настроек для фильтров.

Фильтр из списка можно установить, как фильтр по умолчанию. Когда фильтр установлен по умолчанию, то он будет автоматически применяться к каждому изображению, разве что для данного изображения уже установлен другой фильтр. Чтобы выключить фильтр по умолчанию необходимо отметить эту опцию в настройках «Стандарт».

С помощью функции экспорта можно экспортировать настройки фильтров в виде файла конфигурации и импортировать их на другие станции с помощью функции импорта.

- 1 – Удаление фильтра
- 2 – Установка фильтра по умолчанию и отключение фильтра по умолчанию
- 3 – Перемещение фильтра в списке
- 4 – Импорт фильтра из файла
- 5 – Экспорт фильтра в файл

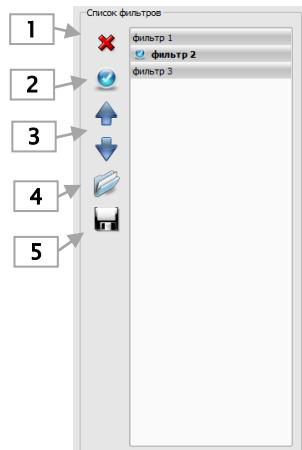

7.3.4 Аннотации и измерения



Погрешности в измерениях длины и углов могут возникнуть из-за модальности или аквизиции изображения!

Измерения зависят от размера пикселей записанных в изображении DICOM.

Погрешности могут быть также вызваны экспозицией – особенно, при традиционной рентгенографии (CR, DX), напр. таза или бедра. Расстояние между облучаемой частью тела и пластиной / детектором искажает представление о длине на 2D рентгенограмме. Даже если часть тела облучается с эталоном, может существовать вероятность возникновения погрешности, поскольку эталон не лежал на той-же самой высоте с измеряемой частью тела.


Если для изображений не заданы единицы измерения относительно пикселя, то все результаты измерений записываются в пикселях.




Аннотации и измерения, имеющиеся в программе не подходят из-за вышеупомянутых возможных отклонений для планирования операции или реализации протез. Для этих целей дополнительно требуются специальные системы планирования со сравнительной шкалой и стандартами.

Под аннотациями находятся кнопки выбора графических элементов (линия, стрелка, прямоугольник, эллипс, многоугольник и текст). Прямоугольники, эллипсы и многоугольники можно нанести с внешней заливкой. Подсказки, как следует рисовать объекты с помощью мышки, всплывают каждый раз после выбора, т.е. после нажатия кнопки в правом нижнем углу. Нарисованные объекты можно потом еще изменять во всех направлениях, или передвигать для придания им требуемой формы и умещения их в требуемой позиции. Дополнительно с правой стороны показан список объектов, которые могут отображаться, или могут быть спрятаны путем нажатия на иконку глаза. Объекты можно по отдельности удалять нажатием на иконку корзины, или нажатием кнопки «Удалить» на клавиатуре .

В результате нажатия кнопки «выполнить больше аннотаций или измерений подряд» выбранный рисуемый объект остается активным. Тогда можно нарисовать несколько измерений расстояния подряд без необходимости нажатия на каждое измерение отдельно. После выполнения рисования всех измерений выход из этого режима осуществляется путем двойного нажатия на поверхность изображения или нажатия клавиши ESC.

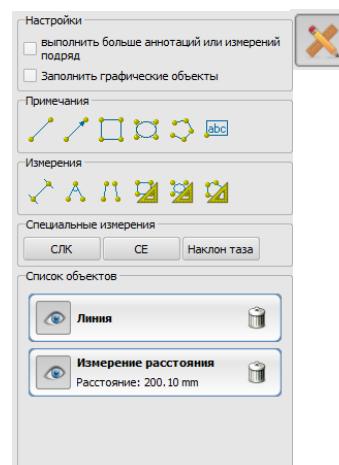

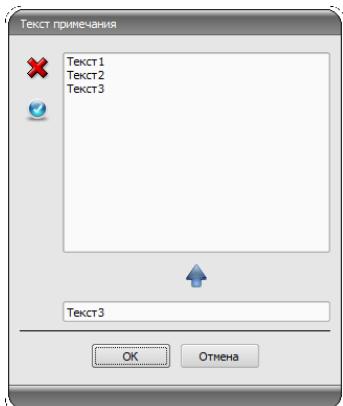

При выборе вставки текста всплывает диалоговое окно, в котором можно: добавить новый текст к списку стандартных заметок (введите текст в нижнем поле и нажмите зеленую стрелочку), выбрать готовый текст из уже имеющихся примеров (двойным щелчком или щелчок и нажатие кнопки OK), ввести желаемый текст (введите текст в нижнем поле и нажмите OK). Выбранный (введенный) текст помещается на снимке. Есть возможность установить стандартный текст, который используется при следующей активации диалогового окна.



Функция измерения существует только в случае включения соответствующего модуля.

Под измерением подразумевается измерение участков и углов, измерение содержимого в выделенных областях (в прямоугольнике, эллипсе и многоугольнике). Измерение угла проводится путем введения 3-х или 4-х точек. При измерении углов в скобках указывается внешний угол .

В случае прямоугольника, эллипса и многоугольника измеряется также площадь поверхности и интенсивность. Рядом с фигурой при этом показывается среднее значение шкалы серого, а также минимальное и максимальное значение серого. Для цветных изображений производится только нормальное измерение поверхности. Для объектов серии СТ значения показываются по шкале Хаунсфилда (HU).

Во время проведения измерений синхронно отражаются реальные данные измерений. Как и в случае аннотаций, нарисованные объекты можно потом еще изменять во всех направлениях, или передвигать для придания им требуемой формы и умещения их в требуемой позиции. Поле с данными измерений можно также перемещать в любое место на изображении.

Отдельные измерения показаны в списке с правой стороны, они могут отображаться, или могут быть спрятаны путем нажатия на иконку глаза. Объекты можно по отдельности удалять нажатием на иконку корзины, или нажатием клавиши Delete на клавиатуре. Нажимая кнопку «Удалить все», расположенную с правой стороны, можно удалить одновременно все аннотации и измерения.



Графические объекты из внешних систем или старых версий digipaX (версия 1.4.5 или более старая) не могут быть изменены.

Настройки для графических объектов в оверлее находятся в конфигурации (категория «Оверлей»).

7.3.4.1 Специальные измерения

Для специальных измерений служат специальные кнопки. Некоторые из них используются только для ветеринарных обследований и они доступны исключительно в ветеринарных версиях digipaX (смотри раздел 22.3).


Выполнение измерения активируется нажатием кнопки для данного измерения. Внизу экрана появится краткая инструкция по проведению процедуры. Вначале необходимо выполнить все шаги согласно описанию, пока не будут обозначены все точки и линии для данного измерения. Только после этого можно поправить измерение и настроить объекты. Чтобы прервать процедуру измерения, чтобы напр. начать измерение сначала, следует нажать кнопку Escape.

СЛК (сердечно–легочный коэффициент)

Оценка размера сердца

Рентгеновский снимок: грудная клетка в прямой проекции (передняя и задняя)

Нажмите кнопку и нарисуйте вначале линию для измерения сердца (максимальный поперечный диаметр сердца). Затем нарисуйте линию для измерения грудной клетки (максимальный внутренний поперечный диаметр). Обе линии можно еще исправить перемещая конечные точки.

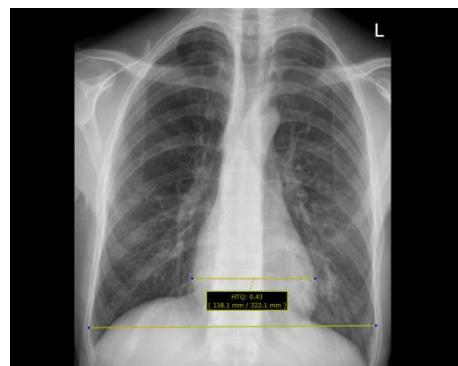


Измерение угла Вайбера

Определяет угол между линией, которая ведет от центра головки бедренной кости, до края крыши вертлужной впадины и продольной оси тела

Рентгеновский снимок: таз в передне-задней проекции

Нажмите кнопку и перетяните круг на головку бедра, начиная от нажатия мышкой на середний пункт, перетягивая круг до края. Затем перетяните угол до края крыши вертлужной впадины.

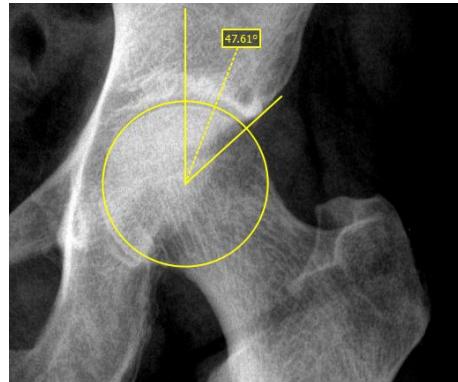


Измерение тазового наклона

Устанавливает угол между горизонтальной линией и линией, проведенной между центральными точками головки бедренной кости.


Рентгеновский снимок: наклонение таза – обзор

Перетащите круги на головки бедренной кости, начиная с нажатия кнопкой мыши по центральным пунктам, а затем перетащить круги к краю

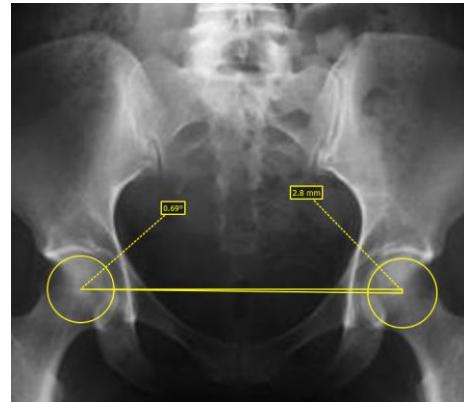

7.3.5 Диафрагма / Display Shutter

Для каждого изображения можно выбрать выделенную область в форме прямоугольника, эллипса или многоугольника. На снимке может быть только одно выделение определенной формы (т.е. нельзя сделать два прямоугольных выделения), но можно использовать все формы одновременно. После нажатия кнопки с выбранной фигурой, появляется объяснение по нанесению.

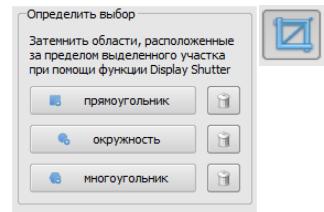

Установка выделенной зоны определенной формы заменяет уже существующую область этой же формы.


Все, что находится за границами выделенной области, может быть затемнено или показано при помощи кнопки на панели инструментов («Display Shutter» в опциях оверлея).

Объекты можно удалять поочередно.

7.3.6 Просмотр ряда изображений (кино-петля)

Функция для автоматического воспроизведения ряда изображений с разными опциями управления, к примеру,, направление или скорость воспроизведения. Скорость воспроизведения изображений можно регулировать специальными регуляторами. «Старт» и «Конец» определяют, с какого изображения ряда должно начинаться воспроизведение и на каком из изображений ряда оно должно заканчиваться. Вертикальными кнопками прокруток можно также вручную выбирать одиночные изображения.

- 1 – Воспроизведение вперед
- 2 – Воспроизведение назад
- 3 – Конец воспроизведения
- 4 – Пауза
- 5 – Регулировка скорости воспроизведения
- 6 – Одноразовое воспроизведение
- 7 – Автоматическое воспроизведение вперед/назад
- 8 – Непрерывный ряд
- 9 – Начать воспроизведение с данного изображения
- 10 – Завершить воспроизведение на данном изображении
- 11 – Ручной выбор одиночных изображений

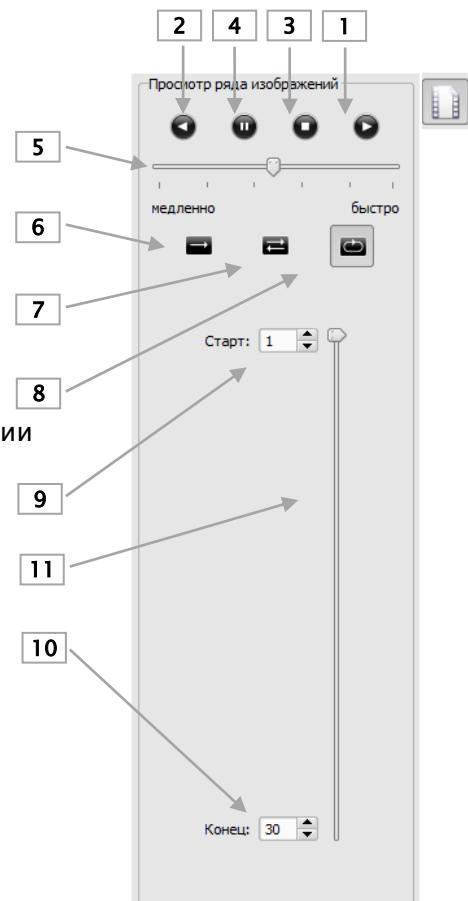

7.3.7 Протоколы изображения (Hanging Protocols)



Модуль доступен только тогда, когда онключен в конфигурацию лицензии. После активации модуля требуемые протоколы должны быть найдены, соотнесены с системой и установлены системным администратором.

С помощью протоколов изображения, дисплей управляет способом отображения определенных типов изображений в определенной договоренности на одном или нескольких дисплеях. Классическим примером является отображение маммографии. Для этого необходимо добавить различные системы отображения, т.е. layout, например, фотографии последнего снимка или снимки левой и правой стороны могут автоматически отображаться рядом.


По двойному щелчку узла обследования в дереве исследования изображения отображаются в окне просмотра изображений в соответствии с определенной системой. Автоматически используется первый протокол с первым layoutem. На правой панели показаны протоколы, определенные для этого типа изображения, а под ними – приписанные им layouty.

Если в конфигурации включается автоматически отображение текущего обследования (см. «Раздел окна / HP», глава 19), изображения пациента будут показываться в соответствии с протоколом уже в момент загрузки.

Для отображения изображений по другому протоколу или по другой системе, нажмите выбранный протокол или layout, и изображения будут отображаться соответственным образом. Layouty, принадлежащие к данному протоколу можно просматривать с помощью левой и правой клавиши курсора, удерживая нажатой клавишу Ctrl (Ctrl + курсор влево или Ctrl + курсор вправо). Первые 9 layoutow следует выбрать клавишами с цифрами 1–9.

Когда поиск изображений работает на нескольких дисплеях (см. «Интерфейс потребителя» в главе 19), можно также включить протоколы отображения для этих дисплеев. Layout автоматически регулируется в активном браузере на используемых дисплеях.

Протоколы изображения используются только для отображения тех типов изображений, для которых был определен протокол с layoutem. Если для данного пациента существуют другие изображения, они должны быть открыты вручную в области просмотра. Такими изображениями могут быть, например, снимки в другой проекции или модальности (CR, ультразвук). Следует также проверить настройку фильтров в лечении пациентов, и все ли анализы данного пациента отображаются.

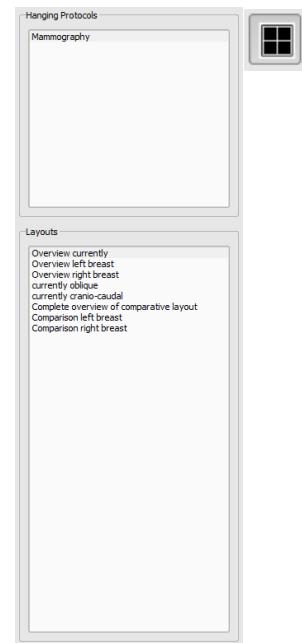



Протоколы layout–отображений показаны в правой панели только в случае, если эти типы изображений определены. Для всех других типов изображений панели инструментов остаются пустыми.

7.4 Линии среза

Линией среза (локализатором) представляется край среза двух слоев (плоскости) и положение отдельных частей снимка серии КТ или МРТ. Положение изображений любой другой серии в отношении активного изображения визуализируется таким же образом.




При отображении в виде линий проекции не указываются данные относительно угла пересечения двух слоев. Линии не указывают на то, перпендикулярны ли слои относительно друг друга или же наклонены диагонально. Именно поэтому стоит помнить о том, чтобы не констатировать расположение двух слоев относительно друг друга на основании линий проекции.

При отображении в виде плоскости, благодаря трехмерному изображению, можно лучше представить себе расположение плоскостей относительно друг друга. Желаемую форму отображения можно настроить в конфигурации Пользователь::Наложение/ Линии среза путем определения типа в группе «Линии среза / локализатор».

Перед тем, как открыть серию снимков, необходимо настроить разделение изображения таким образом, чтобы обозревать отдельные серии рядом. Затем откройте каждую из нужных серий. Локализатор автоматически отображается при включенной функции линий слежения. Щелкните на серии и прокрутите колесиком мыши все её изображения. Как альтернатива, можно использовать клавиши «Page up» и «Page down». Позиция текущего изображения показана в другой серии как линия или плоскость проекции. Настройки линий слежения находятся в разделе конфигурации – Оверлей /Линии среза – 19 Конфигурация.

7.5 Гистограмма

Под изображением находится окно с гистограммой активного снимка. Окно с гистограммой можно закрыть (спрятать).

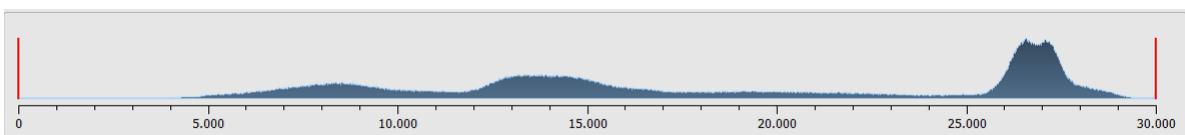

При сериях, состоящих из большого количества снимков, указывается гистограмма текущего снимка.

Для цветных изображений отображаются красные, зеленые и синие кривые для RGB каналов. Для полутоновых снимков используется синяя кривая для отображения разброса значений шкалы серого.

На гистограмме полутоновых снимков всегда отображаются текущие настройки окон, которые тут же могут быть и модифицированы. В левой и правой части видимой области находятся красные линии, обозначающие края окна и являющиеся ползунами для их изменения. Уровень сглаживания гистограммы изменяется в конфигурации Пользователь/Гистограмма. Смотрите в разделе 19. Окно можно передвигать, кликнув на область между красными линиями и перетащив его мышью.

Для увеличения масштаба гистограммы, используйте прямоугольник масштаба, перетаскивая его клавишей Shift + левой кнопкой мыши. Щелчком правой кнопкой мыши на гистограмме, восстанавливается полный размер.


Настройки для работы с гистограммой находятся в конфигурации, категория Гистограмма.

7.6 Easy Report




Этот модуль должен быть активирован при помощи настоящей лицензии.


Используя этот модуль, можно создавать для пациентов рапорты, описания, примечания и т.д. в текстовой форме к обследованиям или изображениям. Ввод текста происходит в предусмотренном поле ввода под просмотром изображений. Текст превращается в сжатое полутоновое изображение, с которой можете обращаться так же, как и с другими изображениями DICOM. Дополнительно, текст будет также откладываться на теге 0020,4000 – Примечание к изображению.

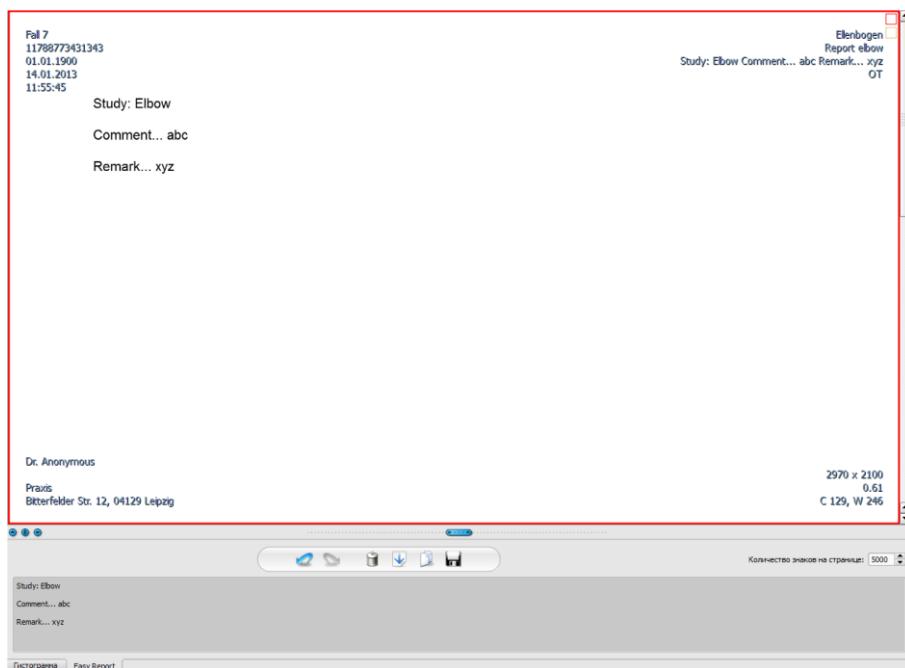

Кнопкой «Сохранить» данные добавляются существующему обследованию или сохраняются в архиве в форме нового обследования. Easy Report также доступный в режиме множества пациентов. Это означает, что можете открыть нескольких пациентов одновременно. Выберите сначала пациента, которому следует присвоить рапорт. Затем выберите существующее или новое обследование. Введите название рапорта и щелкните OK. Название рапорта сохраняется на теге 0008,103E – Описание серии.

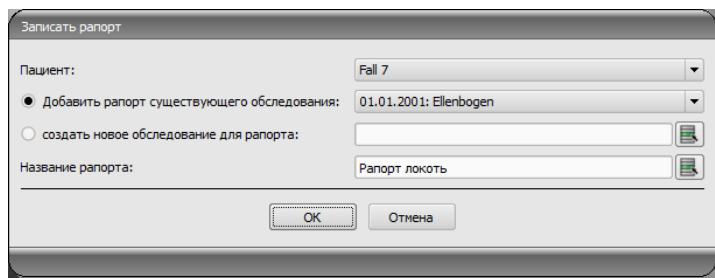

Описание функциональной панели:

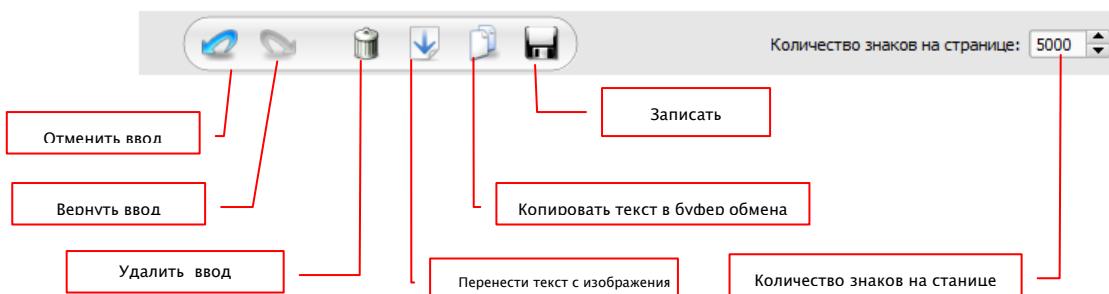


Количество знаков на странице настроено по умолчанию на 5000 знаков. После этого, наступает автоматическая смена страницы. Притом новое изображение автоматически создается в той-же самой серии. Смена страницы совпадает на границе слова. Таким образом, страницы рапорта сохраняются насколько это возможно в формате А4. Количество знаков на странице можно повышать до 10 240 знаков.

Текст можно переносить нажатием иконки «Перенести текст с изображения» из существующего рапорта в поле ввода и таким образом использовать для нового рапорта. Изменение устойчивого рапорта не возможно.

Можно также далее обрабатывать текст из существующих рапортов. Перенесите текст сперва в поле ввода, дальше копируйте текст в буфер обмена, а потом вставьте, например, в документ Word.

8 Менеджмент пациентов

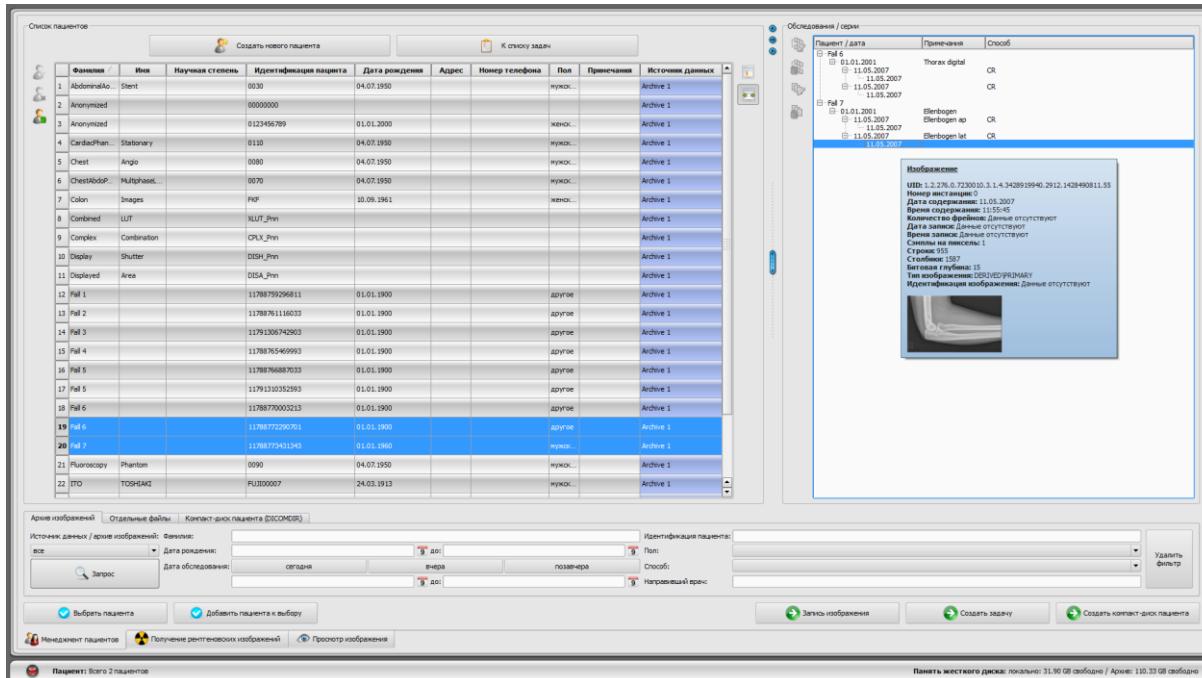

Если менеджмент пациентов будет использоваться как отдельный компонент, тогда в конфигурации в пункте «Интерфейс пользователя» необходимо убрать галочку напротив закладки менеджмента пациентов.. После этого запуск менеджмента пациентов осуществляется путем вызова стартового меню или заголовка, если заголовок активен.

8.1 Данные пациентов

Для каждого пациента определяются такие данные в таблице:

- фамилия
- имя
- звание
- ID пациента
- дата рождения
- пол
- источник данных

Колонки могут быть закрыты и восстановлены по отдельности. Нажмите правой кнопкой мыши верхний колонтитул списка пациентов и активируйте или дезактивируйте желаемые колонки. Можете также определять порядок колонок. Нажмите левую кнопку мыши и переместите колонку на желаемую позицию.

Администратор может активировать дополнительные колонки, напр. С адресом, номером телефона и примечаниями и.т.д. Чтобы эти данные показывались, может быть необходимым приспособление базы данных. Детально узнайте у системного администратора.

С правой стороны возле каждого пациента показываются обследования и содержащиеся в них серии изображений .

8.2 Источники данных

Данные могут быть запрошены из архива изображений, а также из локальных файлов DICOM. Последнее может быть отслежено сканированием по папкам, загружено открытием отдельных файлов или быть импортированным из DICOMDIR, как это обычно используется при записи CD пациентов.

Список пациентов каждый раз показывает список выбранного источника данных отдельной вкладки. Если вкладка меняется, то и список пациентов будет изменен.

Менеджмент пациентов загружается автоматически при запуске программы, если как раз соединение GDT не требует никого другого действия (смотрите в главе 21 Интерфейс GDT). Первым же делом программа посыпает запрос об обновлении списка пациентов. Нажав «Да», загружаются все новые архивы изображений без фильтрации (смотрите в главе 8.2.1 Архив изображений). Это займет какое-то время, в зависимости от количества пациентов, сети и использованной базы данных. В конфигурации, категория «Прочее», настраивается поведение выдачи запроса. Можно настроить так, чтобы список пациентов активировался или нет при запуске программы без запроса. Тим образом, сначала настраивается фильтр и происходит быстрый поиск.

8.2.1 Архив изображений

8.2.1.1 Запрос

Программа дает возможность запрашивать архивы изображений (PACS) и локально установленные данные, которые предусмотрены для записи в архив изображений. В выпадающем окне «Источник данных/ Архив изображений» определяется, какой из источников будет запрашиваться. Можно выбрать «Все» для использования всех возможных источников, «Локально» – для работы с локальными данными, или выбрать название архива изображений. Деактивированные архивы изображений не включаются в список, и не будут запрашиваться в дальнейшем.

При нажатии кнопки «Запрос» запрашиваются источники с использованием настроенных фильтров и список найденных соответствующих пациентов обновляется.

Для ускорения поиска по большим архивам количество отображаемых записей данных ограничено. Если в списке нет искомого пациента, потому что список урезан, надо использовать фильтр для увеличения максимально доступных наборов данных. В конфигурации можно определить количество отображаемых записей данных или отключить ограничение (см. раздел 19 Конфигурация подраздел Другое).

Данные в таблице могут быть отсортированы по возрастанию или убыванию в каждом поле (колонке), нажав на заглавие.

8.2.1.2 Фильтр

Список пациентов может быть отфильтрован по различным критериям. При помощи фильтрации, все пациенты, которые не отвечают условию – отсеиваются. Критерии для фильтрации можно активировать иdezактивировать переключателями и таким образом комбинировать фильтры.

Можно также одновременно применять несколько разных фильтров. С помощью кнопки «Удалить фильтры» все активные фильтры отключаются.



Локальные данные, следовательно, и локально установленные или переданные посредством GDT пациенты, не фильтруются. Они не появляются в списке результатов, даже если соответствуют критериям поиска.

8.2.1.2.1 Поля поиска

В конфигурации в пункте Пользователи/Другое можно включить дополнительные поля поиска по фамилиям и ID пациентов (см. раздел 19).

В поиске есть поля ввода для имени (фамилии) и CD пациента. Первый найденный пациент в списке пациентов будет выделяться каждый раз, когда изменяется текст в любом из полей ввода.

Если текст вводится в любое поисковое поле, то в другом – будет удален. Поля поиска становятся зеленого цвета, если найдено хотя бы одно совпадение, в противном случае – они красные.

В поле поиска достаточно ввести первые буквы фамилии (к примеру, «Ива») или первые символы ID пациента (напр., «123»). Система автоматически выводит первое попадание соответствующее введенным данным.

8.2.1.2.2 Фильтрация по имени

Введите начало искомого имени и «*» после него (например, «Иван*»), для поиска всех пациентов, чье имя (фамилия) начинается на буквы «Иван». Звездочка (*) может использоваться вначале (например, «*ова»), для того, чтобы отобразить всех пациентов, фамилии которых заканчиваются на «ова». Можно также ввести одновременно имя и фамилию, отделяя их запятой (напр., Иван, Люд). Таким образом будут отображены все пациенты, фамилии которых начинаются с «Иван», а имена с «Люд».

8.2.1.2.3 Фильтрация по дате рождения

Пациенты могут быть отфильтрованы по датам рождения включенными между введенными датами.

8.2.1.2.4 Фильтрация по дате обследования

Пациенты могут быть отфильтрованы по содержанию обследования с указанием даты или введением периода времени. У пациента будет показано только одно обследование, которое соответствует критерию поиска.

8.2.1.2.5 Фильтрация по дате регистрации (опция)

В качестве дополнительного варианта, изображения в архиве можно находить путем фильтрования по дате регистрации. Датой регистрации является дата сохранения изображения в архиве. Эта функция может быть полезной при составлении дневных расчетов, статистик и т.п. Она является дополнительным вариантом и должна быть включена администратором системы.

8.2.1.2.6 Фильтрация по ID пациента

Вы можете осуществлять поиск конкретного ID пациента, путем ввода данных в поле поисковой системы и последующего нажатия на Enter или «Поиск». Или введите первые

знаки искомого ID пациента. Или поиск по частям данного ID, используя «*» как для фильтрации по имени.

8.2.1.2.7 Фильтрация по полу

Фильтрует всех пациентов по определенному полу.

8.2.1.2.8 Фильтрация по модальности

Все возможные модальности (методы аквизиции изображения) перечислены в раскрывающемся списке, из которого можно выбрать один из способов. Впоследствии будут показаны только те пациенты, которые имеют изображения сделанные выбранным методом. Это означает, что будут отфильтрованы и серии изображений.

8.2.1.2.9 Фильтрация по пересылке врачу

Фильтрация производится тем же способом, как и по имени пациента. Возможно, понадобится поставить «*» в начале и в конце искомой части (например, «*ов*»).

8.2.1.2.10 Обновление данных пациентов

Двойным нажатием на узел с фамилией пациента в дереве можно получить остальные изображения этого пациента (без фильтров). Эта функция пригодится для сбора всех других изображений пациента, когда было выбрано только одно исследование или применены фильтры для списка. Тогда все изображения пациента отображаются на просмотре.

8.2.2 Одиночные файлы



Используя соответствующую вкладку, локальные DICOM файлы могут быть быстро импортированы и просмотрены. Выберите папку или диск, нажмите кнопку «Сканировать», и все файлы, которые соответствуют настройкам фильтра, будут открыты. Можете задать фильтр для открываний файлов и фильтр для файлов, которые не должны быть импортированы. Активируйте желаемый фильтр и введите имя файла, используя групповые символы («*» и «?»). В случае настройки в виде «*.dcm CT*» с опцией «Только эти файлы», будут найдены все файлы с окончанием «dcm» и все файлы с началом «CT». Если вы активируете опцию «Не эти файлы» и используете фильтр, например «*.exe*.zip», вы устраните возможность того, что импортируется программы или ZIP архивы.

Опция «Включить подпапки» активирует сканирование подпапок на наличие нужных файлов.


Если файл, соответствующий настройке фильтра, не может быть импортирован, это будет записано в файле хронологического протокола, который можно просмотреть в случае ошибок.

Выбранна папка сохраняется и её потом можно всегда быстро найти в раскрывающемся списке. Нова папка выбирается иконкой «...».

При нажатии на кнопку «Добавить файлы DICOM...» напрямую открываются одиночные файлы. Для добавления большего количества файлов используйте клавиши Shift и Ctrl.

Источник данных обнуляется при нажатии на кнопку «Убрать/Очистить список». Все находящиеся в том месте изображения будут удалены из системы. **Тем не менее, файлы останутся в сохранности.**

8.2.3 CD пациента (DICOMDIR)

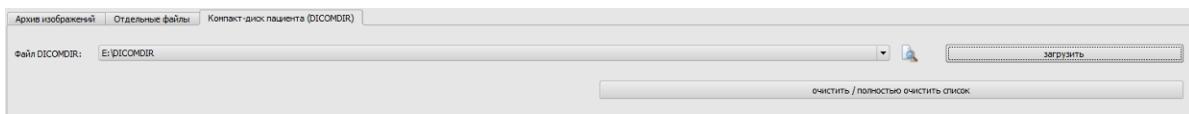

Часто папки для файлов DICOM создаются в файлах DICOMDIR. В основном это происходит при создании CD пациента. Такое CD пациента можно быстро импортировать при помощи этой вкладки.

Файл DICOMDIR (имя файла «DICOMDIR», без расширения) выбирается при помощи «...». Уже использованные места хранения открываются в выпадающем списке и снова могут быть быстро выбраны. Нажатием по «Загрузить» загружается файл DICOMDIR, в котором содержится вся информация о выбранном пациенте, вместе со снимками. Источник данных обнуляется при нажатии на кнопку «Убрать/Очистить список». Все находящиеся в том месте изображения будут удалены из системы. **Тем не менее, файлы останутся в сохранности.**

Компакт-диски пациентов могут быть автоматически импортированы в систему. Если компакт-диск пациента загружается при открытом приложении, будет отображено диалоговое окно, содержащее следующие поручения:

Открыть: отображение содержимого CD пациента в программе digipaX

Импорт: импорт изображений в архив

Импорт для актуального пациента: импорт изображений в архив с переносом данных актуально выбранного пациента

Прервать: прерывание процедуры

После выбора поручений «Импорт» и «Импорт для актуального пациента» будет отображено диалоговое окно, в котором можно еще подобрать данные пациента перед импортированием изображений.

Более подробная информация на тему подбора данных пациента в главах 8.5 Отправка изображений пациента в архив изображений и 8.6 Управление данными пациентов перед отправкой в архив.

8.3 Запись нового пациента / изменение данных пациента

Создание новых пациентов, а также редактирование данных возможно только для источника данных архива изображений. Поэтому необходимо выбрать эту закладку. .

8.3.1 Сохранение данных

Для создания нового пациента выберите кнопку «Создать нового пациента». Во время записи нового пациента, его данные вводятся в диалоговое окно. ID следующего доступного пациента выбирается автоматически. Этот идентификатор можно ввести вручную, если он еще не был назначен. С помощью конфигурации можно также ввести настройки, где ID пациента всегда должен быть введен вручную. В этом случае система не выдает ID, однако после введения вручную ID пациента оно сравнивается с данными, содержащимися в архиве. Если это ID уже существует, система предлагает выбор соответствующего пациента. Если окажется, что это не тот пациент, следует выбрать другое ID.

Использование номера PESEL (только для Польши):

Если система настроена на использование номера PESEL в качестве идентификатора пациента, то номер PESEL, будет проверяться во время ручной регистрации данных пациента и на этом основании будут определены дата рождения и пол пациента.

Введите 11-значный номер в графе ID пациента и перейдите в следующее поле. Если номер введен правильно, дата рождения и пол будут введены автоматически. Если номер неправильный, появится сообщение об ошибке, и введенный номер может быть исправлен.

Ввведите все требуемые информации и нажмите OK. Если выйти из диалога, нажав «Да», то новый пациент записывается на местном уровне. Это означает, что пациент не доступен в архиве изображений, потому что это возможно только с передачей изображений, а не только одних данных в DICOM архив. Таким образом, когда у пациента есть обследование, серия или снимок, все данные могут быть переданы, как новый объект DICOM в архив изображений.

Если в конфигурации установлено, что идентификация (например, номер врача или номер компании) должны быть добавлены к каждому ID пациента, то идентификация будет автоматически добавлена к вводимому вами ID пациента (с разделением «–»). Если в конфигурации установлено, что ID пациента будет автоматически создан системой, поле ввода ID будет отключено.



Следующие символы не допускаются символов в имени или ID пациента: \ / :
* „”? <> |.

Строго избегайте специальных символов типа ^ ° : * ? < > | @ € µ ~ ² ³ !. Достаточно просто–напросто использовать настоящую фамилию пациента и возрастающую нумерацию ID пациентов. Можно, к примеру, начать с цифры 000001.

8.3.2 Редактирование данных пациентов

Данные локальных пациентов можно всегда редактировать. То есть, пока изображения введенного вручную пациента не записаны в архиве, то эти данные можно все еще редактировать. Чтобы редактировать данные пациента нажмите кнопку находящуюся

сверху с левой стороны возле таблицы пациентов. Откроется диалоговое окно, в котором можно изменить данные и их сохранить нажимая ОК.



Как только изображение данного пациента будет записано в архиве, изменение данных этого пациента будет возможно только с помощью специальной функции редактирования. Функцию эту может включить администратор системы.




Перед выполнением этой операции необходимо убедиться в том, что была создана актуальная запасная копия данных. После выполнения операции необходимо обновить запасную копию, чтобы в ней также были введены соответствующие изменения.

Данные пациента, которые уже записаны в архиве, можно изменять для пациента, для обследования или серии изображений. В случае необходимости изменения данных пациента, напр. по причине изменения фамилии (при вступлении в брак), или в случае необходимости исправления ошибки в написании, пометьте пациента в управлении пациентами и нажмите кнопку «Редактировать данные пациента», чтобы открыть диалоговое окно редактирования. В диалоговом окне необходимо ввести необходимые изменения и нажать ОК. В другом возможном случае необходимо изменить данные обследования, или серии изображений, когда во время записи по ошибке они были присвоены не тому пациенту. В этом случае необходимо вначале открыть соответствующего пациента, чтобы он отражался внизу экрана. Затем необходимо в управлении пациентами найти пациента с неправильным обследованием или серией.

Необходимо только пометить пациента в списке, не нажимать двойным щелчком!

Для лучшей ориентации можно с правой стороны открыть дерево, наезжая на него мышкой будет отображаться подробная информация об обследованиях и изображениях. Если доступны пиктограммы изображений, то они будут отображаться вместе с этой информацией. Теперь выберите неправильно присвоенное обследование или серию и нажмите изменение данных пациента для обследования или серии. В диалоговом окне необходимо еще только нажать «Данные актуального пациента», и тогда данные присвоенные неправильному пациенту (смотрите низ экрана) будут перенесены к правильному пациенту, а соответствующие изображения будут описаны снова. При изменении данных в архиве, необходимо дополнительно указать данные владельца, причину изменения и пароль для подтверждения изменений. Пароль Вы получите у администратора системы.

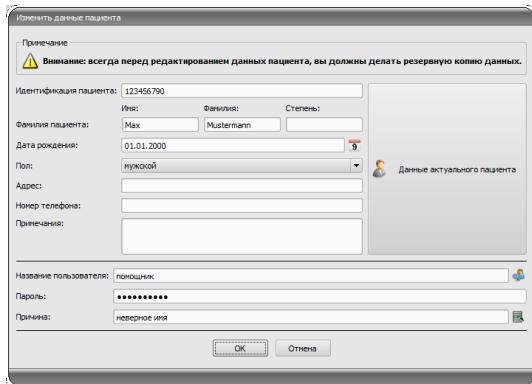

Опционально можно попросить администратора сделать такую настройку системы, чтобы данные пациента, автоматически, сразу же после их вызова, сравнивались в управлении пациентами, чтобы сразу же появлялось диалоговое окно, в котором можно бы было ввести возможные изменения.


8.4 Удаление пациента

Удаление пациентов в основном доступно для всех источников данных. Однако, в случае источника архива изображений, можно удалять только местных пациентов через менеджмент пациентов. Это значит, что пациенты которые уже были сохранены в архиве изображений, могут быть удалены только напрямую из архива или же с помощью функции, доступ к которой будет получен через администратора системы.

В случае с источниками данных для отдельных файлов и СД пациентов, отмеченный пациент или пациенты удаляются только из списка. **Соответствующие файлы, таким образом, физически не удаляются.**

8.5 Отправка изображений пациента в архив изображений

Отправка изображений возможна во все возможные источники данных. Серия или обследования из источника данных также могут быть отправлены отдельно в архив. Для того чтобы отправить одиночное обследование, выберите обследование в правой части, а затем нажмите кнопку «Отправить обследование в архив изображений» рядом с древовидной структурой. Для того чтобы отправить конкретную серию, выберите серию и нажмите на кнопку «Отправить серию в архив изображений».

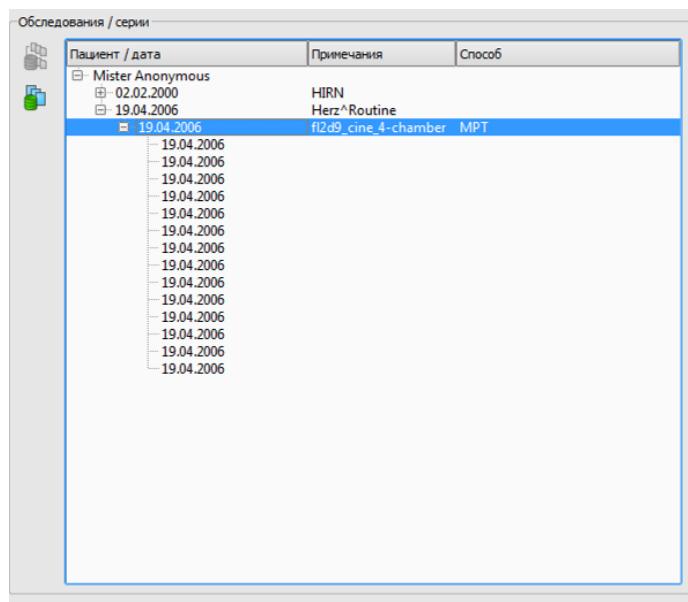


Перед отправкой в архив может быть необходимым присвоение ID пациента. Смотрите в главе 8.6 Управление данными пациентов.

Если настроено и активировано множество архивов (PACS серверов), то целевой архив должен быть выбран в диалоговом окне. Все изображения активных пациентов (все обследования и серии) будут отправлены в целевой архив. При необходимости, список пациентов (источник данных архива изображений) должен быть обновлен, для того, чтобы все изменения вступили в силу.

8.6 Управление данными пациентов перед отправкой в архив

Для этого выберите в диалоговом окне пациента (ов). Если не хотите импортировать всех изображений данного пациента, то можно также открыть дерево любого пациента и выбрать в нем только некоторые обследования и серии. В правой части диалогового окна можно настроить данные пациента и его отдельные обследования. В левой части таблицы (в полях выделенных серым цветом) показываются актуальные данные выбранного пациента, либо обследования или серии (в полях выделенных синим цветом). В правой части их можно соответствующим образом настроить. В нижней части можно увеличивать или уменьшать пиктограммы изображений. Рядом находятся две кнопки, служащие для того, чтобы показывать и прятать целое дерево.

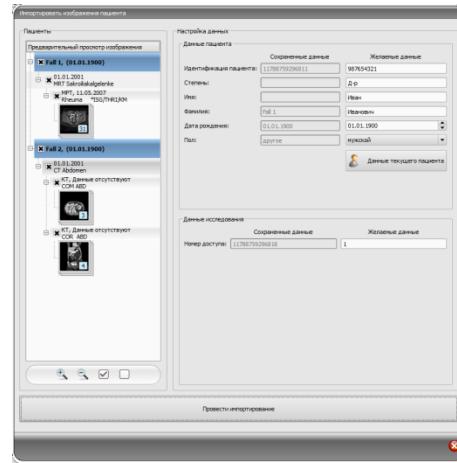

После настройки всех данных нажмите на кнопку «Выполнить импорт» для того, чтобы передать изображение выбранного пациента (ов) в архив. Если вы хотели бы применять данные уже открытых пациентов, которые были направлены через GDT, пожалуйста, выберите кнопку «Данные текущего пациента».

Внимание: Если в программе открыто несколько пациентов, то после нажатия кнопки «Данные актуального пациента» будут всегда применяться данные первого пациента.

8.7 Список обследований, серий и изображений

Параллельно списку пациентов отображаются обследования выбранного пациента или пациентов. Обследования, серии и изображения представлены в виде древовидной структуры. Запись, замечания и модальности серий показываются каждый раз. Многие пациенты могут быть выбраны одновременно – в древовидной структуре в узлах выше – информация о пациенте, а ниже – его обследования.

8.8 Выход из менеджмента пациентов

Выбор пациента делается щелчком по необходимой строке в таблице. Пациент выбирается двойным щелчком в таблице или с помощью кнопки «Выбрать» и будет показан в браузере изображений.. Кроме того, в таблице возможен множественный выбор пациентов для одновременной работы с ними.

Двойным щелчком в списке обследований открывается только выбранное обследование. Пациенты также могут быть добавлены в текущий выбор пациента с помощью кнопки «Добавить выбор».



При нажатии «Добавить выбор» диалоговое окно не будет закрыто, если зажать клавишу Shift. Пациент добавляется, а диалоговое окно остается открытым. Таким образом, может быть найдено и выбрано множество пациентов.

Кроме того, следующие кнопки могут быть использованы для того, чтобы получить доступ непосредственно к другому компоненту после разметки пациента:

К списку задач → Вызывает менеджмент задач

Аквизиция изображения → Открывает активизацию изображения (кнопка доступна только в случае, если модуль аквизиции является активным)

Создание задачи → Создание новой задачи в менеджменте задачи (возможно только для одного выбора)

Создание CD пациента → Запись CD пациента (можно выбрать множество пациентов)

8.9 Функция удаление

8.9.1 Удаление изображений


Если от администратора системы был получен доступ к функции удаления, то изображения можно удалять из архива.



Перед началом данной операции убедитесь в том, что у Вас самая свежая резервная копия данных. После удачного проведения операции по удалению необходимо обновить резервную копию, чтобы там также были введены соответствующие изменения.

Функция удаление применяется к серии изображений, целого обследования или полного пациента. Это значит, что нельзя удалить одиночные изображения, а только всю серию. Обычно любое изображение является своей собственной серией. В случае ряда изображений (TK или MR) все изображения входят в серию. Чрезвычайно редко бывает так, что в серии находится несоответствующее изображение. В этом случае необходимо обратиться за помощью к администратору системы.

Загрузите несоответствующее изображение или изображение неправильной серии либо обследование во вьювере и нажмите на инструмент функции «Удаление». Текущий пациент будет обновлен и будет вызвано диалоговое окно удаления изображений.

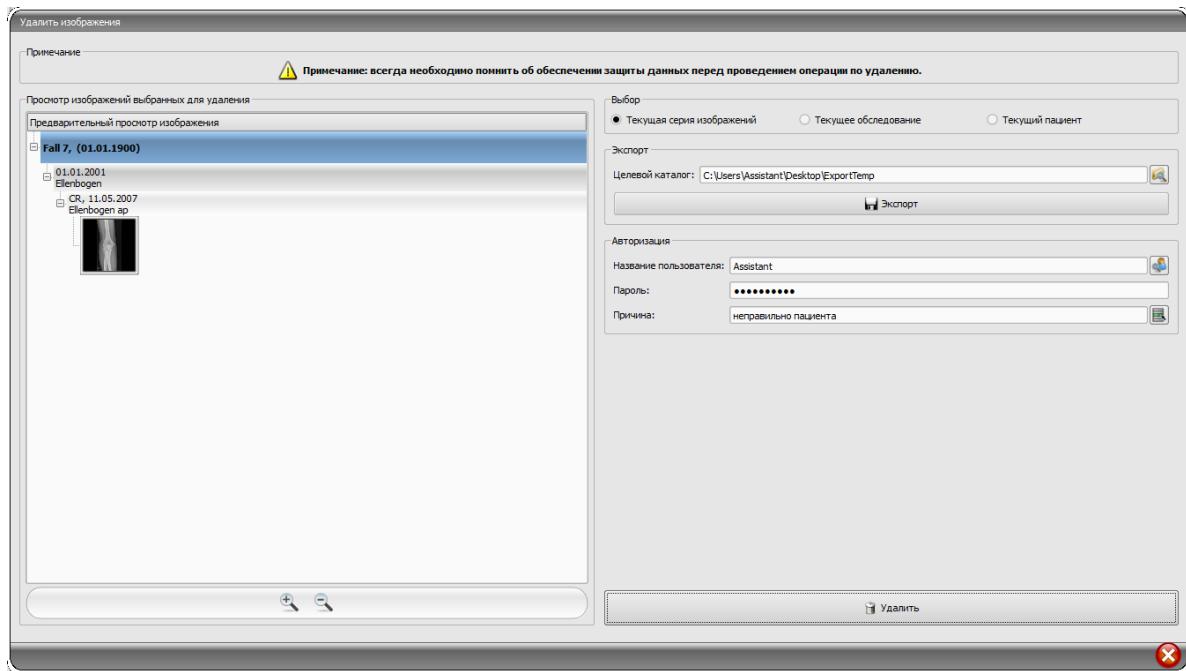

Затем выберите серию, обследование или же полного пациента для удаления.

Укажите соответствующее местонахождение каталога экспорта и экспортируйте в него изображения перед удалением.

Ведите название пользователя, пароль и укажите причину, по которой изображения должны быть удалены. Пароль Вы можете получить у администратора системы. Администратор должны предусмотреть необходимость введения пароля при запуске данной функции.

Нажмите на удаление для того, чтобы начать процесс. Изображения удаляются из архива.



Если Вы забыли провести экспорт изображений перед удалением: Все изображения защищены от запуска процесса удаления. Обратитесь к заведующему системой, который поможет вернуть удаленные изображения применив резервную копию.

8.9.2 Изменение присвоения изображений

Изменение присвоения изображений пациенту может являться необходимым в том случае, если они были ошибочно присвоены другому пациенту в ходе их аквизиции, напр., если ранее обрабатываемый пациент оставался активным в системе. Данные изображения должны быть затем присвоены соответствующему пациенту. Для этого необходимо сначала экспорттировать из архива неправильно присвоенные изображения, затем удалить их из архива, и путем повторного импорта присвоить их соответствующему пациенту.

Для присвоения неправильно присвоенных изображений соответствующему пациенту, необходимо предпринять следующие действия:

Сначала создайте каталог, в который будут экспортированы изображения перед их удалением (напр, на рабочем столе «ExportTemp»). Выберите желаемого пациента (из соответствующего архива изображений). Удалить изображения согласно инструкции, представленной в разделе 8.9.1 Удаление изображений, осуществляя предварительный экспорт изображений в созданный каталог.

Теперь необходимо присвоить экспортированные изображения соответствующему пациенту. С этой целью откройте желаемого пациента обычным образом в системе менеджмента клиники, выберите пациента непосредственно из менеджмента пациентов digipaX или же создайте его вручную (см. раздел 8.3). Если пациент уже выбран, вернитесь к менеджменту пациентов digipaX, а в нем к закладке Одиночные файлы и экспортируйте изображения. Данная процедура уже была описана в разделе 8.2.2. Если изображения уже скачаны, проделайте шаги «Отправка изображений пациента в архив изображений» из раздела 8.5 и «Управление данными пациентов перед отправкой в архив» 8.6.

9 Импорт данных

9.1 Общее


В компоненте импорта активному пациенту могут быть отсканированы как пикельная графика из файлов изображений так и изображения (с помощью интерфейса TWAIN). Переключатели сканирования доступны только в том случае, если был запущен соответствующий модуль.



Импорт изображений с помощью интерфейса TWAIN не предусматривает импорта рентгенодиагностических изображений. Предусмотренная цель применения ограничена до импорта изображений и документов, которые затем могут быть предоставлены пациенту в формате DICOM, и будут одновременно доступны вместе с другими графическими данными пациента.

С помощью интерфейса TWAIN можно импортировать цветные изображения с 32-битной глубиной цвета, изображения в шкале оттенков серого цвета с 8-битной глубиной цвета (256 тонов серого цвета), а также черно-белые изображения (бинарные изображения 1 бит на пиксель).

9.2 Диалоговое окно импорта

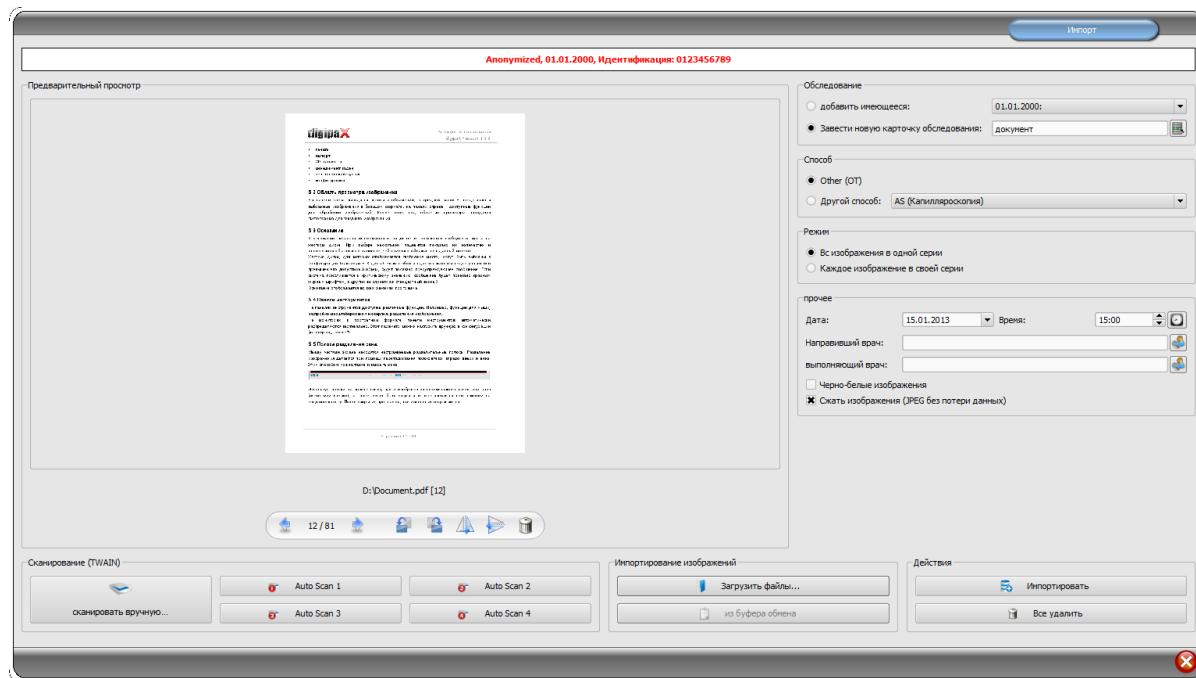

Убедитесь, что выбран только один пациент. Имя текущего пациента отображается в заголовке окна.

Для импорта из файлов нажмите «Открыть файлы...». Выбранные изображения будут добавлены в список импорта. Для сканирования нажмите «Сканировать...». Найденные изображения будут добавлены в список импорта.

Список импорта отображается слева. Для работы с изображениями используется панель кнопок снизу. Изображения можно вращать, зеркально отображать и удалять. С помощью кнопки «из буфера обмена» в список можно добавлять изображения из других программ редактирующих изображения, путем копирования их в буфер обмена. Список импорта можно очистить кнопкой «Удалить всё».

Настройки импорта выбираются в правой панели. Что бы добавить изображения в новое обследование нажмите «Назначить новое обследование» и введите описание обследования. Что бы добавить изображения в существующее обследование нажмите «Добавить к существующим» и выберите нужное обследование из выпадающего списка. Выберите тип изображения с помощью переключателя «Модальность». Обычно используется «ОТ», но можете также выбрать другой метод, соответствующий открытым изображениям.

С помощью переключателя «Режим» выберите нужно ли добавлять все изображения в одну серию или для каждого изображения создавать отдельную серию. Рекомендуется добавлять все изображения в одну серию.

Под «Прочее» можно настроить дату и время создания DICOM файла и указать лечащего и исполняющего врача, если касается создания нового исследования.

Так же можно указать, что изображения должны быть сохранены как полутоновые.

Чтобы сэкономить память в архиве и переносить изображения быстрее, импортированные изображения могут быть сжаты методом сжатия без потерь. Для этого активируйте опцию «Сжать изображения».

Для выполнения импорта нажмите кнопку «Импорт» на нижней панели. Изображения будут сохранены как DICOM файлы (соответственно опциям) в архив изображений. Успешно импортированные изображения исчезнут из списка импорта.

При импортировании создаются 8-битовые DICOM изображения. Из изображений в 16-битовом формате (DICOM, TIF) при импорте создаются 16-битовые DICOM изображения.



После того как изображения будут импортированы, их нельзя будет редактировать или удалять. Для редактирования или удаления изображений из архива нужно обратиться к администратору.


В зависимости от настроек системы, после импорта может быть создан GDT файл. Он может быть загружен в систему управления клиники и привязан к карточке пациента.

9.3 Сканирование документов

Доступны следующие опции: «сканировать вручную...» и автоматическое сканирование, Вы активируете диалоговое окно сканера и можете вручную настроить разрешение и цвет и т.п. перед каждым сканированием. Данное диалоговое окно не является составным элементом программного обеспечения digipaX, однако, является составным элементом программного обеспечения сканера. Для получения точной информации необходимо ознакомиться с документацией сканера. Если установлено несколько устройств с интерфейсами TWAIN или данное устройство оборудовано несколькими интерфейсами TWAIN, тогда можно выбрать соответствующее устройство или интерфейс, придерживая нажатую кнопку переключения (Shift) и щелкая одновременно по кнопке «сканировать вручную...».

Кроме того, в Вашем распоряжении находятся еще четыре кнопки, которые можно запрограммировать соответствующим образом. После настройки кнопок данные параметры будут автоматически передаваться сканеру в процессе распечатки, а документы будут автоматически распечатываться с учетом данных настроек. Для этого необходимо всего лишь раз вручную настроить желаемые параметры, такие как: цвет, разрешение и т.п.


Для того, чтобы провести настройку параметров кнопки автоматического сканирования необходимо одновременно нажать на данную кнопку и на кнопку переключения (Shift). Затем ввести описание данной кнопки и настроить желаемые параметры. Может случиться, что Ваше устройство не обслуживает всех функций и некоторые параметры будут недоступны. В случае использования нескольких устройств, необходимо выбрать, согласно вышеприведенному описанию, с помощью кнопки «Ручное сканирование» устройство, к

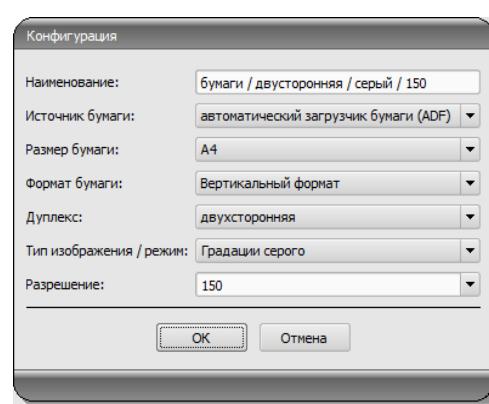

которому будут применяться кнопки автоматического сканирования. Всегда запускается тот сканер, который был выбран в данной карте настроек последним.

10 Экспорт

Опция экспорта позволяет экспорттировать из программы изображения или целые серии, или высылать их в виде электронной почты. Изображения могут экспорттироваться в форме графических файлов JPEG или в формате DICOM.

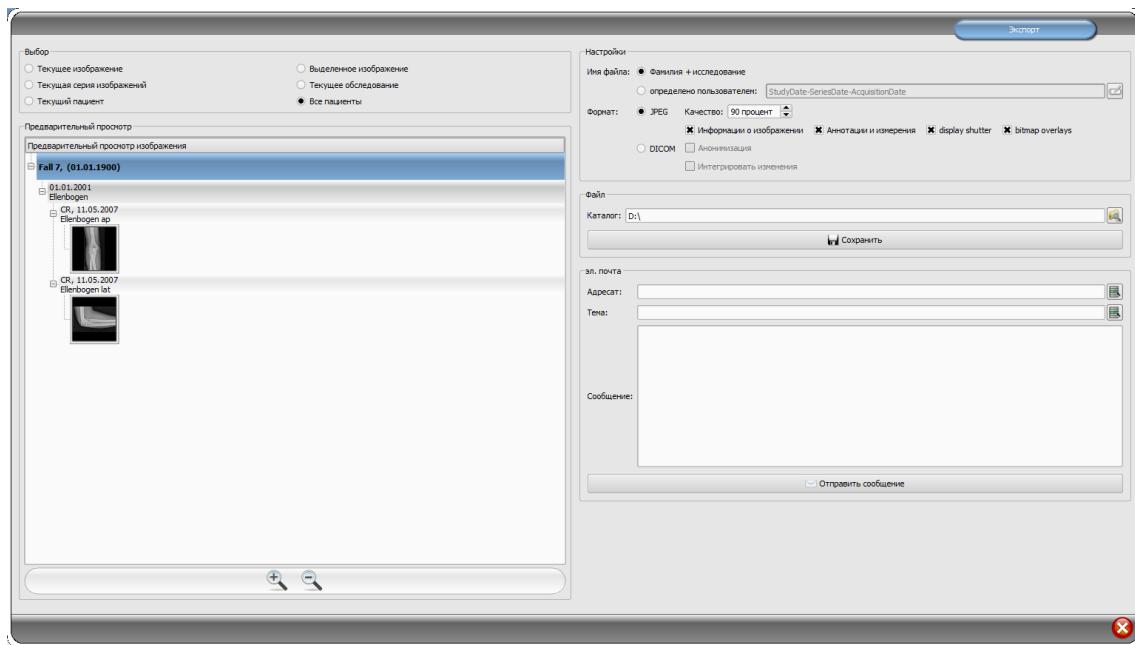

10.1 Выбор

Вначале следует выбрать пациента или пациентов, снимки которых необходимо экспорттировать, а затем включить опцию экспорта. В левой части диалогового окна можно выбрать изображения для отправки. В предварительном просмотре показываются выбранные изображения.

Если хотите выслать несколько отдельных снимков из разных обследований, то вначале их необходимо отметить галочкой (см. раздел 7.2.8 Пометка изображений) и выбрать их выбирая опцию «Помеченные снимки».


10.2 Настройки

10.2.1 Название файла для экспортата изображений

При опции «Фамилия + обследование» название файла создается автоматически по фамилии пациента и описании обследования с добавляемыми в порядке возрастания четырехзначными номерами (напр. Ковальский-Ян-Локоть-0001.jpg).

Чтобы выбрать другое название файла необходимо выбрать опцию «выбрано пользователем». Кнопкой «Редактирование» открываем диалоговое окно. Там можем ввести любой текст, или другую информацию о снимке (напр. дату аквизиции) в качестве названия файла.

Чтобы ввести любой текст его необходимо написать в полоске описания. Каждому экспортируемому снимку будет присвоено именно это название файла с дополнительным четырехзначным номером в возрастающем порядке на конце (напр. Снимок-0001.jpg).

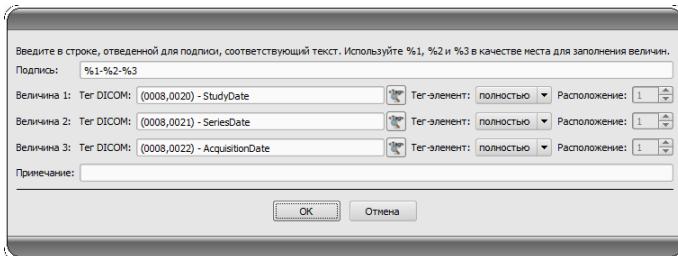

в качестве названия файла можно использовать максимально три параметра с информацией о снимке. В этом случае необходимо выбрать требуемые параметры из тегов DICOM. В полоске описания необходимо ввести %1 для значения 1, %2 для значения 2 и %3 для значения 3. В этом случае названия файлов будут создаваться автоматически согласно этой информации. При этом можно произвольно выбрать очередность. Если значения в полоске описания будут отделены тире, то в названии файла в этих же местах также появятся тире.

В системе MS Windows® запрещается использовать в названиях файлов следующие знаки \ / : * ? , " < > |.

10.2.2 Формат для экспорта снимков

10.2.2.1 Экспорт в формате JPEG

Снимки можно высыпать или в формате JPEG, или в виде изображения DICOM. Количество данных в случае изображений в формате JPEG может быть сокращено путем изменения качества. В этом случае изображения будут сжаты. Это может быть полезным при высылании изображений по электронной почте. Чем выше будет значение в процентах, тем лучше будет качество. Увеличивается также при этом размер файла. Необходимо обратить внимание на то, что серии, состоящие из большого количества снимков, записываются только в одном файле DICOM. Поэтому при экспорте отдельного снимка всегда экспортируется целая серия и соответственно образуется соответствующее количество отдельных снимков в формате JPEG. Кроме того, можно определить будет ли экспортироваться информация о снимке, аннотации и измерения, Display Shutter и растровые оверлеи.

10.2.2.2 Экспорт в виде файла DICOM

Вторая опция – это экспорт снимков в виде изображения DICOM. В этом случае изображения экспортируются в оригинале в виде файла DICOM, также как при CD пациента. И здесь так же можно анонимизировать данные пациента.

С помощью функции «Интегрировать изменения» в экспортируемых изображениях можно интегрировать повороты, обороты, оконный режим, фильтры и Display Shutter. В формате DICOM нельзя экспортировать аннотаций и измерений.

В ветеринарной версии доступна дополнительная опция «Ветеринарный стандарт DICOM». Внутренние данные пациента записываются в тегах DICOM предусмотренных согласно стандарту для этой цели. Это гарантирует совместимость с другими системами DICOM.

10.2.3 Экспорт в виде файла

Чтобы экспортировать изображения в виде файла, например, в память USB, необходимо непосредственно подать ссылку или направить в каталог назначения. Нажать «Сохранить» и изображения сохранятся в каталоге назначения согласно установленным опциям.

10.2.4 Экспорт в виде email

Изображения можно высылать непосредственно в программу электронной почты. Для этого необходимо установить и сконфигурировать соответствующую программу электронной почты на компьютере. Это могут быть такие программы как: Outlook, Outlook Express или Windows Mail и т.п. Если сообщения высылаются непосредственно через сайт, то вначале необходимо экспортировать изображения в виде файла согласно описанию в предыдущем пункте, а затем выслать по своей электронной почте.

При наличии соответствующей программы электронной почты можно воспользоваться предлагаемой здесь функцией.

В полоске «Адресат» ввести адрес email получателя, в полоске «Тема» указать тему сообщения и в текстовом поле написать сообщение.


Затем нажать «Отправить email». Открывается программа электронной почты и введенная информация вставляется автоматически. В приложении находятся соответствующие снимки. Информация, касающаяся адресата, темы и само сообщение можно также подать в программе электронной почты используя напр., имеющуюся адресную книгу и форматирование текста. Если вся информация и данные правильны, то можно выслать email.



Согласно законодательным положениям требуется кодировка сообщений, отправляемых по электронной почте, которые содержат данные о пациентах или их персональные данные. Именно поэтому, клиент электронной почты должен быть настроен таким образом, чтобы данные кодировались, и прочесть их мог только адресат. Существуют дополнения к клиентам электронной почты, которые позволяют кодировать сообщения

Бесплатным заменителем криптографического программного обеспечения является «The GNU Privacy Guard». Данное приложение можно получить на сайте <http://www.gnupg.org> и установить на свою машину. Установку и настройку должен проводить специалист.

11 Печать

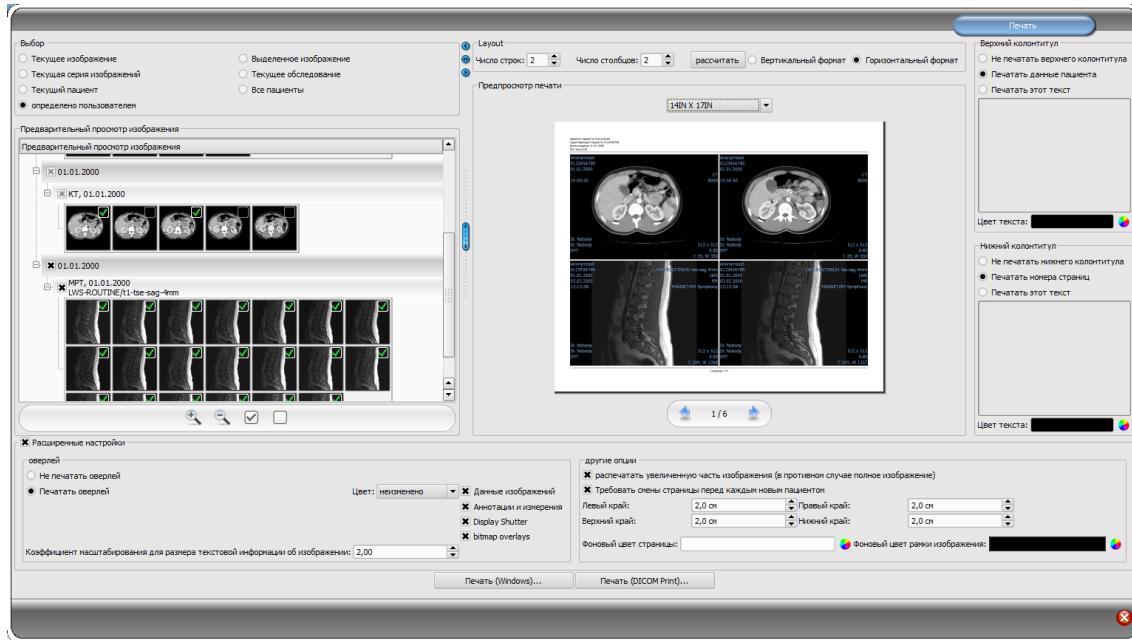

11.1 Выбор

На печать может быть послано одно изображение или сразу несколько. Это определяется в группе «Выбор».

Опция «выбранный пользователем» позволяет выбрать конкретные отдельные изображения, серии, обследования или пациентов. В случае многоклеточных серий, всегда распечатываются все клетки серии изображений.

11.2 Просмотр изображений

Если в группе «Выбор» был установлен режим «выбран пользователем», тогда в просмотре изображений можно выбрать изображения, которые будут распечатаны. Необходимо выбрать соответствующий узел

11.3 Макет страницы

Можно выбрать вертикальную или горизонтальную ориентацию страницы. Можно распечатать много изображений на одной странице. Количество рядов и колон можно установить в группе «Макет страницы» на максимальные 6Х6. Кнопка «расчетать» используется для автоматического расчета количества рядов и колон и для смены страниц в соответствии с выбранными изображениями в просмотре изображений.

11.4 Версия для печати

Все изменения, которые были введены в настройках, сразу же появляются в презентации изображения в версии для печати. Количество страниц постоянно обновляется. При помощи курсира, можно переходить между страницами. Все настройки будут

записываться и могут быть вновь использованы при следующем нажатии компонентов печати (также после перезапуска программы).

Различные виды могут еще преобразить в окна, увеличивать и уменьшать масштаб и перемещать. Изменения вступают в силу немедленно после печати.

Поддержка этих трех функций такая же, как и при просмотре изображений:

- правой кнопкой мыши: увеличить / уменьшить (с вертикальным движением мыши)
- средняя кнопка мыши или колесо мыши нажаты: вид окна
- левая кнопка мыши: перемещение увеличенного / уменьшенного изображения

В разворачиваемом меню можно выбрать размер бумаги или пленки, чтобы отобразить на просмотре перед печатью ожидаемый результат печати. Может случиться, что не все показываемые здесь форматы обслуживаются установленным принтером. Следует обратить внимание на то, что выполненные здесь настройки действуют только для просмотра перед печатью. Начиная печать, следует в диалоговом окне печати повторно выбрать соответствующий формат бумаги или пленки согласно предварительному выбору.

11.5 Заголовок

В верхней части страницы всегда будет печататься строка заголовка, если она активирована. Стока имеет фиксированный размер и шрифт, которые не могут быть изменены. Может быть напечатана как стандартная информация о пациенте с изображением, так и отдельный текст. Цвет текста можно выбрать.

11.6 Колонтитул

В нижней части страницы всегда будет печататься основание, если оно активировано. Основание имеет фиксированный размер и шрифт, которые не могут быть изменены. Можно печатать нумерацию страниц или самостоятельно определенный текст. Цвет текста также можно выбрать.

11.7 Расширенные настройки

11.7.1 Оверлей

Для печати можно выбрать также наложенные объекты. Из-за того, что наложение может быть плохо видно на снимке, дается возможность напечатать его черным, белым или без изменений. «Без изменений» означает, что наложения будут напечатаны таким образом, как это представлено на мониторе. Display Shutter всегда будет представлен в выбранном цвете (из меню конфигурации). Растворные оверлеи будут представлены в том же цвете, как на экране.

Как вариант, можно распечатать только увеличенный элемент изображения. В противном случае будет распечатано полное изображение.

Для того чтобы не перепутать распечатанные снимки, на каждом из них автоматически печатается базовая информация о пациенте.

С помощью коэффициента масштаба можно подобрать величину текста информации на изображении.

11.7.2 Другие опции

Дается возможность настраивать границы страницы, цвет фона или даже фоновую картинку страницы.

11.8 Печать

Кнопкой «Распечатать (Windows)...» печать выводится на принтер Windows.

Кнопкой «Распечатать (печать DICOM)...» печать выводится на настроенный DICOM принтер. Кнопка доступна только тогда, когда активирован модуль печати DICOM. В диалоговом окне выбирается желаемый принтер, размер пленки.

Прогресс приготовления и оправки данных печати показывает индикатор выполнения. Процесс печати можно отменить, нажав кнопку «Отмена».

12 CD пациента


12.1 Общее

В digipaX можно несколькими способами записать CD или DVD с данными пациента.

Обычно данные просто записывают на компакт-диск. Для этого можно использовать программу Nero фирмы Nero AG. Узнайте о возможности использовать эти программы у системного администратора. Если на рабочем компьютере нет возможности записывать диски, можно сбросить данные на флеш-носитель (флешка) или внешний диск и записать на другом компьютере.

Второй способ — воспользоваться специальной программой записи CD/DVD (Disk Producer). Программа поможет автоматически писать диски и печатать обложки. Для начала работы должен быть активирован модуль связи с программой записи. Это модуль работает только совместно с модулем «Печать этикеток на CD».

12.2 Выбор изображений

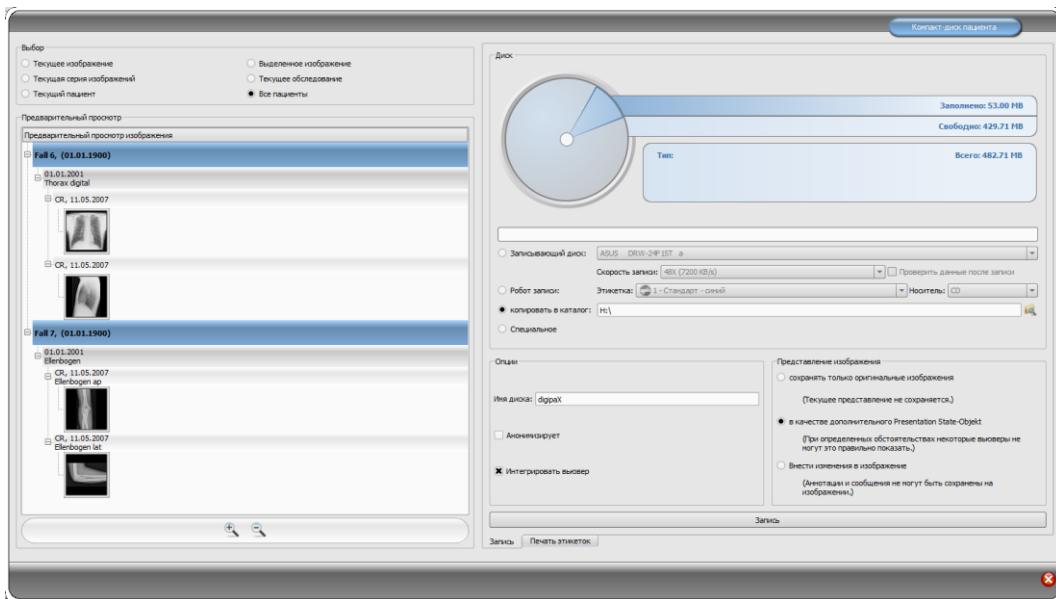

В группе «Выбор» можно выбрать изображения для записи на CD или DVD. Ниже показываются выбранные изображения. Они сгруппированы по пациентам, обследованиям и сериям.

12.3 Дисководы

В группе «Дисковод» можно выбрать с помощью какого дисковода будет осуществлена запись. Тут же отображается информация о носителе: тип диска (CD, DVD), сколько места доступно для записи, сколько места займут данные. Эти информации обновляются в ходе записи.

Можно выбрать скорость записи. Выбор зависит от типов дисковода и чистого диска. Если поставить птичку «Проверить данные после записи» — после записи программа проверит, что все данные правильночитываются с диска.

Если у Вас есть доступ к программе записи, то ее можно выбрать в данном месте. Дополнительно должна быть выбрана этикетка, которая будет наноситься на носитель данных, а также тип носителя данных. Готовые этикетки разработаны и расположены в закладке «Печать этикеток» и сразу же доступны для программы. В разделе 13 Печать этикеток описано каким образом можно создавать и редактировать собственные этикетки. Применение дубликаторов описано в разделе 12.6.

Если данные только копируются в целевую папку, тогда значение «Общее» указывает на общее свободное пространство в памяти соответствующего привода. Значение «Заполнено» указывает на пространство в памяти, которое занимают новые данные, а значение «Свободно» – доступное пространство в памяти, которое останется после завершения копирования данных. В данном случае не отображается тип.

12.4 Опции

Данные могут сохраняться как анонимизированные данные. Это значит, что данные будут выглядеть следующим образом:

- Фамилия: «Anonym» или «Anonym1», «Anonym2» и т.д. если несколько пациентов
- Дата рождения: 01.01.2000
- Пол: О (другие)
- ID: 0 или номер если несколько пациентов

В случае анонимизации будут удаляться следующие теги:

- Patients Address
- Patients Telephone Numbers
- Referring Physicians Name
- Referring Physicians Address
- Referring Physicians Telephone Numbers
- Referring Physician Identification Sequence
- Performing Physicians Name
- Performing Physician Identification Sequence
- Operators Name
- Operator Identification Sequence
- Requesting Physician
- Scheduled Performing Physicians Name
- Scheduled Performing Physician Identification Sequence
- Institution Name
- Institution Address
- Institution Code Sequence
- Institutional Department Name

По желанию на CD / DVD можно также записать браузер digipaX, чтобы после вставления CD в привод компьютера программа для просмотра сохраненных изображений могла открываться автоматически.

В группе «Воспроизведение изображения» можно выбрать одну из следующих опций, а именно:

1. Изначальные изображения

Изображения сохраняются в таком виде, в каком они попали в архив. Это значит в таком виде, в котором они были изначально созданы единицей, получившей изображения.

2. Дополнительный объект Presentation State

К каждому изначальному изображению каждого полутонового изображения дополнительно добавляется файл DICOM (Grayscale Softcopy Presentation State), который содержит информацию относительно увеличения, настроек окна, вращения, зеркального отражения, оборачивания, графических примечаний и Display Shutter. Не каждый браузер DICOM умеет правильно расшифровывать данного рода информацию. Воспользуйтесь данной опцией, если браузер также был сохранен на CD, или если Вы знаете, что адресат CD пользуется

программным обеспечением, позволяющим правильно анализировать информацию в таком виде.

3. Объединить изменения изображения

К каждому изображению создается новое изображение и переносятся изменения изображения (настройка окна, вращение, зеркальное отражение, Display Shutter). Тип изображения устанавливается на «SECONDARY» и для нового изображения создается новая SOP Instance UID. Новосозданное изображение сохраняется и переносится на CD пациента.

Если такая возможность отсутствует, рекомендуется воспользоваться вариантом 2 с дополнительными файлами Presentation State.

Установленные фильтры:



При использовании опции «дополнительных состояний презентации» или «интегрирования изменений» записываются также установленные фильтры. Однако их не интерпретируют другие системы. Если фильтры должны показываться на CD пациента, то на CD должна быть записана программа просмотра digipaX, поскольку только она правильно использует настройки фильтров.

12.5 Запись/копирование данных

После нажатия на кнопку «Сохранить», данные собираются (сжатые данные разворачиваются и анонимизируются). Если опция записи активна, то данные сохраняются на CD / DVD, после чего диск выбрасывается компьютером. Если опция записи неактивна, то данные копируются в указанный целевой каталог. Индикатор прогресса отображает текущее состояние продвижения процесса.

12.6 Создание CD пациента с помощью дубликатора

12.6.1 EPSON PP-100 / PP-100N


12.6.1.1 Общее

Если данные для записи на CD/DVD диск уже собраны и если нажать на кнопку «Записать», то задача будет передана дубликатору. Дубликатор в состоянии принять несколько задач и самостоятельно их обработать. Задачи управляются с помощью программного обеспечения, которое поставляется изготовителями дубликаторов. Программное обеспечение необходимо предварительно установить и осуществить с его помощью соответствующие настройки. Затем необходимо соответствующим образом настроить систему digipaX, чтобы начать пользоваться устройством.

Поручите установку и настройку устройства заведующему системой digipaX и ознакомьтесь с соответствующей документацией изготовителя.

Перед созданием первой задачи устройство должно быть включено. В противном случае, задача будет прервана с ошибкой и не появится в списке задач «EPSON Total Disc Monitor».

12.6.1.2 Создание CD пациента

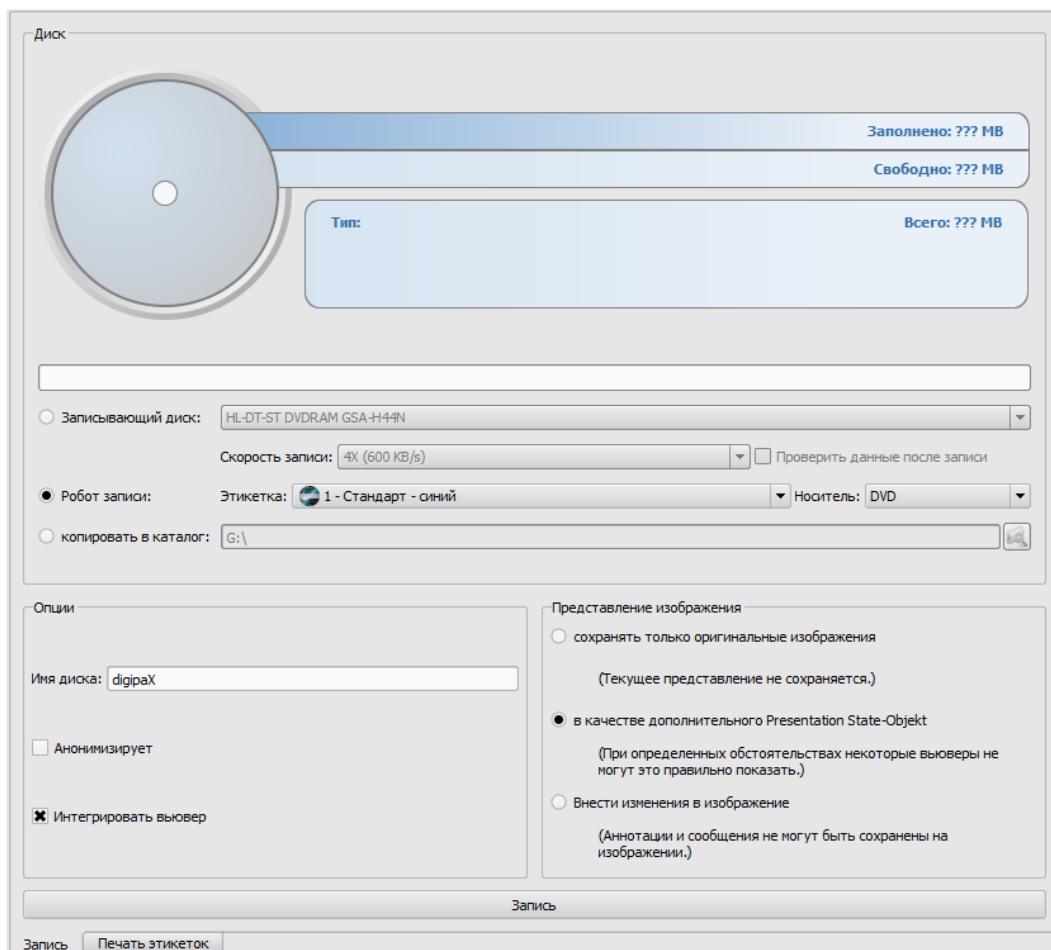

В диалоговом окне создания CD пациентов выберите опцию «Дубликатор». Этикетку, которая должна появиться на носителе, необходимо выбрать из выпадающего списка, аналогично с типом носителя.

Возможные этикетки разрабатываются в закладке «Распечатка этикеток», к которым сразу же после создания имеет доступ дубликатор.

Если все уже готово, тогда нажмите на кнопку «Записать». Данные собираются и передаются в дубликатор (то есть копируются в промежуточный каталог). При этом файлы выовера откладывются в каталоге «SharedData» и будут повторно применяться, благодаря этому пропадает необходимость многоразового их копирования.

Указание:

Для обеспечения правильной разработки задачи, digipaX ожидает обработки файлов задачи. Обработка файлов задачи программным обеспечением EPSON всегда осуществляется поочередно, а не параллельно. В итоге, в случае одновременного создания задач записи на нескольких станциях или же быстрого генерирования задач одна за другой, проверочная процедура может близиться немножко дольше. Хотя это и

редкость, однако в таком случае время ожидания может составить до 60 секунд (в зависимости от размера задачи и мощности компьютера).

12.6.1.3 Менеджмент задач

Приложения «EPSON Total Disc Monitor» или «Total Disc Net Administrator» дают возможность просматривать список задач. С их помощью можно останавливать, удалять и изменять очередность (только Disc Monitor) задач. «Net Administrator» доступен только для устройства типа PP-100N, однако, можно его использовать на всех станциях.

12.6.1.4 Удаление данных

В определенном промежуточном каталоге сохранены как файлы задач так и данные, которые должны быть записаны на CD или DVD. Программное обеспечение digipaX образовывает в нем каталог «SharedData», куда автоматически откладываются необходимые вышеру файлы. В случае необходимости данный каталог можно удалить вручную, к примеру, для того, чтобы удалить старые версии вышера. Требуемые файлы повторно переносятся в ходе следующего применения.

Файлы DICOM задач записи удаляются автоматически. Проверка осуществляется при запуске станции digipaX. При этом удаляются каталоги данных старше 2 часов. Это такой же период времени, который применяется системой EPSON для удаления старых файлов задач из данного каталога.

12.6.2 PRIMERA Disc Publisher


12.6.2.1 Общее

Если данные для записи на CD/DVD диск уже собраны и если нажать на кнопку «Запись», то задача будет передана дубликатору. Дубликатор в состоянии принять несколько задач и самостоятельно их обработать. Задачи управляются с помощью программного обеспечения, которое поставляется изготовителями дубликаторов. Программное обеспечение необходимо предварительно установить и осуществить с его помощью соответствующие настройки. Затем необходимо соответствующим образом настроить систему digipaX, чтобы начать пользоваться устройством.

Поручите установку и настройку устройства заведующему системой digipaX и ознакомьтесь с соответствующей документацией изготовителя.

Перед созданием первой задачи устройство должно быть включено. В противном случае, задача будет прервана с ошибкой.

12.6.2.2 Создание CD пациента

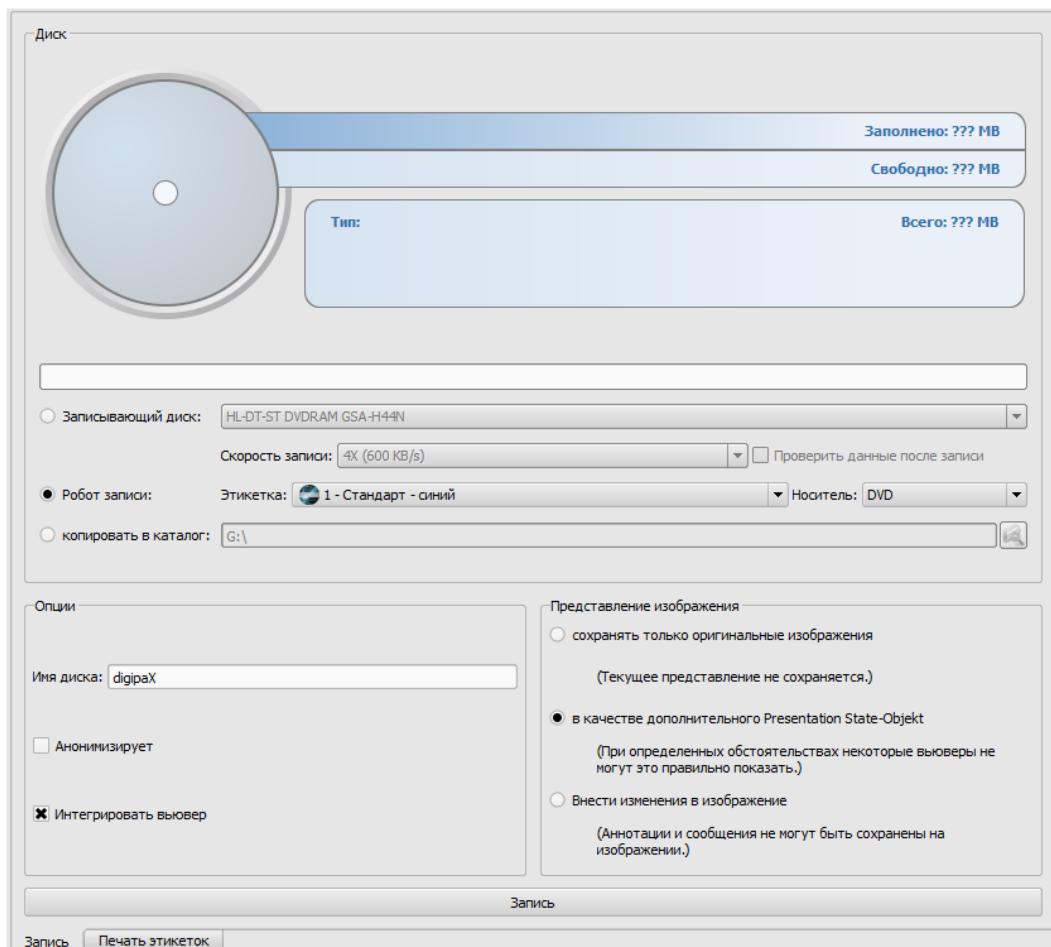

В диалоговом окне создания CD пациентов выберите опцию «Дубликатор». Этикетку, которая должна появиться на носителе, необходимо выбрать из выпадающего списка, аналогично с типом носителя.

Возможные этикетки разрабатываются в закладке «Распечатка этикеток», к которым сразу же после создания имеет доступ дубликатор.

Если все уже готово, тогда нажмите на кнопку «Записать». Данные собираются и передаются в дубликатор (то есть копируются в промежуточный каталог). При этом файлы выьюера откладываются в каталоге «SharedData» и будут повторно применяться, благодаря этому пропадает необходимость многоразового их копирования.

Указание:

Для обеспечения правильной разработки задачи, digipaX ожидает обработки файлов задачи. Обработка файлов задачи программным обеспечением PRIMERA всегда осуществляется поочередно, а не параллельно. В итоге, в случае одновременного создания задач записи на нескольких станциях или же быстрого генерирования задач одна за другой, проверочная процедура может близиться немножко дольше. Хотя это и редкость, однако в таком случае время ожидания может составить до 60 секунд (в зависимости от размера задачи и мощности компьютера).

12.6.2.3 Удаление данных

В определенном промежуточном каталоге сохранены как файлы задач так и данные, которые должны быть записаны на CD или DVD. Программное обеспечение digipaX образовывает в нем каталог «SharedData», куда автоматически откладываются необходимые вышеверу файлы. В случае необходимости данный каталог можно удалить вручную, к примеру, для того, чтобы удалить старые версии вышевера. Требуемые файлы повторно переносятся в ходе следующего применения.

Файлы DICOM задач записи удаляются автоматически. Проверка осуществляется при запуске станции digipaX. При этом удаляются каталоги данных старше 2 часов.

12.7 Функция «Специальное»

Данная дополнительная функция позволяет передавать данные для CD пациента во внешнюю программу для последующей обработки. К примеру, такими внешними программами могут быть специальные информационные носители или приводы.

Данная функция является доступной исключительно в том случае, если администратор ее активировал и задал соответствующую конфигурацию. Название «Специальное» может быть изменено администратором.

Обратитесь к администратору Вашей системы для получения детальной информации о работе данной функции.

13 Печать этикеток



Печать этикеток является возможной только после активации соответствующего модуля.

13.1 Общее

С помощью инструмента «Печать этикеток» можно напечатать на CD/DVD пациентов следующие данные: фамилию пациента, дату рождения, ID пациента и т.п. Вышеупомянутые данные автоматическичитываются с изображений (Заголовок DICOM), и совершенно нет необходимости вводить их вручную. В данном случае программа руководствуется инструкциями DRG (Немецкого Общества Рентгенографии), содержащимися в «Каталоге требований DRG к носителям информации пациентов» <http://www.dicom-cd.de/specs.php.de>.

В Вашем распоряжении находятся разные шаблоны. Готовые шаблоны могут изменяться, а также можно создавать новые собственные шаблоны.

Переход к модулю происходит после нажатия кнопки «CD пациента» и выбора закладки «Печать этикеток».

13.2 Принтеры и носители информации

Необходимо иметь в распоряжении специальный принтер, который может наносить печать непосредственно на CD диски, к примеру, Canon PIXMA. Такие принтеры можно свободно найти в торговых предложениях многих изготовителей компьютерной техники. Специальные рекомендации относительно модели принтера отсутствуют. Единственным условием является совместимость принтера с операционной системой Windows. Должен быть установлен соответствующий операционной системе драйвер принтера. Нет необходимости в установке дополнительного программного обеспечения. Носители информации, на которые будет наноситься печать, также можно найти в торговых предложениях многих изготовителей. Для печати можно использовать как CD так и DVD диски. Рекомендуется руководствоваться каталогом требований DRG, в котором в данный момент еще не содержится информация относительно официальных обслуживаемых DVD.

digipaX не предусмотрены специальные рекомендации относительно носителей информации. Может возникнуть ситуация, в которой все носители совместимы с данной моделью принтера. Чтобы получить детальную информацию по вышеупомянутому вопросу необходимо ознакомится с документацией принтера. Модуль «Печать этикеток» предусмотрен только для CD/DVD дисков, предусмотренным для непосредственной накатки. Система не предусмотрена для распечатки самоклеящихся этикеток.


13.3 Выбор шаблона и распечатка

Условием является правильно установленные драйвера для принтера и безошибочная работа самого устройства. Приведенные примеры распечаток были осуществлены с помощью принтера Canon PIXMA iP4000.

В ходе инсталляции digipaX устанавливаются разные шаблоны для CD дисков с изображениями одного пациента, а также для CD с изображениями большего количества пациентов.

Выберите пациента и щелкните по CD пациента. По умолчанию сначала на CD пациента осуществляется запись желаемых изображений и настроек. Затем происходит переход к доступным в закладке «Печать этикеток» функций нанесения печати на данный носитель информации.

Щелкая мышью по левому и правому краю миниатюр можно осуществлять просмотр галереи шаблонов. Шаблоны расположены в алфавитном порядке. Названия расположены внизу.

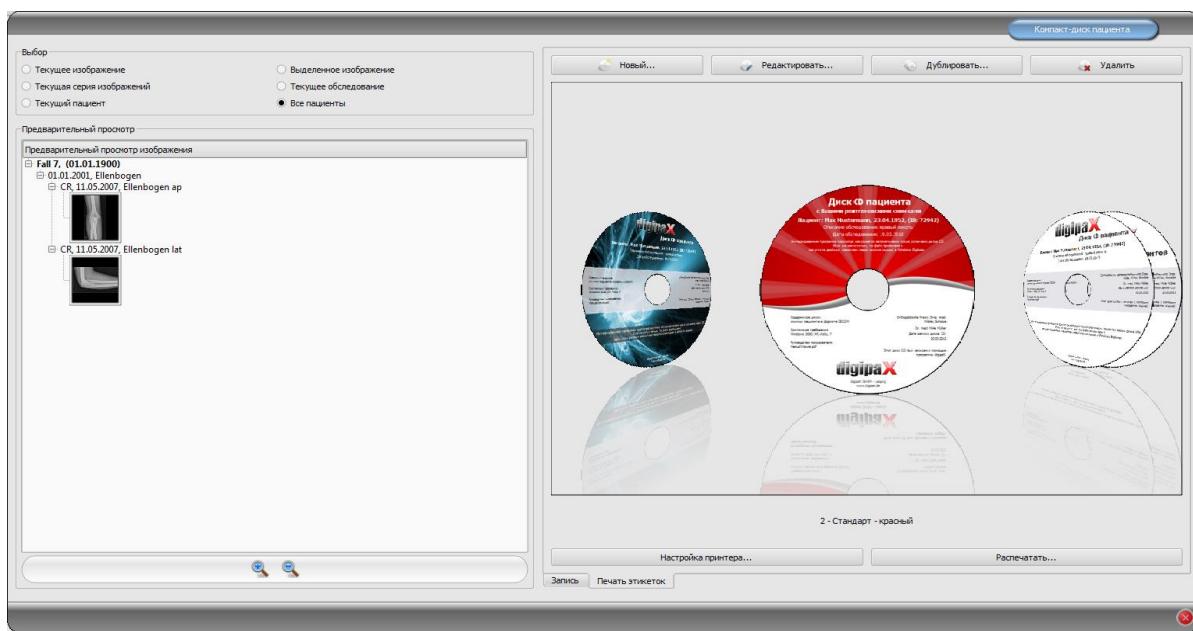

Выберите желаемый шаблон и щелкните по «Распечатать».

После нажатия откроется диалоговое окно выбора принтера. Затем осуществите выбор соответствующего принтера, посредством диалога настроек активируйте режим просмотра и продолжайте процесс путем нажатия на «Распечатать».

В следующем диалоговом окне отображается просмотр носителя информации. Именно здесь видно как данные пациента автоматическичитываются с изображений и применяются. Просмотр может отображаться по-разному в зависимости от модели принтера.




После нажатия на «Начать печать» на носитель информации наносится информация.

13.4 Настройки принтера

В данном разделе определяется размер и позиция носителя информации.

Размер этикетки соответствует размеру носителя информации. Стандартный внешний диаметр поверхности CD с накаткой составляет 118 или 119 мм. Внешние диаметры без нанесенной печати имеют разные размеры. Параметры должны быть настроены в соответствии с изготовителем и версией носителя.

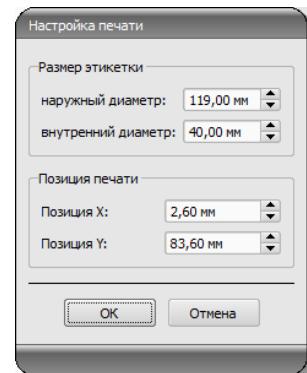

Позиция наката зависит от модели принтера и должна настраиваться только раз, чтобы принтер в ходе накатки тщательно наносила печать на носитель информации. Изменяя параметры, распечатываемое изображение можно перемещать налево/направо (позиция X) и вверх/вниз (позиция Y). С помощью просмотра можно переместить распечатываемое изображение на выбранное место с точностью до миллиметра.

**Примерная характеристика:**

Модель принтера	Позиция X	Позиция Y
<i>Canon PIXMA iP4000</i>	<i>2,60 mm</i>	<i>83,60 mm</i>
<i>Canon PIXMA MG5250</i>	<i>2,60 mm</i>	<i>87,50 mm</i>
<i>Canon PIXMA iP4850</i>	<i>2,80 mm</i>	<i>87,50 mm</i>
<i>Canon PIXMA iP4950</i>	<i>2,60 mm</i>	<i>87,50 mm</i>
<i>Canon PIXMA iP7250</i>	<i>1,60 mm</i>	<i>57,50 mm</i>

13.5 Создание шаблона

Нажатием «Новый» открывается новый пустой шаблон накатки. Сначала в верхней строке необходимо ввести название нового шаблона распечатки.

Можно менять фоновый рисунок, вставлять изображения или символы, текстовые поля, прямоугольники и линии.



13.5.1 Вставка, редактирование и удаление элементов

Этикетки могут содержать разные графические элементы. Размещение и позиционирование всегда осуществляются с помощью мыши. Справа от диалога всегда отображается страница со свойствами активного элемента. Изменения настроек сразу же отображаются на изображении. Щелкнув левой кнопкой мыши по выбранному элементу, данный элемент активируется.

Фоновый рисунок:

В виде фонового рисунка можно применить любую графику. Рекомендуется применять графику в формате «png», размер которой составляет минимум 500 x 500 пикселей.

Для создания собственных фоновых рисунков можно воспользоваться шаблоном Photoshop CD-Template.psd из папки «Печать этикеток», расположенной в инсталляционном каталоге.

Нажмите на «Искать файл» и укажите месторасположение желаемой графики. Выбранный фоновый рисунок будет автоматически вставлен в шаблон.

С помощью кнопки «Удалить фон» можно удалить данную графику. После удаления фонового рисунка фон становится белым.

Вставить текстовое поле:

Нажмите на «Вставить текстовое поле». Затем щелкните кнопкой мыши по любому месту в шаблоне и перетащите текстовое поле желаемых формы и размера. С помощью мыши можно также перемещать объект в любом направлении. Функции текстовых полей детально описаны в дальнейшей части инструкции, в пункте 10.5.2 Редактирование текстовых полей.

С помощью страницы со свойствами можно подобрать позицию и размер с точностью до миллиметра.

Позиция слева:	2,3 мм	Позиция справа:	47,2 мм
Позиция сверху:	54,7 мм	Позиция снизу:	66,9 мм

Вставить изображение:

Как и в случае фона, можно вставить любое изображение. Нажмите на «Вставить изображение» и укажите месторасположение желаемой графики. С помощью выбора опции «Открыть» графика будет применена. С помощью мыши можно перемещать объект в любом направлении и подбирать соответствующий размер.

Вставить прямоугольник:

Вставление прямоугольника осуществляется аналогично вставлению текстового поля. Щелкните мышью по «Вставить прямоугольник» и перетащите прямоугольник с помощью мыши. С помощью мыши можно также перемещать прямоугольник в любом направлении и масштабировать.

Применяя элементы редактирования, можно изменять свойства прямоугольника. Таким образом можно подобрать цвет и толщину рамки, цвет заливки, прозрачность и закругление углов. Позицию и размер можно подбирать с точностью до миллиметра.

Цвет линии:			
Ширина черты линии:	0,2 мм		
Цвет заливки:			
Прозрачность:	50 %		
Округление X:	0,0		
Округление Y:	0,0		
Левая позиция:	29,5 мм	Правая позиция:	87,2 мм
Верхняя позиция:	18,4 мм	Нижняя позиция:	42,1 мм

Вставить линию:

Щелкните мышью по «Вставить линию» и перетащите линию на шаблон.

На странице со свойствами можно подобрать цвет и толщину линии, а также разместить ее с точностью до миллиметра.

Цвет линии:			
Ширина черты линии:	0,2 мм		
Точка 1 X:	1,4 мм	Точка 1 Y:	72,1 мм
Точка 2 X:	118,6 мм	Точка 2 Y:	70,7 мм

Удалить элементы:

Щелкните по элементу, который Вы хотели бы удалить и нажмите на кнопку «Удалить» для удаления выбранного элемента.

13.5.2 Редактирование текстовых полей


13.5.2.1 Функции

Описание

- служит только для ввода описания текстового поля, не печатается (можно только отображаться на редактируемом изображении)

Тип

- содержание CD (теги DICOM): содержание тегов автоматически переносится на поле в ходе накатки, свойства: см. пункт 10.5.2.2 Принцип и свойства содержания CD (тегов DICOM) в текстовом поле.
- актуальная дата: в текстовое поле вводится актуальная дата
- данные введенные пользователем в процессе накатки: запрос на ввод текста перед накаткой
- постоянный текст: в поле вводится постоянный текст

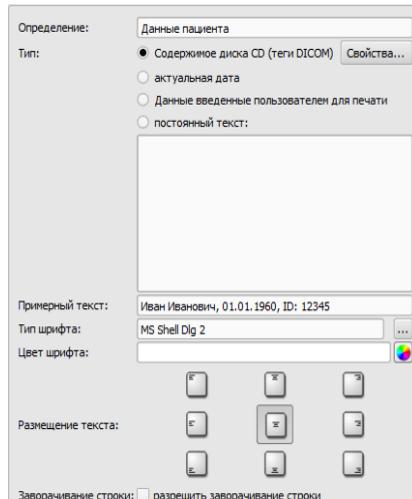

Пример текста:

- введите примерный текст, который будет отображаться в виде образца при просмотре этикетки

Виды и цвета шрифтов:

- подбор вида, цвета и размера шрифта

Расположение текста:

- расположение текста внутри текстового поля (напр., выравнивание по левому или по правому краю)

Перевод строки:

- когда данная опция включена, то осуществляется автоматический перевод строки в конце текстового поля, в противном случае текст, в зависимости от размещения, будет урезан спереди, сзади или по краям

13.5.2.2 Принцип и свойства содержания CD (тегов DICOM) в текстовом поле




В каждом изображении DICOM содержится информация относительно пациента, обследований и изображения. Вся вышеупомянутая информация содержится в так называемых тегах заголовка DICOM каждого изображения. Содержание тегов таких как, к примеру, фамилия пациента, обследование, учреждение отображаются в углах изображения. Теги DICOM пронумерованы (напр., тег «0010,0010» содержит фамилию пациента). Варианты отображения информации в заголовке описаны в разделе 7.2.7.2 Информация в заголовке (DICOM Dump).

В текстовом поле можно применить значения трех разных тегов. Если, к примеру, размещаются фамилия, дата рождения и ID пациента, то соответственно должны быть

загружены теги (0010,0010), (0010,0020) и(0010,0030). С этой целью необходимо настроить теги для значений от 1 до 3. Некоторые теги содержат большее количество элементов (напр., имя, фамилия и заглавие). Если необходимо, чтобы отображался только один определенный элемент, то можно настроить такую опцию в элементе тега. В строку подписи необходимо ввести текст, который будет отображаться. При этом %1, %2 и %3 исполняют функцию многозначных символов и заменяются фактическим содержанием тега.

Именно поэтому на нижеприведенном примере текстовое поле отображается следующим образом: Max Mustermann, 01.01.1960, ID: 12345

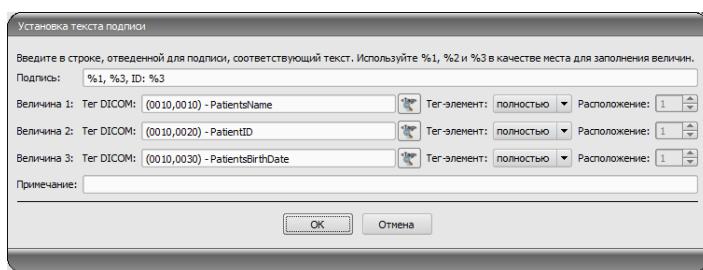

Можно создать списки значений большего количества изображений. Такая необходимость возникает, к примеру, в случае вывода фамилий всех пациентов, которые были сохранены на носителе информации. Для этого служит ключевое слово LIST в строке подписи:

LIST{<теги DICOM>|<делитель>}

Значение <тегов DICOM> в данном сопоставлении является аналогичным ранее описанной одиночной строке. <Делитель> вставляется всегда между одиночными данными. В данном случае необходимо применять:

- «nl» для перевод строки (new line)
- «tab» для табулятора
- любой другой символ, к примеру, точку с запятой или запятую.

Следуя вышеперечисленным указаниям строка будет выглядеть следующим образом:
LIST%1, %3, ID: %2|nl}.

13.6 Редактирование, копирование и удаление шаблонов

Для того, чтобы провести редактирование шаблона необходимо его найти, а затем нажать на «Редактировать». Редактирование осуществляется аналогично принципу создания шаблона.

С помощью кнопки «Сделать копию» можно создать копию шаблона. Копия содержит название оригинала с дополнением «Копия 1» в конце названия. Можно изменять копию и ее название. С помощью кнопки «Удалить» шаблон можно удалить шаблон из системы. Примечание: данное действие приводит к безвозвратной потере шаблона

Все шаблоны расположены в инсталляционном каталоге digipaX, в папке «Печать этикеток». Для каждого шаблона создан отдельный подкаталог с названием шаблона.

Для того, чтобы перенести шаблон на другую систему, необходимо копировать целую папку с шаблоном на данную систему.

13.7 Требования относительно данных на носителях информации

Рекомендуется руководствоваться инструкциями, находящимися в каталоге требований DRG к носителям информации пациентов. В разделе 2.4 каталога приведено детальное описание того, каким образом необходимо маркировать носители информации.

Источник:

<http://www.dicom-cd.de/docs/DRG-Anforderungskatalog-2006.pdf>

2.4 Маркировка носителя информации

2.4.1 Внешняя маркировка

Для маркировки и однозначной идентификации носителя информации необходимо создать ему внешнее описание, содержащее четкую информацию для заинтересованных лиц.

Указания: в случае применения программы записи CD/DVD, которые могут подписывать носители информации без участия пользователя, такого типа описание является обязательным. Системы, не имеющие возможности самостоятельно подписывать носители информации, должны осуществлять поддержку пользователя при создании правильной подписи носителя вручную, к примеру, отображая предлагаемое описание в диалоговом элементе, появляющемся на экране при выбросе носителя информации.

2.4.2 Содержание внешней маркировки (рекомендуемое)


Рекомендуется указывать на носителе фамилию и дату рождения па, ID пациента, дату создания носителя информации, а также дат обследований, находящихся на носителе и названия учреждения, где был создан носитель информации. В случае, если на одном носителе находятся данные нескольких пациентов, то рекомендуется указать на внешней части носителя соответствующее примечание. Кроме того, рекомендуется указать на внешней части носителя информации данные относительно вида содержащихся в нем материалов (DICOM, сеть, браузер DICOM и т.п.).

14 Управление задачами

ПОМНИТЕ!

Чтобы избежать ненужного рентгеновского обследования и ненужного облучения пациента, вы должны поинтересоваться, не делал ли он недавно рентгенографию.

При помощи менеджмента задач (DICOM-Worklist-Management) можно обмениваться задачами между разными системами DICOM. MPPS (Modality Performed Procedure Step) для использования статуса задач не обслуживается.

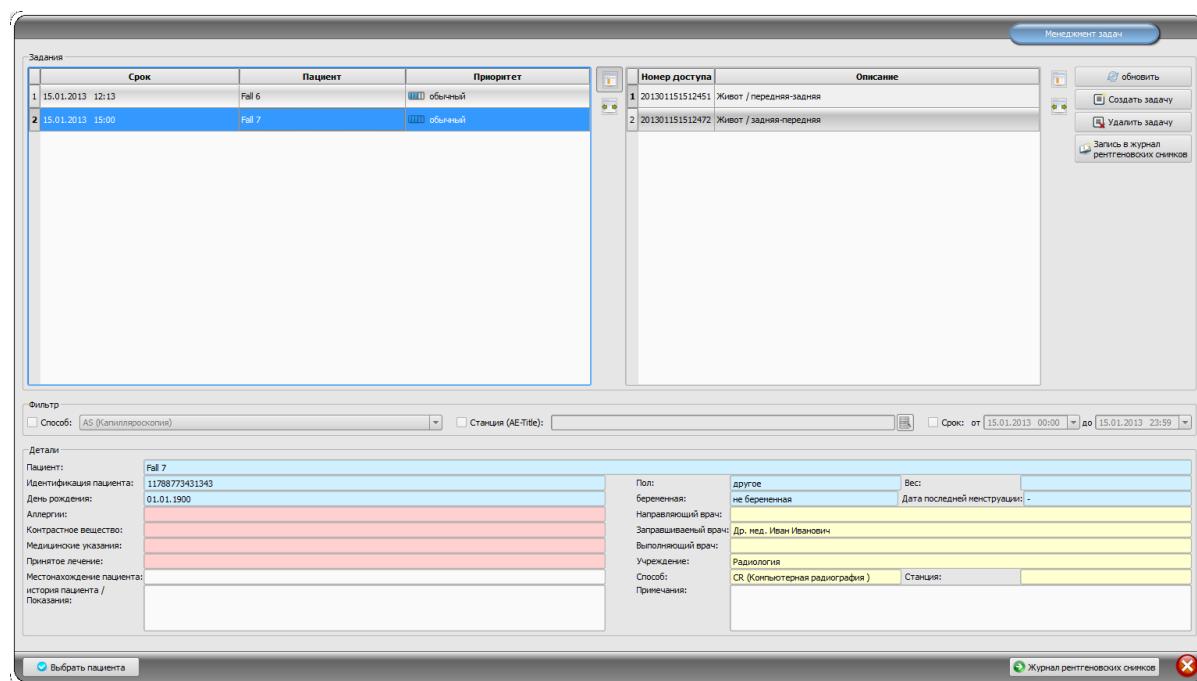

14.1 Статус беременности

Рентгеновское излучение составляет повышенную опасность для беременных. Беременные не должны подвергаться воздействию рентгеновских лучей, либо могут подвергаться только в ограниченной степени. Поэтому перед исследованием у пациентки следует спросить, беременна ли она. Когда система распознает, что исследование касается женщины в возрасте от 10 до 60 лет, то перед созданием задачи появится диалоговое окно с вопросом, касающимся статуса беременности. Выбранный в окне статус сохраняется в течение макс. 24 часов, или до следующего запуска программы digipaX, так чтобы на следующих этапах работы, как, аквизиция изображений или запись в рентгеновский журнал, не нужно было вновь спрашивать о статусе беременности. Если диалоговое окно будет закрыто без указания статуса беременности, система считает, что этот вопрос не был задан, или что не был получен ответ на этот вопрос, статус будет неизвестным и на следующих этапах работы вновь появится этот вопрос. Это диалоговое окно можно



открывать или закрывать отдельно для функции создания задачи, аквизиции изображения, или записи в рентгеновский журнал. Эти настройки описаны в главе 19. В закладках конфигурации Аквизиция изображения и Менеджмент задач можно всякий раз включить или выключить вопрос о статусе беременности.

Настройки для рентгеновского журнала определяет администратор системы.

14.2 Отображение задачи и обновление списка задач

Можно создать один или более списков задач и менять их цвет. Эти настройки производит администратор системы.

Списки будут обновляться через промежуток времени, который задается в настройках (категория «Менеджмента задач» – тоже доступна только для администраторов). В конфигурации можно отключить автоматическое обновление.

При использовании кнопки «Обновление», происходит обновление списка.

Слева отображается список всех пациентов, для которых существует хотя бы одна задача. Список сортируется по умолчанию согласно срокам, ближайший согласованный срок отображается на самой верхней позиции. Вид сортировки списка можно изменить, например, на сортировку согласно фамилии или приоритету. Чтобы изменить вид сортировки, следует нажать на заглавие соответствующей колонки. При выборе пациента из списка, все его проекты будут отображаться в правой части. Таким образом, каждая задача имеет свой уникальный номер.


Щелчком правой кнопки мыши на заголовки таблиц можно прятать или открывать столбцы.

14.3 Фильтрация списка задач

В качестве фильтра можно выбрать модальность (например, рентгеновский снимок, ультразвуковое обследование), название оборудования, на котором будет выполняться задача, или фиксированную дату, на которую запланировано обследование. Для этого активируйте поле выбора и введите желаемую модальность или желаемое имя станции или определите начальную и конечную дату. С помощью кнопки «Обновить» (вверху справа), обновится список с задачами, которые соответствуют настройке фильтра. Настройки сохраняются и применяются при следующем выборе списка задач. Необходимо помнить о том, что на станциях, использующих аквизицию изображений, список задач при выборе пациента фильтруется согласно настройкам в конфигурации. Списки могут отличаться в зависимости от критерииов фильтрации.

14.4 Создание задачи

Новая задача всегда создается для активного пациента, выбранного в данный момент в системе. Если выбрано несколько пациентов, создание задачи невозможно.

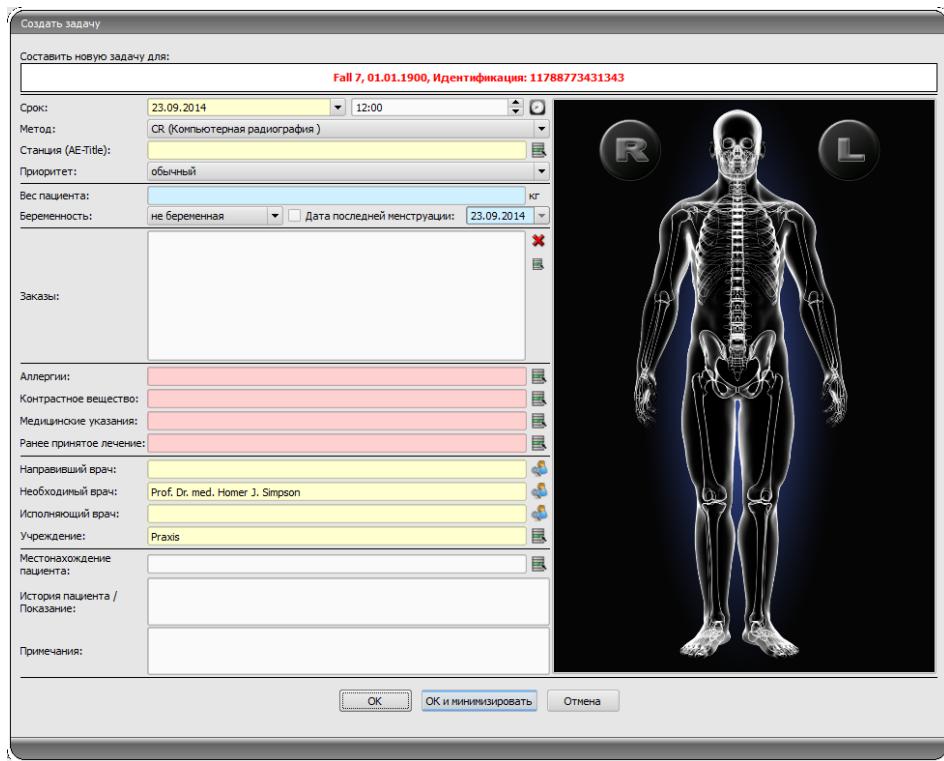


Данные о пациенте, для которого создается задача, отображаются в заголовке диалогового окна и не могут быть изменены.

С левой стороны диалогового окна находится поле ввода для задач. Часть тела и уровни определяются на изображении справа. Для этого укажите мышью на нужную вам часть тела (она выделится другим цветом), щелкните левой или правой кнопкой мыши на эту область, вызвав меню для уточнения. Выберите нужное часть тела/органы и активируйте уровни (путь луча). Можно выбрать несколько уровней одновременно и подтвердить выбор в меню пунктом «Готово». Все настройки появятся в списке в диалоговом окне слева.



В случае таблицы органов, которая не содержит подменю для данного вида проекции (на пример, MRI) просто нажмите необходимую часть тела/орган. Также можно добавлять элементы в список вручную. Для этого щелкните дважды на свободном элементе в списке и введите нужный орган. Таким же образом, вы можете редактировать уже существующие записи. Записи могут быть удалены из списка нажатием красного крестика (в верхней правой части списка). Под кнопкой «Выбрать из списка» находятся предопределенные записи и описания. В этот список можно добавлять и новые записи, которые в будущем будут предлагаться на выбор.

Если вы нажмете на фон изображения, появится меню со всеми доступными частями тела. Этот список дает возможность определять те участки тела, которые еще не были назначены.

Если вы нажмете в контекстном меню пункт «Управление ...», Вы можете настроить списки уточнений и путь лучей (для того обратитесь к главе 14.5 Управление таблицей органов и коды процедур).

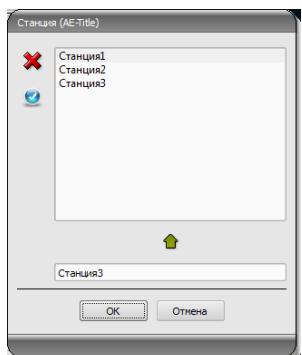

Благодаря небольшим кнопкам за полями ввода вы получаете быстрый доступ к предопределенным терминам, которые можно использовать для заполнения поля. Они могут быть добавлены по зеленой стрелке, удалены при помощи красного крестика или выбраны двойным щелчком. Один из элементов может быть определен по умолчанию. Он будет автоматически вводиться при активации диалогового окна. Это происходит таким же образом, как и для имени пациента.

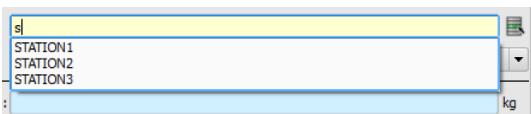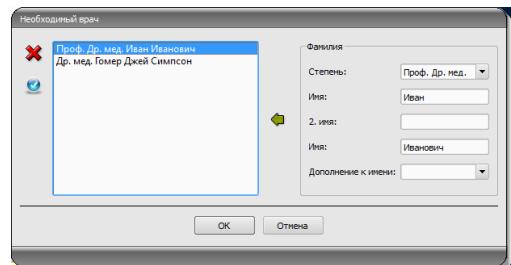


Для того чтобы быстро выбрать конкретную запись из списка, НЕ нужно открывать список кнопкой, в поле введения следует вписать первую букву требуемой записи, например, «S». Сразу появятся все записи, начинающиеся на букву «S», и из них следует выбрать необходимую. В случае полей, содержащих имена и фамилии лиц, например «Врач, который требует», следует вписать первые буквы фамилии. В этом случае появятся все записи, начинающиеся на указанные буквы. Для того чтобы отобразить полный список, следует, вместо вписывания первых букв, перемещать стрелкой вниз. .

После подтверждения кнопкой ОК, задача передается на сервер со списками задач. Если настроено несколько серверов, в диалоговом окне можно выбрать подходящий сервер. Если было введено несколько уровней, для каждого из них будет создано по отдельной задаче, потому что изображения получаются единично и для каждого из них делается запись в журнале рентгеновских снимков. Нажимая «OK и минимизировать» после создания задачи программа сворачивается на панель задач или на системную панель.

14.5 Управление таблицей органов и коды процедур

Диалоговое окно для обработки таблиц органов вызывается в контекстном меню изображения пунктом «Управление ...». Этот диалог показывает иерархически организованные элементы частей тела, уточнения и ход лучей. В последствии, элементы могут быть деактивированы. Отключенные элементы не отображаются в контекстном меню при выборе органов.

Элементы уточнений и хода лучей можно свободно добавлять или удалять. Для добавления уточнения, активируйте

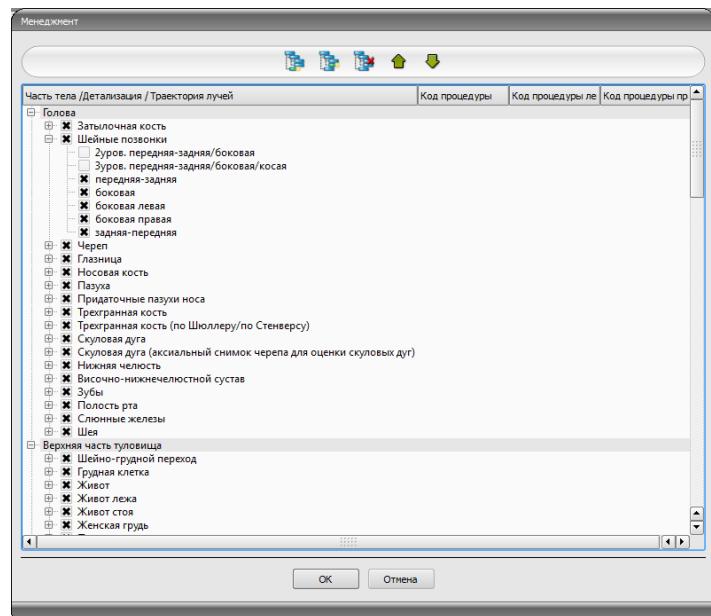

соответствующую часть тела или уже существующее уточнение в этой части тела и нажмите на кнопку «Добавить уточнение». Для добавления нового пути луча, активируйте соответствующее уточнение и нажмите кнопку «Добавить путь луча». Кроме того, укажите желаемое назначения.

Для некоторых таблиц органов (на пример MRI) не требуется выбора видов проекций и можно их в этих таблицах пропустить или выключить. По этому вопросу следует обратиться к администратору Вашей системы. С помощью переключателя «Удалить выбранный элемент» удаляется активный узел со всеми возможными подчиненными элементами. Узлы частей тела не могут быть удалены таким же образом.

Записи можно сортировать с помощью переключателей со стрелками.

Для каждого луча может быть указан так называемый «процедурный код» (Procedure Code). Эти коды должны быть настроены под целевую установку, поскольку каждый производитель использует свои коды для доступа к своим предопределенным настройкам. Двойным щелчком по необходимой ячейке в древовидной структуре, можно назначить код для луча из этой строки. Максимум могут быть введены три кода для каждого луча. В таком случае коды должны быть отделены точкой с запятой («;»). Обратите внимание, что пробелы перед точкой с запятой и после не ставятся, только если они не принадлежат самому коду. Коды могут быть переданы на другие устройства. Конфигурация передачи кодов и установка или ссылка на соответствующие устройства выполняется администратором.

В диалоговом окне создания задачи, код процедуры отображается в виде всплывающей подсказки (отображается, если мышь просто наведена, без щелчка). Описание задачи в этом случае не может быть изменено. Если задачи вводятся вручную, не выбирая изображения, код процедуры не может отслеживаться.

14.6 Удаление задачи

Выбранная (помеченная) в списке задача может быть удалена с помощью кнопки «Удалить задачу» **без подтверждения**.

Кроме того, задачи могут быть автоматически удалены по прошествии определенного периода времени. Такое удаление задач выполняется только системой digipaX, и поэтому при определенных обстоятельствах не выполняется на станции, на которой выполняется работа. Период времени надо выбрать такой, чтобы в нем могли быть обработаны все задачи .

14.7 Запись в рентгеновский журнал

Если рентгеновский журнал не активирован в этой системе, переход на новую запись отсутствует.

Для упрощения работы и для избежания ошибок, все значения могут быть перенесены в рентгеновский журнал в диалоговом окне при создании новой записи. В зависимости от конфигурации, доступны три различных режима:

1. передача данных из списка задач;
2. передача данных автоматически получаемых изображений;
3. без передачи данных.

Кроме того, возможно использование данных от присоединенного генератора и/или устройства для измерения поверхностной дозы.. Если система администратором настроена соответствующе, можно применить значения из таблицы, двойным щелчком по этим значениям или обозначая строку с требуемыми значениями и перенося их курсором. .

14.7.1 Данные из списка задач

Отметьте задачу, для которой Вы хотите создать запись в рентгеновском журнале. Насколько это возможно, данные (например, имя пациента, дата рождения), уже должны быть переданы из задач и введены в область диалогового окна журнала. Заполните остальные поля соответствующей информацией и внесите данные в рентгенографический журнал нажатием кнопки ОК.

14.7.2 Данные из полученных изображений

Для использования данных из снимков, должно быть включено и правильно настроено автоматическое получение изображений (обратитесь к главе 15 Рентгеновский журнал). Новые изображения передаются из архива на станцию. Если администратор задаст настройку в виде автоматической последовательности записей, то в дальнейшем уже нет необходимости в выполнении какого-либо дополнительного действия. В случае создания записей вручную, данные получаемых изображений служат шаблонами для записи в журнале. Сначала выберите из списка вновь принятых изображений снимок, для которого хотите создать запись. В данном случае идет передача всех данных изображения DICOM. Заполните остальные поля соответствующей информацией и внесите данные в рентгенографический журнал нажатием кнопки ОК.

14.7.3 Без передачи данных

При выборе этого режима, все поля диалогового окна журнала будут пустыми. Все данные вносятся вручную и сохраняются в записи после нажатия кнопки ОК.

14.8 Отображение полученных изображений

Если маршрутизация изображений, архив изображений и установка digipax настроены правильно, то digipax может автоматически получать изображения в фоновом режиме. Если это так, и опция «Помечать цветом колонку с количеством полученных изображений» и элемент списка, когда приходит изображение» активирована администратором, то, как пользователь, вы получаете возможность управлять задачами. Если на рабочей станции нельзя удалить выбранную задачу, это означает, что она находится в процессе. Если задачи удаляются с установки (digipax), которая делает снимки, они автоматически убираются со списка.

14.9 Выход из менеджмента задач

Компонент закрывается после выбора пациента из списка при помощи кнопки «Выбор пациента» или дважды щелкнув по нужному пациенту. Если в вашем списке пациент еще не существует (взят из источника данных архива изображений), он будет внесен в список локально.

Кроме того, с этого места вы можете перепрыгнуть непосредственно к менеджменту пациентов. Если Вы успели отметить пациента в списке, то он будет выбран первым, как активный пациент.

Если установлены и активированы рентгеновские журналы, можно перейти непосредственно в них. Таким образом, ни один пациент не будет выбран.

15 Рентгеновский журнал

Если рентгеновский журнал запущен в системе, то его можно открыть с помощью кнопки Start..

15.1 Новая запись

С помощью кнопки, расположенной в верхнем левом углу можно ввести новую запись в рентгеновский журнал.



Эта кнопка доступна только на станции, которая настроена на введение новой записи в рентгеновский журнал. В противном случае в этом месте находится кнопка для обновления изображения.

Значение полученного изображения может быть передано при добавлении новой записи в рентгеновский журнал в том случае, если правильно настроено получение снимка в фоновом режиме. Для этого выберите в диалоговом окне из списка вновь принятых изображений снимок, который хотите добавить к записи. Если ни одно изображение не выбрано, поля останутся пустыми и могут быть заполнены вручную. Внесите запись в журнал нажатием кнопки ОК.

Если есть напрямую подключенный генератор или устройство для измерения поверхностной дозы и система соответствующе настроена администратором, то значения полученные с этих устройств в таблице, которая дополнительно показывается в диалоговом окне, могут быть введены в полях диалогового окна двойным щелчком или с помощью курсора. Уже используемые значения генератора при очередном открытии этого диалогового окна повторно не высвечиваются.

15.2 Просмотр записей в рентгеновском журнале

Откройте журнал с помощью кнопки Start, как описано выше. Откроется содержимое рентгеновского журнала. Записи отсортированы от новых к старым. Рентгеновский журнал можно редактировать только на одной станции. На всех остальных станциях записи в рентгеновском журнале можно только просматривать, но их нельзя вводить. Если во время просмотра рентгеновского журнала будет введена новая запись, необходимо обновить изображение. Для этого необходимо нажать кнопку «Обновить» в верхнем левом углу.

15.2.1 Фильтрация



Внизу диалогового окна можно настроить фильтр по именам пациентов, частей тела и датам аквизиции. Каждый раз при использовании фильтра активируются блоки управления. При закрытии всех блоков управления и нажатии кнопки «фильтровать», отображается полный список записей.

Настройки фильтра сохраняются до следующего запуска рентгеновского журнала.

15.2.1.1 Имя пациента

Введите часть искомого имени, используя групповой символ («*»). Например, «Клим».

15.2.1.2 Часть тела

Укажите один или несколько терминов или частей слов в поле ввода для частей тела. В выпадающем списке можно определить, должно ли описание части тела одержать все термины (И) или только один (ИЛИ). После нажатия на кнопку «фильтровать», выводится список записей, в которых находятся выбранные термины.

15.2.1.3 Промежуток времени

Укажите в поле «от» дату, на которую должен начинаться фильтруемый список и в поле «до» дату конечной записи. После нажатия на кнопку «фильтровать», отобразятся записи журнала, которые были созданы в промежуток указанного времени (включая в себя даты «от» и «до»).

15.3 Экспорт

Журнал может быть экспортирован в виде CSV файла (текстовый файл с точкой с запятой как сепаратором между значениями), который можно прочесть при помощи Excel.

Если был настроен фильтр, он также будет экспортирован. Таким образом будут сохранены записи, которые показываются в таблице.

По желанию, экспортенный журнал может быть сразу открыт, отредактирован и распечатан при помощи стандартного программного обеспечения, например Excel.

15.4 Очистка (удаление)

Для очистки журнала Вам понадобится ввести специальный пароль для удаления.

Пароль: delete

Введите пароль, и все записи будут стерты из журнала.

16 Сшивка изображений (stitching)

16.1 Общее

Функция «сшивка изображений» дает возможность электронного склеивания отдельных изображений для получения полной радиограммы всего позвоночника или нижних конечностей.

Использование опции «Сшивка изображений» возможно только после получения к ней доступа от администратора системы.

16.2 Аквизиция радиограмм

Все радиограммы для сшивки изображений должны быть выполнены поочередно, одна за другой. Пациент не должен шевелиться во время выполнения радиограмм. Можно закрепить позицию пациента, дать ему опереться о что-нибудь или держаться за что-нибудь.

Расстояние между рентгеновской лампой и детектором должно быть по возможности максимальным. Аппарат выполняет ряд экспозиций, получая последовательность изображений, выполненных «внахлест». В соответствии с этими «нахлестками» компьютерная система склеивает изображения в одно целое.




Для ориентации при склеивании изображений можно также использовать обозначения (свинцовые шарики) или рентгеновские линейки.

16.3 Обслуживание опции stitching



Перед сохранением полной радиограммы необходимо еще раз проверить, все ли изображения находятся на соответствующих позициях. Здесь пригодится инструмент для прозрачного отображения изображений.

Загрузить изображения в браузер и выбрать «Stitching» в стартовом меню, чтобы открыть соответствующее диалоговое окно.

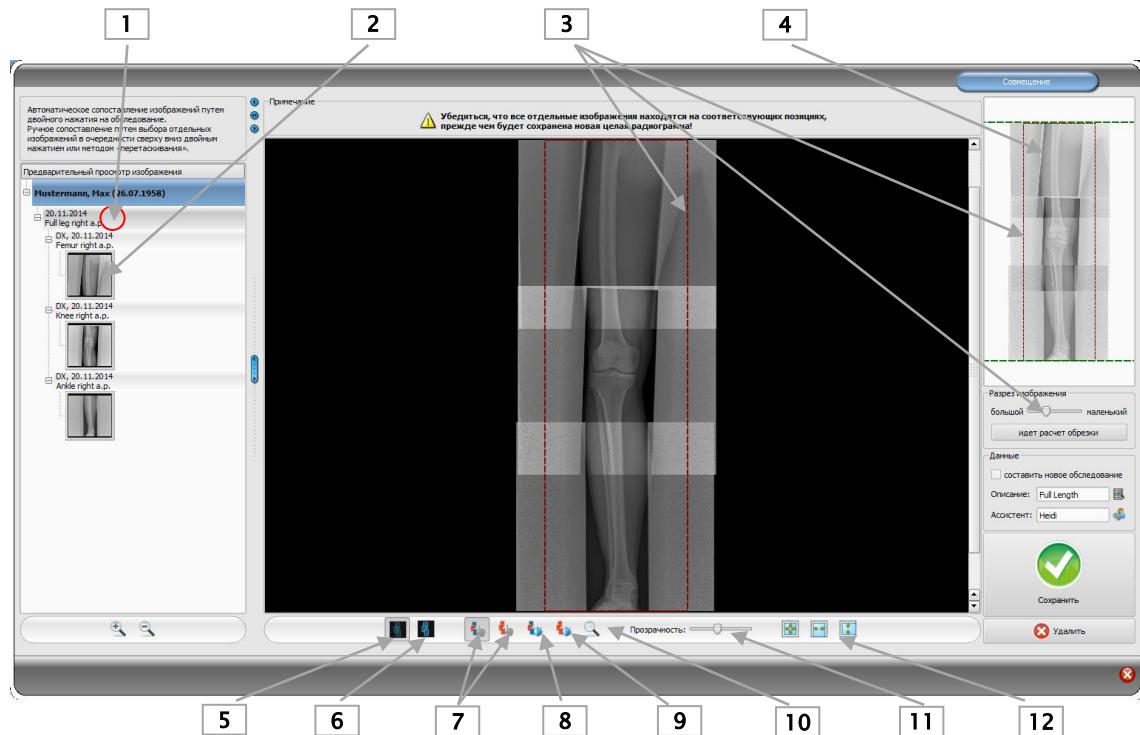

- 1 – Двойное нажатие узла обследования для автоматической сшивки изображений
- 2 – Двойное нажатие или перетягивание отдельного изображения для ручной сшивки изображений
- 3 – Инструмент и рамка для обрезки изображения
- 4 – Просмотр всей радиограммы с отображением актуального фрагмента изображения
- 5 – Прозрачная презентация последовательности изображений «внахлест»
- 6 – Отображение всей радиограммы (создает полную радиограмму с разглаженными местами соединения отдельных изображений)
- 7 – Перемещение отдельного или всего изображения
- 8 – Подгонка уровня окна для отдельного изображения
- 9 – Подгонка уровня окна для всей радиограммы
- 10 – Увеличение
- 11 – Изменение прозрачного вида (действует только в случае, когда включена прозрачная презентация, см. кнопка 5)
- 12 – Подгонка изображения к окну

16.4 Автоматическая сшивка изображений

Автоматическая сшивка вводится в действие двойным нажатием на узел обследования. В этом случае программа пытается автоматически соединять изображения на основе оттенков серого, характерных пунктов на изображении и времени аквизиции изображения, записанного в нем.

Все изображения отображаются прозрачным способом, с видимыми местами соединения их по краям.

Если аквизиция прошла правильно с соответственно выполненной последовательностью изображений «внахлест», изображения сразу автоматически оказаться на соответствующих позициях. Если, однако, так не происходит, изображения следует разместить на них вручную, способом, описанным в разделе 16.5. Когда все изображения уже находятся на соответствующих позициях, далее следует действовать согласно указаниям, описанным в разделе 16.6.

16.5 Мануальная сшивка изображений

Перетянуть по очереди отдельные изображения, начиная с того, который находится в самом верху, в черную область работы. Поместить изображения на соответствующих позициях так, чтобы их заходящие друг на друга края были точно подогнаны, используя для ориентации структуры тканей или кости, или нанесенные свинцовые обозначения или рентгеновские линейки.

Здесь пригодится инструмент Прозрачность, Уровень окна и Увеличение. Увеличение также доступно, когда мы придержим нажатую правую кнопку мыши и проведем мышью вверх или вниз. Перемещать изображения до момента, когда все они окажутся на соответствующих позициях. Далее действовать согласно способу, описанному в разделе Сохранение всей радиограммы.

С помощью кнопки «Удалить» можно удалить все изображения из области работы и начать всю процедуру с начала.

16.6 Сохранение всей радиограммы

После утверждения результата можно разгладить места соединения изображений с помощью кнопки «Отобразить всю радиограмму» (6), создать полную радиограмму и проверить ее.

В случае необходимости можно еще подогнать управлением окнами ко всей радиограмме с помощью кнопки (9). Далее воспользоваться функцией обрезки изображения, чтобы обрезать левый и правый край всей радиограммы.

Если Вы хотите записать результат в новом исследовании, отметьте поле галочкой.

Присвоить изображению название и вписать фамилию ассистента, нажимая «Сохранить» и сохранить всю радиограмму в архиве изображений.



17 Отправление изображений

Если система сконфигурирована таким образом, что сохранение изображений в архиве или в другом месте происходит в фоновом режиме, этот процесс можно контролировать, и, в случае необходимости, вмешиваться в него с помощью модуля «Отправление изображений».

Изображения сначала сохраняются в буфере обмена, а оттуда автоматически переносятся в фоновом режиме. В процессе переноса можно без препятствий дальше работать в программе.

С целью проверки актуального статуса следует открыть перенос изображений в меню, которое разворачивается после выбора кнопки Старт с левой стороны внизу.

Появляется список изображений, ожидающий в настоящий момент в очереди. В нормальной ситуации должны быть перенесены все изображения, а после удачно завершенного переноса изображение отображается в списке со статусом «отправлено».

Перенесенные изображения можно спрятать, выбирая знак крючка с левой стороны внизу.

Если программа закрывается прежде, чем будут перенесены все изображения, появляется сообщение, информирующее о том, что не все изображения еще перенесены. Ни одно изображение не будет потеряно, даже после выключения компьютера. После следующего ввода в действие программного обеспечения digipaX перенос изображений продолжится. Однако, рекомендуется закрывать программу после отправления всех изображений.

Неудавшиеся попытки отправления возобновляются. Число попыток отправления определяется администратором. Если изображение не будет доставлено после максимального допустимого числа попыток, оно будет иметь статус «доставка невозможна», и дальнейшие попытки его отправления не предпринимаются.

Попытку отправления недоставленных изображений можно повторить, выбирая соответствующую кнопку с правой стороны внизу. Тогда система пробует опять перенести изображения согласно установленному допустимому числу попыток. Если, несмотря на многократные попытки, изображение не удастся перенести, следует найти причину проблемы. В такой ситуации следует обратиться к администратору системы.

Недоставленные изображения остаются по-прежнему в очереди, даже если программа будет закрыта или выключен компьютер.

Недоставленные изображения можно также отменить, выбирая другую кнопку внизу с правой стороны. В этом случае эти изображения будут окончательно удалены из очереди.

Отправленные изображения сохраняются в списке. Этот список можно записать в форме файла, выбирая кнопку «Экспортировать протокол», а потом использовать его, например, для составления расчетов или статистики и т.д.

Список перенесенных изображений можно отменить, выбирая кнопку «Удалить отправленные из базы данных».

18 Аквизиция изображений

18.1 Общее

Для аквизации изображений предусмотрено три разных модуля, при этом на каждой машине может быть запущен только один из них.

Модуль аквизации рентгеновских изображений может использоваться для приема цифровых рентгеновских изображений из подсоединеных устройств, а именно: считывателей радиографических изображений, а также детекторов.

Модуль аквизации изображений МРТ может использоваться для приема изображений МРТ из подсоединеных устройств МРТ.

Видеомодуль frame grabber/изображения служит для аквизации изображений или серии изображений из устройств, использующих видеовыходы или подсоединеных к системе с помощью соответствующего компьютерного оборудования. Это могут быть, к примеру, эндоскопы, ультразвуковые аппараты и т.п. Для управления аквизицией можно применять ножные переключатели.


Следующие устройства могут быть подсоединены посредством модуля аквизации серии изображений. Это интерфейс для устройств, которые не обязательно должны быть соединены со станцией digipaX, и самостоятельно хранят данные изображений в ранее определенном каталоге компьютера или в сети. Затем изображения принимаются digipaX и в дальнейшем обрабатываются именно там.



Устанавливая устройства необходимо всегда обращать внимание на безопасное размещение проводов, чтобы свести до минимума риск возникновения несчастного случая, в результате которого может быть повреждено оборудование. Ножные переключатели работают на низковольтном напряжении и не несут опасность здоровью или жизни.

18.2 Ход аквизиции изображений с использованием управления задачами

Принципиально поступки для аквизиции изображений те же самые во всех модулях. Выберите из «Управления задачами» пациента, для которого вы хотели бы выполнять следующую аквизицию. Для этого выделите имя пациента в списке, ознакомьтесь с деталями запроса в нижней части диалога и нажмите «Выбор пациента» (или двойной щелчок на имя пациента).

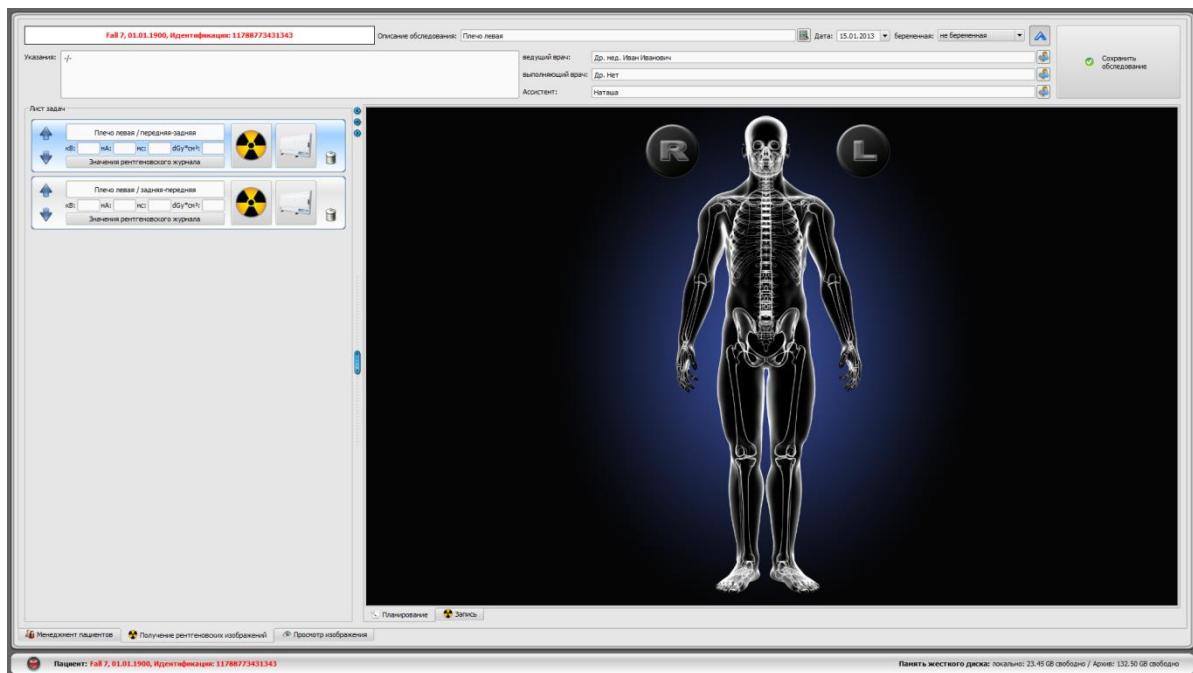

Пациент выбран, приложение переходит к планированию задачи, в котором присвоенные данному пациенту задачи отображаются с левой стороны диалогового окна в виде списка. Удерживая курсор на записи (без щелчка), вы можете просмотреть все детали этой задачи в виде всплывающей подсказки. Теперь отсортируйте задачи по порядку, в котором вы хотели бы выполнить аквизицию.

Верху расположены поля для ввода описания и даты обследования, а также статуса беременности. Описание и дата обследования обычно вводятся автоматически из выбранной задачи. Если нет, то здесь необходимо ввести правильные данные пациента и подать статус беременности. У пациентов мужского пола поле статуса беременности конечно же пустое и его нельзя изменить.

Ниже находятся другие поля для введения данных относительно врача, ассистента, который делает снимок и указания для пациента. Если такая информация не нужна (напр., в случае ветеринарной клиники), данные поля можно опустить и даже скрыть с помощью синей стрелки, расположенной справа вверху . Возле нее расположена кнопка для передачи изображений в архив.

18.2.1 Планирование задач

Теперь у Вас повилась возможность сортировки задач в такой очередности, в какой Вы желаете делать аквизиции.

Если не все задачи отображаются, то причиной тому настройки фильтра, которые были проведены администратором системы.

В планировании задач можно непосредственно добавлять следующие или удалять задачи. В этом месте в Вашем распоряжении те же типы органов, что и в управлении задачами в виде закладок. Выбор части тела и органа для создания задачи осуществляется таким образом как это описано в разделе 14.4. Однако, в данном месте нельзя ввести дополнительные данные. Кроме того, к модальности и станции назначения (название внедряющей организации) автоматически применяются значения по умолчанию, которые были определены администратором. Если требуются другие значения или другие данные, тогда для создания следующей задачи необходимо воспользоваться управлением задачами. В планировании задач можно также управлять таблицами органов и кодами процедур (см. раздел 14.5).

Указание: Если в системе не включен визуальный выбор органов, а значит отсутствует графическая помощь при создании задачи, планирование задач также отсутствует. В данном случае в этом месте можно только сортировать задачи. С этим вопросом необходимо обратиться к заведующему системой.

Выбранные задачи можно удалять с помощью иконки корзины.

От следующего шага начинается аквизиция изображений. Шаги будут разные в зависимости от используемого модуля.

После сохранения новых изображений, завершенные задачи могут удаляться в зависимости от выбранной конфигурации.

Каждый шаг аквизиции, а также обработки изображений/серий в каждом модуле, приведен в дальнейших частях руководства. Подробнее об этом также в разделах 18.4 Аквизиция рентгеновских изображений, 18.5 Аквизиция изображений МРТ и 18.6 Frame grabber / аквизиция серии изображений.

18.3 Ход аквизиции изображения без управления задачами

Планирование задач доступно также без менеджмента задач, если, конечно же, в системе включен визуальный выбор органов. В планировании задач можно создавать задачи еще до аквизиции. Однако, задачи не будут сохранены и будут удаляться при закрытии digipaX, если предварительно не будет запущен сервер рабочих списков.

Осуществите выбор пациента в своем приложении менеджмента поликлиники или в менеджменте пациентов digipaX. System przechodzi do planowania zleceń. Система переходит к планированию задач. Теперь Вы можете создавать, удалять и сортировать задачи в соответствии с описанием в разделе 13.5.1. Затем начните аквизицию изображения. Если Вы не желаете создавать какие-либо задачи, то у Вас есть возможность сразу же перейти к аквизиции изображений. В случае аквизиции рентгеновских изображений Вам необходимо нажать еще на кнопку аквизиции в контекстном меню на правой панели инструментов. В зависимости от программного обеспечения видеоустройства следует еще, если необходимо, вручную выбрать орган и проекцию изображений. Получите изображение или серию и сделайте соответствующие шаги по их обработке. Описание шагов Вы найдете в разделе 18.4 Аквизиция рентгеновских изображений, 18.5 Аквизиция изображений МРТ или 18.6 Frame grabber / аквизиция серии изображений.

Перед сохранением новых изображений необходимо дополнительно указать отсутствующие данные, а именно: описание обследования, изображения или серии. Необходимо указать общее описание обследования, которое будет относиться ко всем изображениям данного обследования, к примеру, «Поясничный отдел позвоночника, грудной отдел позвоночника» или «Плечо, правое». В виде комментария к изображению или серии введите точное описание данной регистрации, к примеру, «Поясничный отдел позвоночника, задне-передняя проекция». Затем укажите параметры аквизиции, а также фамилию и сокращенное название рентгеновского технолога. Когда все данные введены, сохраните обследование нажатием кнопки в правом верхнем углу.

Дата сверху в закладке аквизиции вставляется автоматически и актуализируется системным временем Windows. Перед сохранением можно вручную изменить дату. Затем дата автоматически актуализируется после повторного запуска системы digipaX.

18.4 Аквизиция рентгеновских изображений

18.4.1 Общее

Если в конфигурации включен модуль для аквизиции рентгеновских изображений, то отображается дополнительная вкладка «Аквизиция рентгеновских изображений». Она составляется из частей Планирование (если включено) и Аквизиция.

Аквизиция рентгеновских изображений содержит дополнительные функции для аквизиции и обработки изображений.

С правой стороны данной вкладки показаны подключенные устройства (если необходимо, отображение необходимо активировать в контекстном меню панели инструментов). Поля вкладки, во время сканирования, временно отмечаются цветом (желтым во время передачи, зеленым при успешной передаче, красным при неудачной передаче).

Под закладкой расположены элементы для обслуживания аквизиции изображений и инструменты для их обработки. В контекстном меню можно скрывать и открывать необходимые функции. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по области инструментов и включить или выключить функцию в вызванном меню.

Слева расположен список задач текущего пациента.

18.4.2 Специальные функции устройств и правила безопасности

К каждому устройству применяются так называемые коды процедур (Procedure Codes) для передачи выбранного органа и проекции. Эти коды попадают совместно с рентгеновским заданием в устройство. Устройства по умолчанию настроены на выбранную съемку, без необходимости повторного выбора органа и проекции в устройстве. Это значит, что в генераторе по умолчанию настроены показатели kV и mAs для съемки на базе этих кодов или в случае CR читателя либо детектора выбираются соответствующие фильтры для реконструкции изображений в данных устройствах.

Поэтому в случае передачи неправильного кода, как результат, неправильные настройки генератора могли бы создавать угрозу для пациента. В случае CR читателя или детектора, неверный фильтр мог бы стать причиной плохого качества изображения, в результате чего пациенту необходимо было бы повторить снимок, а это в свою очередь увеличило бы дозу, полученного им, излучения.

Именно поэтому перед съемкой обязательной является проверка настроек по умолчанию на соответствие выбранному типу съемки.

Вид проверки зависит от используемого устройства. Обратитесь к администратору Вашей системы с целью получения информации относительно используемых в ней устройств. Перед запуском необходимо в обязательном порядке пройти детальное обучение по технике и программному обеспечению.

18.4.2.1 Генератор Josef Betschart AG

Совместимые устройства: GENESIS 50 RFT или DT



Перед каждой аквизицией на экране консоли генератора / панели управления необходимо проверять правильность параметров аквизиции, и в случае необходимости, сделать соответствующие изменения.

18.4.2.2 Детектор Teleoptic

Совместимые устройства: ALPHA-Serie, IONA-Serie



В случае неудовлетворительного качества изображения, необходимо проверить коды процедур. Обратитесь к администратору Вашей системы.

18.4.2.3 Детектор XCAN

Совместимые устройства: XCAN DR-System

Для данных устройств не предусмотрены коды процедур. Необходимо всегда вручную выбирать орган и проекцию.

18.4.2.4 Детектор Perkin Elmer

Обслуживание устройства: XPad 4336, XPad 4343



В случае ошибочного кода процедуры (кода, который неизвестен устройству) будет отображено сообщение о возникновении ошибки. В таком случае можно осуществить аквизицию с настройками по умолчанию. Однако, в результате этого возможно получение изображения неоптимального качества. Сначала рекомендуется откорректировать настройки, а после этого осуществить аквизицию изображения. Следует откорректировать код, создать новую команду с правильным кодом и повторить процедуру. В случае проблем обратиться к администратору системы.



Перед введением экспозиции в действие следует всегда обращать внимание на то, есть ли сигнал о готовности декодера к приему (зеленое окно сообщения с надписью «Готов»).



В случае использования панели WiFi Panels (XPad 4336 WiFi) следует обратить внимание на уровень зарядки батареи. Он показан в виде символа в программном обеспечении. Этот уровень следует проверить перед выполнением аквизиции. Если батарея заряжена недостаточно, ее следует сначала заменить или зарядить. Описание процедуры для проверки уровня зарядки батареи представлено в инструкции по обслуживанию детектора Perkin Elmer.



В случае неудовлетворительного качества изображения следует проверить коды процедур. Необходимо обратиться к администратору системы.



В случае использования 2 или 3 устройств, перед введением аквизиции в действие следует убедиться, что выбрано соответствующее устройство (1=стол, 2=настенный штатив или 3=свободный снимок).

18.4.2.5 CR читатель iCRco

Совместимые устройства: iCR1000, iCR2600, iCR3600



Перед каждым сканированием необходимо проверить надпись в верхнем левом углу диалогового окна iCRco сканера с точки зрения соответствия органа и проекции выбранной съемке, и в случае необходимости, сделать соответствующие изменения.



В случае неудовлетворительного качества изображения необходимо проверить коды процедур. Обратитесь к администратору Вашей системы.

18.4.2.6 CR читатель Kodak

Совместимые устройства: PoC360



Перед каждым санированием необходимо проверить надпись в поле приложения для сканирования с точки зрения соответствия органа и проекции выбранной съемке.




В случае ошибочного кода процедуры (кода не распознаваемого устройством) появится сообщение об ошибке. В этом случае необходимо прервать сканирование, изменить код, создать новое задание с правильным кодом и повторить процедуру. В случае необходимости обратитесь к администратору Вашей системы.



В случае неудовлетворительного качества изображения, необходимо проверить коды процедур. Обратитесь к администратору Вашей системы.

Для этого устройства имеются дополнительные кнопки, предназначенные для удаления кассеты и для проведения теххода.

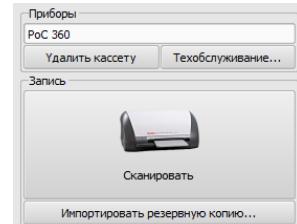



Пожалуйста, обратите внимание, что кассета, которая не была полностью стерта, не может быть использована для записи последующих изображений!

18.4.2.7 CR читатель Orex

Совместимые устройства: PcCR 1417

Для данных устройств не предусмотрены коды процедур. Необходимо всегда вручную выбирать орган и проекцию.

18.4.2.8 Считыватель CR Carestream

Совместимые устройства: Carestream Vita

18.4.2.8.1 Carestream Vita LE



Необходимо проверить надпись в поле приложения для сканирования с точки зрения соответствия органа и проекции выбранной съемке.



В случае ошибочного кода процедуры (кода не распознаваемого устройством) появится сообщение об ошибке. В этом случае необходимо прервать сканирование, изменить код, создать новое задание с правильным кодом и повторить процедуру. В случае необходимости обратитесь к администратору Вашей системы.




В случае неудовлетворительного качества изображения, необходимо проверить коды процедур. Обратитесь к администратору Вашей системы.

Для этого устройства имеются дополнительные кнопки, предназначенные для удаления кассеты и для проведения техухода.




Пожалуйста, обратите внимание, что кассета, которая не была полностью стерта, не может быть использована для записи последующих изображений!

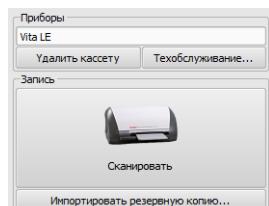

18.4.2.8.2 Считыватель CR Carestream Vita Flex

Для этого устройства доступны для дополнительные кнопки для технического обслуживания и диагностики. Считывание и удаление кассеты осуществляется с помощью кнопки «Scan». В диалоговом окне сканирования доступны функции сканирования, удаления, сбрасывания кассеты. Кроме того, вы можете активировать опцию «Высокое разрешение».

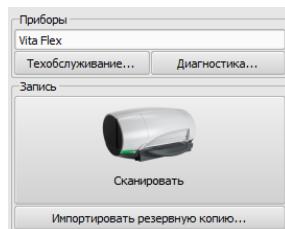

В случае неправильного кода процедуры (кода, оторого устройство не знает), появляется сообщение об ошибке. В этом случае вы должны остановить сканирование, ввести правильный код, создать новую заявку с уже правильным кодом и повторить процедуру. Если у вас есть проблемы, обратитесь к системному администратору.



Если качество изображения недостаточно хорошее, следует проверить коды процедуры. Чтобы сделать это, обратитесь к системному администратору.



Пожалуйста, обратите внимание, что кассета, которая не была полностью стерта, не может быть использована для записи последующих изображений!

18.4.2.8.3 Считыватель CR Carestream Vita Flex

Совместимые устройства: Carestream Classic



Необходимо проверить описание в программе Carestream с точки зрения соответствия органа и проекции выбранной съемке, и в случае необходимости, вручную сделать соответствующие изменения.



В случае неудовлетворительного качества изображения, необходимо проверить коды процедур. Обратитесь к администратору Вашей системы.

18.4.2.9 Подключение других устройств / систем посредством рабочего списка DICOM



Перед каждой аквизицией необходимо проверить в устройстве или программе соответствие органа и проекции выбранной съемке. В случае необходимости обратитесь к администратору Вашей системы для получения более детальной информации.



В случае неудовлетворительного качества изображения, необходимо проверить коды процедур. Обратитесь к администратору Вашей системы.


18.4.3 Ход аквизиции рентгеновских изображений

Процесс аквизиции изображений может отличаться от описанного в данном документе, в зависимости от типа системы. Точный процесс зависит от типа рентгеновской техники, технологии аквизиции изображения, подключенных устройств и программного обеспечения. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, обратитесь к системному администратору. В принципе, однако, отдельные этапы выглядят, как описано ниже.

После выбора пациента можно начать аквизицию изображений. Выберите желаемую задачу и щелкните по иконке аквизиции. Если Вы используете генератор, который применяет коды процедур к настройкам по умолчанию, и передача данных кодов обслуживается digipaX, тогда начните аквизицию с передачей кодов процедур путем нажатия на кнопку «Отправить настройки в генератор». Затем сделайте снимок пациенту. Для снимка еще необходимо ввести параметры показа в специально отведенных для этого полях, если параметры не были введены автоматически. При вводе значений используйте десятичный разделитель (обычно это запятая). В соответствии со стандартом DICOM запрещен ввод десятичных чисел (после запятых) в значениях mAs. Однако, администратор может в конфигурации включить опцию «Разрешить mAs в виде десятичных чисел».

Затем можно загрузить изображение в задаче и передать его digipaX, нажимая на кнопку «Начать передачу изображения».

Дополнительно в контекстном меню на правой панели инструментов можно включить большую кнопку аквизиции изображения. Если Вы хотите пользоваться данной кнопкой, то обратите внимание на то, что перед ее применением задача должна быть обозначена синим цветом (одиночный щелчок по задаче), чтобы скачанное изображение было присвоено надлежащим образом. Если ни одна задача не будет отмечена голубым цветом или отмеченная задача уже содержит изображение, то будет использована следующая пустая задача без изображения. Рекомендуется выполнение всех аквизиции непосредственно используя кнопки задачи и выключение правой кнопки. Следует, по мере возможности, сохранять очередность шагов, чтобы обеспечить правильное назначение задачи, кодов процедур, параметров экспозиции и изображений. По мере возможности необходимо всегда придерживаться правильной очередности шагов, что поможет избежать ошибок в ходе присваивания задач, кодов процедур, параметров аквизиции и изображений.

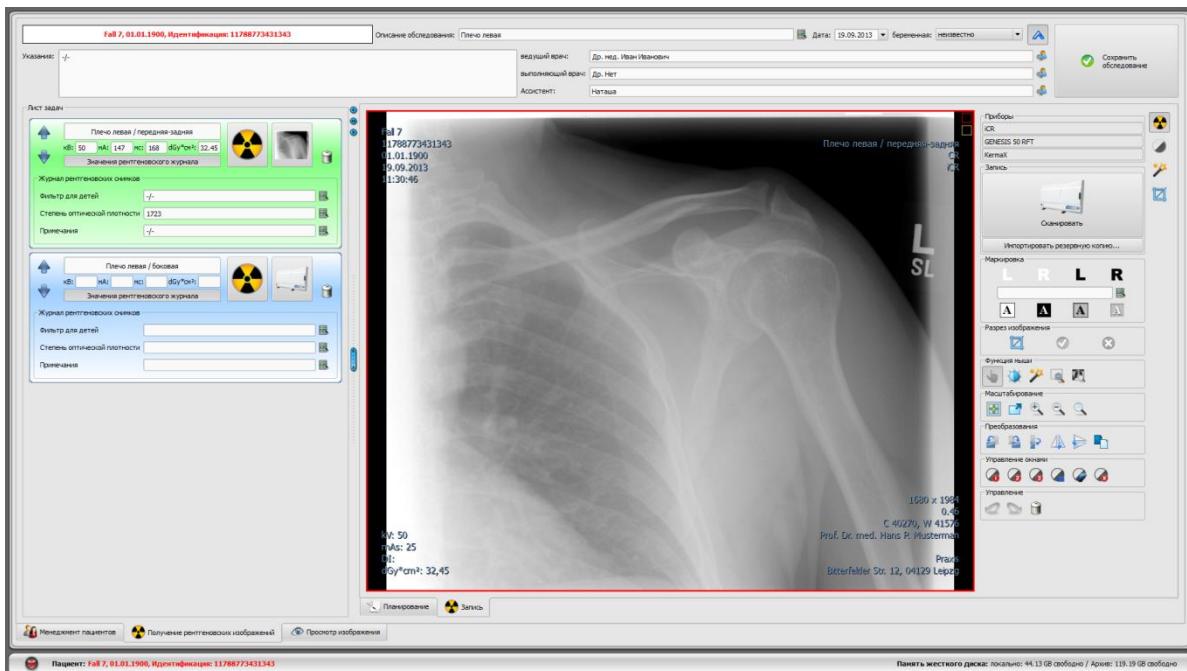

Когда Вы уже начнете процедуру аквизиции, откроется программа аквизиции рентгеновских изображений предоставляемая изготовителем устройства , при помощи которого передаются данные об изображении.



Подпись и символ кнопки аквизиции рентгеновских изображений могут отличаться на вашей установки. Это зависит от конфигурации системы.

Если используется больше устройств:

Если для снимков, выполняемых с помощью стола или настенного штатива, а также для свободной экспозиции используются отдельные экспонирующие устройства, следует перед введением экспозиции в действие выбрать соответствующее из них. Обычно система автоматически выбирает соответствующее устройство.



Перед введением экспозиции в действие необходимо проверить и откорректировать в случае необходимости выбор устройства.



Стол



Настенный штатив



Свободная экспозиция

Для каждого экспонирующего устройства (только, если есть) справа показан символ с информацией о статусе. Символ, который находится выше всех, обозначает стол, средний символ обозначает настенный штатив, а самый нижний – свободную экспозицию.

В случае устройств, питаемых от батареи, отображается также уровень зарядки батареи.



Устройство с внешним питанием



Устройство, питаемое от батареи



Устройство не найдено – идет поиск

В результате нажатия на символ отображается подробная информация кас. устройства, а также сила сигнала в случае устройств с доступом к wi-fi.

В случае, когда первое изображение будет отсканировано, то оно присваивается соответствующей задаче и отображается в окне в виде миниатюр, а также в большом формате. Во время чтения и передачи графических данных, при определенных обстоятельствах может уже выполняться следующая аквизиция. Программное обеспечение для чтения данных изображения (не digipaX) должно быть закрыто после каждой аквизиции.

Изображения присваиваются новому обследованию и каждое из них откладывается в собственную серию. Название обследования создается автоматически задачами или же можно его вводить вручную.

Введите фамилию рентгеновского техника. Когда Вы разработаете уже все задачи и данные будут полными, тогда Вы можете завершить процедуру. Для этого щелкните по кнопке «Сохранить обследование», чтобы передать новые изображения в архив.

18.4.4 Обозначение



Функция обозначения доступна только, если активен соответствующий модуль.

Перед сохранением изображения на нем можно выполнить обозначения (функция обозначения должна быть включена в конфигурации на странице «Аквизиция изображений»). Можно, например, нанести виртуальные свинцовые буквы (L / R), нажимая на них левой кнопкой мыши и перетягивая мышью на изображение. В этом случае видна форма буквы, которую можно дополнительном уменьшить или увеличить, используя колесо прокрутки мыши или кнопки плюс / минус на клавиатуре. Далее следует переместить букву на нужное место и поместить ее там повторно, нажимая левой кнопкой мыши. Буква будет зафиксирована на изображении. Операцию можно отменить сразу после ее выполнения (стрелками под инструментарием). Когда изображение будет сохранено, из него нельзя будет удалить обозначение.

На изображения можно также наносить тексты. Для того чтобы нанести текст на изображение, его следует вписать в поле (любой текст) или выбрать готовый текст из списка уже готовых текстов. Используя 4 кнопки для настроек текста на изображении можно поместить черный текст на белом фоне, белый текст на черном фоне, черный текст без фона или белый текст без фона, в зависимости от того, какая настройка

возможна для данного изображения. Величину текстового поля можно также изменять таким же способом, как и величину виртуальных свинцовых букв.

После сохранения изображения уже нельзя устраниТЬ обозначений или текстов.

18.4.5 Обрезка изображения



Обрезка изображения доступно только при активированном соответствующем модуле.

Перед тем как изображения будут сохранены, они могут быть обрезаны по краям. Это дает следующие преимущества:

- можно осматривать отдельные части изображения, без изменения масштаба;
- используется меньше памяти на жестком диске;
- осуществляется быстрая передача данных;
- быстрое отображение и обработка изображений (например, кадрирование)

Тем не менее, существует опасность, что на снимке может быть обрезана важная информация.



Исходное изображение доступно только в качестве резервного снимка в списке новых изображений. Если обрезанное изображение сохранено в архиве, оно уже не может быть восстановлено.

Ручное определение прямоугольника для обрезки изображение:

Для обрезки изображения, нажмите на кнопку «Пометить изображение». После этого щелкните левой кнопкой мыши два раза по изображению и отметьте область, которую хотите вырезать. В предварительном просмотре отображается часть снимка, которая будет вырезана.

Автоматическое исчисление прямоугольника для обрезки коллимации:
Для некоторых типов оборудования (например, Perkin Elmer) есть возможность автоматически исчислить отрезок изображения для обрезки коллимации. Для этого сначала нажмите на кнопку «Выбрать область». Тогда исчислиться площадь коллимации и автоматически появляется прямоугольник. Его можно еще изменить с помощью мыши.

Обратитесь к системному администратору с вопросом, есть ли эта функция доступна для установленного оборудования.

Проверка и запись

Проверьте еще раз изображение в предварительном просмотре, не будет ли удалена какая-нибудь важная информация после обрезки. Нажав на кнопку «Принять» вы подтверждаете обрезку, но при этом изображение еще не сохраняется, и вы можете отменить это действие. Нажав на кнопку «Отменить» отменяется выбранная область для обрезки, и вы можете ее откорректировать.

18.4.6 Трансформация изображений / оконный режим/ фильтры / диафрагма

Перед сохранением новых отсканированных изображений Вы можете осуществлять последующую их обработку, напр., проводить трансформацию (поворот/зеркальное отражение), устанавливать фильтры или же изменять оконный режим. Для этой цели служат функции мыши и такие же как в веб-браузере инструменты для масштабирования (см. раздел 7.2.1 и 7.2.2), а также инструменты для оконного режима и трансформации (см. раздел 7.3.1 и 7.3.2).

На панелях инструментов справа размещены прокрутки для оконного режима с настройками по умолчанию (пресеты) и конкретные инструменты предназначенные для фильтров и диафрагмы.

Все изменения (поворот, отражение, кадрирование и т.д.) сохраняются и передаются в архив. Эти преобразования сразу же отображаются на других станциях, на которых извлекается изображение.

В конфигурации («Аквизиция изображений») вращение и отражение могут быть установлены автоматически, и применяться ко всем новым изображениям.

18.4.7 Отклонение изображения

Отдельные изображения могут быть отклонены. Это означает, что они не передаются в архив изображений, а сразу удаляются. Щелкните по иконке корзины в задаче, а затем выберите «Удалить только изображения» или же по миниатюре в задаче, чтобы отобразить ее во вьювере в большом формате, и нажмите на кнопку «Отменить», расположенную справа внизу на панели инструментов. Появляется сообщение о подтверждении, на которое необходимо ответить «Да». При этом одновременно удаляются значения генератора или значения измерителя произведения доза-площадь, которые уже были присвоены изображению.

18.4.8 Дополнительные устройства

Как уже было сказано ранее, к системе могут быть подключены дополнительные устройства, как например, генератор рентгеновского излучения или дозиметр. Устройства автоматически передают новые значения в систему или система сама циклически запрашивает данные. Как только становятся доступны новые значения, то осуществляется их присвоение либо к текущей (обозначенной синим цветом) задаче или же изображению либо к следующей по списку, которая не имеет никаких значений. В противном случае, заводится новая задача и ей присваиваются соответствующие значения.

Потому необходимо обратить внимание на очередность задач, если сперва Вы желаете загрузить поочередно несколько изображений на рентгеновское устройство, а лишь затем передать их digipaX. Если изображению были присвоены несоответствующие значения, то необходимо вручную ввести значения в предусмотренные поля до того, как изображение будет предано в архив.

18.4.9 Резервные копии

Для каждого изображения, которое будет загружено, создается резервная копия до первого действия перед обработкой. Если подключены дополнительные устройства, их значения также будут сохраняться в резервной копии.

Для восстановления изображения из резервной копии, сначала активируйте пациента, к которому это изображение относятся. Далее используйте кнопку «Импортировать резервную копию...» под кнопкой аквизиции изображений. В диалоговом окне появятся эскизы с данными и датами и временем получения снимков, а также фамилия пациента (для которого получены эти изображения). Выберите запись, которая будет импортирована и нажмите ОК. Изображение импортируется в таком виде, как заново отсканированное. В новом обследовании создается новая задача. Если Вы работаете с несохраненным обследованием, то задача будет приложена к данному обследованию. Теперь обычным образом заполните поля ввода требуемыми значениями. После новой регистрации или импорта всех изображений из резервной копии сохраните полное обследование с помощью кнопки в верхнем правом углу.

18.4.10 Рентгеновский журнал

Если модуль рентгеновского журнала активирован на станции, на которой загружаются новые изображение, то после сохранения обследования в рентгеновский журнал заносятся новые записи. Запись в рентгеновском журнале создается автоматически. В поле отображения задачи находится переключатель «Значения рентгеновского журнала». Нажатие на данную кнопку позволяет отобразить последующие поля, требующие заполнения. Здесь Вы можете дополнить значения, которые необходимо занести в журнал вместе с данным снимком. Если отсутствует требуемая обязательная запись, то перед сохранением выводится предупреждающее сообщение и обследование не может быть завершено. Необходимо заполнить требуемые поля и повторно нажать на «Сохранить обследование».

Системный администратор должен предварительно определить какие из параметров будут загружаться в рентгеновский журнал в процессе аквизиции изображения как обязательные, а какие – как дополнительные.

18.4.11 Показатель дозы экспозиции согласно EN 62494-1

Инструмент «Показатель дозы экспозиции» помогает в подборе настроек рентгеновского аппарата с целью получения изображения оптимального качества при экспозиции пациента на самое минимальное из возможных облучение. Этот инструмент доступен только тогда, когда аквизиция изображения, а также обработка изображения выполняются непосредственно в системе digipaX.


Если показатель отклонения после аквизиции изображения сильно отличается от нуля, с помощью этого инструмента следует проанализировать причины этой ситуации, чтобы предпринять соответствующие корректировочные меры.

Перед сохранением изображения нажмите на инструментарий «Показатель дозы экспозиции». На изображение будет нанесена маска и будут отображены значения: показатель дозы экспозиции, постоянное целевое значение, показатель отклонения и установленный масштаб серости. Показатель отклонения рассчитывается на основании целевого значения и показателя дозы экспозиции. Масштаб серости является средней величиной серости пикселов внутри отображаемой маски (по отношению к необработанной черновой области).

При открытии инструментария рассчитанная коллимация и рассчитанная маска представлены как накладка на объекте.



Здесь следует проверить правильность положения маски.


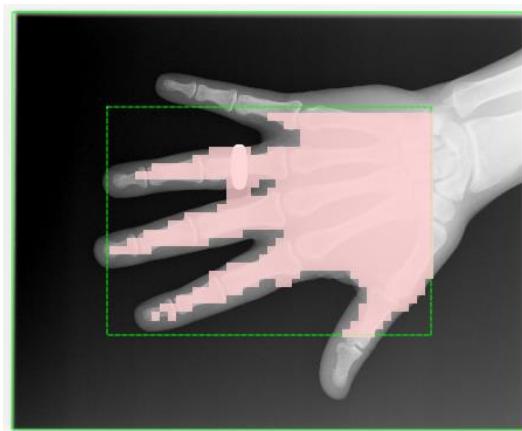


Коллимация определяется автоматически системой (зеленая непрерывная линия). К ней добавляется предварительно определенная кромка (зеленая прерывистая линия).

Кромка должна быть достаточно большой, чтобы не были включены области кроме коллимации, однако не должна ограничивать сам объект. На объект накладывается маска, показывающая, какие области изображения будут использованы для расчета показателя дозы экспозиции. Мaska может прикрывать только просвечиваемый лучами объект.

В случае отклонений можно еще поправить области с помощью 3 ползунов. Значения для расчетов при этом изменяются соответственно.

На примере изображения кромка должна быть изменена настолько, чтобы вся ладонь оказалась внутри кромки.

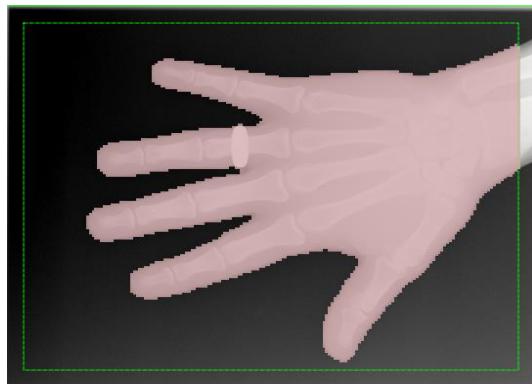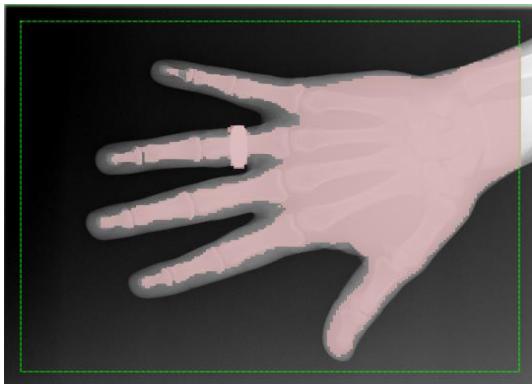

Используя регулятор «Точность», можно уточнить растр маски, а также уменьшить или увеличить выбор так, чтобы объект был оптимально прикрыт маской.



Кроме того следует проверить целевое значение, в случае необходимости обратиться к технику.

Если значения приемлемы, изображение можно сохранить.

Если несмотря на правильные настройки для кромки и маски появляется показатель отклонений, сильно отличающийся от нуля, следует соответственно подобрать дозу к аквизиции изображения. Если показатель имеет положительное значение, необходимо уменьшить дозу, если отрицательное значение, дозу следует увеличить, если качество изображения недостаточно хорошее. Оптимальной является небольшая доза при хорошем качестве изображения. Если несмотря на отрицательное значение изображения приемлемы, увеличение дозы необязательно.



Если при хорошей настройке радиологических параметров и соответствующей маске и правильном целевом значении имеют место большие отклонения показателя дозы экспозиции, следует выполнить калибровку показателя дозы экспозиции или всего рентгеновского аппарата. С этим вопросом обратитесь к технику.

18.4.12 Затушевывание полосок сетки

Если в рентгеновской системе используется детектор фирмы PerkinElmer (см. 18.4.2.4) и неподвижная отсеивающая сетка, на снимках могут быть видны полоски сетки. Эти полоски можно затушевывать с помощью соответствующего алгоритма (дополнительная функция). Эта функция должна быть сконфигурирована администратором системы.

В таком случае затушевывание полосок сетки происходит автоматически во время аквизиции изображения. В заглавии DICOM изображения можно проверить, были ли полоски сетки затушеваны. Для этой цели используется тег DICOM 0018,1166.

0018,1166 = пустой или отсутствует

-> полоски сетки не затушевываются

0018,1166 = FIXED

-> полоски сетки затушевываются

18.4.13 Проблемы и решения

Что делать если кассеты перепутались и изображения расположены в не правильной последовательности?

Задачи могут сортироваться перед сохранением в любой очередности и в такой очередности они будут сохранены. Также описание изображения, а также всех значений снимка, могут изменяться вручную. Именно поэтому следует обратить внимание на то, чтобы перед сохранением обследования, описания, значения и очередь были изменены соответствующим и правильным образом.

Что делать, если изображения назначены не тому пациенту?

Если новые изображения были назначены не тому пациенту нужно спра отклонить изображения. С этой целью необходимо аннулировать изображения и удалить задачи, потом выбрать нужного пациента и импортировать один из последних снимков из резервной копии. См. 18.4.7 Отклонение изображения и 18.4.9 Резервные копии.

Если изображения уже были сохранены в архив, их можно присвоить соответствующему пациенту, используя функцию редактирования. Функция удаления и редактирования должна быть включена администратором (см. раздел 8.9.2)..

Что делать если данные с устройств уже были переданы в архив до того как был создан клиент?

Данные с устройств сохраняются в резервной копии. По-этому активируйте нужного пациента; импортируйте данные из резервной копии; осмотрите снимки и сохраните их.

Что произойдёт если попытаться сменить текущего пациента или закрыть приложение прежде чем его изображения будут сохранены?

Появится сообщение о том, что сначала нужно сохранить или отклонить все изображения текущего пациента. Нельзя переключить текущего пациента или закрыть программу, пока изображения не сохранены в архив.

Что если произошёл сбой программы во время аквизиции изображения?

Снова запустите программу. Выберите пациента в разделе «Менеджмент пациентов» и проверьте какие изображения сохранились.

Если для текущего пациента сохранены не все изображения, откройте список резервных копий. Восстановите недостающие изображения. Если недостающие изображения отсутствуют, нажмите кнопку «Аквизиция изображений». Появится диалоговое окно, с помощью которого можно импортировать изображения с устройства аквизиции. Выберите «импортировать» – захваченные изображения будут импортированы и их можно будет сохранить. Если нужные изображения не были измортированы, изображения не возможно восстановить в программе. Изучите раздел о восстановлении изображений в руководстве по эксплуатации устройства аквизиции, или обратитесь к администратору системы.

18.5 Аквизиция изображений МРТ

18.5.1 Общее

Если модуль аквизиции изображений MR является доступным, соответственно подсвечивается дополнительная закладка «Аквизиция изображений МРТ». Закладка состоит из двух частей: Планирование (если эта функция включена) и Аквизиция. Модуль аквизиции изображений МРТ содержит дополнительные функции, которые можно скачать, а также функцию обработки изображений.

С правой стороны закладки отображаются подключенные аппараты (возможно эту настройку следует сначала включить в контекстном меню панели). При открытии значения поля эти данные подсвечиваются разными цветами (желтым цветом во время получения, зелёным во время удачного открытия значения, красным если получение было безуспешным). Внизу находятся элементы обслуживания аквизиции изображений и инструменты для обработки изображений. Благодаря контекстному меню можно показывать или прятать ненужные актуальные.

С левой стороны находится список задач, которые относятся к данному пациенту.

18.5.2 Специальные функции устройств и рекомендации по безопасности



Абсолютно необходимо перед каждой активацией проверить являются ли предварительные настройки для необходимой аквизиции правильными.



Способ проверки зависит от используемого аппарата. Спросите администратора системы, какие аппараты используются. Перед запуском необходимо пройти обучение в области технологии и программного обеспечения.

Могут существовать ограничения в применении аппаратов МРТ. К ним относятся кардиостимуляторы, имплантанты или иные металлические объекты. Детальные ограничения указываются производителем аппарата и должны быть четко соблюдены.

18.5.2.1 Сканер МРТ S.P. Helpic Ltd.

Поддержка устройства: Everest 1.5T, Renex 0.3T




Передаётся информация об пациенте и об выполненном обследовании. Пользователь должен её проверить перед проведением аквизиции изображений.

Коды процедур не передаются.

18.5.3 Ход аквизиции изображений МРТ

После выбора пациента, необходимо начать аквизицию изображений. Выберите необходимую задачу, соответственную позицию размещения пациента с открытого списка с правой стороны, нажимая иконку аквизиции в задачи. Затем выполните обследование пациента.

Дополнительно можно включить в контекстном меню правой панели настроек большую кнопку для аквизиции изображения. Если Вы хотите его использовать, обратите внимание на то, что необходимая задача должна перед тем быть обозначена голубым цветом (путём отдельного нажатия необходимой задачи), чтобы скачиваемое изображение могло быть правильно отделено. Если ни одна задача не была обозначена голубым цветом или обозначенная задача уже содержит изображение, в этом случае будет использована следующая пустая задача без изображения.

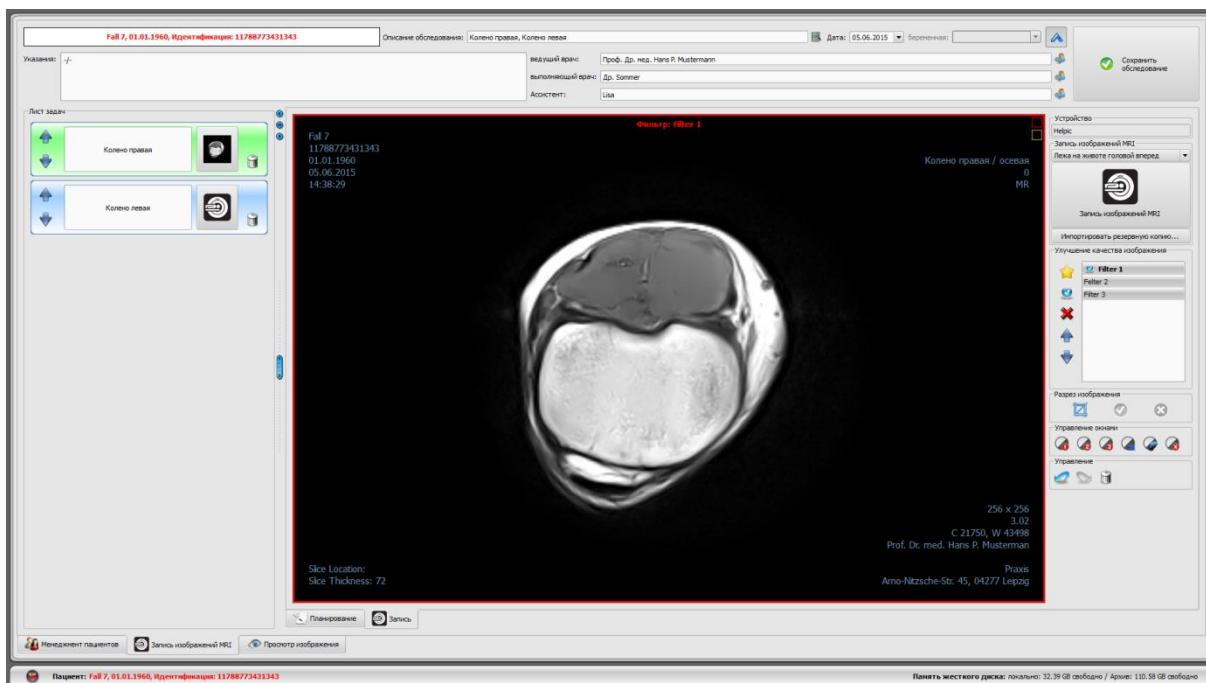

Если Вы начнете процедуру аквизиции, откроется программа для аквизиции, созданная производителем устройства для управления ним, получения изображений и пересылки данных об изображениях.

Когда первые изображения будут отсканированы, будут отделены к соответственной задачи и будут высвечиваться в качестве миниатюры в задачи и в качестве большого формата в окне. Во время, когда аппарат MRI выполняет следующую серию, можно просматривать уже выполненную серию в браузере изображений. В них можно изменять вложения изображений MR и браузера . Программирование для считывания данных об изображениях должно закрываться после окончания просмотра изображений (однако не системы digipaX).

Изображения будут отделяться для нового обследования и каждый из них будет отложен для новой серии. Название обследования создается автоматически сами задачами, однако возможно их также вводить вручную.

Введите фамилию рентгеновского специалиста. Когда Вы обработаете все задачи и данные будут полными, Вы можете закончить процедуру. Для этого нажмите кнопку «Записать обследование», чтобы переслать новые обследования в архив.

18.5.4 Улучшение качества изображения (фильтры МРТ)

18.5.4.1 Общее

Перед записью недавно полученных изображений, можно ещё установить специальные фильтры MRI. Они используются для оптимизации разных фрагментов изображения. В фильтрах применяются разные алгоритмы для обострения, сглаживания и обострения контраста.

Чтобы использовать эти фильтры, необходимо использовать специальный модуль, запуск которого требует лицензии. Кроме того, необходимо подключить дополнительный ключ (dongle), чье присутствие необходимо для активации модуля. В качестве фильтров доступны также файлы, которые впервые очередь необходимо интегрировать. Если у вас возникнут вопросы, касающиеся доступности и функций фильтра, обратитесь к системному администратору.

18.5.4.2 Руководство по безопасности



Качество изображения

Качество изображения должно быть оценено опытными радиологами.



Файлы с фильтрами:

Создайте структуру фильтров, давая им четкое название (например, заточка, сглаживание, повышение контрастности и т.д.), для того, чтобы избежать ошибок в их применении.



Обезопасте файлы с фильтрами.

Если обработка изображений не удалась или в случае аварии системы во время обработки, последние оригинальные изображения всегда доступны без фильтров в резервной копии.



Обновление системы:

После обновления системы (оборудования, операционной системы или антивирусных программ и т.п.) необходимо проверить функционируют ли фильтры и дальше.




Изменение устройства, которое получает изображения

В случае изменений устройства, которое получает изображения, таких как к примеру установка нового программирования или изменение настроек Вам возможно потребуется заново настроить фильтры для того, чтобы избежать ухудшения качества изображения.


В случае возникновения вопросов, обратитесь к администратору Вашей системы

18.5.4.3 Настройки

- 1 – Включить/выключить фильтр
- 2 – Добавить фильтр в список
- 3 – Удалить фильтр из списка
- 4 – Установить / удалить фильтр по умолчанию
- 5 – Перенести фильтр в списке

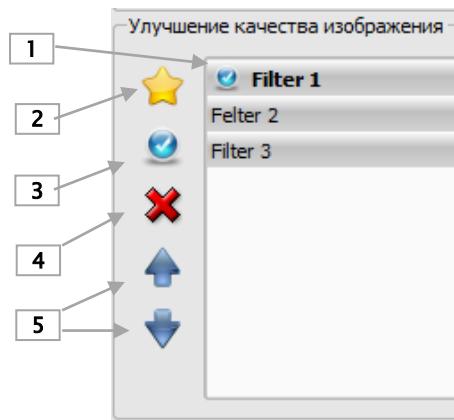

Чтобы добавить новый фильтр в список, нажмите значок (2) и откройте нужный файл фильтра, введите имя и нажмите кнопку ОК. Теперь новый фильтр доступен. Чтобы снова удалить фильтр из списка, нажмите 3.

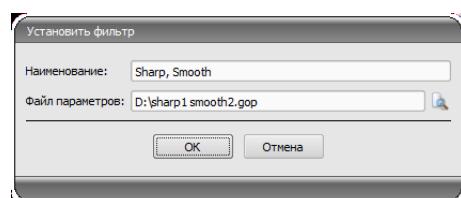

С помощью кнопки 4 вы можете установить фильтр по умолчанию. Этот фильтр может применяться автоматически для каждой аквизиции. Чтобы установить фильтр по умолчанию, нажмите соответствующий фильтр, а затем кнопку. Чтобы удалить фильтр по умолчанию, следует снова выполнить этих два шага. Благодаря использованию кнопки 5 можно изменить порядок фильтров в списке.

18.5.4.4 Применение фильтров

Фильтры должны быть установлены перед сохранением изображений МРТ. Изменения навсегда сохраняются в этой серии. Чтобы настроить фильтр, нажмите позицию в списке (1). Фильтры могут быть установлены много раз мешанным способом в любом порядке. На верхнем краю изображения имеется информация о том, что фильтры были установлены.

Каждое действие может быть отменено с помощью курсоров контроля. Фильтры должны регулироваться до того момента, пока желаемый эффект будет достигнут

18.5.5 Обозначение



Функция обозначения доступна только, если активен соответствующий модуль. Кроме того, функция обозначения должна быть включена в конфигурации на странице «Аквизиция изображений».

Перед сохранением изображения на нем можно выполнить обозначения. Можно, например, нанести виртуальные свинцовые буквы (L / R), нажимая на них левой кнопкой мыши и перетягивая мышью на изображение. В этом случае видна форма буквы, которую можно дополнительно уменьшить или увеличить, используя колесо прокрутки мыши или кнопки плюс / минус на клавиатуре. Далее следует переместить букву на нужное место и поместить ее там повторно, нажимая левой кнопкой мыши. Буква будет зафиксирована на изображении. Операцию можно отменить сразу после ее выполнения (стрелками под инструментарием).

На изображения можно также наносить тексты. Для того чтобы нанести текст на изображение, его следует вписать в поле (любой текст) или выбрать готовый текст из списка уже готовых текстов. Используя 4 кнопки для настроек текста на изображении можно поместить черный текст на белом фоне, белый текст на черном фоне, черный текст без фона или белый текст без фона, в зависимости от того, какая настройка возможна для данного изображения. Величину текстового поля можно также изменять таким же способом, как и величину виртуальных свинцовых букв.

После сохранения изображения уже нельзя устраниТЬ обозначений или текстов.

18.5.6 Обрезка изображений

Перед записью можно обрезать края изображения. Эта операция имеет следующие преимущества:

- сразу видна область изображения без необходимости расширения изображения с самого начала
- меньшее использование памяти
- быстрая передача данных
- быстрая презентация и редактирование изображения (например, обслуживание окон)

Тем не менее, есть существует риск обрезки изображения важной информации, размещенной на изображениях



Оригинальное изображение доступно только в качестве резервной копии в списке недавно полученных изображений. Если изображение было сохранено в архиве изображений, не возможным будет воспроизвести обрезку краев.

Обрезка изображений всегда оставляет след всех изображений в выбраной серии MRI. Для того, чтобы обрезать представленное изображение, необходимо сначала нажать

«Выбрать область». Затем дважды щелкните левой кнопкой мыши на изображение, чтобы выбрать угловые точки изображения, которые мы хотим в конечном итоге получить.

Теперь Вы можете видеть в области предварительного просмотра изображение, то, которое мы получаем после резки. **Ещё раз проверьте этот отрывок, не была ли с обрезкой изображения отрезаны важная информация, размещенная на нем.** Нажатие кнопки «Принять», подтвердите обрезку изображения и операция будет выполнена. Изображение, однако, ещё не будет сохранено и не будет автоматически перемещено в архив изображений. Выполненную операцию можно отменить нажатием кнопки «Отменить», также, как и другие операции. Нажав на кнопку «Отклонить» Вы можете отменить выбор и произвести новый. Таким образом, Вы можете удалить неправильный выбор.

18.5.7 Обслуживание окон

До поступления отсканированных изображений они могут быть подвергнуты, например можно применить дальнейшее обслуживание окон. Для этого используются кнопки для автоматического функционирования окон, как и в браузере изображений (см раздел 7.3.2).

18.5.8 Непринятие изображений

Отдельные изображения не могут быть отклонены, только выбранные серии. Это означает, что они не будут перемещены в архив изображений, но будут удалены. Нажмите значок корзины в задачи, а затем выберите «Удалить только серию изображений» или миниатюру в изображении, чтобы показать серию в большом формате в браузере и нажмите «Отклонить» в правой нижней части на панели инструмента. Система выдаёт вопрос, действительно Вы хотите ли отклонить изображение .На вопрос следует ответить «Да».

18.5.9 Импортирование резервной копии

Для каждой полученной серии изображений в качестве первой создается резервная копия. В случае необходимости серии изображений может быть восстановлены из резервной копии каталога. Для этого, сначала откройте пациента, к которому относятся данные изображения. Затем нажмите «Импортировать резерв. копию...». В появившемся диалоговом окне, показываются миниатюры с датой и временем получения серии. Выберите серию, которую Вы хотите импортировать, подтвердите выбор нажатием кнопки OK. Серия будет импортирована и назначена согласно новой задачи.

18.5.10 Решение проблем

Что необходимо предпринять для того, чтобы пациент и дальше был активным?

Если новые изображения были назначены ненадлежащему пациенту, Вы можете удалить их. Для этого необходимо отклонить каждое изображение и удалить задачу. Затем открыть необходимого пациента и ещё раз импортировать одно из последних изображений нажимая кнопку «Импортировать резервную копию ...». Пожалуйста, обратитесь к секции «Отклонение изображений» смотрите 18.5.8 и 18.5.9 «Импортирование резервной копии изображения».

Если изображения уже сохранены, вы также можете импортировать их для необходимого пациента с резервной копии и повторно сохранить их. Тем не менее, неправильно сохраненные изображения первого пациента должны быть удалены из архива изображений администратором системы или при помощи функции удаления (смотрите раздел 8.9).

Что делать, когда предпринимается попытка изменить пациента или выход из программы, хотя ещё не все изображения актуального пациент не были сохранены?

Высвечивается сообщение, что в первую очередь необходимо сохранить или отменить все активные изображения пациента. Пациент не может быть изменен, а также работа программы не может быть завершена, пока существуют необеспеченные изображения

Что предпринять в случае неполадки системы во время аквизиции изображений? Необходимо перезапустить приложение. Если Вы не уверены в том, что процедура записи изображений была успешно завершена, необходимо открыть пациента в управлении пациентами и проверить его изображения.

Если изображения не были полностью сохранены, Вы должны импортировать их из резервной копии. Чтобы сделать это, откройте список резервных копий и импортируйте резервную копию (см. также 18.5.9 «Импортирование резервной копии») для уже правильно выбранного пациента, и еще раз выполните запись изображений.

18.6 Frame grabber / аквизиция серии изображений

18.6.1 Общее

Модуль «Frame grabber» позволяет получать одиночные изображения или целые серии изображений из внешнего источника с помощью видеоконвертера и передавать их в архив изображений. Frame grabber может быть установлен лишь при наличии в источнике изображений видеоинтерфейса Composite или S-Video, к которому можно подсоединить видеоконвертер. Конвертер преобразует данные изображений и передает их в компьютер. Может использоваться оборудование обслуживающее только производителя «The Imaging Source» которые обслуживают DirectShow или имеют драйвер WDM. Подробную информацию относительно технических деталей и помощи при подборе наиболее соответствующего устройства Вы можете получить у администратора системы.

Существуют устройства, которые должны быть вмонтированы в компьютер, а также такие, которые могут быть подсоединенены под внешний коммуникационный порт USB. Обслуживание может осуществляться с помощью клавиатуры, мыши или внешнего ножного переключателя. Могут использоваться ножные переключатели с USB-разъемом или же разъемом последовательного порта (COM-портом). В случае использования ножного переключателя с USB-разъемом данный переключатель лучше всего должен иметь две программируемые педали. Под одной из педалей будет запрограммирована кнопка F5 клавиатуры, а под другой – F9, при этом можно по усмотрению выбрать, какая (правая или левая) из педалей будет соответствовать какой-либо из двух вышеупомянутых кнопок клавиатуры. Как правило, программирование осуществляется с помощью программного обеспечения, которое приложено к переключателю.

Использование ножного переключателя с последовательным портом возможно лишь при условии наличия возможности подсоединения такого переключателя к компьютеру. В настоящее время в большинстве компьютеров **уже не предусмотрен** данный разъем, именно поэтому этот порт должен быть предварительно установлен.

Каким образом подсоединить и установить устройство Вы можете узнать в документации изготовителя данного устройства. Установку должен проводить исключительно специалист.

Модуль «Аквизиция серии изображений» позволяет создавать данные изображений внешней системой и передавать их в digipaX для последующей обработки. Таким образом приложение принимает эти данные и занимается их дальнейшей обработкой.

18.6.2 Системные требования для установки видеопроцессора frame grabber

Для обработки серии изображений со скоростью нескольких изображений в секунду необходим компьютер соответствующей мощности. Ниже приведена таблица, отображающая минимальные требования, которым должен соответствовать компьютер, для обслуживания frame grabber и digipaX.

Процессор	Dual Core или Quad Core от 2,5 ГГц и выше
Рабочая память	2 Гб RAM и выше
Операционная система	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 (только Business/Pro и выше)
Программное обеспечение	DirectX 9c и выше
Графика	минимум 128 Мб DVI (Dual), мин. 1280 x 1024
Жесткий диск	мин. 60 Гб
Сеть	1000BaseT (Gigabit Ethernet)
Интерфейсы оборудования	свободный порт USB 2.0 для внешних устройств или же свободный разъем (чаще всего PCI или PCIe) для встроенных в компьютер устройств и дополнительный USB-разъем в случае использования переключателя с таким разъемом СОМ-порт в случае использования ножного переключателя с разъемом последовательного порта


18.6.3 Конфигурация frame grabber в digipaX

Для того, чтобы можно было пользоваться модулем «Frame grabber» в системе digipaX, он должен быть лицензирован и запущен. Конфигурация в digipaX также должна быть проведена специалистом. Если модуль включен, тогда в браузере изображений будет активирована новая панель инструментов для настройки и управления устройством.

С помощью переключателей «Видеисточник» и «Конфигурация» осуществляется выбор и конфигурация подсоединенного устройства. Элементы конфигурации и обслуживания активируются только после того, как был открыт только ОДИН пациент. Если было открыто более одного пациента, тогда элементы дезактивируются. Таким образом данные изображений не могут быть присвоены несоответствующим пациентам.

18.6.3.1 Видеоисточник

- **Название устройства:** если видеоустройство было правильно установлено, то оно отображается в списке «Название устройства». Если список пуст – это значит, что либо устройство было установлено неправильно либо оно не соответствует вышеприведенным требованиям. Если в списке присутствуют несколько устройств, тогда необходимо выбрать одно из них.
- **Серийный номер:** отображает серийный номер выбранного устройства.
- **Свойства:** открывает диалоговое окно доступа к разным точным настройкам устройства. Подробнее об этом в документации изготовителя.
- **Видеостандарт:** настраивает видеостандарт. Стандарт зависит от видеоисточника или же источника изображений. В Европе обычно применяется стандарт PAL.
- **Видеоформат:** рекомендуется использовать изображения с высоким разрешением параллельно с наилучшей глубиной цвета устройства.
- **Эффективность работы преобразователя:** определяет количество изображений в секунду, поставляемых видеоисточником. При скорости 25 изображений в секунду, каждые 40 миллисекунд видеоисточник транслирует изображение.
- **Входной канал:** видеointerфейс видеоконвертера, к которому подсоединен видеоисточник.

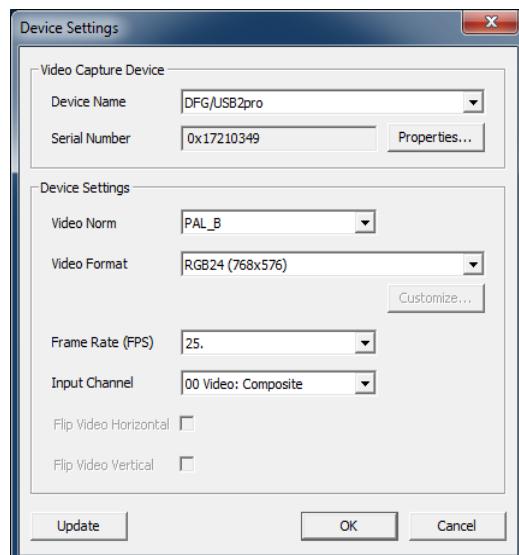

Всем данным настройкам не присущи общие обязательные параметры. Параметры всегда зависят от используемого компьютерного оборудования и могут быть разными. Детальная информация относительно данной темы размещена в документации изготовителей компьютерного оборудования и видеоконвертера, а также источника изображений или же видеоисточника.

18.6.3.2 Конфигурация


В данном случае активируется диалоговое окно доступа к точным настройкам аналогичное «Видеоисточник/Свойства». Разница состоит лишь в том, что диалоговое окно в данном месте можно активировать и изменять настройки также в процессе прямой передачи изображений.

18.6.4 Элементы обслуживаемые видеопроцессором frame grabber

Для обслуживания можно использовать мышь или клавиатуру. Кроме того, существует возможность подсоединения внешнего ножного переключателя компьютера. Благодаря этому, устройство можно обслуживать с помощью ступней, а руки использовать для обслуживания источника видеосигнала. Кнопки F5 (Запуск прямого изображения) и F9

(Запуск моментального снимка) можно по усмотрению настроить к любой из педалей ножного переключателя, для создания оптимально удобных условий работы обслуживающему лицу.

- **привести в действие прямое изображение:** отображает изображение при активной прямой передаче в браузере.
- **масштабировать до размеров окна:** увеличивает или уменьшает изображение до размеров окна.
- **Старт (F5):** запускает прямую передачу изображения. Данное действие можно активировать путем щелчка мышью, нажатия на кнопку клавиатуры F5 или на соответствующую педаль ножного переключателя. Повторное нажатие задерживает передачу.
Необходимо обратить внимание на то, что полученные изображения можно обрабатывать только после задержки прямой передачи.
- **Моментальный снимок (F9) при настройке одиночных изображений:** щелчком по мыши, нажатием на кнопку клавиатуры F9 или на соответствующую педаль ножного переключателя осуществляется моментальный снимок текущей видеопередачи.
- **Регистрация (F9) при настройке серии изображений:** щелчком по мыши, нажатием на кнопку клавиатуры F9 или на соответствующую педаль ножного переключателя в течение определенного времени загружается серия изображений. Детальная информация по данной теме находится в пункте «Серия изображений».
- **одиночные изображения:** переводит переключатель регистрации на моментальные снимки. Всегда получаются только одиночные изображения.
- **серия изображений:**
 - интервал: – определяет в течение какого времени будет загружаться изображение. Необходимо обратить внимание на то, что максимальное количество изображений в секунду зависит от установленного преобразователя frame grabber, а также эффективности работы компьютера.
 - продолжительность: – регистрация автоматически завершается по истечении наведенного времени. Запуск регистрации производится щелчком мыши или одноразовым нажатием на кнопку F9 либо на соответствующую педаль ножного переключателя.
 - до тех пор, пока кнопка находится в нажатом состоянии: – регистрация запускается путем щелчка мышью, нажатия на кнопку F9 или на соответствующую педаль ножного переключателя и остается во вкл. состоянии до тех пор, пока остается нажатой кнопка.
- **распределять регистрации по отдельным сериям:**
 - при одиночных изображениях каждое из изображений сохраняется в отдельной серии и также может отдельно описываться

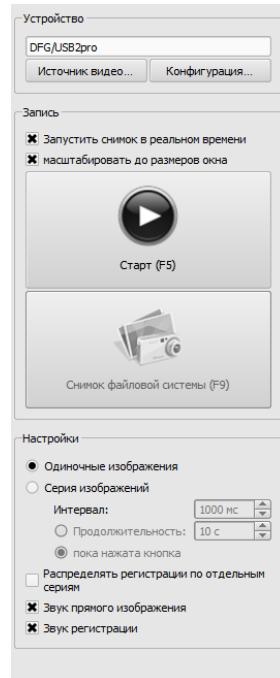


- при серии изображений после каждого нажатия на клавишу начинается новая регистрация в новой серии
- **звук прямого изображения:** воспроизведение звука в ходе представления прямого изображения для акустической проверки
- **звук регистрации:** воспроизведение звука в ходе регистрации также для акустической проверки.

Для воспроизведения звуковых сигналов компьютер или же монитор должны быть оборудованы колонками, которые в свою очередь должны быть соответствующим образом отрегулированы. В случае возникновения каких-либо вопросов обращайтесь к системному администратору.

18.6.5 Аквизиция с использованием видеопроцессора frame grabber

Если менеджмент задач активен, то здесь отображается также закладка планирования и менеджмента задач. Для аквизиции серии изображений необходимо включить передачу в реальном времени путем щелчка по соответствующей иконке в задаче или отметить задачу синим цветом и нажать на кнопку Start на панели инструментов справа либо на клавишу F5 или же на ножной переключатель (если применяется).

Полученные одиночные изображения или же серии изображений отображаются в виде кандидатов в окне просмотра внизу, количество одиночных изображений отображается в задаче. После того, как будет задержана прямая передача, полученные изображения отображаются также в виде просмотра миниатюр и могут проходить обработку.

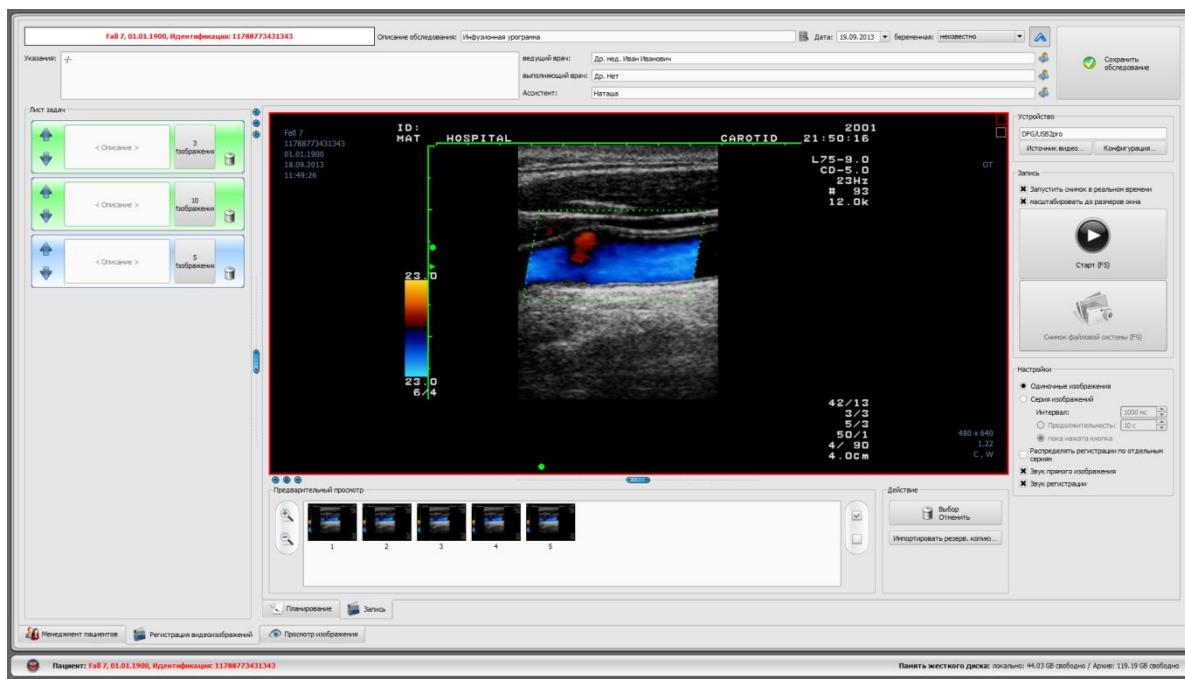

После активации одиночных изображений одновременно с моментальным снимком получается новое изображение и добавляется к листу кандидатов активной задачи. При новом запуске передачи изображений в реальном времени система каждый раз переходит к следующей задаче. Таким образом, можно разрабатывать задачу за задачей.

Если до того не были созданы задачи, то они будут создаваться автоматически с включения передачи изображений в реальном времени.


Также при настройке «Серия изображений» все полученные изображения откладываются в одну серию, а серия закрывается при завершении прямой передачи изображений.

Дальнейшая обработка данных и сохранение в архиве описаны в разделе 18.6.7 Обработка и сохранение полученных изображений.

18.6.6 Аквизиция с помощью модуля аквизиции серии изображений

Изображения получаются из внешней системы и передаются посредством компьютера, а приложение принимает эти данные. После того как будет передано первое изображение, digipaX ожидает в течение времени ожидания, наведенного администратором системы. Если в течение наведенного времени не будут получены следующие изображения, тогда полученные изображения автоматически добавляются к листу кандидатов активной задачи и откладываются в новую серию. Если Вы целесообразно желаете получить несколько серий одного пациента, то для этого лучше всего получить по возможности изображения серии во внешней системе, а затем передать закрытую серию в digipaX и подождать до тех пор, пока digipaX завершит импорт серии. Затем можно продолжить процедуру без предварительного сохранения полученной серии со следующей серией. В завершение можно провести соответствующую обработку изображений и занести их в архив.

18.6.7 Обработка и сохранение полученных изображений

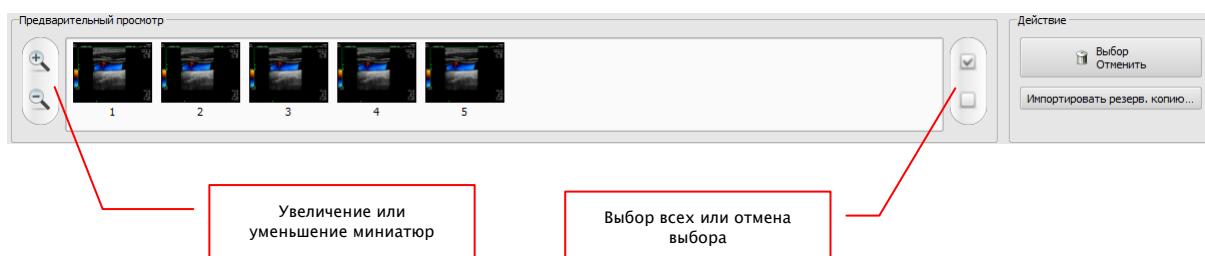

В случае щелчка по листу задач в окне просмотра отображаются изображения-кандидаты. Чтобы улучшить отображение можно увеличивать или уменьшать миниатюры. Двойной щелчок по миниатюре позволяет вывести изображение во вьювере в большом формате. Перед сохранением можно проверить изображения, а также избавиться от тех, которые Вы не хотите сохранять. Щелкните раз по миниатюре, миниатюра будет обозначена синим цветом, затем щелкните по «Отменить выбор». Щелкнув по «Убрать выбор», Вы уберете пометку со всех обозначенных изображений. Если Вы желаете отменить целую серию, тогда Вам необходимо щелкнуть по «Выбрать все», а затем по «Отменить выбор» или щелкните по иконке корзины в задаче, а затем выберите «Удалить только изображения». Когда обработка всех серий уже готова, введите необходимые данные в соответствующие поля, а затем щелкните по «Сохранить обследование» для того, чтобы отправить в архив.

18.6.8 Импортирование резервных копий

к каждой прямой передаче изображений или же серий изображений создаются резервные копии полученных моментальных снимков или серий изображений. В случае, если возникнет такая необходимость, их можно воспроизвести благодаря резервной копии. Для этого сначала активируйте пациента, которому будут присвоены изображения. Щелкните кнопкой мыши по «Импортировать резервную копию...». В активированным диалоговом окне отображаются миниатюры регистрации с датой, временем и количеством изображений oraz nazwisko pacjenta (dla którego pozyskano obrazy). Выберите регистрацию, которую Вы желаете импортировать и подтвердите выбор путем нажатия на кнопку OK. Моментальные снимки или серии изображений импортируются обратно и присваиваются новой задаче. В качестве альтернативы можно также присвоить резервную копию существующей задаче, предварительно обозначая задачу синим цветом и осуществляя импорт резервной копии.

18.6.9 Проблемы и решения

Что делать, если неправильный пациент ещё активирован?

Если новые изображения были назначены не тому пациенту нужно сперва удалить (отклонить) изображения. Потом выбрать нужного пациента и импортировать нужные снимки из резервной копии (кнопкой «Импортировать резервную копию...»). См. 18.6.7 Обработка и сохранение полученных изображений и 18.6.8 Импортирование резервных копий.

Если неправильные изображения уже были сохранены в архив, нужно выбрать нужного пациента и импортировать необходимые снимки из резервной копии. Изображения неправильно присвоенные первому пациенту должны быть удалены заведующим или администратором системы либо с помощью функции удаления (см. раздел 8.9) из архива.

Что делать если данные с устройств уже были переданы в архив до того как был создан пациент?

Это может произойти только когда употребляемый модуль аквизиции серии изображений.

Если пациент не активирован, данные изображений остают в указанной папке для передачи данных. Как только активируете пациента, эти данные изображений будут импортированы и назначены тому пациенту. Затем можете продолжать normally с сохранением изображений.

Что произойдёт если попытаться сменить текущего пациента или закрыть приложение прежде чем его изображения будут сохранены?

Появится сообщение о том, что сначала нужно сохранить или отклонить все изображения текущего пациента. Нельзя переключить текущего пациента или закрыть программу, пока изображения не сохранены в архив.

Что если произошёл сбой программы во время аквизиции изображения?

Снова запустите программу. Выберите пациента в менеджменте пациентов и проверьте какие изображения сохранились.

Когда употребляемый модуль получения серии изображений все ещё не импортированы изображения будут автоматически ещё раз прочитаны для пациента и Вы можете продолжать нормально с сохранением изображений. Если это не происходит или Вы работаете с модулем frame grabber, нужно импортировать нужные изображения из резервной копии. Для того активируйте список резервных копий и импортируйте резервную копию для уже правильно выбранного пациента и проведите запись ещё раз.

18.7 Аквизиция изображений из томосинтеза

18.7.1 Общее

Если в конфигурации включен модуль для аквизиции изображений из томосинтеза, то отображается дополнительная вкладка «Аквизиция изображений из томосинтеза». Она составляется из частей Планирование (если включено) и Аквизиция. Аквизиция изображений содержит дополнительные функции для получения и обработки изображений. Возможна аквизиция, как одиночных рентгеновских изображений, так и серии изображений из томосинтеза.

С правой стороны данной вкладки показаны подключенные устройства (если необходимо, отображение необходимо активировать в контекстном меню панели инструментов). Поля вкладки, во время сканирования, временно отмечаются цветом (желтым во время передачи, зеленым при успешной передаче, красным при неудачной передаче).

Под закладкой расположены элементы для обслуживания аквизиции изображений и инструменты для их обработки. В контекстном меню можно скрывать и открывать необходимые функции. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по области инструментов и включить или выключить функцию в вызванном меню.

Слева расположен список задачи текущего пациента.

18.7.2 Специальные функции устройств и правила безопасности

К каждому устройству применяются так называемые коды процедур (Procedure Codes) для передачи выбранного органа и проекции. Эти коды попадают совместно с рентгеновским заданием в устройство. Устройства по умолчанию настроены на выбранную съемку, без необходимости повторного выбора органа и проекции в устройстве. Это значит, что в генераторе по умолчанию настроены показатели kV и mAs для съемки на базе этих кодов.

Поэтому в случае передачи неправильного кода, как результат, неправильные настройки генератора могли бы создавать угрозу для пациента.

Именно поэтому перед съемкой обязательной является проверка настроек по умолчанию на соответствие выбранному типу съемки.

Вид проверки зависит от используемого устройства. Обратитесь к администратору Вашей системы с целью получения информации относительно используемых в ней устройств. Перед запуском необходимо в обязательном порядке пройти детальное обучение по технике и программному обеспечению.

18.7.2.1 Генератор Josef Betschart AG

Совместимые устройства: GENESIS 50 RFT или DT



Перед каждой съемкой на экране консоли генератора / панели управления необходимо проверять правильность показателей съемки, и в случае необходимости, сделать соответствующие изменения.

18.7.2.2 Детектор Teleoptic


Совместимые устройства: Phoenixray

В устройство не передаются коды процедур.

18.7.3 Ход аквизиции изображений из томосинтеза

После выбора пациента, необходимо начать аквизицию изображений. Если для этого пациента еще не запланированы никакие задачи, следует, прежде всего, создать их в закладке планирования. Далее выбрать необходимую задачу и нажать на иконку аквизиции в задачи.

Дополнительно можно включить в контекстном меню правой панели настроек большую кнопку для аквизиции изображения. Если Вы хотите его использовать, обратите внимание на то, что необходимая задача должна перед тем быть обозначена голубым цветом (путем отдельного нажатия необходимого задачи), чтобы скачиваемое изображение могло быть правильно отделено. Если ни одна задача не была обозначена голубым цветом или обозначенная задача уже содержит изображение, в этом случае будет использована следующая пустая задача без изображения. По мере возможности необходимо всегда придерживаться правильной очередности шагов, что поможет избежать ошибок в ходе присваивания задач.

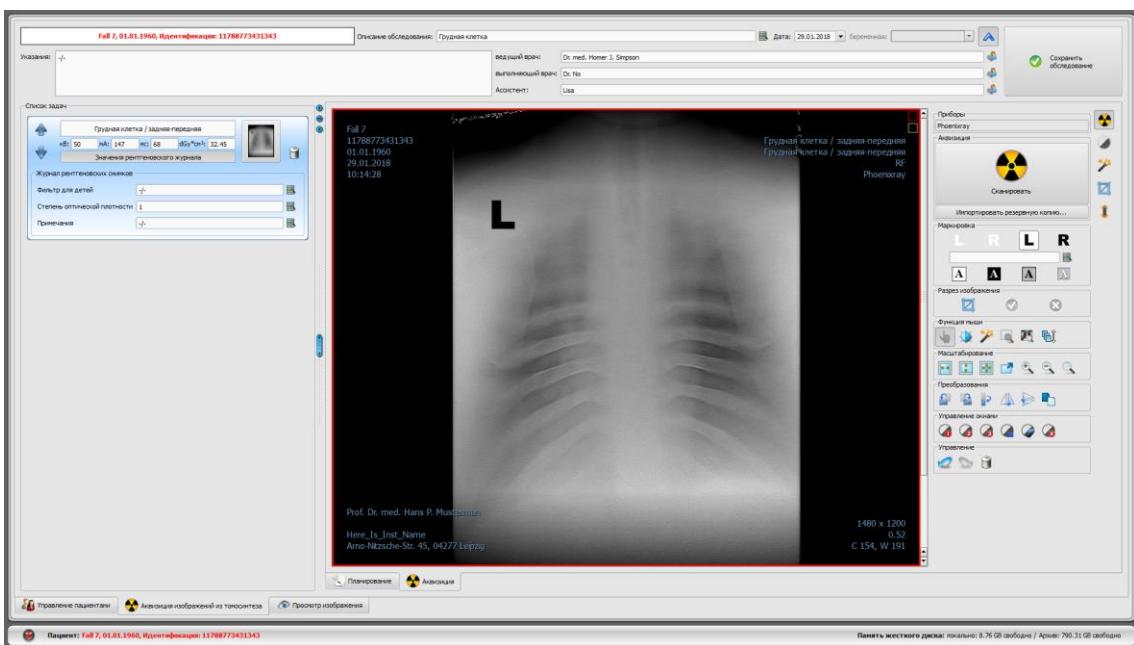

Когда Вы уже начнете процедуру аквизиции, откроется программа аквизиции рентгеновских изображений предоставляемая изготовителем устройства, при помощи которого передаются данные об изображении.




Подпись и символ кнопки аквизиции рентгеновских изображений могут отличаться на вашей установки. Это зависит от конфигурации системы.

18.7.4 Выбор интересных изображений



С помощью этой функции неинтересные для обследования изображения можно обрезать в начале и в конце полученной серии изображений из томосинтеза. Таким образом, серии сокращаются к изображениям, которые подходят или имеют отношение к обследованию.

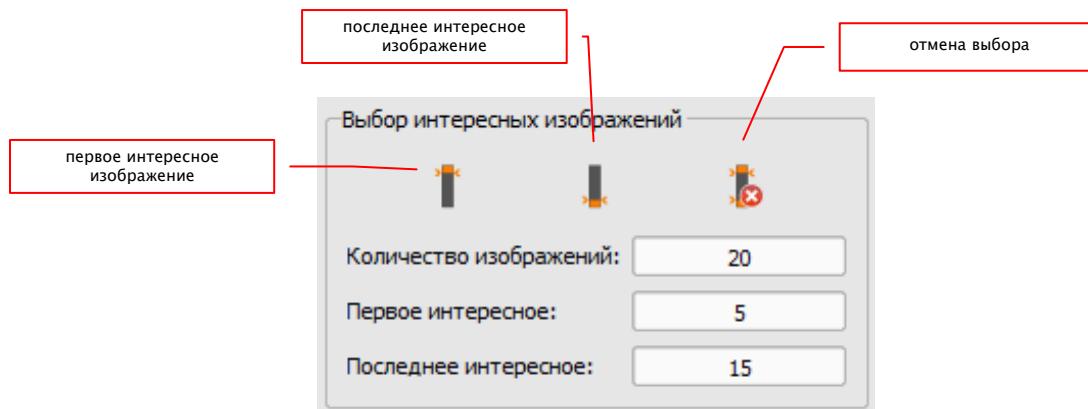

После аквизиции изображений нажмите на соответствующую иконку справа на панели инструментов. Прокрутите к первому существенному изображению и нажмите на кнопку «первое интересное изображение». Затем прокрутите к последнему существенному изображению и нажмите на кнопку «последнее интересное изображение». Таким образом, есть теперь два установленных «виртуальных обозначения обрезки». Для контроля изображения неинтересные для обследования закрыты серой вуалью. Выбирая кнопку «отмена выбора» Вы можете отменить действия.

Когда Вы здесь закончите, выполните все дальнейшие необходимые шаги (см. следующие разделы). Только когда обследование сохраняется, изображения помеченные здесь как «неинтересные» обрезаются, и только «интересные» изображения передаются в архив.

18.7.5 Обозначение

В случае серии изображений из томосинтеза обозначения всегда относятся ко всем изображениям серии.



Функция обозначения доступна только, если активен соответствующий модуль.

Перед сохранением изображения на нем можно выполнить обозначения (функция обозначения должна быть включена в конфигурации на странице «Аквизиция изображений»). Можно, например, нанести виртуальные свинцовые буквы (L / R), нажимая на них левой кнопкой мыши и перетягивая мышью на изображение. В этом случае видна форма буквы, которую можно дополнительном уменьшить или увеличить, используя колесо прокрутки мыши или кнопки плюс / минус на клавиатуре. Далее следует переместить букву на нужное место и поместить ее там повторно, нажимая левой кнопкой мыши. Буква будет зафиксирована на изображении. Операцию можно отменить сразу после ее выполнения (стрелками под инструментарием). Когда изображение будет сохранено, из него нельзя будет удалить обозначение.

На изображения можно также наносить тексты. Для того чтобы нанести текст на изображение, его следует вписать в поле (любой текст) или выбрать готовый текст из списка уже готовых текстов. Используя 4 кнопки для настроек текста на изображении можно поместить черный текст на белом фоне, белый текст на черном фоне, черный текст без фона или белый текст без фона, в зависимости от того, какая настройка возможна для данного изображения. Величину текстового поля можно также изменять таким же способом, как и величину виртуальных свинцовых букв.

После сохранения изображения уже нельзя устраниТЬ обозначений или текстов.

18.7.6 Обрезка изображения

В случае серии изображений из томосинтеза обрезка всегда относится ко всем изображениям серии.



Обрезка изображения доступна только при активированном соответствующем модуле.

Перед тем как изображения будут сохранены, они могут быть обрезаны по краям. Это дает следующие преимущества:

- можно осматривать отдельные части изображения, без изменения масштаба;
- используется меньше памяти на жестком диске;
- осуществляется быстрая передача данных;
- быстрое отображение и обработка изображений (например, кадрирование)

Тем не менее, существует опасность, что на снимке может быть обрезана важная информация.



Исходное изображение доступно только в качестве резервного снимка в списке новых изображений. Если обрезанное изображение сохранено в архиве, оно уже не может быть восстановлено.

Для обрезки изображения, нажмите на кнопку «Пометить изображение». После этого щелкните левой кнопкой мыши два раза по изображению и отметьте область, которую хотите вырезать. В предварительном просмотре отображается часть снимка, которая будет вырезана.

Проверка и запись



Проверьте еще раз изображение в предварительном просмотре, не будет ли удалена какая-нибудь важная информация после обрезки. Прокрутить колесиком мыши серию изображений или воспользоваться полосой прокрутки на правой стороне изображения, чтобы проверить, как будут выглядеть после вырезки другие изображения серии и, не будут ли случайно отрезаны существенные части других изображений серии.

Нажав на кнопку «Принять» вы подтверждаете обрезку, но при этом изображение еще не сохраняется, и вы можете отменить это действие. Нажав на кнопку «Отменить» отменяется выбранная область для обрезки, и вы можете ее откорректировать.

18.7.7 Трансформация изображений / оконный режим/ фильтры / диафрагма

Перед сохранением новых отсканированных изображений Вы можете осуществлять последующую их обработку, напр., проводить трансформацию (поворот/зеркальное отражение), устанавливать фильтры или же изменять оконный режим. Для этой цели служат функции мыши и такие же как в веб-браузере инструменты для масштабирования, а также инструменты для оконного режима и трансформации.

На панелях инструментов справа размещены прокрутки для оконного режима с настройками по умолчанию (пресеты) и конкретные инструменты предназначенные для фильтров и диафрагмы.

Все изменения (поворот, отражение, кадрирование и т.д.) сохраняются и передаются в архив. Эти преобразования сразу же отображаются на других станциях, на которых извлекается изображение.

В конфигурации («Аквизиция изображений») вращение и отражение могут быть установлены автоматически, и применяться ко всем новым изображениям.

В случае серии изображений из томосинтеза изменения всегда относятся ко всем изображениям серии.

18.7.8 Отклонение изображения

Отдельные изображения или серии изображений могут быть отклонены. Это означает, что они не передаются в архив изображений, а сразу удаляются. Щелкните по иконке корзины в задачи, а затем выберите «Удалить только изображения» или же по миниатюре в задачи, чтобы отобразить ее во вьювере в большом формате, и нажмите на кнопку «Отменить», расположенную справа внизу на панели инструментов. Появляется сообщение о подтверждении, на которое необходимо ответить «Да». При этом одновременно удаляются значения генератора, которые уже были присвоены изображению.

18.7.9 Дополнительные устройства

Как уже было сказано ранее, к системе могут быть подключены дополнительные устройства, как например, генератор рентгеновского излучения. Устройства автоматически передают новые значения в систему или система сама циклически запрашивает данные. Как только становятся доступны новые значения, то осуществляется их присвоение либо к текущей (обозначенной синим цветом) задачи или же изображению либо к следующей по списку, которая не имеет никаких значений. В противном случае, заводится новая задача и ей присваиваются соответствующие значения.

18.7.10 Резервные копии

Для каждого изображения, которое будет загружено, создается резервная копия до первого действия перед обработкой. Если подключены дополнительные устройства, их значения также будут сохраняться в резервной копии. В резервной копии будут также сохраняться изображения обрезаны как «неинтересные» (см. раздел 18.7.4).

Для восстановления изображения из резервной копии, сначала активируйте пациента, к которому это изображение относится. Далее используйте кнопку «Импортировать резервную копию...» под кнопкой получения изображений. В диалоговом окне появятся эскизы с данными и датами и временем аквизиции снимков, а также фамилия пациента (для которого получены эти изображения). Выберите запись, которая будет импортирована и нажмите ОК. Изображение импортируется в таком виде, как заново отсканированное. В новом обследовании создается новая задача. Если Вы работаете с несохраненным обследованием, то задача будет приложена к данному обследованию. Теперь обычным образом заполните поля ввода требуемыми значениями. После новой аквизиции или импорта всех изображений из резервной копии сохраните полное обследование с помощью кнопки в верхнем правом углу.

18.7.11 Проблемы и решения

Что делать если задачи расположены в не правильной последовательности?

Задачи могут сортироваться перед сохранением в любой очередности и в такой очередности они будут сохранены. Также описание изображения, а также всех значений снимка, могут изменяться вручную. Именно поэтому следует обратить внимание на то, чтобы перед сохранением обследования, описания, значения и очередь были изменены соответствующим и правильным образом.

Что делать если изображения назначены не тому пациенту?

Если новые изображения были назначены не тому пациенту нужно спра отклонить изображения. С этой целью необходимо аннулировать изображения и удалить задачи, потом выбрать нужного пациента и импортировать один из последних снимков из резервной копии. См. 18.7.8 Отклонение изображения и 18.7.10 Резервные копии.

Если изображения уже были сохранены в архив, их можно присвоить соответствующему пациенту, используя функцию редактирования. Функция удаления и редактирования должна быть включена администратором (см. Раздел 8.9.2).

Что произойдёт если попытаться сменить текущего пациента или закрыть приложение прежде чем его изображения будут сохранены?


Появится сообщение о том, что сначала нужно сохранить или отклонить все изображения текущего пациента. Нельзя переключить текущего пациента или закрыть программу, пока изображения не сохранены в архив.

Что если произошёл сбой программы во время аквизиции изображения?

Снова запустите программу. Выберите пациента в разделе «Менеджмент пациентов» и проверьте какие изображения сохранились.

Если для текущего пациента сохранены не все изображения, откройте список резервных копий. Восстановите недостающие изображения. Если недостающие изображения отсутствуют, нажмите кнопку «Аквизиция изображений». Появится диалоговое окно, с помощью которого можно импортировать изображения с устройства аквизиции. Выберите «импортировать» – захваченные изображения будут импортированы и их можно будет сохранить. Если нужные изображения не были измортированы, изображения не возможно восстановить в программе. Изучите раздел о восстановлении изображений в руководстве по эксплуатации устройства аквизиции, или обратитесь к администратору системы.

19 Конфигурация

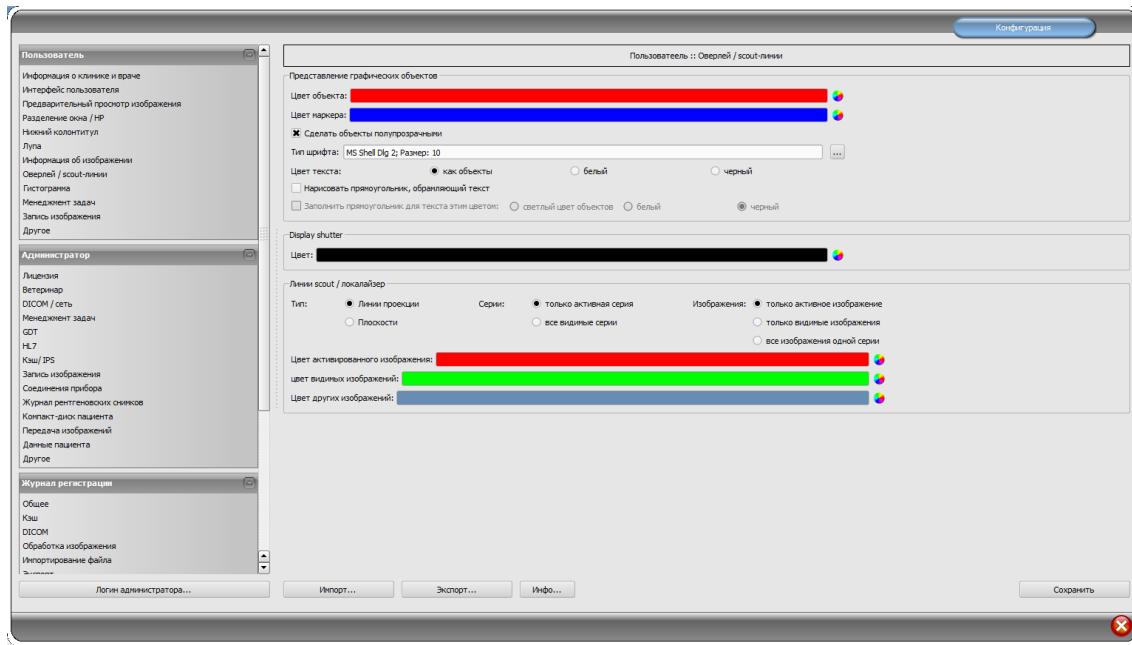

Существует центральное место конфигурации программы. При этом конфигурации, а также разные записи лога разделены в диалоге на следующие группы: Пользователь, Администратор и Лог. Конфигурации в группе Администратор могут изменяться только при условии, если имеются права администратора. Администратор должен осуществлять вход в систему при запуске данного компонента «Вход в систему в качестве администратора...». Пользователь, который вошел в качестве администратора имеет возможность с помощью «Импортировать...» и «Экспортировать...» получить полную конфигурацию или ее часть из файла INI или же сохранить ее в файле с таким же расширением.

Кнопка «Инфо...» служит для отображения информации относительно продукта.

Пользователь может осуществлять следующие настройки конфигурации:

- **Информация о клинике и врачах**

Учреждение: название клиники, поликлиники и т.п.

Адрес: главный офис клиники


Фамилия врача: фамилия врача, пользующегося данным аппаратом

Номер врача / идентификационный номер учреждения: Идентификационный номер врача, если в клиниках работает несколько врачей, или идентификационный номер учреждения (данное поле может оставаться незаполненным)

- **Интерфейс пользователя**

Монитор: настройка и размещение мониторов. Если включено несколько мониторов, отдельные элементы для индивидуальной настройки могут показываться на всех или только на определенных мониторах – гистограмму и EasyReport можно выключить на всех мониторах (это касается также получения изображений и таблицы заданий, если

модуль получения изображения выключен) – закладка управления пациентами может быть активна только на одном мониторе – размещение мониторов можно регулировать

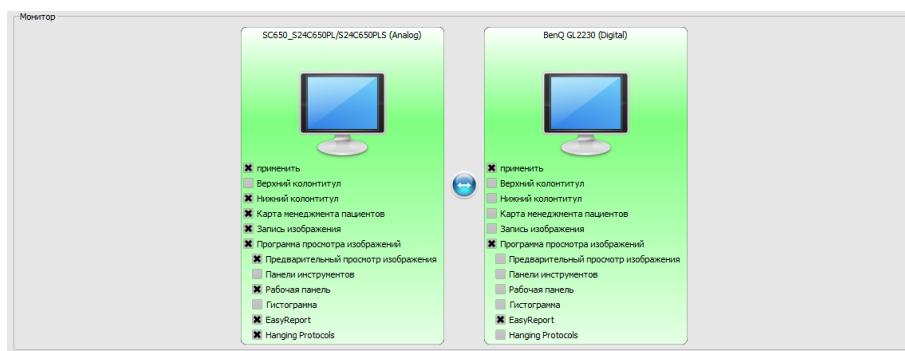

Модуль конфигурации нескольких мониторов имеет дополнительную лицензию и требует отдельного запуска – после запуска количество используемых мониторов зависит от установленного оборудования – без лицензии digipaX может высвечиваться только на одном из доступных мониторов.

Design: разнообразные возможности отображения.

Позиция панелей инструментов: в случае вертикальных экранов рекомендуется располагать слева – это происходит автоматически или же это можно указать здесь (отображение панелей инструментов должно включаться на каждом мониторе)

Высота рабочей панели инструментов (расположение окон): в случае вертикальных экранов рекомендуется использовать короткую рабочую панель, и соответственно широкую нижнюю рабочую панель (гистограмму) – это происходит автоматически или же это можно указать здесь

Шрифт: настройка вида и размера шрифта описаний кнопок и окон, а также таблиц, указаний и информации и т.п. приложения

Размер символов: настройка размера символов на программных кнопках

▪ Просмотр изображений

Древовидный просмотр: выбор тегов, по которым должна осуществляться сортировка перечня изображений, направление сортировки и определение отображаемого текста в узлах изображений (аналогично принципу информации на изображениях)

Для сортировки по отображению можно применить следующие теги:

0x0008, 0x0016	SOPClassUID
0x0008, 0x0018	SOPInstanceUID
0x0020, 0x0013	InstanceNumber
0x0008, 0x0023	ContentDate
0x0008, 0x0033	ContentTime
0x0028, 0x0008	NumberOfFrames
0x0008, 0x0022	AcquisitionDate
0x0008, 0x0032	AcquisitionTime
0x0028, 0x0002	SamplesPerPixel
0x0028, 0x0010	Rows
0x0028, 0x0011	Columns
0x0028, 0x0101	BitsStored
0x0008, 0x0008	ImageType

0x0054, 0x0400

ImageID

Режим развертывания: Разверните самые свежие обследования: развертываются только изображения самого свежего обследования; Развернуть все: после выбора пациента все узлы обследований и узлы серий изображений в древовидной структуре развертываются, и, соответственно, при просмотре отображаются все его изображения; Свернуть все: Все узлы обследований свернуты, и, соответственно, не отображаются миниатюры – в данном случае необходимо вручную выбрать обследование и серию изображений, просмотр которых будет осуществляться; Автоматически: без включенной аквизиции изображений самое свежее обследование развернуто и отображаются все миниатюры, в случае включенной аквизиции изображений узлы обследований свернуты и только новосозданные обследования развернуты

Сначала новые обследования: очередность сортировки в просмотре миниатюр таким образом, что самые свежие обследования отображаются на самом верху; Сначала старые обследования: очередьность сортировки в просмотре миниатюр таким образом, что самые старые обследования отображаются на самом верху

Режим отображения серии изображений: в качестве альтернативы все изображения данной серии могут отображаться в виде дерева просмотра или только одиночного изображения серии (возможность настройки каждого типа изображения отдельно) – сначала необходимо слева выбрать соответствующую модальность, напр., СТ, а затем справа – настройку, которая будет применена к данному типу изображения (все изображения или только первое, центральное и последнее изображение серии)

Другие: загрузка структуры обследования в фоновом режиме позволяет, при включении пациента, проводить в фоновом режиме поиск узлов (обследований, серий и изображений), благодаря чему система будет быстрее приведена в готовность (если данная опция выключена, то перед появлением в дереве просмотра, проводится комплексный поиск по всем информацией DICOM)

▪ Разделение окна / HP

Запуск: при включении пациента, серии нового обследования автоматически отображаются в окне просмотра изображений: стандартно деление окна производится автоматически и каждая серия отображается в отдельном окне; двойным щелчком по узлу обследования отобразятся также серии этого обследования, а деление окна произведется автоматически, если модуль протокола дисплея активируется, система сначала проверяет, определен протокол отображения – если да, то изображения автоматически «приостанавливаются» в окне; то же самое происходит для двойного щелчка

Монитор: при использовании модуля обслуживания нескольких мониторов здесь определяется, для какого монитора будет включена опция автоматического отображения изображений.

Выбор модальности: для каждой модальности можно выбрать индивидуальные настройки

Деление окна: автоматически – т.е. деление происходит автоматически в соответствии с количеством отображаемых серий, в противном случае окно

просмотра изображений всегда делится на определенные строки и столбики, в которых отображаются изображения серии
Протоколы отображения (Висячие протоколы): выбор цвета для области изображения текущего снимка или исследования и выбор цвета для полей предварительного исследования; установка типа шрифта для вступительных полей; также отображаются описание соответствующего изображения или список изображений

- **Нижний колонтитул**

Проверка: отмечая галочкой можно включить или выключить проверку данного привода; для привода необходимо выбрать любой каталог на проверяемом диске (или же сетевой путь); перед отображаемым в нижнем колонтитуле текста может находиться префикс; если свободное место на приводе упадет ниже критического значения, тогда один раз в процессе сессии будет отправляться предупреждение, если свободное место на приводе упадет в два раза критического значения, то значение будет отмечаться красным цветом, в противном случае будет оставаться черного цвета

Циклы обновления: циклы в секундах, в процессе которых будет обновляться проверка свободного места в памяти

- **Лупа**

Прямоугольник: применение прямоугольного увеличительного стекла в программе просмотра с указанным или автоматическим пиксельным размером

Круг: применение круглого увеличительного стекла в программе просмотра с указанным диаметром или автоматическим размером

Автоматический размер: ширина и высота прямоугольника или диаметра круга настраиваются на одну треть текущей ширины окна или высоты окна изображения, в зависимости от того, какое из значений меньше

Коэффициент зума: коэффициент увеличения отображаемого фрагмента изображения в выделенной области лупы(касается оригинального изображения)

- **Информация об изображении**

Цвет текста: цвет текста информации, отображаемой в углах изображения


Вид шрифта: вид шрифта текста информации

Коэффициент увеличения: служит для подбора размера шрифта (конечно же, размер шрифта автоматически подстраивается под размер окна)

Полутоны: поскольку текст на изображениях с белым фоном может быть непригодным для чтения, используя данную опцию можно применить тени – в случае черных или темных изображений полутоны могут быть почти незаметными

Группа элементов: для каждого типа изображений (модальности) можно определить, какая информация должна отображаться в углах наложения изображения. Сначала необходимо выбрать желаемый тип, а затем опцию «применить данные настройки», если применяются стандартные настройки. Щелкнуть по желаемому полю, чтобы определить угол изображения, а затем по кнопке «новая запись в активированном поле», чтобы добавить элемент в данном поле. В строку подписи можно ввести

любой текст, который появится на изображениях. Необходимо применить %1, %2 и %3 в качестве «переменных» (многозначных символов). Переменные будут заменены соответствующими тегами DICOM на дисплее. В случае необходимости можно определить отображение только части данного тега, напр., фрагмента фамилии пациента или значения в определенном месте тегов, которые допускают несколько значений (мультипликация). С помощью двойного щелчка по тексте в полях перечней или по кнопке «редактировать активную запись» можно редактировать введенные данные. Для удаления введенных данных из перечня необходимо воспользоваться кнопкой «удалить активную запись». Для перетаскивания или копирования элементов в рамках одного поля перечня или между полями перечня можно их перетаскивать придерживая левую кнопку мыши (drag & drop). Для того, чтобы перетащить элемент, необходимо придерживать нажатым клавишу Shift. Без нажатой клавиши Shift элемент будет скопирован

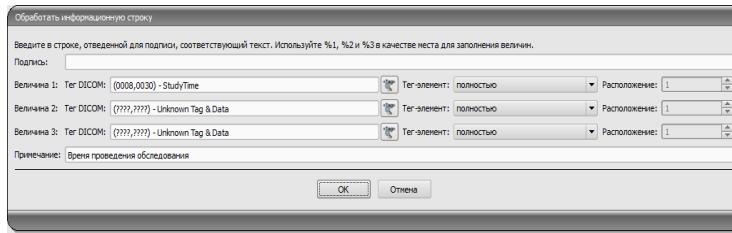

▪ Оверлей / линии среза

Презентация графических объектов:

Цвет объекта: цвет для рисования графических объектов

Цвет маркера: цвет маркеров (угловых и конечных точек, центральных точек и т.п.) для редактирования графических объектов.

Полупрозрачная заливка объектов: если данная опция активна, то при рисовании на изображении объектов с заливкой, заливка рисунков является полупрозрачной, чтобы можно было распознать изображение, скрывающееся за ними, в противном случае заливка объектов будет полной и того цвета, который будет выбран

Вид шрифта: вид шрифта используемый в текстовых объектах

Цвет текста: ранее выбранного белого или черного цвета

Создать прямоугольную рамку для текста: если данная опция включена, то текст будет помещен в прямоугольную рамку ранее выбранного цвета из палитры, доступной для графических объектов; благодаря этому, в некоторых случаях текст является более четким

Залить прямоугольник текста данным цветом: если данная опция будет включена, тогда прямоугольник, в котором будут помещены текстовые объекты будет залит выбранным цветом (ранее выбранная полупрозрачность будет применена также в данном случае), в противном случае прямоугольник останется без заливки и будет виден фон в виде изображения; для заливки можно применить тот же цвет, что и в случае объектов (освещенного), белого или черного

Display Shutter:

Цвет: цвет, перекрывающий скрываемые области

Линии среза (scout lines) / локализатор:

Тип «линии проекции» – при включенной данной опции отображаются только прямые линии среза изображений или проекции краев; **«плоскость»** – в данном случае изображения отображаются в виде плоскостей среза в третьем измерении.

Серии: «только активные серии» – в данном случае отображаются только линии проекции или плоскости активных серий; **«все видимые серии»** – в данном случае отображаются линии проекции или плоскости всех видимых серий – **Указания:** данная опция работает только в том случае, если включена опция «все видимые изображения» или «все изображения серии».

Изображения: «только активное изображение» – в данном случае отображается только линия проекции или плоскость активного изображения; **«все видимые изображения»** – при этой опции отображаются линии проекции или плоскости всех видимых изображений; **«все изображения серии»** – при этой опции отображаются все линии проекции или плоскости всех изображений всех серий

Цвет активного изображения: цвет линии резки активного изображения (частичное окно)

Цвет видимых изображений: цвет линии резки других (неактивных) частичных окон

Цвет других изображений: цвет других (невидимых) изображений

▪ Гистограмма

Урезать справа и слева: благодаря данным опциям, значения гистограммы правых и левых краев приобретают такие промежуточные значения, которые позволяют правильно отобразить в окне целую гистограмму. Если при этом возникает необходимость урезать существенные области или значения представляемые между данными граничными значениями продолжают оставаться слишком малыми, то необходимо увеличить или уменьшить указываемые размеры.

Сглаживание гистограммы для отображения: проведите сглаживание гистограммы для отображения путем соответствующего количества одиночных сглаживаний. Изображения при этом не сглаживаются. Данная опция служит только для более качественного отображения гистограммы.

Значения: отображение на оси X только тех значений, которые действительно применяются в изображении, или же всех значений которые могли бы появиться на основании глубины цветов изображения

▪ Управление задачами

Поля управления задачами: выбор всех полей, которые должны быть применены в процессе работы с рекомендациями. Необходимо провести дезактивацию тех полей, которые не должны применяться.

Применить цвет к полям: если данная опция включена, тогда поля данных в разных областях применения будут отмечаться разными цветами соответствующими их значениям. Если же данная опция выключена, то цвета применяться не будут и поля останутся белыми.

▪ Аквизиция изображений

Удаление направления из рабочего списка: с вопросом или автоматически после

сохранения данного изображения.

Уведомление относительно статуса сохранения: настройка времени отображения уведомления (в секундах) или введенный «0», чтобы уведомление не появлялось (уведомление статуса отображает информацию относительно осуществленных операций сохраненного изображения).

Запасные копии: количество создаваемых запасных копий (когда данное количество будет превышено, самая старая копия будет автоматически удалена).

Статус беременности: если еще не указан статус беременности, то при передаче изображения появится поле статуса беременности и диалоговое окно с вопросом относительно беременности (дальнейшую информацию смотри разделе 14.1)

Номер задачи: эта функция активируется при аквизиции изображений дополнительное поле для вручного введения или коррекции номера задачи и записывает их в изображении в теге DICOM Accession Number

Пометки: активация пометок; выбор типов изображений для виртуальных свинцовых букв; выбор шрифта для любого текста.

Автоматические преобразования изображения: любое новое полученной изображение проходит автоматические преобразования.

Функции учения: с помощью функции «учиться с уровня окна» система учит при аквизиции рентгеновского изображения настройки для кадрирования (отдельно для каждого типа аквизиции) и использует эти настройки для следующей аквизиции. С помощью функции «учиться параметры экспозиции» система запоминает настройки генератора для данной экспозиции (kV, mAs) для органа и траектории луча, и в будущем автоматически вводит их в поля ввода

Кнопка аквизиции изображений: здесь можно настроить другое описание и другую иконку кнопки аквизиции рентгеновских изображений

▪ Прочее

Архивные данные: после открытия программы данная настройка применяется для запуска (инициализации) перечня пациентов или же при требуемом обновлении.

Функция мыши: настройка окна: синхронизирована с отображаемой ниже гистограммой или модифицируемая, чтобы сохранить настройки другой системы.

Фильтр MagicSharp: для фильтра Magic Sharp можно ограничить минимальные и максимальные значения (таким образом можно избежать сильного эффекта кафельной плитки), с помощью функций мыши можно автоматически включить усиление контраста с определенной силой.

▪ *Режим прокрутки изображений:* изображения можно менять путем прокрутки колесом мыши или с помощью кнопок «Изображение вверх» и «Изображение вниз». Здесь можно также настроить будет ли прокрутка работать только в рамках одной серии изображений. Изменение изображений может распространяться не только на одну серию и может относиться ко всем изображениям обследования, а также распространяться на все изображения данного пациента в рамках нескольких обследований.

Отображение изображений после зуммирования: если данная опция отключена, тогда пиксели увеличены и не происходит сглаживание (однако, иногда детали могут

быть заметными), если же данная опция включена, тогда сильно увеличенные изображения сглаживаются (изображения теряют четкость, а детали иногда расплываются).

Отображение отмеченных объектов: добавление или нет затенения к отмеченным изображениям (при убранном затемнении только красная точка в правом верхнем углу изображения).

Информация / сообщения: некоторым действиям сопутствуют отображаемые указания, расположенные в малом окне в нижнем правом углу экрана – здесь можно настроить время их отображения, данные сообщения можно также полностью дезактивировать.

Единицы измерения: эта опция служит для выбора единицы измерения «мм/мм²», или «см/см²»

Менеджмент пациентов/дополнительное поле поиска: когда данная опция включена, то в распоряжении менеджмента пациентов появляются два дополнительные поля поиска по фамилиям и ID пациентов, благодаря которым, после введения начальных букв или чисел соответствующих фамилии либо ID, можно перейти непосредственно к желаемому пациенту в таблице

Менеджмент пациентов / максимальное количество попаданий: определение максимального количества записей данных, отображаемых при поиске по архиву (стандартным значением является количество 500, определение более высокого числа может привести к уменьшению скорости поиска по архиву); если данная опция отключена, то отображаются все попадания

Для просмотра записей лога необходимо в группе «Лог» выбрать желаемую категорию. Затем в правой части окна отображаются записи лога данной категории. Записи в окне лога можно отмечать с помощью мыши или клавиши Ctrl + A, а также с помощью комбинации Ctrl + C копировать в буфер обмена. После копирования их можно вклейте в любой редактор и сохранить. Кроме того, файл лога global.log расположен в инсталляционном каталоге, куда попадают отчеты всех действий приложения.

20 Выход из программы

20.1 Выход из программы

Выход из программы производится нажатием на символ  в верхнем правом углу заголовка или на красный крестик окна Windows. Приложение сворачивается в системный лоток, в правый нижний угол (символ – красный X), если иное не установлено администратором. Приложение остается активным в фоновом режиме и может быть снова открыто через контекстное меню иконки в системном лотке. Через контекстное меню программу можно закрыть полностью.

Вы можете спокойно выключить компьютер, не выходя из программы, работающей в фоновом режиме.

Программа закрывается моментально (не сворачивается), если при закрытии её главного окна задержать клавишу Shift, Ctrl или Alt. То же самое происходит, если закрыть сочетанием клавиш Alt + F4.

20.2 Выключение оборудования

Для того чтобы полностью выключить систему необходимо отсоединить устройство и компьютер от электросети. С этой целью можно воспользоваться бытовыми удлинителями с выключателями.



Перед выключением компьютера необходимо правильно закрыть систему Windows. В противном случае система может быть повреждена и стать непригодной к использованию.

21 Интерфейс GDT

Маркировка GDT: GDT-D-11

В программу можно в любой момент, как при запуске так и при входе в программу передать файл GDT. Передача происходит в указанном коммуникационном каталоге и в указанном формате. Настройка каталога и формата проводится администратором системы.

Тип GDT-записи	Действие
6301: Отправить постоянные данные	<ul style="list-style-type: none">Пациент, переданный в файле GDT, создается локально, если он еще не существует в одном из определенных архивов изображенийПри запуске программы, или если ни один компонент не открыт, открывается управление пациентами
6302: Запрос на новое обследование	<ul style="list-style-type: none">В данном случае пациент также создается локально, если, конечно, он еще не существует в системеЗатем пациент выбирается для работыВ ходе запуска программы, или если ни один компонент не открыт:<ul style="list-style-type: none">А) активируется только пациент, если включен модель аквизиции изображений и аквизиция происходит непосредственно на данной машине илиБ) запускается компонент рабочего перечня и открывается диалог создания нового направления, если аквизиция изображений не включена или приложение запущено с помощью параметра /wВ) запускается компонент импортирования, если аквизиция изображений и компонент рабочего перечня не включены или приложение не запущено с помощью параметра /i
6311: Показать данные обследования	<ul style="list-style-type: none">В данном случае пациент также создается локально, если, конечно, данная опция востребована и выбранаНе был запущен ни один компонент, но все доступные обследования данного пациента отображаются в виде дерева просмотра и могут быть сразу же просматриваться в браузереОтображается первое изображение обследования

	<p>(если будет передана дата обследования и будет найдено обследование с указанной датой)</p> <ul style="list-style-type: none">• Компонент CD пациента запускается, если приложение было запущено с помощью параметра /pcd
--	---

Данные могут отправляться на другие системы, напр., если обследование уже проведено. Это также осуществляется посредством файлов GDT по указанному коммуникационному пути.

22 Ветеринарная версия

Система может применяться также в ветеринарии. В таком случае администратор системы настраивает систему таким образом, чтобы можно было работать с животными в качестве пациентов. В ветеринарной версии в качестве данных пациентов применяются, изменяются и отображаются данные животного и его владельца.

В дальнейшей части находятся объяснения элементов программы, которые отличаются в ветеринарной версии. Основная часть программы остается без изменений.

Примечание: сохранение данных животных не предвидится международным стандартом DICOM (являющимся основой архитектуры системы). Поэтому администратор должен осуществить специальные настройки, позволяющие сохранять значения на других тегах DICOM. В связи с этим полученное таким образом изображения являются или же не являются при определенных условиях «совместимыми» с другими системами (напр., кличка животного или вид животного не отображается или же неправильно отображается на другой системе либо значение появляется в другом месте системы). Однако это ни коим образом не влияет на работу самих систем.


22.1 Управление пациентами

В таблице пациентов находятся следующие группы колонки: кличка животного, фамилия владельца, вид животного, ID пациента, дата рождения владельца и источник данных.

Для поиска пациента в таблице можно воспользоваться следующими полями поиска: кличка животного, фамилия владельца и ID пациента.

В источнике данных «Архив изображений» нельзя воспользоваться, как в стандартной версии программы, фильтрованием по полу пациента, а только по виду животного. Необходимо ввести в поле ввода вид животного, такой же, как и тот, что был указан при регистрации животного, затем нажать на кнопку «Поиск» для обновления таблицы пациентов. При вводе или изменении данных пациентов осуществляется поиск как данных владельца так и данных животного. Может произойти, что некоторые поля в системе будут недоступными. Эти поля были выключены администратором, поскольку они не являются существенными в данном случае, но значительно упрощают работу с системой.

В ветеринарной версии **нельзя** манипулировать данными при отправке изображений в архив изображений.

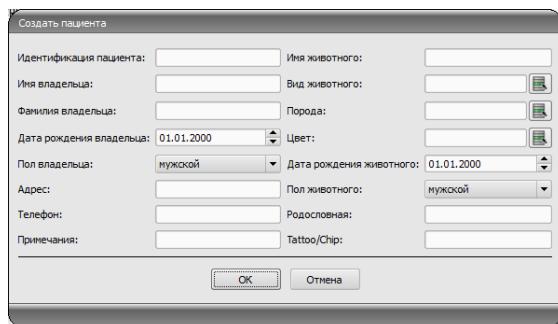

22.2 Управление задачами

В таблице пациентов, ожидающих направлений, отображаются кличка животного (фамилия владельца), вид животного и, по мере возможности, количество полученных изображений. Фамилия владельца находится в скобках с кличкой животного. При детальном обзоре направления отображаются остальные данные животного.

Если не были введены изменения, то по умолчанию диалог создания направления не отображает изображения выбора органов. Ввод данных проводится полностью вручную в виде текста.


22.3 Специальные измерения (ветеринарные)

ДТС (дисплазия тазобедренных суставов)

Измерение угла Норберга

Рентгеновский снимок: вентродорсальный вид тазобедренных суставов (задние конечности полностью растянуты)

При проведении этого измерения вначале на снимке будут автоматически показаны графические элементы. Эти элементы необходимо уместить в соответствующих местах на снимке. Для этого вначале следует уместить окружности над головками бедренных костей, а затем растянуть линию в уголки вертлюжных впадин. Углы обновляются автоматически и показываются в полях измерений. .

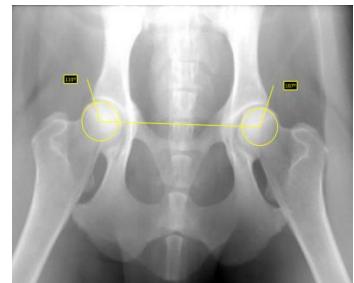


VHS (Vertebral Heart Score)

Оценка размера сердца по размерам позвонков

Рентгеновский снимок: грудная клетка в боковой проекции (снимок сделан на вдохе)

Растяните одну линию для продольной оси сердца и вторую линию для ширины сердца. Затем обозначте точку на doczaszkowy краю грудного позвонка (T4) и одну точку на doczaszkowy краю грудного позвонка (T9)..

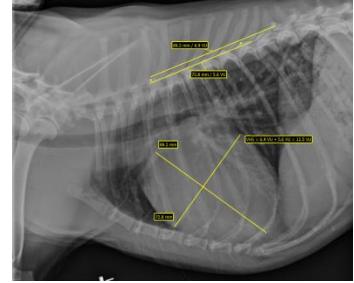

Длины оси сердца нанесены на позвоночнике. Результаты измерений указаны в единицах позвоночника (VU).

TTA (Tibial Tuberosity Advancement)

Измерение выдвижения бугристости большеберцовой кости

Рентгеновский снимок: снимок коленного сустава в боковой проекции

Уместите щелчком левой клавиши мыши центральную точку окружности на бедренной кости и центральную точку второй окружности на большеберцовой кости. Затем уместите одну точку при макушке чашечки, а вторую точку при бугристости большеберцовой кости. В конце поправьте окружности и точки. Окружности должны соприкасаться.

**TPA (Tibial Plateau Angle)**

Измерение угла наклона верхней суставной поверхности большеберцовой кости для TPLO (выравнивающей остеотомии верхней суставной поверхности большеберцовой кости)

Рентгеновский снимок: снимок коленного сустава с голеностопным в боковой проекции



Уместите по одной точке на краинальном и каудальном краях верхней суставной поверхности большеберцовой кости, а затем две точки для линии через межмыщелковое возвышение и центральную точку таранной кости.

Индекс дистракции (ID) для исследования методом PennHIP

Соотношение длины между центральными точками головки бедренной кости и вертлужной впадины тазобедренного сустава и радиуса головки бедренной кости.

Рентгеновский снимок: проекция вентролатерально–спинная бедра (картина с дистракцией)



Каждый раз поместите круг на краю головки бедренной кости и вертлужной впадины тазобедренного сустава, начиная от центральной точки путем перетаскивания круга в направлении краев.

22.4 Распечатка

В процессе распечатки осуществляется соответствующая настройка стандартного заголовка. Всегда отображается ID пациента. Остальные отображаемые значения обусловлены полями данных активированных в процессе конфигурации. Это значит, что если администратор системы активировал пол животного, то пол также будет находиться на распечатке в строке стандартного заголовка.

22.5 CD пациента

Если при создании CD пациента была выбрана опция анонимизации, тогда сначала значения будут анонимизироваться, так же как и в нормальной версии программы (см. 9 CD пациента) и отображаться следующим образом:

- фамилия владельца: «AnonymOwner» или «AnonymOwner1», «AnonymOwner2» и т.д. в случае нескольких пациентов
- дата рождения владельца: 01.01.2000
- пол владельца: О (Прочее)
- кличка животного: «AnonymAnimal» или «AnonymAnimal1», «AnonymAnimal2»

Если программа просмотра должна быть объединена с CD пациента, тогда программа тоже получает настройки, которые являются характерными ветеринарной версии. Поэтому настройки программы аналогичны настройкам системы.

22.6 Экспорт

При экспорте доступна дополнительная опция, позволяющая экспорттировать изображения DICOM в ветеринарном стандарте DICOM (смотри также 10.2.2.2 Экспорт в виде файла DICOM).

22.7 Прочее

Информация, передающаяся в подсказках – тултипах (полях с краткой информацией, которые появляются после наведения мышью без щелчка в течение короткого промежутка времени), содержат данные владельца и животного. Данные тултипы присутствуют в древе просмотра выбранных пациентов (слева) и в обзорах в качестве древа обследований. Кроме того, древо просмотра отображает кличку животного и в скобках фамилию владельца.

В нижнем колониттуле отображаются кличка животного и в скобках фамилия владельца.

23 Подсоединение LOCALITE OrthoPlaner



Подсоединение возможно только после активации соответствующего модуля.

digipaX совместимо с программным обеспечением LOCALITE OrthoPlaner. Для передачи изображения в LOCALITE необходимо его открыть и нажать на соответствующую кнопку в поле функции или расположенную в верхнем правом углу панели инструментов (если включена). Эта кнопка является доступной только в том случае, если был активирован соответствующий модуль.



После завершения переработки необходимо отправить изображение в архив и закрыть LOCALITE. Выполнив данное действие, digipaX обновляет данные пациента и новое изображение становится доступным.

24 Прочее

24.1 Таблицы

В системе можно настроить большое количество таблиц. Перетаскивая заголовок колонки, ее можно изменить. Щелкнув правой кнопкой мыши по элементу в заголовке, можно в появляющемся контекстном меню показывать и скрывать колонки.

24.2 Тултипы

Большая часть кнопок, полей данных или конфигураций содержит так называемые «тултипы» (подсказки). После наведения на поле мышью без щелчка по нему, в течение короткого промежутка времени на месте курсора мыши появится окно помощи. Тултипы содержат информацию относительно данного поля – действие, запускающееся ним или значение в случае конфигурационных возможностей.

24.3 Завершение работы с приложением

Работа с приложением завершается после нажатия на кнопку Start, расположенную слева внизу, а затем – на кнопку «Завершить» или на иконку расположенную в верхнем правом углу заголовка (если заголовок активен) либо путем нажатия на клавиши Alt + F4. Если система настроена таким образом, чтобы во время закрытия приложения оно только минимизируется в системный трей, то к уже перечисленным действиям следует добавить необходимость придерживать клавиши Shift либо щелчок правой кнопкой мыши по справа внизу.

24.4 Лицензия

Программное обеспечение защищено лицензией. Система запускается администратором. Администратор заказывает файл с лицензией от изготовителя и загружает его в систему.

Продукт: digipaX

Изготовитель: digipaX GmbH
Arno-Nitzsche-Str. 45
04277 Leipzig
GERMANY

Данный продукт имеет знак CE 0494

Последняя правка руководства: 24.07.2020