## Datensicherung

Mit Hilfe der Software "Datensicherung" können Dateien nach bestimmten Datumsangaben gesucht und automatisch auf CD / DVD gebrannt werden. Die Wahl ob auf CD oder DVD gesichert werden soll, hängt von der anfallenden Datenmenge ab.

Legen Sie zuerst ein leeres Medium in das Brennlaufwerk ein. Starten Sie dann das Programm "Datensicherung". Wählen Sie den Zeitraum (von/bis) aus, von dem die Daten gesichert werden sollen. Bei der aller ersten Sicherung wählen Sie als Startdatum irgendein Datum, das früher zurück liegt als Ihre älteste digitale Aufnahme (z.B. 01.01.2000) und als Enddatum das heutige. Dieses sollte bereits voreingestellt sein. Mit dieser Einstellung werden alle Daten, die zwischen dem 01.01.2000 und heute angefallen sind, gesichert.

Bei der nächsten Sicherung wird automatisch als Startdatum der Tag nach der letzten Sicherung und als Ende wieder das dann aktuelle Datum eingetragen. So werden immer nur die neusten Daten gesichert.



Es sollten nach der Sicherung an diesem Tag keine weiteren Bilder hinzugefügt werden. Ansonsten müssen Sie bei der nächsten Sicherung als Startdatum das Enddatum der letzen Sicherung wählen.

letzte S	icher	ung: un	bekan	nt				hier							
von:			-	(Tradese				DIS:		-		100	-	_	0
•		1	Januai	r 200	)		-	9		Se	ptemt	er 20	112		•
52	27	28	29	30	31	1	2	35	27	28	29	30	31	1	2
1	3	4	5	6	7	8	9	36	3	4	5	6	7	8	9
2	10	11	12	13	14	15	16	37	10	11	12	13	14	15	16
3	17	18	19	20	21	22	23	38	17	18	19	20	21	22	23
4	24	25	26	27	28	29	30	39	24	25	26	27	28	29	30
5	31	1	2	3	4	5	6	40	1	2	3	-4	5	6	7
Verzeich	nnis:	D:/Con	quest/c	data											]
Brennop	otione	en													
Laufwe	rk:	HL-DT-S	ST DVD	RAM GS	SA-H44	Ņ									Ŧ
		Brennge	schwind	digkeit:	4X (6	00 KB/	s) ·	-		Date	en nach	Brenn	vorgan	g überp	rüfen
Disk-Na	me:	30_09_	2012												
												25			

letzte S	ichen	ung: <b>01</b> .	01.20	00 - 30	.09.20	12		him							
G		Ø	ktobe	r 201	2		•	03.		No	vemb	er 20	12		9
39	24	25	26	27	28	29	30	44	29	30	31	1	2	3	4
40	1	2	3	4	5	6	7	45	5	6	7	8	9	10	11
41	8	9	10	11	12	13	14	46	12	13	14	15	16	17	18
42	15	16	17	18	19	20	21	47	19	20	21	22	23	24	25
43	22	23	24	25	26	27	28	48	26	27	28	29	30	1	2
44	29	30	31	1	2	3	4	49	3	4	5	6	7	8	9
Verzeic	nnis:	D:/Con	quest/c	iata											)
DICINIU	JUUNE														
Laufwe	rk:	HL-DT-S	ST DVD	RAM GS	A-H44	N									-
	1	Brennge	schwing	ligkeit:	4X (6	00 KB/	s)	•	8	X Date	en nach	Brenny	/organ	g überp	rüfen
Disk-Na	me:	30_11_	2012												
													72		

Geben sie in die Zeile "Dateiname" ein \* ein, damit alle Dateiennamen eingeschlossen werden. Als Verzeichnis geben Sie den Pfad zu Ihrem Bildarchiv an.

Wählen Sie Brennlaufwerk und Brenngeschwindigkeit aus. Es wird empfohlen, die Daten nach dem Brennvorgang zu überprüfen. Als Disk-Name wird das Enddatum des Zeitraumes angegeben. Die Such- und Brennoptionen werden gespeichert und sind bei der nächsten Sicherung automatisch wieder voreingestellt.

Klicken sie auf "Suchen und Brennen" um den Vorgang zu starten. Die Anzeige schaltet um, die Dateien werden zusammengesucht und automatisch auf den Datenträger gebrannt. Wenn die Daten nicht auf eine CD/DVD passen, werden Sie automatisch aufgefordert das nächste leere Medium einzulegen wenn das aktuelle voll ist. Sind alle Daten gesichert, kommt eine entsprechende Erfolgsmeldung. Andernfalls erscheint eine Fehlermeldung.

Es ist ratsam einen automatischen Start des Programms mittels des Windows Taskplaners einzurichten.

Der Gesetzgeber schreibt eine regelmäßige Datensicherung auf nicht wiederbeschreibbaren Medien vor. Die Medien müssen den Anforderungen zur Sicherung medizinischer Daten entsprechen.

Lagern Sie die Sicherungsmedien an einem geeigneten und räumlich getrennten Ort auf, damit z.B. im Brandfall die Sicherungen nicht mit zerstört werden können.



letzte S	licher	ung: 01.	01.20	00 - 3	0.09.20	012		hie-							
G		c	ktobe	r 201	2		0	0		No	wemb	er 20	12	-	e
39	24	25	26	27	28	29	30	44	29	30	31	1	2	3	4
40	1	2	3	4	5	6	7	45	5	6	7	8	9	10	11
41	8	9	10	11	12	13	14	46	12	13	14	15	16	17	18
42	15	16	17	18	19	20	21	47	19	20	21	22	23	24	25
43	22	23	24	25	26	27	28	48	26	27	28	29	30	1	2
44	29	30	31	1	2	3	4	49	3	4	5	6	7	8	9
Datein	ame:	•													
Verzeic	hnis:	D:/Con	quest/c	data											
Brenno	ption	en													
Laufwe	rk:	HL-DT-	ST DVD	RAM G	A-H44	N									
		Brennge	schwing	digkeit:	40K (6	00 KB/	s) ·	-		Date	en nach	Brenn	vorgan	güberg	rüfe
Disk No.	mei	30.11	2012												

Verzeichnisliste:	Ferti	
Dateisuche:	Ferti	
Anzahl gefundener Dateien:	91	Dateigröße gesamt: 317.7 MB
rennvorgang		
renvorgang		Belegt: 317.7 MB Frei: 385.1 MB
remvorgang	Typ: CD-RW	Belegt: 317.7 H8 Frei: 385.1 H8 Gesamt: 702.8 H8



# Schritt 1

Medium einlegen

## Schritt 2

Start- und Enddatum auswählen

Such- und Brennoptionen einstellen

"Suchen und Brennen" drücken

### Schritt 3

Daten werden gebrannt

Wenn Aufforderung kommt, weiteren Datenträger einlegen

#### Schritt 4

Fertig und Schließen! Medien an sicheren und räumlich getrennt Ort lagern!