
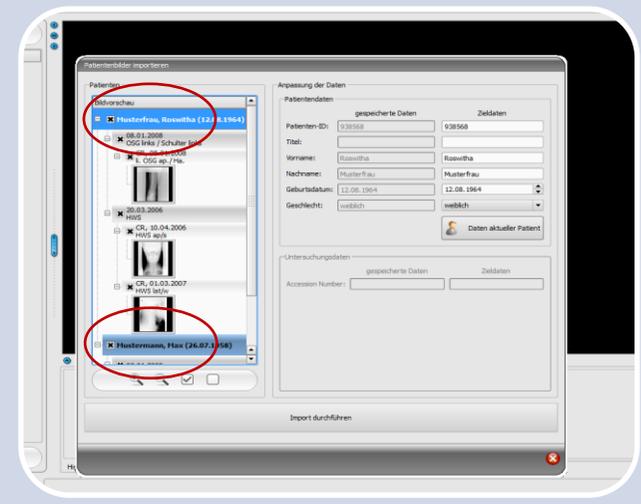


Radiologieanbindung

Wenn Patientenbilder aus einer anderen Praxis empfangen wurden, haben die Patienten meist eine andere Patienten-ID. Bevor Sie nun die Bilder in Ihr System importieren, muss diese Patienten-ID noch an Ihr eigenes Patientenverwaltungssystem angepasst werden.

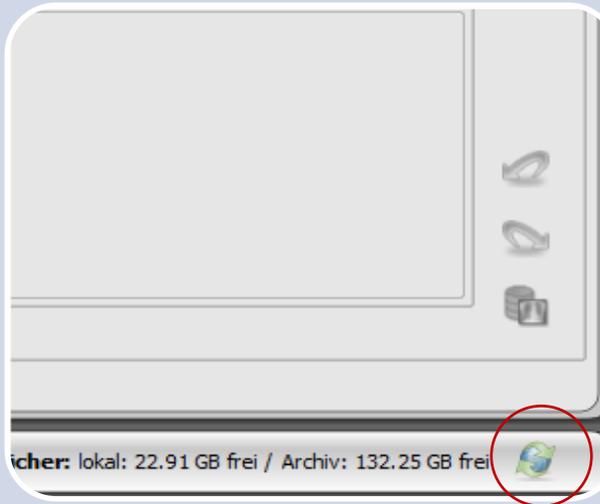

Schritt 1

Um zu prüfen, ob neue Bilder empfangen wurden, starten Sie digipaX an dem für den Bildempfang vorgesehenen PC durch Doppelklick auf das digipaX-Symbol auf dem Desktop oder von der Karteikarte der Praxisverwaltung aus.

Schritt 2


Wenn die Bilder aus der Radiologie empfangen wurden, erscheint unten rechts ein Symbol.

Klicken Sie auf dieses Symbol.

(Welcher Patient gerade geladen ist, spielt dabei keine Rolle.)

Schritt 3

Es werden die Namen der Patienten angezeigt, für welche Bilder empfangen wurden. Wählen Sie die Patienten nacheinander aus der Patienten- oder Praxisverwaltung aus und gehen Sie weiter zum nächsten Schritt.

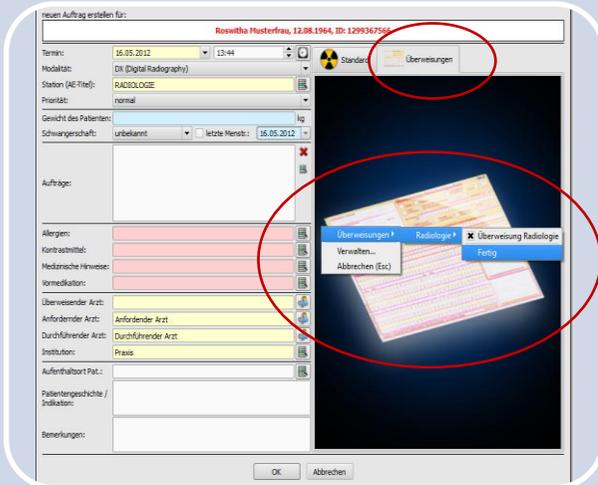

Schritt 3

Erstellen Sie für den Patient einen neuen Überweisungsauftrag.

Wechseln Sie dazu zum Reiter Überweisungen.

Wählen Sie anschließend die gewünschte Überweisung und bestätigen Sie den Auftrag mit OK.


Wiederholen Sie die Schritte bis für alle Patienten ein Auftrag erstellt wurde



Schritt 4

Öffnen Sie den Dialog erneut. Prüfen Sie, ob alle Patienten mit einem grünen Häkchen markiert sind. Wenn ein Häkchen fehlt, kehren zurück zu Schritt 2 um einen Worklistauftrag für den oder die fehlenden Patienten zu erstellen.

Im Anschluß klicken Sie auf "Import durchführen".

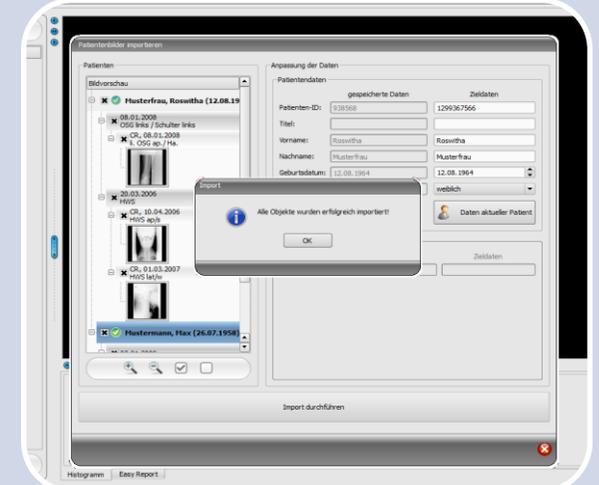

Schritt 6

Nach erfolgreichem Import wird Ihnen diese Erfolgsmeldung angezeigt.